

Produktinformasjon

Alpha XT 9|7|5 miniBTE T R

Bernafon Alpha XT tar Hybrid Technology™ til nye nivå. miniBTE T R er et brukervennlig, oppladbart høreapparat med et Li-ion-batteri som gir strøm til en hel dags bruk, inkludert direkte-streaming. Det er et BTE-apparat designet for brukere med små til store hørselstap.

Det inkluderer 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy, NFMI-teknologi, telespole og én trykknapp for volum- og programendringer. miniBTE T R er tilgjengelig med miniFit tynnslange-systemet, som inkluderer en rekke domer og støpte propper.

Hook



AHXT 9|7|5 MNB T R

miniFit 1.3 mm



AHXT 9|7|5 MNB T R




miniFit 0.9 mm



AHXT 9|7|5 MNB T R

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Works with
 android

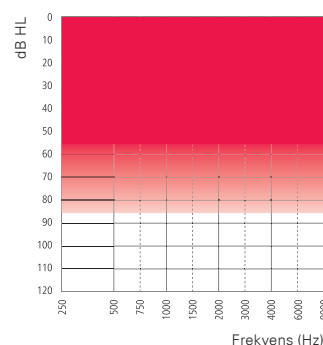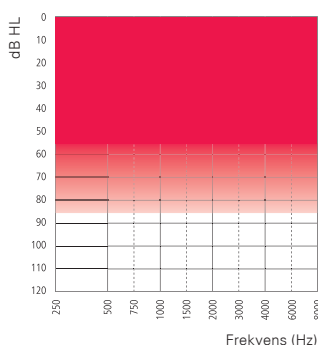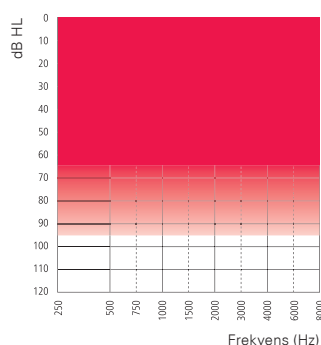

Tekniske egenskaper

- Direkte-streaming (kompatibel med iOS og Android™ -enheter)
- Hands-free kommunikasjon**
- 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy
- NFMI (near-field magnetic induction)
- Enkel trykknapp
- Telespole
- miniFit tynnslange
- Vannavstøtende materialer
- IP68
- LED-lys

Tilbehør*

- Bernafon App (kompatibel med iOS- og Android-enheter)
- RC-A (fjernkontroll)
- TV-A (TV-adapter)
- SoundClip-A
- Noahlink Wireless (trådløs tilkobling)

* Vennligst se www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity for ytterligere informasjon.

** Tilgjengelig fra FW 1.0 med utvalgte iPhone- og iPad-modeller.

Bernafon Alpha XT er et Made for iPhone, iPad og iPod høreapparat. Direkte-streaming for Android-enheter krever Android 10 eller nyere, Bluetooth® 5.0 og en implementering av Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) på Android-enheten. For informasjon om kompatibilitet, besøk www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land.



Bluetooth® -navnet og logoen er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av disse er lisensiert til William Demant Holding A/S. Andre varemerker og navn er fra de respektive eiere.

ADVARSEL: Ingen endring av dette utstyret er tillatt.

bernafon
Your hearing • Our passion

Alpha XT 9 miniBTE T R

— Hook
--- miniFit 1.3 mm
--- miniFit 0.9 mm

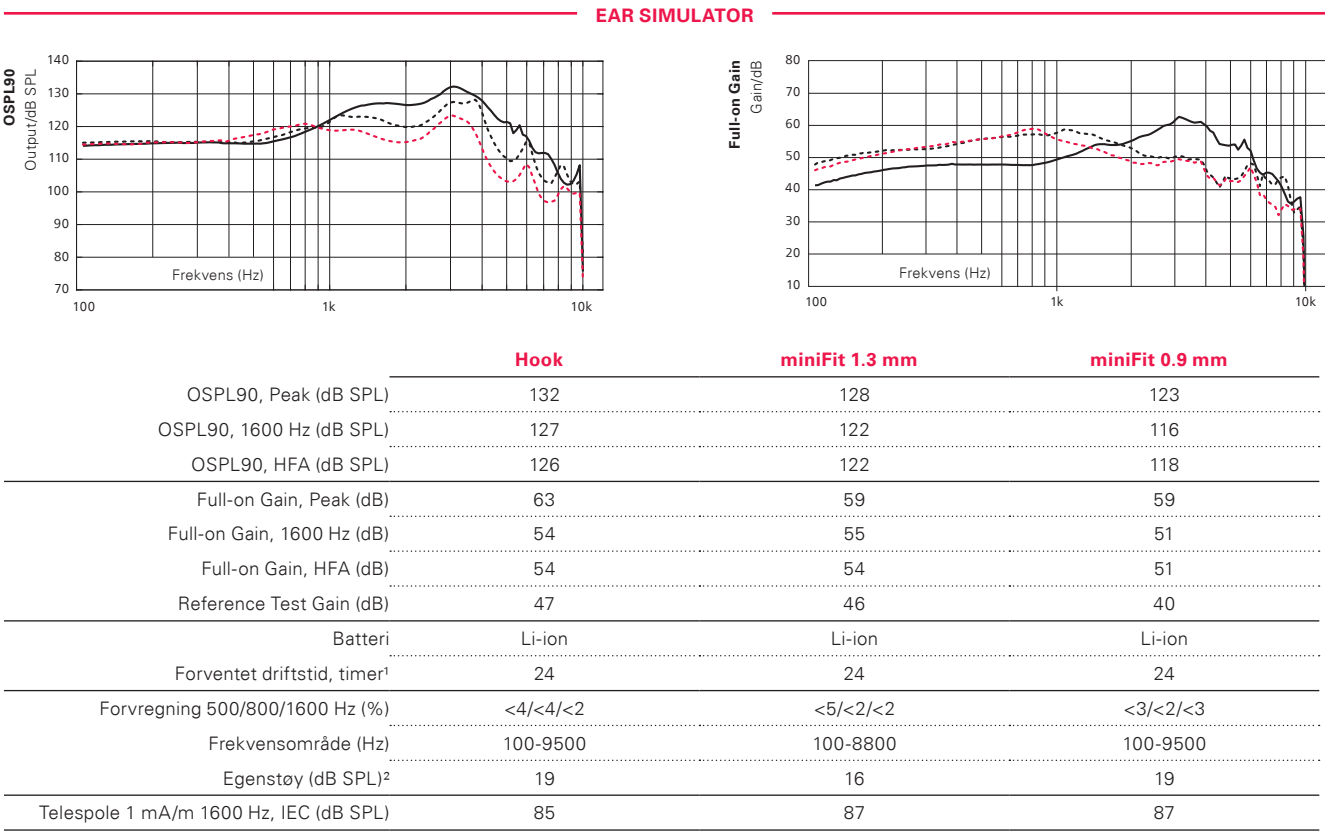
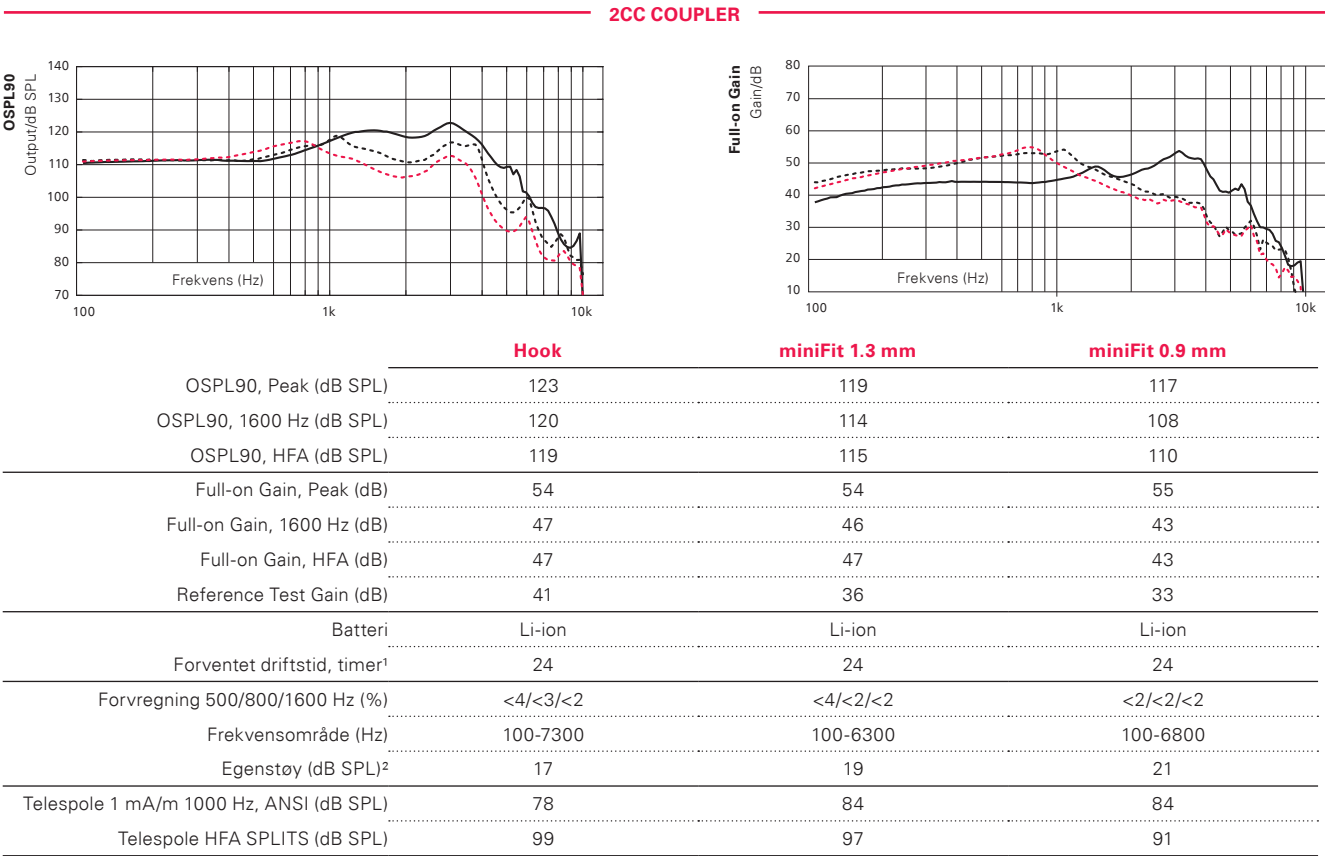


¹ Forventet driftstid for oppladbart batteri avhenger av bruksmønster, aktive egenskaper, hørselstap, lydmiljø, alder på batteriet og bruk av trådløst tilbehør.

² Technical data measured with expansion, corresponding to the test Box measurement settings.
“2cc” refers to a coupler according to IEC 60318-5:2006. “Ear simulator” refers to a coupler according to IEC 60318-4:2010.
Applied versions: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.
Full-on gain is measured with the gain control of the hearing aid set to its full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB.
This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0+A1:1994 but without influence of feedback.

Alpha XT 7|5 miniBTE T R

— Hook
--- miniFit 1.3 mm
--- miniFit 0.9 mm

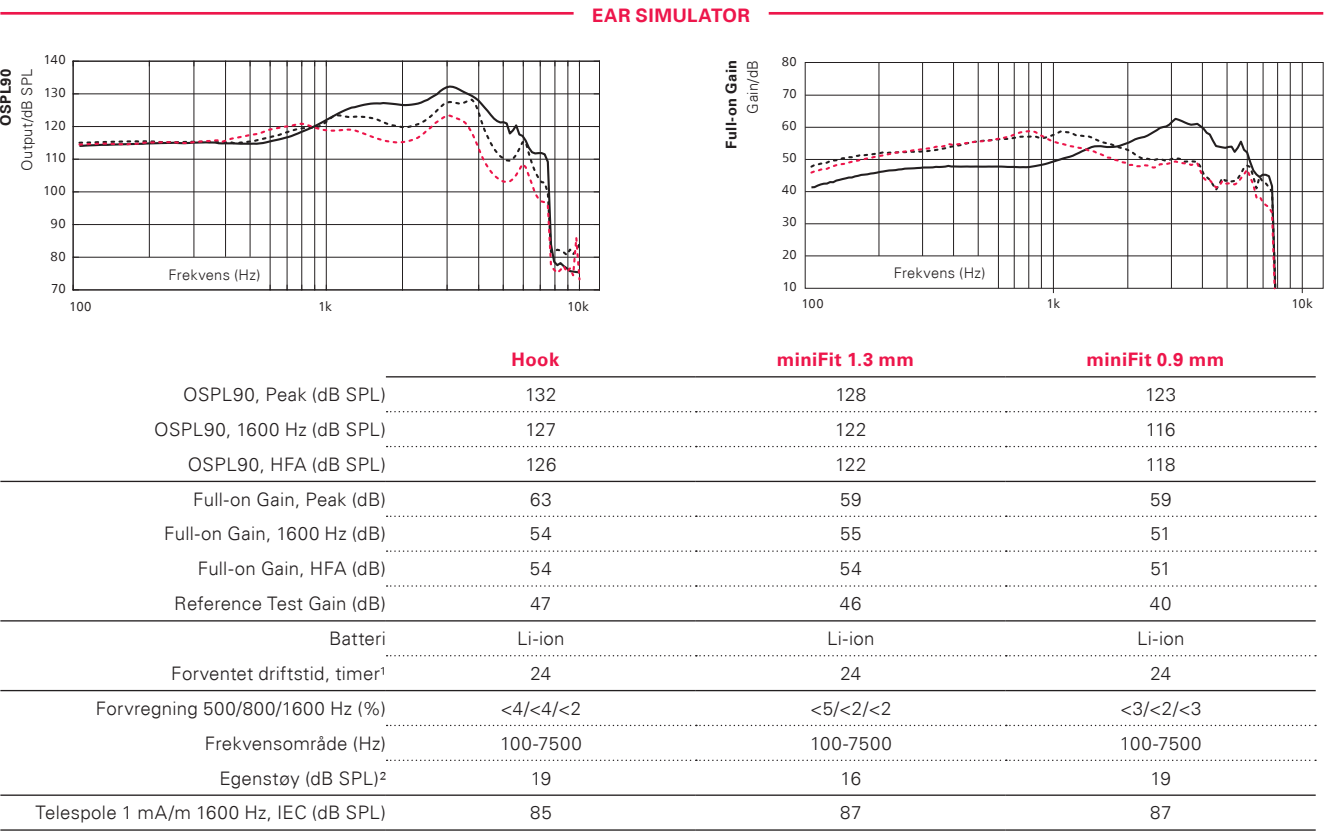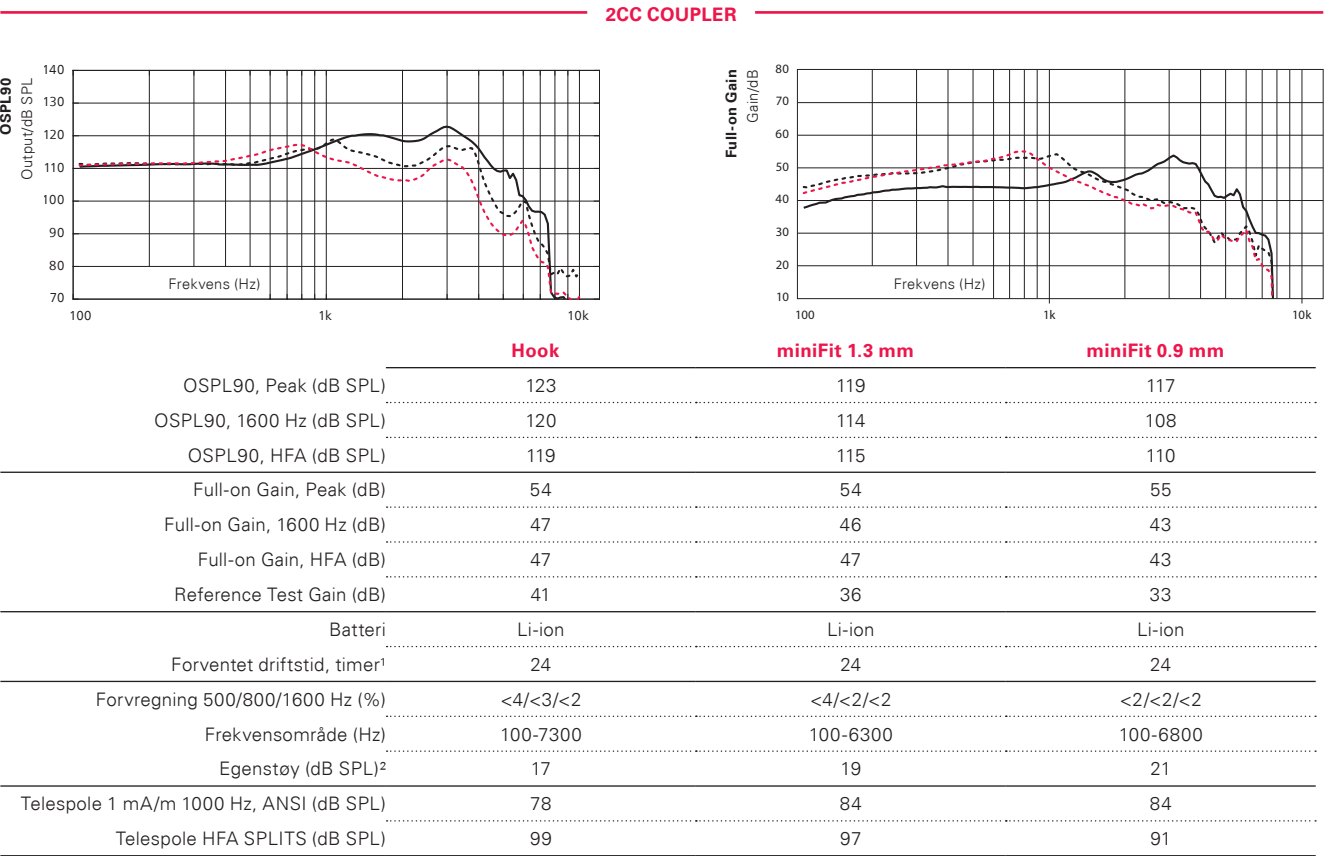

¹ Forventet driftstid for oppladbart batteri avhenger av bruksmønster, aktive egenskaper, hørselstap, lydmiljø, alder på batteriet og bruk av trådløst tilbehør.

² Technical data measured with expansion, corresponding to the test Box measurement settings.
“2cc” refers to a coupler according to IEC 60318-5:2006. “Ear simulator” refers to a coupler according to IEC 60318-4:2010.
Applied versions: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.
Full-on gain is measured with the gain control of the hearing aid set to its full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB.
This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0+A1:1994 but without influence of feedback.

	Alpha XT 9	Alpha XT 7	Alpha XT 5
Hybrid Technology™			
Hybrid Sound Processing™	•	•	•
Frekvensområde	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Hybrid Balancing™	•	•	-
Talebalanse	3 valg	2 valg	•
Støybalanse	4 valg	2 valg	-
Hybrid Noise Management™	•	•	•
Smart støyreduksjon	4 valg	4 valg	3 valg
Smart retningsvirkning	4 valg	4 valg	4 valg
Valg Dynamisk	3 valg	2 valg	-
Valg Omni	2 valg	2 valg	-
Hybrid Feedback Cancellor™	•	•	•
Hybrid Sound Care™	•	•	•
Beskyttelse mot vind kontaktstøy	•	•	•
TALE			
Bass-boost	•	•	•
Frequency Composition ^{and}	•	•	•
KOMFORT			
Binaural støykoordinering	•	•	-
Impulsstøyreduksjon	6 valg	5 valg	4 valg
Utvidet dynamikkområde	•	•	-
Reduksjon av svak støy	•	•	•
RETNINGSVIRKNING			
Dynamisk	•	•	•
Adaptiv full retningsvirkning	•	•	•
Fast retningsvirkning	•	•	•
Fast omni	•	•	•
Omni retningsvirkning	•	•	-
True Directionality Plus	•	•	-
INDIVIDUELLE EGENSKAPER			
Personlig tilpasning	•	•	•
Justeringsbånd	24	20	18
Programvalg	13/4	12/4	12/4
Musikkopplevelse	•	•	•
Binaural koordinering: VK, programbytte	•	•	•
Automatisk tilvenning	•	•	•
Overgang	4 valg	3 valg	2 valg
Datalogging	•	•	•
Samtaledata	•	•	•
Taleindikator	•	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•	•
Kompatibel med CROS	•	•	•

Alpha XT MNB T R kan programmeres med Oasis^{ext} 2023.1 eller nyere

Bruksvilkår
Temperatur: +5 °C til +40 °C
Luftfuktighet: 5 % til 93 %,
ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk 700 hPa til 1060 hPa

Lagring og transport
Temperatur og luftfuktighet må ikke overskride disse verdiene over lengre perioder ved transport og lagring:

Transport:
Temperatur: –20 °C til +60 °C
Luftfuktighet: 5 % til 93 %,
ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk 700 hPa til 1060 hPa

Lagring:
Temperatur: –20 °C til +30 °C
Luftfuktighet: 5 % til 93 %,
ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk 700 hPa til 1060 hPa

Lader, miniBTE T R

Laderen til Alpha XT miniBTE T R bruker induktiv teknologi som gjør det mulig å lade høreapparatene ved hjelp av induksjonsspole. Videre forhindrer magnetforbindelsen i laderen at høreapparatene faller ut.

Når høreapparatene settes inn i laderen, starter de automatisk å lade. Høreapparatene slås på når de fjernes fra laderen.



Ligger vedlagt

- Reiseveske
- Bruksanvisning
- Strømforsyningsadapter

Ladetid for litium-ion batteri

- 3,5 t = Fulladet
- 1 t = 40 % ladet
- 30 min = 20 % ladet

¹ Strømforsyningsadapteren vil variere fra land til land

Lader, miniBTE T R – Tekniske data

Lader, miniBTE T R	
Kompatibel med	Alpha, Alpha XT, miniBTE T R
Dimensjoner	Ø95 mm /total høyde 39 mm
Vekt	135 gram
Farge	Svart
Strømforsyningsadapter	USB A
Status-indikatorer	LED-lys på laderen indikerer om laderen er AV/PÅ LED-lys på høreapparatene indikerer ladestatus
Ladetid for høreapparatene	Maks 3,5 timer avhengig av batteriets tilstand (Temperatur: +5 °C til +35 °C) Maks 5 timer avhengig av batteriets tilstand (Temperatur: +5 °C til +10 °C / +35 °C til +38 °C)
Strømkilde	Medfølgende strømforsyningsenhet
Inngangsspenning	5 V DC
Inngangsstrøm	< 0.2 A (ved lading av to høreapparater) <10 mA stand-by (ingen høreapparater til lading)
Kabel	Fastmontert kabel / 150 cm
Tilkoblet eksternt utstyr	Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet til stikkontakt, må dette utstyret overholde IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 til 20. juni 2019) eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Bruksvilkår	
Bruk	Temperatur: +5 °C til +38 °C Luftfuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Lagring og transport	Temperatur: –25 °C til +70 °C Luftfuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk	700 hPa til 1060 hPa

Tekniske data: Strømforsyningsenhet	
Strømforsyningsenhet	AN05x – 050A
Inngangsspenning	100 – 240 V AC
Inngangsstrøm	0,2 A
Inngangsfrekvens	50 – 60 Hz
Utgangsspenning	5 V DC
Utgangsstrøm	1 A

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

www.bernafon.com

Bernaфон is part of the Demant Group.

IP68

bernaфон 
Your hearing • Our passion