

Easy LE Adapter

Parings- og feilsøkingssveiledning




Bernafon

Oversikt

Opplev streaming av lyd i høy kvalitet med Bluetooth® LE Audio, nå integrert i Easy LE Adapter. Denne enheten muliggjør handsfree kommunikasjon på Android™-telefoner, nettbrett samt PC-er med USB-C som mangler innebygd LE Audio-støtte. Easy LE-adapteren sikrer en sømløs overgang til handsfree toveislyd, enten det er for telefon- eller videosamtaler, eller bare for å nyte musikk med god lyd kvalitet.

Viktig: Høreapparatene dine må støtte LE Audio for å fungere med Easy LE Adapter.
De fleste telefoner og nettbrett med 3,5 mm lydutgang fungerer ikke med adapteren.

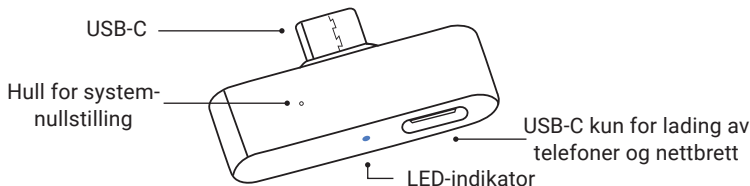


Paring av Easy LE-adapteren



Trinn 1:

- Koble Easy LE-adapteren til USB-C-porten på telefonen, nettbrettet eller PC-en.
- Adapteren vil slå seg på og gå i paringsmodus (hvis ingen eksisterende paring blir funnet).
- Paringsmodus indikeres av at LED-indikatoren blinker raskt blått. I denne modusen vil Easy LE-adapteren søke etter LE Audio-enheter innenfor en rekkevidde på 2 meter, klare til paring.

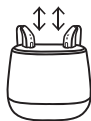

Trinn 2:


- Start høreapparatene på nytt ved å sette dem i laderen, og ta dem deretter ut igjen.
- Dette vil sette dem i paringsmodus i 3 minutter.



Trinn 3:

- Vent til høreapparatene og adapteren er parert.
- Paringen er fullført når LED-indikatoren endrer seg fra å blinke blått til å lyse konstant blått i 5 sekunder og deretter slår seg av.
- Nå er du klar til å streame lyd eller foreta handsfree telefonsamtaler med Easy LE-adapteren.

Andre funksjoner

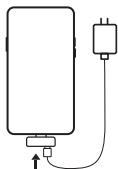

Lade telefonen eller nettbrettet ditt via Easy LE-adapteren

- Du kan lade telefonen eller nettbrettet med opptil 9V/2A eller 5V/3A standardlading. Det er ikke nok strøm som kan leveres gjennom adapteren til å støtte lading av PC-er.
- Koble strømkabelen til Easy LE-adapteren for å lade enheten din.
- Ladetiden vil variere avhengig av enhetens batterikapasitet.
- Hurtigladeteknologier eller dataoverføring støttes ikke når ladeporten brukes. For å få tilgang til dataoverføring, fjern Easy LE-adapteren fra enheten din og koble deretter til kabelen.



Tilbakestille og fjerne paringen av Easy LE-adapteren

- Sørg for at adapteren er koblet til en telefon, et nettbrett eller en PC, slik at den er slått på.
- For å tilbakestille adapteren, trykk et spisst verktøy inn i hullet til LED-indikatoren på adapteren begynner å blinke blått. Adapteren er nå klar til å kobles til en ny LE Audio-enhet.

Tips: Easy LE-adapteren mister ikke paringen med høreapparatene når den tas ut av en telefon, nettbrett eller PC og kobles til en ny enhet. Dette betyr at du enkelt kan streame fra forskjellige enheter med en USB-C-port.

Viktig: Du kan bare være koblet til ett sett med høreapparater eller andre LE Audio-enheter om gangen.

Ofte stilte spørsmål og feilsøking

Spørsmål

Svar

Hvilke typer enheter vil Easy LE-adapteren fungere med?

- Easy LE-adapteren kan streame lyd med høreapparater, ørepropper og andre trådløse lydenheter som har innebygd LE Audio.
- Adapteren er optimalisert for bruk med Android-telefoner og nettbrett, samt PC-er som har en USB-C-port.
- Adapteren er ikke beregnet for bruk med telefoner, nettbrett eller PC-er som støtter LE Audio, og den er ikke beregnet for bruk med iPhone, iPad, Mac eller Vision Pro.
- De fleste telefoner og nettbrett med 3,5 mm lydutgang fungerer ikke med adapteren, ettersom mange produsenter velger å sende lyden gjennom jack-porten i stedet for USB-C.

Enheten min har ikke en USB-C-port. Kan jeg koble Easy LE-adapteren til en USB-adapter som passer til telefonen, nettbrettet eller PC-en min?

- Ja, det er mulig å bruke en adapter, for eksempel en USB-C til USB-A-adapter. Det er imidlertid ikke garantert at alle tredjepartsadaptere fungerer med Easy LE-adapteren.

Kan jeg ta imot og avslutte samtaler enten ved å bruke trykknappene eller ved å trykke på høreapparatene mine?

- Nei, dette er ikke mulig. Når adapteren er koblet til enheten, støttes ikke samtalehåndtering via trykknapper eller tapping på høreapparatene.
- Motta eller avslutt samtaler via telefonen, nettbrettet eller PC-en.
- Når du streamer lyd eller samtaler, vil knappene på høreapparatene kontrollere streaming-volumet (hvis denne funksjonen er konfigurert av audiografen din).

Easy LE-adapteren er koblet til telefonen, nettbrettet eller PC-en min, men det er ingen lyd. Hva kan jeg gjøre?

- Sørg for at volumet er skrudd opp både på enheten du streamer fra og høreapparatene dine.
- Kontroller at riktig utgang er valgt for lyd på enheten din (f.eks. «Kablede hodetelefoner» på telefon/nettbrett og «Easy LE Adapter» på PC-en).
- Slå Bluetooth® AV og På igjen.
- Fjern Easy LE-adapteren fra enhetens USB-C-port og koble den til den samme porten for å starte adapteren på nytt.
- Hvis forslaget ovenfor ikke løser problemet, må du tilbakestille og pare adapteren på nytt.

Ofte stilte spørsmål og feilsøking

Spørsmål	Svar
Lyden høres forvrengt eller hakkete ut. Hva kan jeg gjøre?	• Flytt deg nærmere enheten som Easy LE-adapteren er koblet til. Bluetooth-tilkoblingen kan påvirkes av avstand og hindringer. • Sørg for en stabil internettforbindelse eller telefonsignal hvis du streamer lyd på nettet eller er i en samtale.
Easy LE-adapteren er løs eller sitter ikke ordentlig i USB-C-pluggen på telefonen, nettbrettet eller PC-en min. Hva kan jeg gjøre?	• Adapteren har en forlenget USB-C-plugg som er designet for å passe til standard telefon- og nettbrettdeksler, men den passer kanskje ikke helt inntil deksler som er veldig tykke. Prøv å fjerne telefon-/nettbrettdekslet før du kobler adapteren til enheten igjen. • Støv/skitt inni USB-C-pluggen kan føre til feil plassering. Rengjør USB-C-porten på enheten nøye i henhold til spesifikasjonene fra enhetsprodusenten.
Etter at jeg koblet Easy LE-adapteren til enheten min, mistet høreapparatene mine forbindelsen til høreapparat-appen eller enheten. Hva kan jeg gjøre?	• Når adapteren kobles til USB-C-porten, starter den Bluetooth-tilkoblingen på nytt i enheten den er koblet til. Dette betyr at høreapparater eller andre lydenheter noen ganger kan miste forbindelsen til enheten og appene de er koblet til. • Slå Bluetooth av og på igjen for å koble til høreapparatene eller andre lydenheter som har mistet forbindelsen.

Easy LE-adapteren er produsert av Minami Acoustics Limited.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av Demant og Minami Acoustics Limited er under lisens. Android™ er et varemerke for Google LLC. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

