

TAMI Guide – Brukermanual APP

TAMI briller

Versjon 1.0

INNHold

Del I – Komme i gang

1. Komme i gang
2. Installasjon av appen
3. Introduksjon
4. Oppstart og oppsett

Del II – Koble til brillene

5. Navigering i appen
6. Koble til en enhet
7. Oversikt over enhetskontroll

Del III – Bruk og konfigurering av TAMI

8. Finn brillene mine
9. Enhetsinnstillinger
10. Fastvareoppdatering (OTA)
11. Batteristatus

Del IV – Konto og støtte

12. Innboks og nyhetsbrev
13. Appinnstillinger og konto
14. Feilsøking

KOMME I GANG

Appinstallasjon (iPhone): Åpne App Store, søk etter «Tami Guide», trykk Hent og åpne appen etter installasjon.

Appinstallasjon (Android): Åpne Google Play Store, søk etter «Tami Guide», trykk Installer og åpne appen når installasjonen er ferdig.

Kontoopprettelse og innlogging

1. Trykk Registrer for å opprette konto eller Logg inn dersom du allerede har en konto.
2. Skriv inn e-postadresse og passord.
3. Etter vellykket innlogging åpnes hovedskjermen.

Introduksjonssider:

- Velkommen – introduksjon til Tami Guide.

- Koble til – sammenkobling, inne-/utemodus, vibrasjon og lyd.
- Administrer – OTA-oppdateringer, Finn brillene mine og batteriovervåking.
- Hold deg oppdatert – varsler om oppdateringer og månedlige nyhetsbrev.

KOBLE TIL BRILLENE

Appen har tre faner: Hjem, Innboks og Innstillinger.

Koble til en enhet:

1. Åpne Hjem-fanen.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert.
3. Slå på TAMI-brillene.
4. Velg enheten fra listen over tilgjengelige enheter.
5. Vent til tilkoblingen er fullført.
6. Enheten vises deretter under Tilkoblede enheter.

Frakobling:

Sveip enhetskortet til siden og bekreft frakoblingen.
Normalt støttes én tilkoblet enhet om gangen.

OVERSIKT OVER ENHETSKONTROLL

Batteri – viser batterinivå og ladestatus.

Innstillinger – åpner enhetsinnstillinger.

Finn brillene mine – får brillene til å avgi lyd.

Omstart – starter enheten på nytt.

FW Update – vises i vedlikeholdsmodus.

FINN BRILLENE MINE

1. Trykk Finn brillene mine.
2. Trykk Start for å få brillene til å ringe/pipe.
3. Trykk Stopp for å slå av lyden.
4. Lyden stopper også automatisk etter en forhåndsinnstilt tid.

ENHETSINNSTILLINGER

Vibrasjonsintensitet:

Nivå 0 = Av

Nivå 1 = Lav

Nivå 2 = Middels

Nivå 3 = Høy

Nivå 4 = Maksimal

Tilbakemeldingsmodus:

Kort rekkevidde (innendørs) – for trange områder.

Lang rekkevidde (utendørs) – for åpne områder.

Endringseffekt ved modusbytte:
Velg Vibrasjon eller Lyd.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger:
Advarsel: Handlingen kan ikke angres. Alle egendefinerte innstillinger slettes.

FASTVAREOPPDATERING (OTA)

1. Sett enheten i vedlikeholdsmodus ved å koble til strøm og holde inne knappen i 10 sekunder.
2. Åpne FW Update.
3. Velg fastvarefil og bekreft.
4. Opplastingen starter og fremdriften vises.
5. Enheten starter automatisk på nytt.
6. Appen kobler seg til igjen og verifiserer oppdateringen.
7. Gjenta for underenheten dersom nødvendig.
8. Avslutt vedlikeholdsmodus ved å holde inne strømknappen i 10 sekunder.

BATTERISTATUS

Viser batteriprosent og ladestatus for hovedenhet og undereenhet.

Fargekoder:

Grønn – tilstrekkelig batteri.

Oransje – lavt batteri.

Rød – kritisk lavt batteri.

INNBOKS OG NYHETSBREV

Innboksen viser varsler om Firmwareoppdateringer og månedlige nyhetsbrev.

Uleste meldinger markeres med et merke på fanen.

APPINNSTILLINGER OG KONTO

Profilinformasjon – navn, e-post og kontotype.

Logg ut – avslutter økten.

Slett konto – fjerner kontoen permanent.

Rapporter feil – sender inn feilrapport.

Om – personvernerklæring, bruksvilkår, nettsted og appversjon.

FEILSØKING

- Enheten vises ikke: Kontroller Bluetooth, strøm og rekkevidde.
- Tilkoblingen mislykkes: Gå nærmere enheten og start app og briller på nytt.
- Kan ikke starte FW Update: Kontroller at enheten er i vedlikeholdsmodus.
- Finn brillene mine fungerer ikke: Kontroller at enheten er tilkoblet.
- Hardwareoppdatering feiler: Bruk riktig og uskadet .bin-fil.
- Ingen vibrasjon: Kontroller at vibrasjon ikke er satt til Av.

- Udatert nyhetsbrev: Oppdater innboksen og kontroller internettforbindelsen.