

bernafon[®]

Innovative Hearing Solutions



RC-S

***Fjernkontroll
Bruksanvisning***

Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen:



RC-S

Gratulerer med din nye Bernafon fjernkontroll. Dette er en av de mest avanserte fjernkontrollene tilgjengelig på markedet. Den er tilpasset slik at du enkelt og nøyaktig skal kunne betjene styrken og de forskjellige programmene som er programmert inn i høreapparatene.

Vennligst følg denne bruksanvisningen når du bruker den nye fjernkontrollen. Det vil hjelpe deg til å oppnå den best mulige utnyttelsen av høreapparatene dine. Du kan igjen nyte lydene av liv din familie, venner og omgivelsene.

Bernafon fjernkontroll

RC-S



Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhets-
informasjon

Beskrivelse av lytteprogrammer

Lytte-
programmer

Beskrivelse av funksjoner

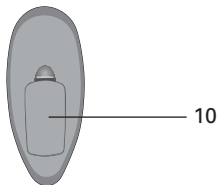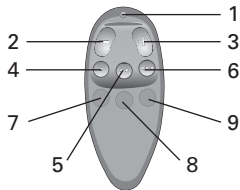

- 1 Batteri-indikator
- 2 Redusere lydstyrken
- 3 Øke lydstyrken
- 4 Lytteprogram 1
- 5 Lytteprogram 2

- 6 Lytteprogram 3
- 7 Symbol for program 1
- 8 Symbol for program 2
- 9 Symbol for program 3
- 10 Batteriluke

Dine lytteprogrammer:

Lytteprogram 1:

Lytteprogram 2:

Lytteprogram 3:

Fylles ut av
din audiograf

Hvordan betjene høreapparatet ditt ved hjelp av fjernkontrollen

Du kan benytte kontrollene på selve høreapparatet eller trykke på ønsket funksjon på din fjernkontroll. Den siste justeringen du gjør vil bli gjeldende innstilling i høreapparatet.

Eksempel: Dersom bryteren på høreapparatet ditt står i program 2, og du trykker på program 1 på fjernkontrollen, vil innstillingen i høreapparatet bli endret til program 1.


Rekkevidden på fjernkontrollen

Med fjernkontrollen kan du betjene høreapparatet ditt med en rekkevidde på 1 meter (tilsvarer omtrent lengden på armen din). Fjernkontrollen kan benyttes fra jakkelommen eller håndvesken din. Direkte sikt mellom fjernkontrollen og høreapparatet er ikke nødvendig.

Sovemodus

Din nye fjernkontroll har ingen Av/På funksjon. Den vil automatisk gå i «sovemodus» når du ikke bruker den.

Volumkontroll

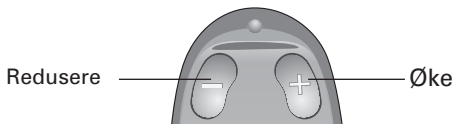


Trykk «+» for å øke lydstyrken (høyere)

Trykk «-» for å redusere lydstyrken (lavere)

3 lytteprogrammer

Høreapparatet ditt kan tilpasses med 3 ulike lytteprogrammer (se side 3). Du kan enkelt bytte mellom disse tre programmene med fjernkontrollen.

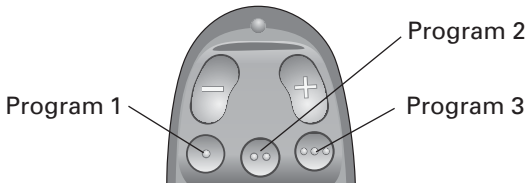

For program 1 trykk på knappen med «●»

For Program 2 trykk på knappen med «●●»

For Program 3 trykk på knappen med «●●●»

Programknappens rekkefølge

De 3 programknappene på fjernkontrollen din tilsvarer de 3 programmene i høreapparatet ditt. Når du bruker fjernkontrollen for å bytte lytteprogram, vil høreapparatet ditt pipe og indikere hvilket program du hører på.

Vennligst se i bruksanvisningen som følger med høreapparatet for mer informasjon.

Hvis program 2 og/eller program 3 i høreapparatet ditt ikke er tilgjengelig, vil det ikke skje endringer når du trykker på «●●» eller «●●●» knappene.




Skifte batteri

Sette i nytt batteri (CR 2)

- Benytt fingerneflen til forsiktig å fjerne batterilokket.



- Ta ut det brukte batteriet

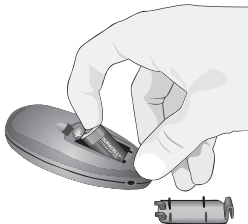

- Før du setter i et nytt batteri må du forsikre deg om at «+» tegnet på batteriet og «+» tegnet på batteriluken peker mot hverandre.
- Sett batteriet i batteriluken og pass på at batteriet har kontakt i begge ender.

- Sett på plass batterilokket over batteriluken. Forsøk aldri å tvinge batterilokket på plass.
- Batteri-indikatoren blinker grønt når batteriet fungerer og rødt når det må byttes ut.
- Batteriets levetid vil variere avhengig av bruken. Kontakt din audiograf for mer informasjon.
- Benytt ikke oppladbare batterier i din fjernkontroll.



Batteri-indikator



Vedlikehold av fjernkontrollen

- Når du bytter batteri i fjernkontrollen din, bør du holde den over en myk overflate for å unngå skade om du skulle miste den.
- Hold fjernkontrollen ren. Tørk den regelmessig med en tørr klut eller fille.
- Unngå at fjernkontrollen blir våt (ikke bruk den i dusjen, kraftig regnvær e.l.).
- Forsøk aldri å tørke fjernkontrollen med en hårføner, i mikrobølgeovn, eller ved hjelp av annet utstyr som ikke er beregnet til dette formålet.

- Utsett aldri fjernkontrollen din for ekstrem varme.
La den for eksempel aldri ligge i hanskerommet i bilen.

Miljømessige hensyn



Tenk på miljøet, ikke kast batteriene eller fjernkontrollen sammen med husholdningsavfallet. Det vil føre til miljøforurensning. Vennligst resirkuler fjernkontrollen og batteriene, eller returner dem til høresentralen din. Kontakt din audio-graf for mer informasjon.

Advarsler og sikkerhetsinformasjon

Gjør deg kjent med hele denne bruksanvisningen før du tar den nye fjernkontrollen i bruk.

Et oppbrukt batteri bør fjernes/erstattes øyeblikkelig.

Brukte batterier bør returneres til din forhandler eller audiograf.

Brenn aldri batterier. Det kan medføre eksplosjonsfare.

Kast ikke batterier sammen med husholdningsavfall. Det kan føre til miljøforurensning.

Prøv aldri å lade opp ikke-oppladbare batterier.

Hold nye og brukte batterier borte fra barn.

Kontakt straks kvalifisert helsepersonell hvis de svelges!!!

Fjernkontrollen er ikke godkjent for bruk der det er eksplosjonsfare og den må ikke benyttes i slike omgivelser.

Fjernkontrollen benytter digitalt induktive signaler for å overføre kommandoer til høreapparatet. Selv om det er lite sannsynlig, råder det en viss bekymring for at disse signalene kan påvirke medisinsk utstyr som f.eks. pacemakere.

Som en ekstra forhåndsregel anbefaler vi at pacemaker-pasienter ikke har fjernkontrollen i brystlommen eller rundt halsen.

Advarsel! Fjernkontrollen er ikke en leke og skal ikke under noen omstendigheter overlates til små barn.

Av sikkerhetsgrunner skal aldri snoren knyttes sammen, benytt snorlåsen som følger med.

Internasjonal garanti

Bernafon fjernkontroller dekkes av en begrenset garanti, som dekker material- og produksjonsfeil i en periode på 12 måneder fra utleveringsdato. Denne garantien dekker fjernkontrollen, men ikke tilbehør som batterier o.l.

Garantien er ugyldig dersom feilen er et resultat av ukyndig og feilaktig bruk.

Garantien er også ugyldig dersom fjernkontrollen blir reparert av ikke-autorisert personell. Vennligst gjennomgå garantien med din audiograf og forsikre deg om at ditt garantikort er riktig utfyllt.

Beskrivelse av lytteprogrammer med symboler

Illustrasjonene nedenfor av ulike lyttesituasjoner er ment for å gi deg din personlige fjernkontroll. Din audiograf kan hjelpe deg med å velge passende symboler til dine lytteprogrammer.

Manufacturer:

Bernafon AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Switzerland:

Phone +41 31 998 15 15

Fax +41 31 998 15 90

www.bernafon.com



GEWA

- helping people

Gewa AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN

Besøksadresse: Trollåsveien 8

Telefon: 66 99 60 00

Telefaks: 66 80 94 90

Teksttelefon: 66 80 93 90

gewa@gewa.no

www.gewa.no

www.hear-it.org

For mer informasjon om hørsel
og hørselstap.