

Dersom ikke annet er nevnt, er alle anbefalinger basert på nivå 2 i forsterkningsbildet.

2 dB = 1 trykk i nivå 2

Level 1	Level 2	Level 3	Low	Mid	High	All
			2	13	9	80 dB

STYRKE

PROBLEM		LØSNING	
STYRKE omgivelseslyder	SVAKE LYDER	for svak	Øk forsterkningen for 50 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for 50 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
	MIDDELS KRAFTIGE LYDER	for svak	Øk forsterkningen for 65 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for 65 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
	KRAFTIGE LYDER	for svak	Øk forsterkningen for 80 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for 80 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
	ALLE INNIVÅER	for svak	Øk forsterkningen for alle innivåer i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for alle innivåer i alle frekvenser med 2 dB steg
STYRKE talelyder	SVAK TALE	for svak	Øk forsterkningen for 50 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for 50 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
	VANLIG SAMTALE	for svak	Øk forsterkningen for 65 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for 65 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
	KRAFTIG TALE	for svak	Øk forsterkningen for 80 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		for kraftig	Reduser forsterkningen for 80 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg

BAKGRUNNSSTØY

PROBLEM		LØSNING	
BAKGRUNNSSTØY middels kraftig og kraftig	KUN STØY		<ul style="list-style-type: none"> Reduser forsterkningen for 65 og 80 dB innivå i lavfrekvensen med 2 dB steg Endre innstillinger for Støyreduksjon Reduser generell forsterkning i alle frekvenser med 2 dB steg Velg "Støy" i Omgivelsesoptimalisering
	TALE ER TIL STEDE	Tale er tydelig og kraftig nok, men bakgrunnsstøyen er for kraftig	<ul style="list-style-type: none"> Reduser forsterkning for 80 dB innivå i lavfrekvensen med 2 dB steg Endre innstillinger for Støyreduksjon og sørg for at retningsvirkningen er på
		Tale er utydelig, men bakgrunnsstøyen er ok	<ul style="list-style-type: none"> Øk forsterkningen for 50 og 65 dB innivå i midt- og høyfrekvensen med 2 dB steg Sørg for at retningsvirkningen er på og velg "Tale i støy" i Omgivelsesoptimalisering
BAKGRUNNSSTØY svak	KUN STØY		<ul style="list-style-type: none"> Øk Soft Noise Management et hakk Reduser forsterkningen for 50 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg

Dersom ikke annet er nevnt, er alle anbefalinger basert på nivå 2 i forsterkningsbildet.

2 dB = 1 trykk i nivå 2

Level 1	Level 2	Level 3	Low	Mid	High	All
			2	13	9	80 dB

FEEDBACK

PROBLEM	LØSNING
PIPING	<ul style="list-style-type: none"> Utfør feedbackmåling Reduser "risiko for feedback" med ett steg og trykk "reduser feedback"-knappen
	<ul style="list-style-type: none"> Reduser ventilering og sjekk øreproppens plassering i øret Bytt til en tettere ørepropp (for eksempel Spiraflex: fra åpen til tulipdome) eller bytt fra åpen løsning til hook. Merk: dersom du endrer akustikken fysisk på høreapparatet, må dette oppdateres i Oasis.

LYDKVALITET

PROBLEM	LØSNING		
LYDKVALITET	METALLISK	<ul style="list-style-type: none"> Reduser forsterkningen i høyfrekvensen med 2 dB steg 	
	TYNN ELLER SVAK	<ul style="list-style-type: none"> Øk forsterkningen for alle innivåer i lavfrekvensen og/eller reduser forsterkningen for alle innivåer i høyfrekvensen med 2 dB steg 	
	UTYDELIG	<ul style="list-style-type: none"> Øk forsterkningen for 65 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg 	
	FOR MYE DISKANT	<ul style="list-style-type: none"> Reduser generell forsterkning i høyfrekvensen med 2 dB steg og/eller øk generell forsterkning i lavfrekvensen med 2 dB steg Trykk "Mørkere" under Lyd i Nivå 1 i forsterkningsbildet 	
	FOR MYE BASS	<ul style="list-style-type: none"> Reduser generell forsterkning i lavfrekvensen med 2 dB steg og/eller øk generell forsterkning i høyfrekvensen med 2 dB steg Trykk "Lysere" under Lyd i Nivå 1 i forsterkningsbildet 	
EGEN STEMME	SVAK	Når du snakker høyt	<ul style="list-style-type: none"> Øk forsterkningen for 80 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		Når du snakker normalt	<ul style="list-style-type: none"> Øk forsterkningen for 65 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
		Når du snakker svakt	<ul style="list-style-type: none"> Øk forsterkningen for 50 dB innivå i alle frekvenser med 2 dB steg
	OKKLUSJON	<ul style="list-style-type: none"> Øk eller reduser generell forsterkning i lavfrekvensen med 2 dB steg Reduser forsterkningen for 80 dB innivå i lavfrekvensen med 2 dB steg 	
		<ul style="list-style-type: none"> Kontroller ventilasjonen og/eller vurder å åpne denne mer Bytt til en mer åpen propp/dome; husk å endre i Oasis 	
	TYNN	<ul style="list-style-type: none"> Øk generell forsterkning i lavfrekvensen med 2 dB steg 	
	METALLISK	<ul style="list-style-type: none"> Reduser generell forsterkning i høyfrekvensen (4 kHz, 6 kHz og 8 kHz) med 1 dB steg (gå til Nivå 3) 	
FOR MYE BASS	<ul style="list-style-type: none"> Reduser generell forsterkning i lavfrekvensen med 2 dB steg 		