

Telefon freeTEL II/S

CANTEC

- helping people

Brukerveiledning

freeTEL II/S

trådløs telefon med høy lyd og teleslynge



FreeTel II/S - komplett m/basestasjon HMS nr. 135270 Best. nr. 1104905

FreeTel II/S - håndsett m/lader HMS nr. 136004 Best. nr. 1104906

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

Sikkerhetsanvisninger

For å kunne bruke telefonen sikkert, vennligst les gjennom sikkerhetsanvisningene nedenfor og kapittelet „ta i bruk“.

- Sett apparatet på et sklisikkert underlag.
- Legg tilkoblingsledninger slik at de ikke skades.
- Utsett aldri telefonen for:
 - varmekilder
 - direkte sollys
 - fuktighet
 - andre elektriske apparater
- Beskytt telefonen din mot fuktighet, støv, etsende e væsker og damper.
- Koble tilkoblingsledningene kun til de passende pluggene.
- Tilkoble kun sertifisert tilbehør.
- Du må ikke
 - åpne basen eller håndsettet selv!
 - bruke telefonen ved tordenvær!

Innholdsfortegnelse Side

Ta i bruk

Pakningsinnhold	4
Tilkobling av telefonen	4
Batterier	4
Visning av batterienes ladetilstand	5
Rekkevidde	5
Søking etter håndsett (Paging)	5

Betjeningselementer

Betjeningselementer for håndsett	6
Betjeningselementer for base	7

Visninger på displayet

8

Telefonering

Ring eksternt	8
Besvare anrop	8
Bruke handsfree under en samtale	9
Repetisjon	9
Innstilling av telefonrørvolum/ regulering av høy-/lavfrekvente lyder	9
Koble inn/ut mikrofonforsterkning	9
Visning av samtalevarighet	10
Koble inn/ut mikrofon	10

Innstilling dato/klokkeslett

10

Telefonbok

Bruk av telefonboken	11
Tasttildeling	11
Oppringing med telefonboken	12
Lagre navn/nummer	13
Endre navn/nummer til en telefonbokoppføring	14
Lagre telefonnummer fra repetisjonslisten	15
Slette navn/nummer i telefonboken	15

Nummeroverføring

Funksjon	16
Lese og ringe oppføringer	16
Lagre oppføring i telefonboken	17
Slette oppføring eller alle oppføringer	18

Innstillinger håndsett

Melodi/ringetonevolum	19
Endre navn på et håndsett	20
Endre menyspråk	20
Melde opp ekstra håndsett	21
Avmelde håndsett på basen	22
Tastelås	23
Slå av permanent radiostråling	23

Innstillinger nettverk

Innstille valgmodus	24
Innstille flashtid	25
Innstille valgpause	25

Bruk av flere håndsett

Interne samtaler	26
Sammenkoble samtaler mellom håndsett	27

Tilkobling av ekstra tilbehør

27

Hvis telefonen ikke fungerer

28

Tilbakestilling av telefonen til

fabrikkoppsett

28

Viktige henvisninger

29

Tillegg

Vedlikehold og pleie	29
Garanti	29
Miljøinformasjon/Avfallshåndtering	29
Tekniske data	30
CE-merking	30

Ta i bruk


Pakningsinnhold

Vennligst kontroller om alle delene som er oppført nedenfor er med i leveringen:

- Telefon (håndsett)
- Base
- Strømadapter
- Telefonledning
- 2 batterier (NiMH)
- Brukerveiledning
- Garantikort

Skulle det mangle deler, vennligst henvend deg til Cantec AS.


Tilkobling av telefonen

1. Tilkoble strømadapteren til stikkontakten og til basen.
2. Tilkoble telefonstøpslet til telefonledningen til basen.
3. Sett telefonledningen i kontakten til telefonnettet.
4. Sett begge batteriene inn i håndsettet. Vær oppmerksom på at batteriene tilkoples med riktig polaritet!
5. Still håndsettet med tastaturen fremover i basen. Hvis håndsettet er plassert korrekt, begynner batterisymbolet  i telefondisplayet å blinke og den røde ladeindikatoren på basen lyser.

Obs!

Ikke plasser basen i nærheten av f.eks. TV-apparater, dataskjermer, andre telefoner, ventilatorer osv. for å holde risikoen for forstyrrelser så lav som mulig. Still heller ikke basen i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.

Batterier


Telefonen leveres med NiMH-batterier. Hvis batteriene lades korrekt opp og ut, har de en lang levetid. Når batteriene er fullt oppladet, har de en standbytid på ca. 100 timer henholdsvis en maksimal taletid på 10 timer. Opplading av batterier som er helt utladet tar ca. 14 timer. Visning av batterienes ladetilstand blinker så lenge telefonen lades. Når ladingen er avsluttet, lyser symbolet  i displayet. Telefonen har en ladeautomatikk slik at batteriene som brukes ikke overlades.

Obs!

Når telefonen tilkobles for første gang, må batteriene lades i 12 timer.

Anmerkning: Unngå lagring av batteriene i håndsettet, hvis du ikke bruker telefonen i lengre tid (ca. 6 måneder).

Visning av batterienes ladetilstand

Når batteriene er nesten tomme, vises symbolet  i displayet til håndsettet og du hører en varseltone. Hvis telefonen ikke lades nå, slås håndsettet automatisk av ved for liten batteriespenning til det settes i basen igjen.

Rekkevidde


Telefonens rekkevidde kan variere mellom 30 og 300 m. Radiosignalene for overføring kan påvirkes av forskjellige faktorer. Maksimal rekkevidde oppnås kun hvis det ikke står noe mellom telefonen og basen (idealtilfellet er en rekkevidde på 300 m). I huset eller i en leilighet begrenses rekkevidden av vegger. I idealtilfellet står basen litt opphøyd. Befinner håndsettet seg utenfor rekkevidden under en samtale lyder en varseltone. Hvis håndsettet ikke føres nærmere basen, kan samtalen avbrytes.


Søking etter håndsett (Paging)

1. Trykk tast  på basen.
2. Alle oppmeldte håndsett ringes opp.
3. Ringingen slutter når det trykkes en hvilken som helst tast på ett av håndsettene som ble ringt opp.

Betjeningselementer


Betjeningselementer til håndsettet

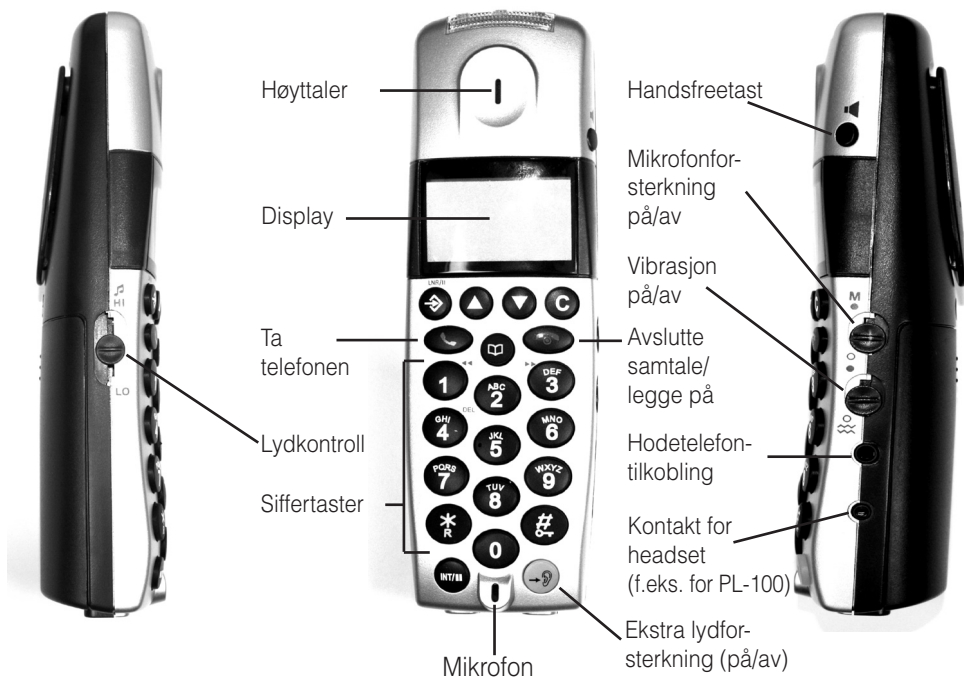


 Menyfunksjon/bekreftelse utvalg


 Slette feil inntasting

 Telefonbok


 Firkanttast / Tastelås på/av – langt trykk på tasten, s. 23

 Bla:  opp ned

 Ved inntastingsfeil gå tilbake til startmeny

 *_R Stjernetast / R-tast (Flash) – langt trykk på tasten, s. 25

Betjeningslementer til basen

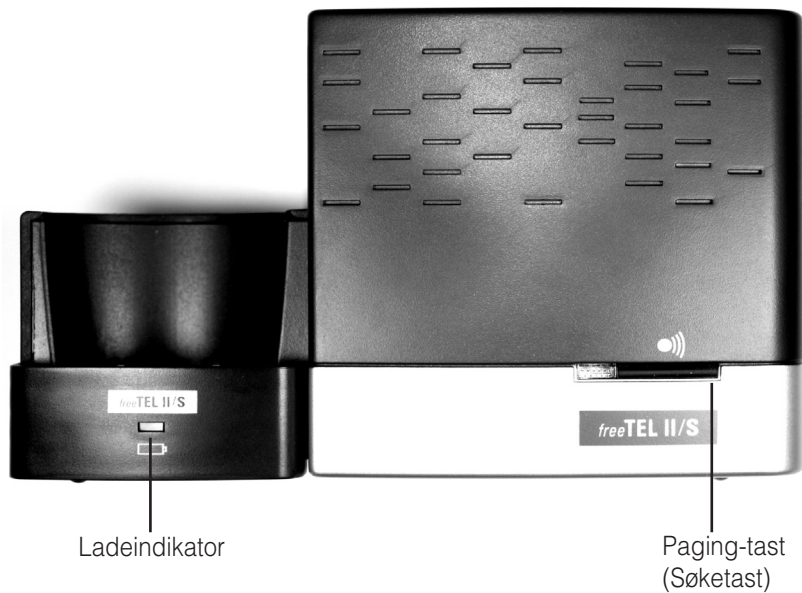


Visninger på displayet







Telefonering

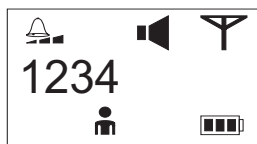Ring eksternt

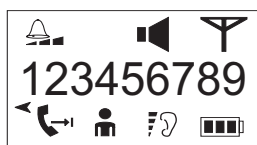

1. Tast inn ønsket telefonnummer (maks. 20 sifre). En feil inntasting kan slettes med tast **C**.





2. Trykk tast  eller handsfreetasten . Nummeret ringes opp.
3. Samtalen avsluttes igjen idet tast  trykkes.


Besvare anrop



1. Telefonen ringer.
2. Besvar anropet med tast  eller handsfreetasten .
3. Samtalen avsluttes igjen når det trykkes på tast .



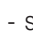

Bruke handsfreefunksjonen under en samtale

1. Trykk handsfreetasten , for å koble inn handsfreefunksjonen under en samtale.
2. For å koble handsfreefunksjonen ut igjen, trykk handsfreetasten  på nytt.


Anmerkning: For optisk fremstilling av innkoblet handsfreefunksjon vises  - symbolet i displayet.

Repetisjon

Med tast  kan man vise de siste oppringte telefonnumrene.


1. Trykk tast  og bla med tastene   til ønsket telefonnummer.
2. Idet tast  trykkes ringes nummeret opp.

Innstilling av telefonrørvolum/regulering av høy-/lavfrekvente lyder

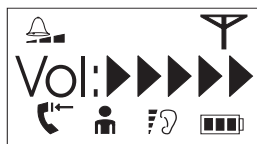

Telefonrørvolumet kan innstilles under en samtale med piltastene på håndsettets forside.

Idet tastene   trykkes, økes henholdsvis reduseres telefonrørvolumet i fem trinn med 4 dB per trinn.


Med tast  kan en ekstra forsterkning kobles inn (tasten lyser rødt) og lydkontrollen aktiveres. Med lydkontrollen (skyvebryter på husets venstre side) kan du i tillegg forsterke høy- henholdsvis lavfrekvente lyder med 10 dB.

For å koble ekstra forsterkning og lydkontroll ut igjen, trykk tast  (tasten lyser ikke).


Anmerkning:

Omkobling av forsterkningen fungerer kun når telefonrøret er tatt av.

Koble inn/ut mikrofonforsterkning

FreeTEL II/S har en ekstra mikrofonforsterkning som kan kobles inn. Dette gjør det mulig for deg å oppnå en bedre tydelighet/forståelse ovenfor samtalepartneren ved lave lydoverføringer. For å koble inn mikrofonforsterkningen skyv skyvebryteren **M** på posisjon .


Visning av samtalevarighet

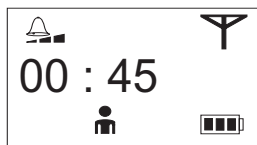

Etter samtalen vises samtalevarigheten i displayet.

Koble inn/ut mikrofonen

Under en samtale kan du koble mikrofonen til håndsettet ditt inn og ut. For å koble ut mikrofonen, gå frem slik:

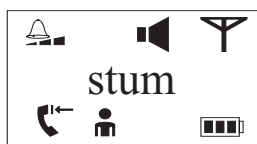

1. Trykk tast **C**. Mikrofonen er nå koblet ut, og i displayet blinker "stum".
2. For å koble mikrofonen inn igjen, trykk tast **C** en gang til.

Innstilling dato/klokkeslett



1. Velg ▲▼ menyfunksjonen „system“ med tasten ⇄ og trykk deretter tast.



2. Velg nå menyfunksjonen „dag/tid“ og trykk tast ⇄.



3. Visning av dato blinker og du kan taste inn ønsket dato med sifertastene (se tabell "Tasttildeling" side 11).
4. Er datoen innstilt, trykk tast ▼.



5. Venstre siffer til klokkeslettet (tt:mm) blinker. Tast nå inn første siffer via sifertastaturet og trykk deretter tast ▼ for å komme til neste siffer. Gå frem på samme måte ved de neste sifrene.
6. Er klokkeslettet innstilt, trykk tast ↩ og du hører en bekræftelsestone.

Anmerkning:

Hvis telefonen er koblet til et telefonanlegg, overtas automatisk tidsinnstillingen fra telefonanlegget ved opptak av en beskjed.

Tastildeling

Tast	ukedag	Tast	ukedag
1	man	5	fre
2	tirs	6	lør
3	ons	7	søn
4	tors		

Telefonbok

Bruk av telefonboken

I telefonboken kan du lagre opptil 50 oppføringer med navn og telefonnummer. Hvert navn kan ha opptil 10 tegn og nummeret kan maksimalt ha 20 sifre.

Tastildeling

Tast	bokstav / tegn	Tast	bokstav / tegn
1	[mellomromstast] 1	6	M N O m n o 6
2	A B C a b c 2	7	P Q R S p q r s 7
3	D E F d e f 3	8	T U V t u v 8
4	G H I g h i 4	9	W X Y Z w x y z 9
5	J K L j k l 5	0	0

Oppringing med telefonboken

For å ringe fra telefonboken har du to metoder:

1. metode:





1. For å åpne telefonboken, trykk tast .

Anmerkning:

For å kunne bruke tasten  må det være lagret minst en oppføring i telefonboken!




2. Første oppføring i telefonboken vises. Med tastene   kan du veksle mellom oppføringene. For ikke å måtte søke gjennom hele telefonboken etter ønsket oppføring, kan du bruke søkefunksjonen. Hvis du f.eks. søker etter en oppføring med forbokstaven W, trykk siffertast **9** (»W«).

3. For å ringe nummeret til ønsket abonnent, trykk tast .


4. Idet du trykker tast **C** kan du avbryte søkefunksjonen.


2. metode:



1. Bla til menyfunksjonen „telbok“ med tastene   og trykk deretter tast .



2. Velg nå menyfunksjonen „finn“ og bekreft valget med tast .

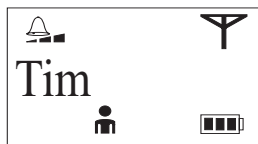

3. Første oppføring i telefonboken vises. Du kan veksle mellom oppføringene med tastene ▲▼ For ikke å måtte søke gjennom hele telefonboken etter ønsket oppføring, kan du bruke søkefunksjonen. Hvis du f.eks. søker etter en oppføring med forbokstaven W, trykk siffertast **9** (»W«).

4. For å ringe nummeret til ønsket abonnent, trykk tast .


5. Ved å trykke tast **C** kan du avbryte søkefunksjonen.

Lagre navn/nummer

For å taste inn nye oppføringer i telefonboken, gå frem slik:




1. Velg menyfunksjonen „telbok“ med tastene ▲▼ og trykk tast .

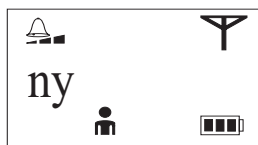


2. Velg deretter med tastene ▲▼ menyfunksjonen „ny“ og trykk tast .



3. Nå taster du inn det nye navnet. Tast de tilsvarende siffertastene en eller flere ganger til den ønskede bokstaven vises (se tabell „tastildeling“ side 11). Trykk tast  når du er ferdig med inntastingen.




4. Tast nå inn ønsket telefonnummer inklusive retningsnummer. Når du er ferdig med inntastingen, trykk tast . For å bekrefte lagringen vises ”lagr.” i displayet.






5. I displayet vises nå „ny“.
6. Trykk tast , for å taste inn en ytterligere oppføring eller tast **C** for å gå ett nivå tilbake i menyen.

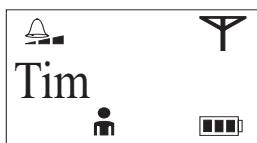


Endre navn/nummer til en telefonbokoppføring


1. For å endre en telefonbokoppføring, trykk tast .




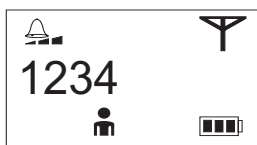
2. Velg nå ønsket oppføring med tastene   og trykk tast .



3. Velg nå menyfunksjonen „endre“ med tastene   trykk deretter tast .

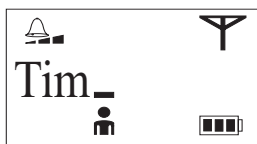


4. Du kan nå endre navnet på oppføringen. For å slette en bokstav, trykk tast **C**. Lagre endringen av navnet ved å trykke tast .



5. Rediger deretter nummeret til oppføringen og bekreft endringene dine med tast .

Lagre telefonnummer fra repetisjonslisten

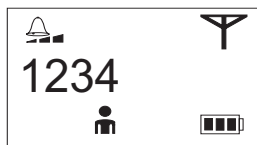




1. Trykk tast , i displayet vises det siste oppringte nummeret.
2. Bla med begge tastene   mellom numrene til du har funnet den ønskede oppføringen.




3. Trykk nå tast , i displayet vises spørsmålet „lagre nr?“.





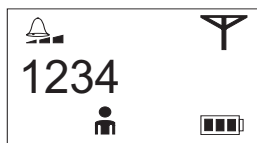

4. Bekreft dette med tast . I displayet vises „navn:“, tast inn et navn med sifertastene og bekreft inntastingen din med tast .






5. Nummeret vises nå en gang til i displayet. For å lagre dette, trykk tast .
6. For å forlate menyen, trykk tast **C**.

Slette navn/nummer i telefonboken

1. For å slette en telefonbokoppføring, trykk tast .
2. nå den ønskede oppføringen med tastene   og trykk tast .



3. Velg nå menyfunksjonen „slette“ med tastene   og trykk deretter tast .



4. I displayet vises spørsmålet „bekreft?“.
5. Trykk nå tast  for bekreftelse.

Nummeroverføring

Funksjon

Telefonen lagrer opptil 50 identifiserte telefonnumre. Ubesvarte anrop vises øverst i telefonnummerlisten.

OBS! Nummeroverføringen fungerer kun hvis teleselskapet ditt støtter denne funksjonen. Vennligst spør teleselskapet ditt.

Lese og ringe opp oppføringer



1. Trykk tast ▼, for å velge menyfunksjonen "oppring id".



2. Trykk tast ↗, på displayet vises nå alle mottatte anrop med navn eller nummer og symbolet  lyser.

3. For å vise ytterligere detaljer, trykk tast ↗ når navnet eller nummeret til det ønskede opptaket vises i displayet. Bla deretter med tastene ▲▼ mellom telefonnummeret, navnet, datoen eller klokkeslettet til opptaket.


Anmerkning:

Telefonnummeret vises kun med navn hvis nummeret er lagret i telefonboken og er tildelt et navn.

4. Bla mellom oppføringene med tastene ▲▼.



5. Trykk tast ↗, for å vise nummeret. Hvis nummeret har mer enn 10 tegn, lyser symbolet ► i displayet og etter kort tid vises de gjenværende sifrene.

6. Trykk tast , mens du ser på opptaket for å velge ut og ringe opp nummeret som ble tatt opp.

Lagre oppføring i telefonboken



1. Trykk tast ▼, for å velge menyfunksjonen ”oppring id”.




2. Trykk tast ↩, på displayet vises nå alle mottatte anrop med navn eller nummer


3. Velg nå den ønskede oppføringen med tastene ▲▼ og trykk tasten ↩ to ganger.



4. Velg nå menyfunksjonen „lagre“ med tastene ▲▼.

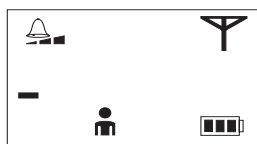

5. Trykk tast ↩, tildel den nye oppføringen et navn og bekræft med tast ↩.

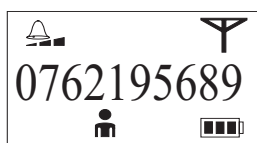

6. Telefonnummeret vises i displayet og du må trykke tasten ↩ en gang til.



7. I displayet vises „lagret“ og oppføringen din er nå lagret i telefonboken.



Anmerkning:

Er lagringsplassen full vises „minne flt“ i displayet.

Slette oppføring eller alle oppføringer



1. Trykk tast ▼ for å velge menyfunksjonen „oppring id“.



2. Trykk tast ↗, på displayet vises nå alle mottatte anrop med navn eller nummer.

3. Velg nå den ønskede oppføringen med tastene ▲ ▼ og trykk tast ↗ to ganger.



4. Velg nå med tastene ▲ ▼ mellom „slette“ eller „slett alle“. Trykk deretter tast ↗.



5. For å slette oppføringen eller alle oppføringer, trykk tast ↗ på nytt.



6. Hvis det ikke eksisterer flere oppføringer, står det „ingen id“ i displayet og symbolet  lyser ikke lenger.

Innstillinger håndsett

Melodi/ringtonevolum

Melodien/ringtonevolumet til håndsettet kan innstilles på følgende måte:



1. Velg menyfunksjonen „ringtone“ med tastene ▲▼ og trykk tast ➡.



2. Trykk tast ➡ en gang til for å velge menyfunksjonen „melodi“.



3. Med tastene ▲▼ kan du velge en av de åtte melodiene og så bekrefte valget ditt med tast ➡.




4. Skift til menyfunksjonen „lydstyrke“ ved å trykke tastene ▲▼.

5. Trykk deretter tast ➡.




6. Velg ønsket volum med tastene ▲▼ og bekreft med tast ➡.

Anmerkning:

Det valgte volumet ser du på symbolet  øverst til venstre i displayet.

Endre navn på et håndsett

Du kan endre navnet til håndsettet „Welcome 1“ til din personlige tekst. Gå frem slik:

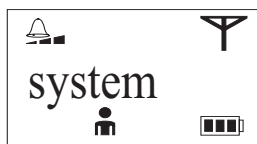

1. Velg menyfunksjonen „system“ med tastene ▲▼ og trykk tast ↵.



2. Nå velger du menyfunksjonen „mobildel“ og trykker tast ↵.



3. Trykk tast ↵ en gang til når „navn“ vises i displayet.



4. Tast nå inn det ønskede navnet idet du sletter bokstavene med tast C og taster inn det nye navnet med siffer-tastene.

5. Lagre inntastingen din med tast ↵.

Anmerkning:

I tillegg til navnet vises et nummer mellom 1 og 6, alt etter hvor mange håndsett som er meldt opp.

Endre menyspråk



1. For å endre menyspråket velg menyfunksjonen „system“ med tastene ▲▼ og trykk tast ↵.



2. Nå velger du menyfunksjonen „språk“ og trykker tast



3. Velg nå ønsket språk og trykk tast for bekreftelse.

Melde opp ekstra håndsett

Ved bruk av flere håndsett må håndsettene meldes opp på basen. Oppmeldingen må gjennomføres for hvert ekstra håndsett. Det kan meldes opp inntil 6 håndsett på en base.

Anmerkning:

Håndsettet som er levert med basen er allerede meldt opp. Dette håndsettet må du ikke melde opp.




1. For å melde opp ekstra håndsettet, velger du menyfunksjonen „system“ med tastene og trykker tast .




2. Velg nå menyfunksjonen „mobildel“ med tastene og trykk tast .



3. Nå velger du menyfunksjonen „register“ og trykker tast .

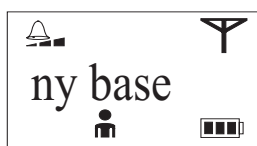


4. Bla til menyfunksjonen „ny base“ og trykk tast .

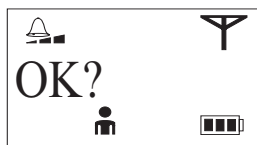


5. I displayet vises „OK?“. Du må bekrefte valget med tast



6. Telefonen søker nå etter en base og etter kort tid vises „Finding: 1“ i displayet.

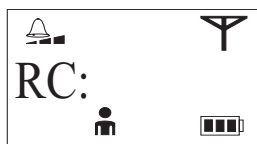


7. Trykk og hold tasten på basen til „RC: “ vises i displayet til håndsettet.

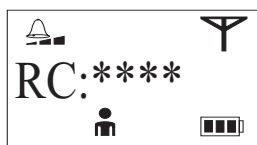

8. Tast inn RC-kode (**1590**).
9. Bekreft inntastingen med tast . Etter kort tid går håndsettet tilbake til startmeny og i displayet vises symbolet

Avmelde håndsett på basen

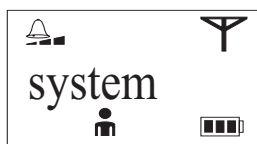

1. For å avmelde håndsettet, velg menyfunksjonen „system“ med tastene og trykk tast .



2. Velg nå menyfunksjonen „mobildel“ med tastene og trykk tast .



3. Nå velger du menyfunksjonen „register“ og trykker tast .



4. Bla til menyfunksjonen „slette“ og trykk tast



5. Spørsmålet „bekreft?“ vises i displayet. For bekreftelse trykker du tast . Håndsettet er nå avmeldt fra basen.

Tastelås

For å koble inn tastelåsen gå frem slik:

1. Hold tasten trykket ned til spørsmålet „låse?“ vises i displayet.
2. Bekreft med tasten . I displayet vises „låst“ og tastene er låst.
3. For å låse tastene opp igjen hold tasten trykket ned til spørsmålet „oppheving?“ vises i displayet.
4. Bekreft med tasten . Telefonen går tilbake til startmeny og tastene er låst opp igjen.

Slå av permanent radiostråling

På telefonen kan du innstille om basens radiostråling skal slå av når håndsettet står i basen eller om det skal være permanent radiostråling. For å koble inn denne funksjonen går du frem slik:



1. Velg menyfunksjonen „system“ med tastene og trykk deretter tast .



2. Bla til menyfunksjonen „lav telstr“ og bekreft ved å trykke tast .




3. Velg nå mellom innkoblet („på“) og utkoblet („av“) funksjon.

a. på: Radiostrålingen slås av, så snart håndsettet settes i basen.

b. av: Radiostråling står permanent på.

Anmerkning:


Ved levering er funksjonen koblet ut (=av).

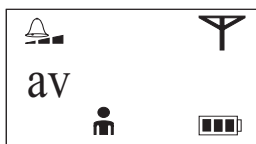

4. Bekreft med tast for å avslutte valget ditt ➡.

Innstillinger nettverk

Innstille valgmodus

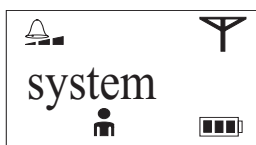

1. Velg meny „system“ med tastene ▲▼ og bekreft med tast ➡.



2. Bla til menyfunksjonen „nettverk“ og trykk deretter tast ➡.



3. Velg undermenyen „tastemåte“ og trykk tast ➡.



4. Velg med tastene ▲▼ mellom tonevalg- („tonev“) og impulsvalgmodus („pulsv“) og trykk tast ➡ for bekreftelse.



Anmerkning:

De fleste telefoner bruker i dag tonevalgmodus.

Stille inn flashtid (R-tast)

Funksjonen til R-tasten er nødvendig for å aktivere bestemte tjenester til T-Net. Dersom telefonen din er tilknyttet en telefonsentral, kan det hende at du må endre flashtiden (se bruksanvisning telefonsentral).



1. For å stille inn flashtiden, velg meny „system“ med tastene ▲▼ og bekreft med tast ➡.



2. Bla til menyfunksjonen „nettverk“ og trykk deretter tast ➡.



3. Velg undermenyen „tilbakring“ og trykk tast ➡.



4. Velg tiden som er nødvendig med tastene ▲▼ og bekreft med tast ➡.

Anmerkning:

Flashtiden kan innstilles på følgende tider:

90/110/130/260 ms.

Ved levering av telefonen er verdien innstilt på 90 ms.

Stille inn valgpause

Du kan stille inn en valgpause i oppringingen etter første siffer dersom telefonen din er tilknyttet et telefonanlegg. Pausetiden kan innstilles mellom 1 og 6 sekunder.



1. For å stille inn pausetiden velg meny „system“ med tastene ▲▼ og bekreft med tast ➡.



2. Bla til menyfunksjonen „nettverk“ og trykk deretter tast



3. Velg undermenyen „pause“ og trykk tast



4. Innstill ønsket pausetid med tastene og trykk tast for bekreftelse.

Betydning til de innstilte tallene

Innstillt tall	Pausetid
1	1 sec
2	2 sec
3	3 sec
4	4 sec
5	5 sec
6	6 sec

Bruk av flere håndsett

Interne samtaler

Hvis flere håndsett er oppmeldt på en base kan det føres interne samtaler mellom disse telefonene.



1. Trykk tast „Intercom“ og symbolet for en utgående oppringing vises i displayet.






2. Tast inn nummeret til ønsket håndsett.
3. Håndsettet som er ringt opp tar imot samtalen med tast .

Sammenkoble samtaler mellom håndsett

Et eksternt anrop kan overføres fra et håndsett til et annet (begge håndsett må være oppmeldt på samme base).



1. Det føres en eksternt samtale og du vil koble samtalen videre.
2. Trykk tast  og nummeret til ønsket håndsett. På displayet til mottakeren vises „Intercom”, nummeret til det oppringte håndsettet og symbolet  som tegn for et innkommende anrop.
3. For å koble den eksterne samtalen videre, må den som setter over telefonen trykke tasten  på håndsettet etter at den interne abonnenten har svart.

Tilkobling av ekstra tilbehør

freeTEL II/S har:

- Standard-Headset-tilkobling med en 2,5 mm jack plugg (f.eks. for tilkobling av en PL-100/PL-200).
- 3,5 mm jack audioutgang (f.eks. for tilkobling av hodetelefon eller lignende).

I tillegg kan følgende ekstra utstyr tilkobles til basen:

- Vibrasjonspute
- Relémodul
- Blitsmodul
- Akustisk modul

Hvis telefonen ikke fungerer

Generelt

- Forvis deg om at telefonledningen er uten skader og korrekt satt i. Fjern eventuelt ekstra utstyr – skjøteledning og andre telefoner. Hvis telefonen fungerer etter dette, skyldes feilen et annet apparat.
- Sikre at strømadapteren er tilkoblet korrekt til basen og stikkkontakten.
- Kontroll om batteriene er oppladet.
- Forsøk å tilkoble telefonen f.eks. hos en nabo. Hvis apparatet fungerer der, har telefon-tilkoblingen din mest sannsynlig en feil. Ring feilmeldingstjenesten.
- Tilkoble en annen telefon til tilkoblingen din. Hvis dette apparatet fungerer har sannsynligvis telefonen din en feil.

Varseltone under en samtale


- Batteriene er nesten utladet
 - sett håndsettet i laderen.
- Telefonens rekkevidde er overskredet
 - før håndsettet nærmere basen.

Telefonnummeret overføres ikke

- Telefonnummeroverføringen må støttes av nettoperatøren din.
- Hvis --P-- vises i displayet, betyr dette at det ikke finnes noen telefonnummerinformasjon eller at anroperen har reservert seg mot visning av telefonnummeret.
- Ved tilkopling til et biapparat fungerer nummeroverføringen ikke.

Tilbakestilling av telefonen til fabrikkoppsett

For å stille telefonen tilbake til fabrikkoppsett, gå frem slik:

1. Trykk og hold tasten  til spørsmålet „sperre?“ vises i displayet.
2. Tast inn koden „4,6,1,5,3,0,5“ via tastaturet. Det lyder et bekreftelsessignal, og i displayet vises „vente“. Etter ca. 10 sekunder vises ”startmeny“. Nå er telefonen tilbakestilt til fabrikkoppsett.

Viktige henvisninger

Apparatet er ikke beskyttet **mot** vann. Ikke still gjenstander som er fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet. Det må heller ikke settes åpen ild, som f.eks. levende lys på apparatet.

Tillegg

Vedlikehold og pleie

Telefonen krever ikke vedlikehold. Hvis den er tilsmusset kan du tørke av apparatet med en myk, fuktig klut. Bruk aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Telefonen skal ikke stå i direkte sollys over lengre tid og må dessuten beskyttes mot høy varme, fuktighet eller sterke mekaniske rystelser.

Garanti

Apparatet er ytterst driftssikkert. Hvis det til tross for saklig korrekt betjening skulle oppstå forstyrrelser, så sett deg i forbindelse med din forhandler eller henvend deg direkte til produsenten.

Garantiytelsen omfatter gratis reparasjon og gratis tilbakesending. Forutsetning er at apparatet sendes inn i originalemballasjen, du må altså ikke kaste denne.

Garantien bortfaller ved skader som er oppstått gjennom uforsiktig behandling eller reparasjonsforsøk av ikke-autoriserte personer (ødeleggelse av apparatets segl).

Garantireparasjoner blir bare utført ved kopi av fakturaen/kassekvitteringen fra forhandleren.

Apparatets nummer må alltid oppgis.



Miljøinformasjon/Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av brukte elektriske og elektroniske apparater. Apparatet gjenvinnes som EE-avfall og skal leveres til godkjent mottak (EL-retur).

Tekniske data

Standard:	DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication Utvidet digitalstandard for trådløse telefoner GAP = Generic Access Profile Overføringsprotokoll for trådløse telefoner
Antall kanaler:	120 duplekskanaler
Radiofrekvensområde:	1880 MHz til 1900 MHz
Duplekssignalering:	Tidsmultipleks
Kanalmønster:	1728 KHz
Bitfrekvens:	1152 Kbit/s
Modulering:	GFSK
Sendeeffekt:	10 mW, middels ytelse per kanal
Rekkevidde:	opptil 30 m innendørs opptil 300 m i åpent landskap
Strømforsyning:	Basen: Primær: 220/230V 50 Hz / 60mA Sekundær: 6V DC / 600 mA Håndsett: 2 stk. NiMH, størrelse AA, 1,2V, 1000 mAH
Opptatt effekt:	ca. 7 Watt
Driftstid:	Standby: opptil 100 timer Samtale: opptil 10 timer
Dimensjon (BxHxD):	Base: 165 x 122 x 73 mm Håndsett: 61 x 163 x 43 mm
Vekt:	Base: ca. 190 g Håndsett: ca. 180 g (med batterier)



CE-merking

Dette apparatet oppfyller kravene til EU-direktivene 1999/5/EG direktiv om radio- og teleterminalutstyr og gjensidig anerkjennelse av deres samsvar. Samsvar med direktivet som er nevnt ovenfor bekreftes av CE-merkingen på apparatet.

Samsvarserklæringen for dette apparatet får du hos din fagforhandler eller direkte hos produsenten.

Forbehold om tekniske endringer.

D

Germany

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tel.: 0 76 21/ 9 56 89-0
Fax: 0 76 21/ 9 56 89-70

CH

Switzerland

Humantechnik GHL AG

Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel
Tel.: 0 61/ 6 93 22 60
Fax: 0 61/ 6 93 22 61

A

Austria
Eastern Europe

Humantechnik Austria KG

Wagnitzer Strasse 29
A-8401 Kalsdorf b. Graz
Tel.: ++43 3135/ 5 62 87
Fax: ++43 3135/ 5 62 87

F/B

France
Belgium

SMS

Audio Electronique Sàrl

173 rue du Général de Gaulle
F-68440 Habsheim
Tel.: ++33-3 89 44 14 00
Fax: ++33-3 89 44 62 13

**For other service-partners
in Europe please contact:**

Humantechnik Germany

Tel.: ++49-76 21- 9 56 89-0
Fax: ++49-76 21- 9 56 89-70
Internet: www.humantechnik.com
e-mail: info@humantechnik.com



HUMANTECHNIK