


**Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663**



## INNHOLDSFORTEGNELSE

Readable III bladvender .....	1
1. Deler til Readable.....	2
2. Hvordan sette inn en bok.....	4
3. Å arbeide med Readable III .....	10
3.1. Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll.....	10
3.2. Skanning.....	12
4. Tips.....	13

## 1. Deler til Readable

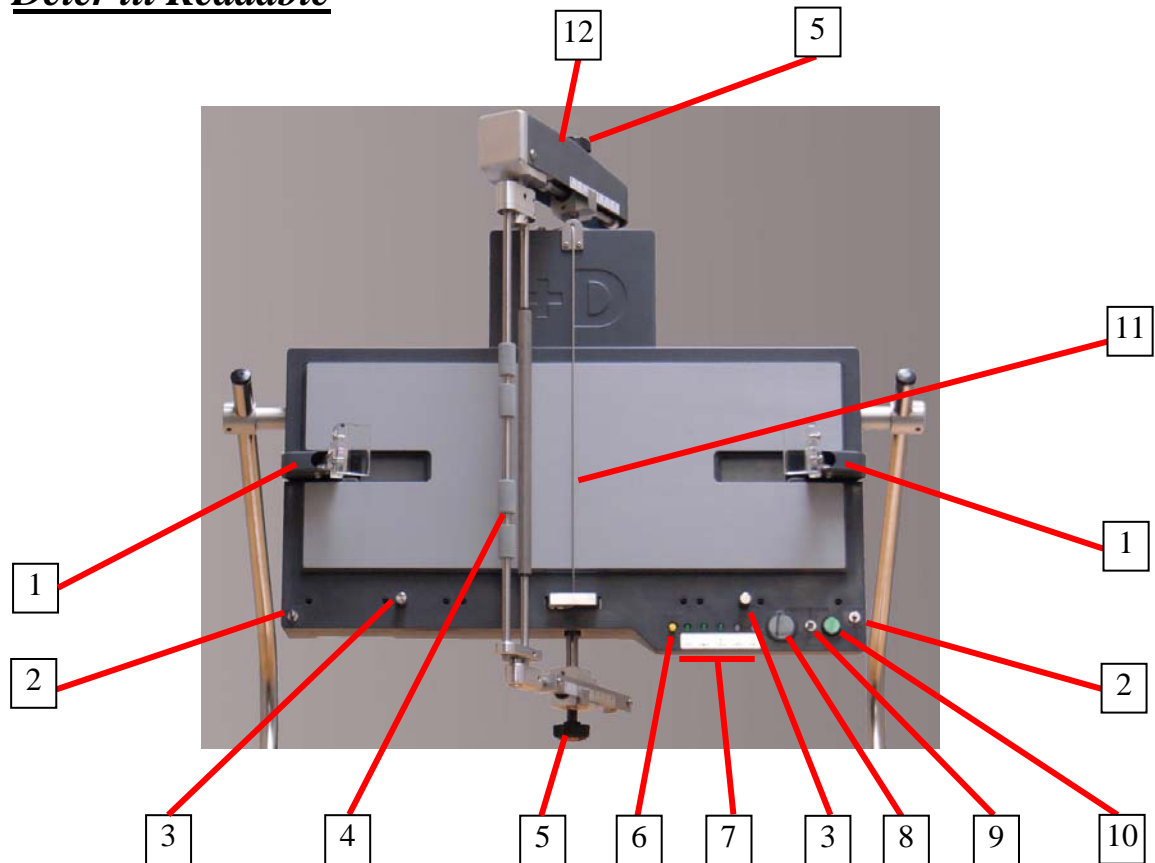

1. Festearm
2. Bryter for å åpne/lukke festearm
3. Bokstøtte
4. Dobbel valse
5. Justeringsskruer til å feste/løsne vendeenheten
6. Gul bryter for å justere skanningshastigheten
7. Lamper til skanningsmodulen
8. IR-mottaker
9. Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)
10. Av/På knapp
11. Wire
12. Vendeenhet

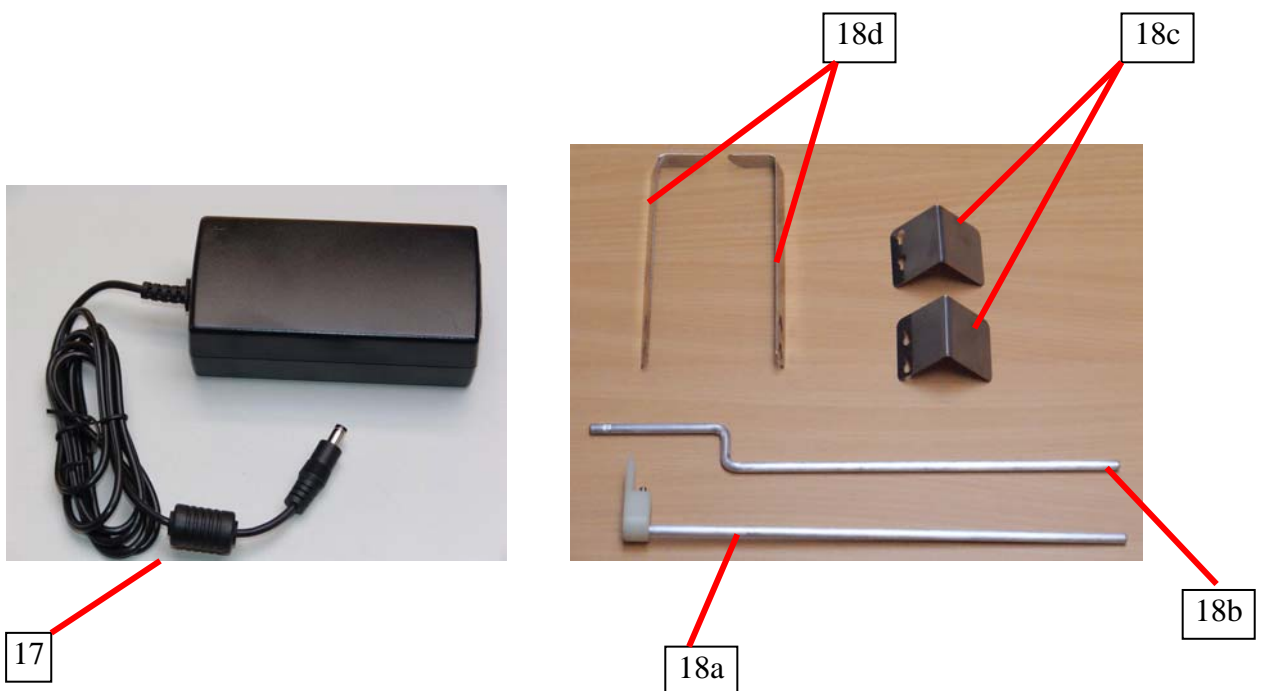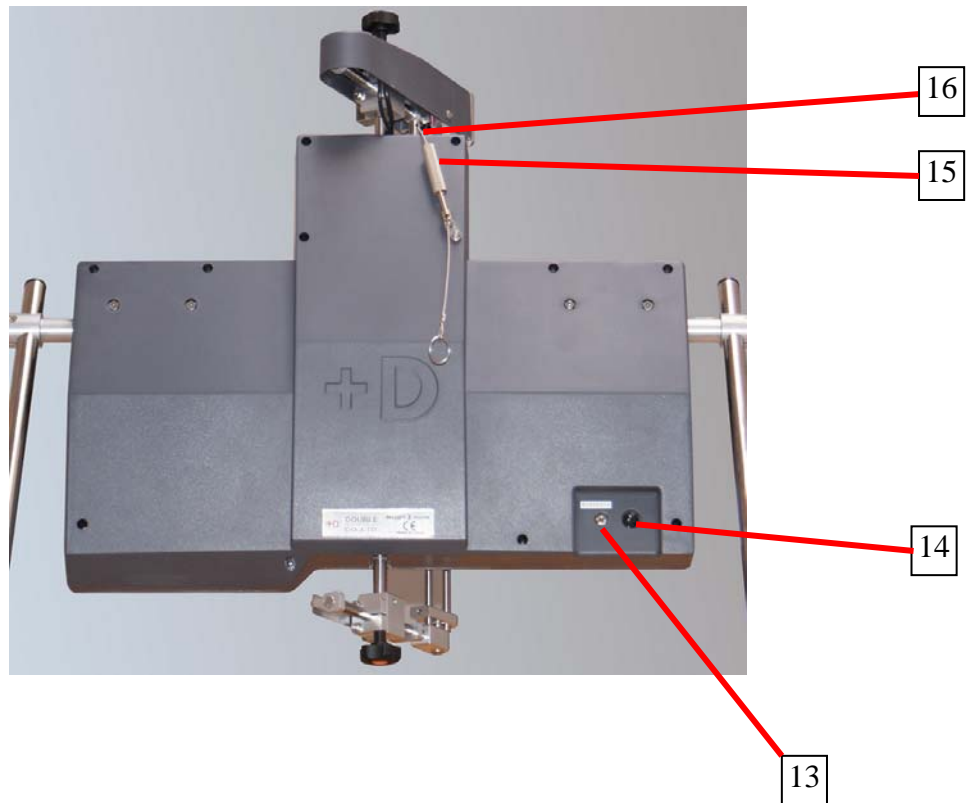


- 13. Inngang for enfunksjonsbryter
- 14. Inngang for strømtilførsel/adapter
- 15. Justeringsskrue til wire
- 16. Utløserknapp til wire
- 17. Adapter
- 18. Tilbehør for større bøker

## 2. Hvordan sette inn en bok

Dette er den viktigste informasjonen når det gjelder hvordan Readable skal brukes. Hvis boken blir satt inn riktig, kan brukeren håndtere Readable uten noen problemer. Vi råder deg derfor til å bruke tid på å lese disse instruksjonene nøye.

1. Plassér Readable i vertikal posisjon (det gjør innstillingen/justeringen enklere).

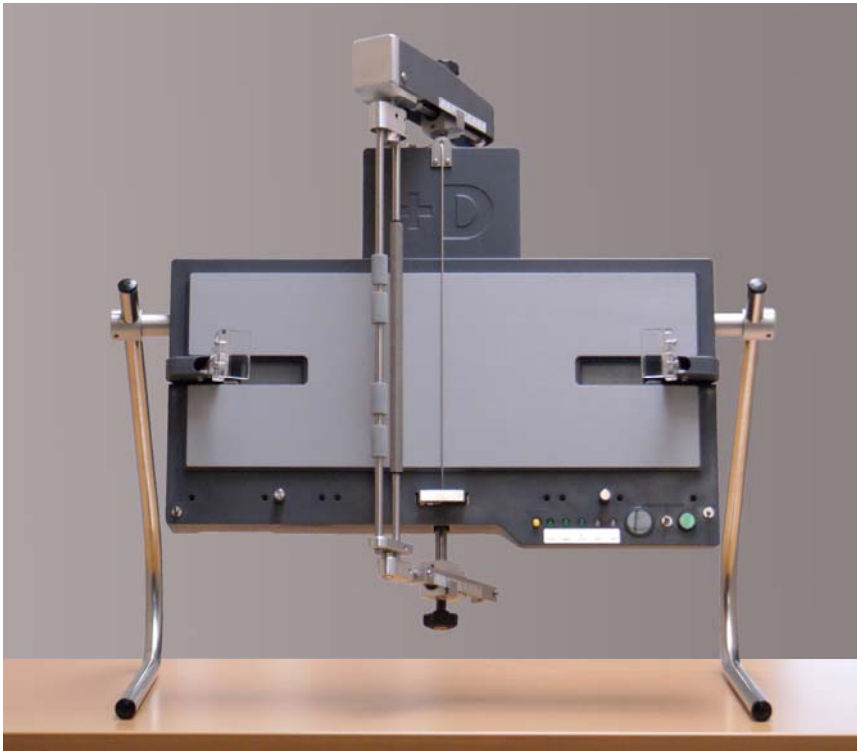

2. Kople til adapteren og slå på Readable ved å trykke på "Av/På knappen" (10).



Av/På knapp (10)

Denne knappen vil lyse grønt hvis strømforsyningen er tilkopleet strømmettet.


3. Velg vendemetode med "Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)" (9)

4. Åpne de to “Festearmene” (1) ved å trykke på “Bryter for å åpne/lukke festearm” (2) mot utsiden av Readable i noen sekunder.




Bryter for å  
åpne/lukke  
festearmene (2)


5. Skyv festearmene lengst mulig mot sidene av Readable (slik at du får mer plass når du skal sette inn en bok).

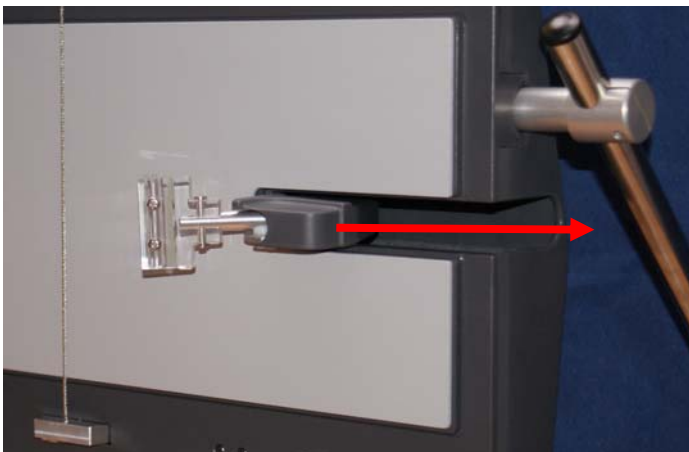


6. Løsne litt på “Justeringskrue til å feste/løsne vendeenheten” (5) (på toppen og bunnen), og skyv valsene så langt som mulig bort fra Readable.

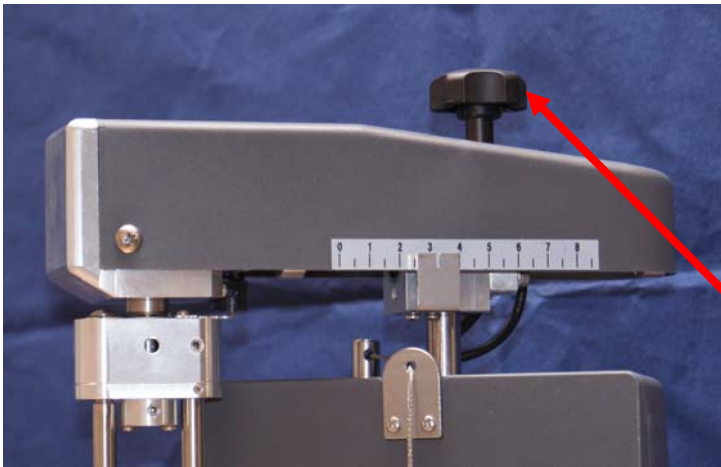

Justeringskrue (5)  
for å feste/løsne  
vendeenheten

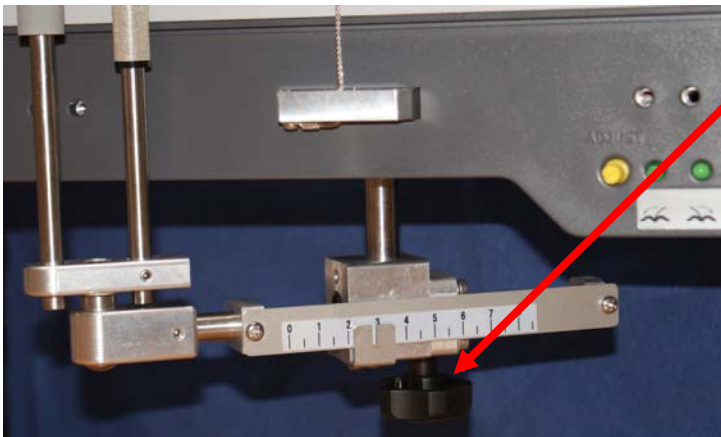


7. Løsne “Justeringskrue til wire” (15) og løs ut wiren ved å trykke på ”Utløserknapp til wire (16) på toppen av justeringskruen.

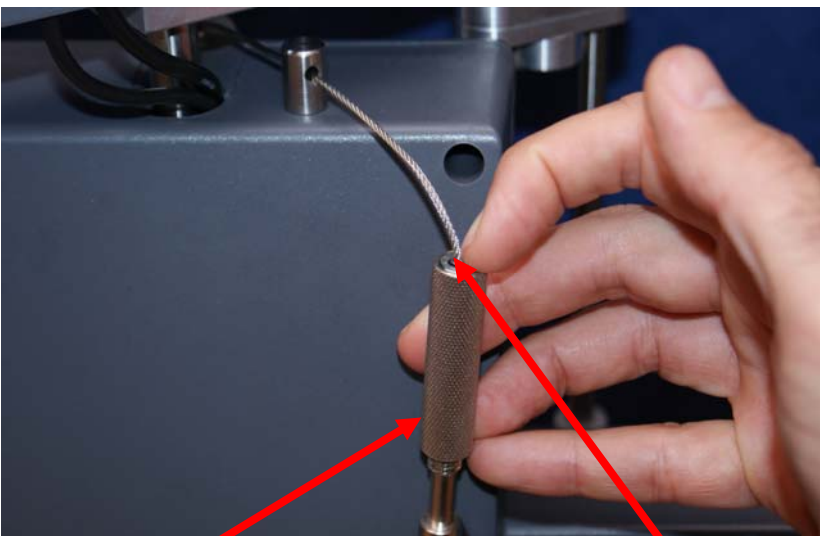

Justeringskrue (15)

Utløserknapp for å løsne wire (16)

8. Hold boken i hånden som vist på bildet under og sett den inn i Readable. Pass på at “Wiren” (11) blir plassert på midten av boka.

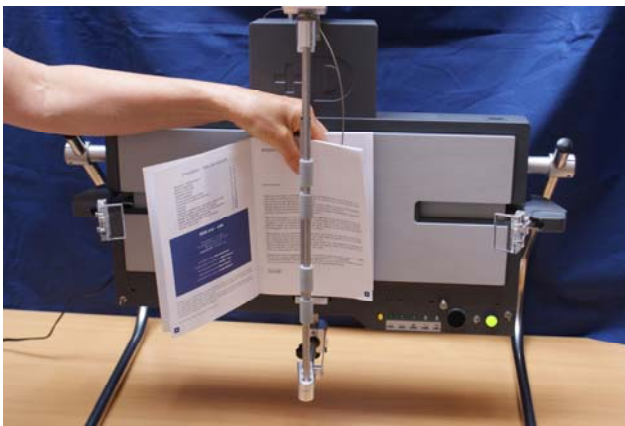

Boka skal hvile på den lille metallstøtten nederst.




Metallstøtte

9. Fest "Wiren" (11) når boken er plassert riktig. Ved å dreie på "Justeringsskruen" (15) kan du stramme wiren og sikre deg at boken blir stående der den skal.
10. Beveg "Festearmen" (1) tilbake til midten av Readable på begge sider. Lukk disse armene ved å trykke på "Bryter for å åpne/lukke festearm" (2) mot midten av Readable. Hold bryteren i denne posisjonen til festearmene er helt lukket og har sluttet å bevege seg. Kontroller at plexiglasset er på marginen av boken og ikke over teksten. Finjustér posisjonen til plexiglasset ved å skyve hele enheten forsiktig til høyre eller venstre.




11. Skyv "Vendeenheten" (12) tilbake mot Readable til du har en avstand på  $\pm 1.5$  cm mellom valsen og boken. Fest så "Justeringsskrue til å feste/løse vendeenheten" (5) oppe og nede.

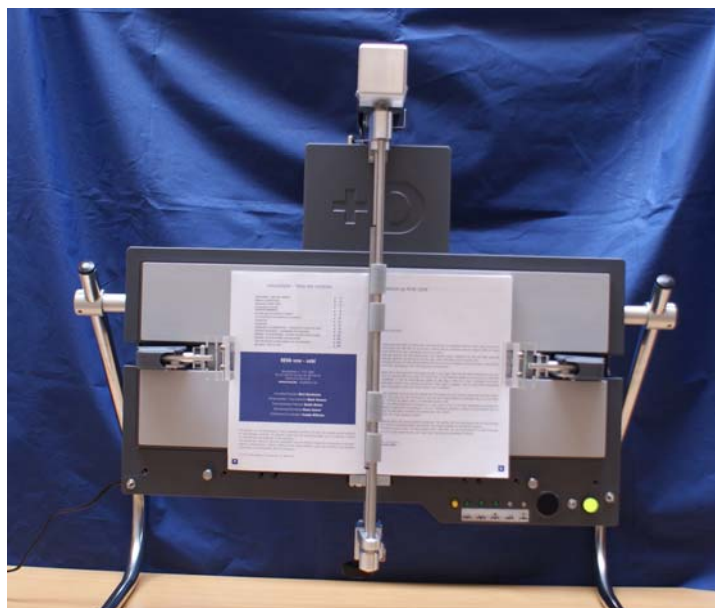




12. Hvis nødvendig, skrus "Bokstøtten" (3) på høyre og venstre side inn i et annet hull slik at boken får støtte.

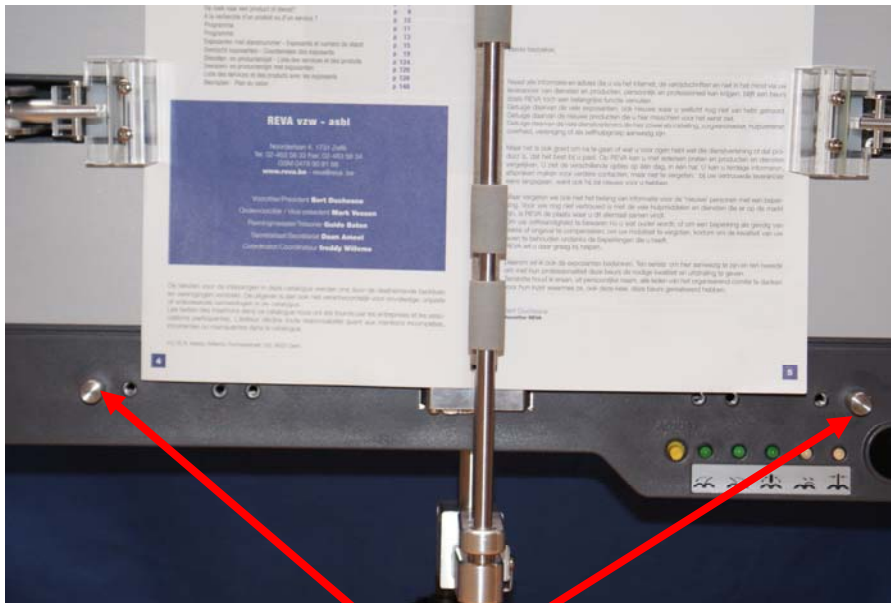

**Støtte for bok 3**

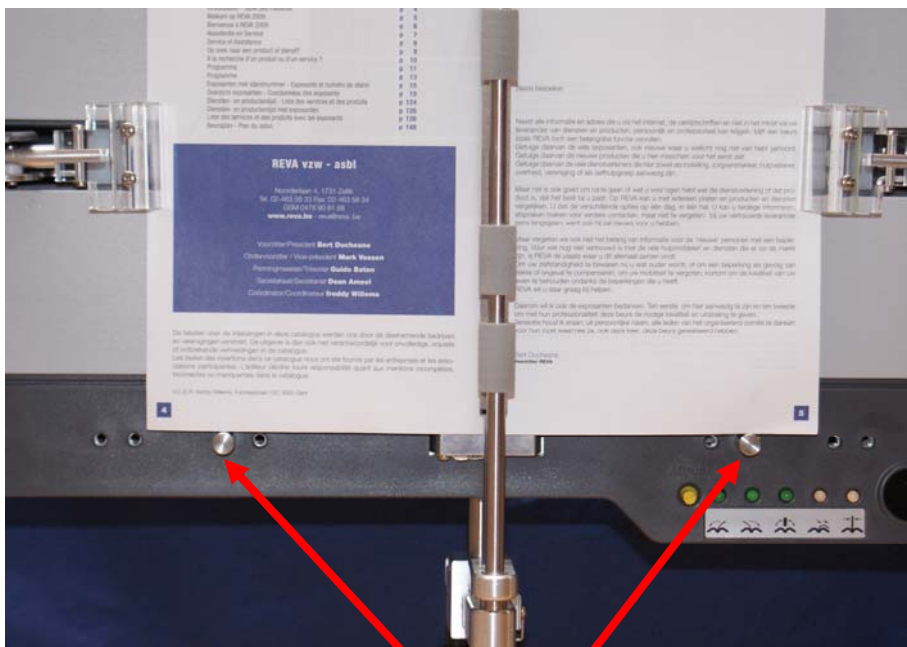

**Støtte for bok 3**

### 3. Å arbeide med Readable III

#### 3.1. Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll

Kontroller at “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning) (9)” står i posisjon “Direct” (direkte).









Bryter for å velge metode (direkte eller skanning) (9)

Hvis bryteren ikke står i den posisjonen, må du skru av Readable ved å trykke på ”Av/På knappen” (10). Sett så “Bryter for å velge metode” (9) i posisjon “Direct” og skru på Readable igjen.

På fjernkontrollen til Readable finner du følgende knapper:



1. : Med denne knappen setter du Readable i Stand-by posisjon. Med denne knappen er Readable **IKKE** slått helt av. Denne innstillingen er bare mulig ved manuelt å trykke på “Av/På knappen” (10).

2.  : Denne knappen brukes for å bla en side som står på høyresiden til venstre.
3.  : Denne knappen brukes for å bla en side som står på venstresiden til høyre.
4.  : For å flytte ”Vendeeheten” (12) slik at teksten blir synlig - fra venstre til høyre eller omvendt (uten å bla om noen sider). (Du kan bruke denne funksjonen for å bevege ”Vendeeheten” til den andre siden og lese den siden som er under ”Vendeeheten”.)
5.  : Hvis du leser i en bok med veldig glatt eller tykt papir, er det mulig at valsene på ”Vendeeheten” vil glippe/skli og ikke klare å bla om sidene. Ved å aktivere denne funksjonen vil ”Vendeeheten” presse hardere på siden mens den blar. På denne måten kan Readable, nesten i ethvert tilfelle, klare å bla om sidene. Når denne funksjonen er aktivert vil den røde lampen over det samme symbolet på Readable lyse opp (nede i høyre hjørne av Readable). Trykk på knappen en gang til for å deaktivere denne funksjonen.
6.  : Denne funksjonen er mest nødvendig når du leser en liten, men tykk bok. Denne funksjonen brukes hvis ikke arket legger seg flatt ned etter vending (se bildet nedenfor).



Ved å aktivere denne funksjonen vil Readable rette ut sidene som buer seg utover. Når denne funksjonen er aktivert, vil den røde lampen over det samme symbolet på Readable lyse opp (nede i høyre hjørne av Readable). Trykk en gang til på denne knappen hvis du vil deaktivere denne funksjonen.



### **3.2. Skanning**

Hvis du har problemer med å trykke på knappene på fjernkontrollen til Readable, kan du bruke den innebygde skanningen i utstyret. Kople til en enfunksjonsbryter på venstre side av fjernkontrollen til Readable. Det finnes mange forskjellige enfunksjonsbrytere å velge mellom. Ta kontakt med Cantec AS (tlf. 66 99 60 00) hvis du ønsker mer informasjon om disse bryterne. Det som er nytt med Readable III er at du også kan kople en bryter direkte til Readable. Tilkoplingen er på baksiden ved siden av strømtilkoplingen.





Inngang for enfunksjonsbryter (13)


Nede i høyre hjørne på Readable ser du fem “Lamper til skanningsmodulen” (7). Hver lampe har en tilhørende funksjon som står skrevet over hver enkelt lampe. For å få en mer detaljert forklaring på disse funksjonene, se avsnittet “Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll” (3.1).




1. Pass på at “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)” (9) står i posisjon “Scan” (Skanning). Hvis den ikke gjør det, så slå av Readable ved å trykke på “Av/På knapp” (10). Sett ”Bryter for å velge metode” (9) i posisjon “Scan” og slå Readable På igjen.
2. Du kan regulere skanningshastigheten ved å skru på “Gul bryter til å regulere skanningshastigheten” (6).
3. Du kan aktivere en funksjon ved å trykke på enfunksjonsbryteren samtidig som lampen med ønsket funksjon lyser opp.


#### 4. Tips

1. **IKKE** bruk funksjonene  eller  hvis det ikke er nødvendig.

Hvis du bruker funksjonen  for en bok med “normalt” papir, er det mulig at Readable blar to sider samtidig.

Hvis du bruker  når det ikke er nødvendig, kan det hende at boken i sin helhet blir flyttet til høyre eller venstre og at en festearm mister grepet på boken.

2. I skanningsmodus kan du blokkere for funksjonene

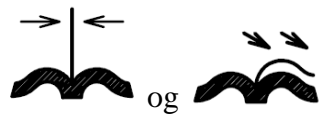


og

Hold enfunksjonsbryteren trykket ned i ca. 3 sekunder mens lampen lyser opp. Når du så slipper enfunksjonsbryteren, vil du se at skanningen ikke lenger går innom disse to funksjonene. For å gjøre disse to funksjonene tilgjengelige igjen, må du



holde enfunksjonsbryteren trykket ned i ca. 3 sekunder mens lampen lyser opp. Det er **IKKE** mulig å blokkere disse to funksjonene ved innstillingen “Direct”.

3. Bruk “Tilbehør for større bøker” (18a, b, c og d)” når du leser bøker som er større enn A5. Når du leser mindre bøker, må du fjerne dette tilbehøret.

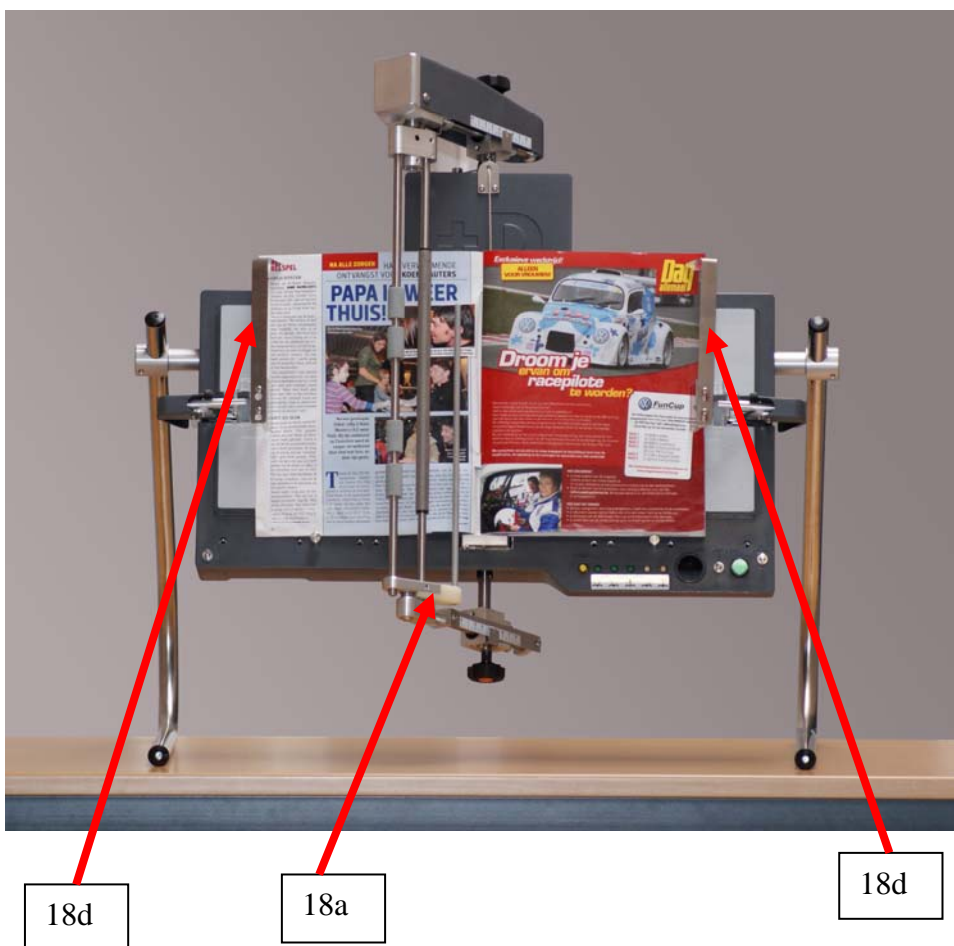

19. Hvis du prøver å bla om større sider uten tilbehøret **18a**, er det mulig at sidene setter seg fast mellom valsene på “Vendeenheten”.



Hvis det skjer, vil “Vendeenheten” fortsette å vende i ca. 15 sekunder. Hvis sidene forblir blokkert mellom valsene, går Readable inn i Alarm-modus. Readable slutter da å fungere og de 5 skanningslampene begynner å blinke. For å stille inn Readable på nytt, må du slå den av ved å bruke “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)

4. Det er **IKKE** mulig å stille inn Readable på nytt ved å bruke “Av/På knappen” (9) på fjernkontrollen.

Når du leser en bok eller et ukeblad i veldig stort format og med få sider, må du bruke den S-formede stangen **18b** istedenfor den rette stangen.

Bruk tilbehøret **18c** når du ønsker å lese en liten, men tykk bok. Ved hjelp av disse vinklede metallplatene kan du gjøre festearmene lengre.



Detaljert bilde: 18c

Når du leser en bok i A4-format eller større, kan det skje at hjørnene på sidene vil bøye seg nedover, spesielt hvis du vipper Readable over for å lese en bok på sengen. Bruk tilleggsutstyr **18d** for å holde hjørnene på plass. Bare skyv dem over ”Festearmen” (1).



Detaljert bilde 18d

5. Rotasjonen på "Vendeeheten" (12) er ikke kraftig. Dette er en innebygd sikkerhetsregel for å unngå at en side blir revet i stykker hvis den sitter fast i "Vendeeheten".