

RX-2004 mottaker – Knop



RX-2004 mottaker – Knop: HMS art. nr.: 020742 Best. nr.: 2223232

INNHOLD

RX-2004 mottaker – Knop	1
Generelt om RX-2004	2
Funksjon	2
Batteri/driftstid/batterialarm.....	2
Programmering	2
Trådløs overføring	2
Tekniske data.....	2

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Generelt om RX-2004

RX-2004 er en 1-kanals mottaker som er batteridrevet og bærbar. RX-2004 kan motta signaler fra KNOP's øvrige trådløse hjelpemidler.

Funksjon

RX-2004 mottar kodete signaler som tilsvarer den koden som RX-2004 er innstilt på. Når man aktiverer en hvilken som helst sender med samme systemkode som RX-2000, vil RX-2004 gi et alarm signal som varer i 2 minutter hvis den ikke avbrytes med et trykk på RESET-knappen.

Batteri/driftstid/batterialarm

Løsne skruen til batteriboksen på mottakerens bakside og ta ut de brukte batteriene. Sett i to nye batterier av type LR6 1,5V alkaline. Driftstid er ca. 7 måneder. NB! Se etter at batteriene er riktig polvendt. Lav batterispenningsindikator ved en konstant tone. (Skift straks batteriene.)

Programmering

Hold "Reset" knappen nede mens mottakeren slås på; ca. 2-3 sekunder. Lysdioden vil da lyse konstant. Slipp så knappen og trykk på ønsket sender. Når signalet fra senderen er mottatt, slukker lysdioden.

Trådløs overføring

RX-2004 har en innebygd radiomottager med akustisk/optisk signalgiver. RX 2000 kan motta signaler fra nedenforstående sendere:

- EPI 2000 Epilepsialarm: bestillingsnr. 2223234
- LAK 821 HF Lydstyrkebryter: bestillingsnr. 2223466
- DV 2000 Tidsstyrt døralarm: bestillingsnr. 2223226

Se separate brukerveiledninger for respektive senderanordninger.

Tekniske data

Frekvens:.	433.92 MHz
Koder:	256 forskjellige
Diode:	blinker ved oppkalling
Lyd:	"bipper" ved oppkalling
Reset:	trykk en gang på knappen
Farge:	sort
Vekt:	120 gr.
Batterier:	2 x 1,5V LR6/AA/E91 Alkaline
Driftstid:	ca. 7 måneder
Kanaler:	1
Bestillingsnummer:	2223232