

ZoomCam - Visninger og innstillinger

OPERATIVSYSTEM	Søknad	Konfigurasjon
 Windows	Lyd: Aktiver "Lytt til denne enheten" <i>Innstillinger - System - Lyd - Flere lydinnstillinger - Opptak - Mikrofon ZoomCam - Egenskaper - Lytt - Lytt til denne enheten</i>	
	Windows-kamera 	 Klikk på neste kamera hvis bildet ikke vises. Video - Innstillinger 1080p 16:9 60fps.
	ZoomText 	Verktøy - Kamera • Kamera: ZoomCam USB Video Stream • Oppløsning: 1920 x 1080 - Bildefrekvens: 60 FPS
 MacOS	Supernova 	Visuelt – Koble til og vis • Kamera: ZoomCam USB Video Stream • Bruk kameraets optiske zoom. • Bruk kameraets fargeendring. • Innstillinger: oppløsning 1920 x 1080, 60 fps.
	Kamera-vinduet 	• Video - Enhet - ZoomCam USB Video grensesnitt. • Audio - Enhet - ZoomCam USB-grensesnitt. • Lyd – demp AV.
 iPadOS 17	CamX 	Bare USB-C iPads.
 ChromeOS	Lyd over eksterne høyttalere (adapter med minijack eller Bluetooth-adapter).	
	Kamera 	 Klikk på neste kamera hvis bildet ikke vises.  Klikk på Mirroring hvis bildet speiles.
 Android	nExt-kamera 	Eneste nettbrett med USB-C 3-dataport. Innstillinger: Aktiver "Audio loopback".
 Linux	Ost 	• Kamera: ZoomCam USB Video Stream. • Oppløsning: 1920 x 1080.