

## Komme i gang



## Prodigi Nettbrett



### Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn  
Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

[bestilling@cantec.no](mailto:bestilling@cantec.no)  
[www.cantec.no](http://www.cantec.no)

## Prodigi Nettbrett, komme i gang

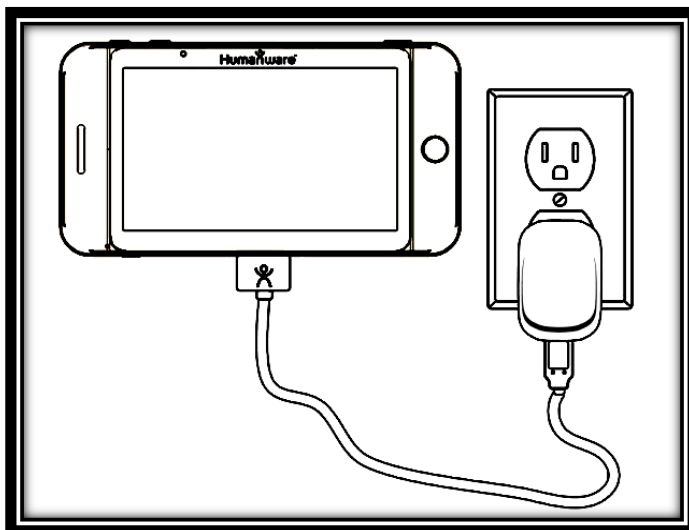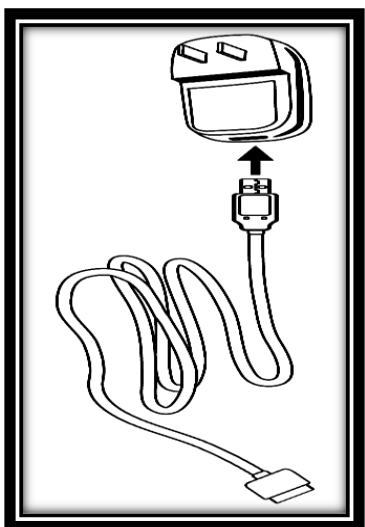

1. Koble USB lade-kabelen til strømnettet.
2. Hold enheten slik at Humanware logoen er øverst. Koble lade-kabelen til lade-inngangen. Pass på at den taktile Humanware logoen (1) er opp.

**VIKTIG:** Vær forsiktig når du kobler til kabelen. Lade-inngangen kan lett ødelegges.

3. La enheten lade i 8 timer før du bruker den første gang, og trykk På/Av knappen for å starte den.

