



TOPAZ XL HD



- helping people

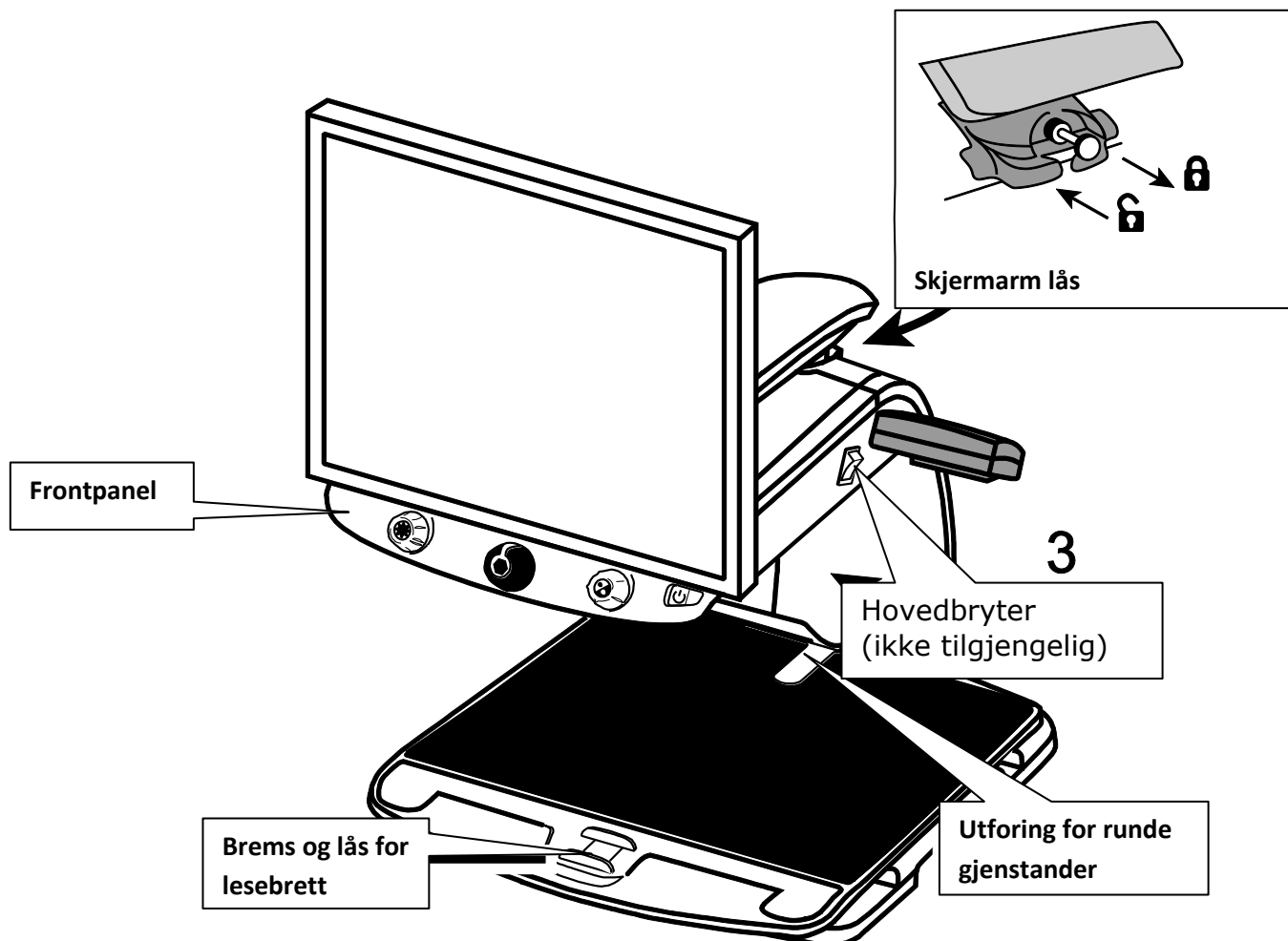

Frontpanel Topaz XL HD

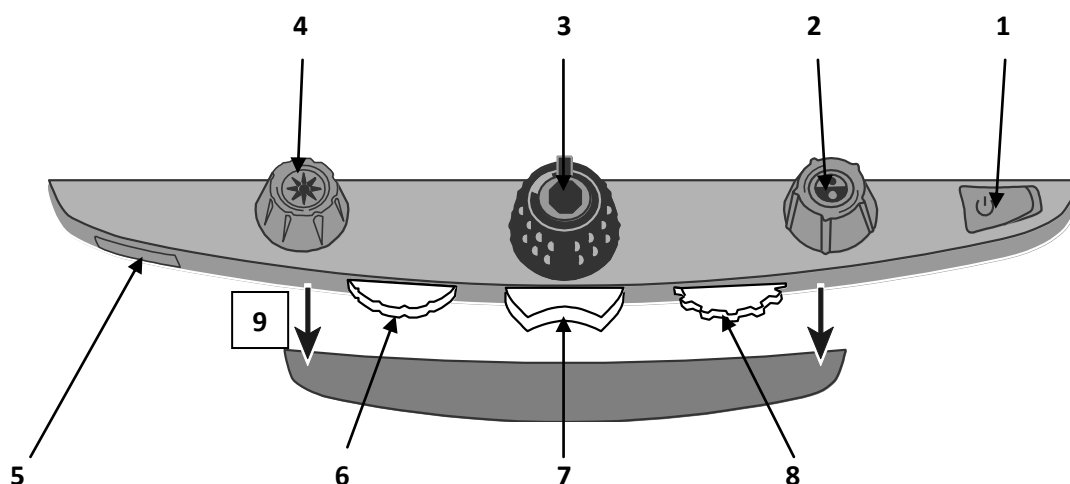

1	Av og På	Slår på eller Av både kamera og skjerm. Egen hovedbryter på høyre side
2	Modus og fargevalg	Trykk for modusvalg. Vri for å endre kontrastfarge i valgte modus
3	Zoom og lås bilde	Vri for å finne riktig forstørrelse. Trykk for å fryse bildet på skjermen. Trykk igjen for å gå tilbake til normal igjen.
4	Lystyrke og oversikt	Vri for ønsket lystyrke. Trykk og hold for å få et oversiktsbilde med trådkors i minste forstørrelse. Slipp å gå tilbake til valgte forstørrelse
5	Auotofkous	Trykk for å oppheve autofokus. Ett trykk til og du får ett rødt markeringslys. Trykk igjen for å slå av.
6	Horisontal /Vertikal	Flytter valgte horisontale leselinje eller gardin opp/ ned, og vertikal valgte gardin og leselinje høyre/ venstre
7	Gardin/ leselinje	Vippebryter hvor du velger mellom de forskjellige leselinjer og gardiner.
8	Gardin/ leselinje avstand	Justerer avstand mellom gardinene eller leselinjene i henholdsvis horisontal eller vertikal stilling.
9	Deksel	Dekker over gardin og leselinjefunksjonene om de ikke er i bruk

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no