

Tilsiktet bruk av RX900A

RX900A er en armbåndsmottaker, som er designet til å fungere sammen med trådløse enheter i KNOPP's 900-serie. Der kan innkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn etter eget valg.

De siste 50 anrop lagres i en liste hvor man kan se tidspunktet for anropet, samt hvor anropet er kommet fra, og om det er kvitteret.

Med RX900A er det mulig å foreta et nødanrop til en annen kollega med et enkelt trykk.

All betjening og visning foregår på et touch LCD skjerm.

RX900A er med oppladbart batteri og trådløs oppladning.

Begynn å bruke

Det anbefales at RX900A lades til 100 %, før den tas i bruk.

Den medfølgende trådløse lader tilsluttes nettadapteret via USB kablen.

RX900A legges på ladeplaten og displayet på RX900A tennes og viser batteriets ladetilstand i prosent.

Pakkens innhold:



RX900A på ladeplaten:



Generelt om betjening

Første gang enheten skal slås på etter utpakking, skal den legges på ladeplaten.

Når RX900A ikke ligger på ladeplaten, Slås skjermen av ca. 10 sekunder etter siste betjening.

Startskjerm

Ved et trykk midt på skjermen tender displayet og klokke og dato vises.

Øverste vises navnet på brukeren / personalet om det er innkodet. Se side 7

Nederst vises en statuslinje med ikoner.



Følgende symboler kan vises i statuslinjen:



Batteritilstand.

Grønn: Batteri ok.

Gul: Oppladning tilrådes.

Rød: Batteriet er nesten oppbrukt, skal lades snarest.



Alarmlyd av/på.

Grønn: Alarmlyd er slått på.

Rød: Alarmlyd er slått av.



Vibrasjon av/på.

Grønn: Vibrator er slått på.

Rød: Vibrator er slått av.

Hovedmeny

Når fingeren med et svakt trykk strykes nedover skjermen, kommer man inn i Hovedmenyen. Den grønne pil i venstre side viser hvilken linje i menyen som kan velges.



Batteri alarm RX900A



Når batteri symbolet skifter farge fra grønn til gul, skal RX900A snart lades.

Skifter symbolet til rødt, bør man straks legge enheten på ladeplaten som vist under Begynn å bruke, side 3. Samtidig kommer det et par korte pipelyder ca. hvert 5. minutt, som indikerer lavt batteri, samtidig med at nedenstående skjerm vises:




Hvis RX900A fremdeles ikke blir ladet vil nedenstående skjermen vises når batterispenningen blir kritisk. RX900A Slås av og kan kun slås på ved å legges på ladeplaten.



Batterialarm fra sender

Når det mottas en alarm fra en sender som har dårlig batteri, vises teksten "Lavt batteri".

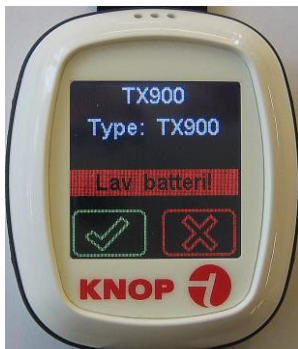

Også i listen "Siste anrop" vil man kunne se "Lavt batteri" for senderen.



Oppdatering av RX900A

Det er mulig å oppdatere softwaren i RX900A, samt downloade og uploade oppsett med KNOPTool. For nærmere beskrivelse henvises til veiledning for KNOPTool.

Rengjøring:

Produktet kan rengjøres med en fugtig klut eller spritserviett.

Avhending:

Produktet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, men behandles etter kommunens anvisning for elektronisk avfall.



Kontroll av dekningsområde:

En person aktiverer en sender (f.eks. TX900-1) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i området og avmerker på en skisse over bygning og område, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret slik at alle som skal betjene systemet kan se hvor man har dekning. Utenfor dekningsområdet kan man ikke motta alarmer.

Dekningsområdet kan økes ved bruk av et repeatersystem fra KNOP Elektronik.

Kontakt Cantec AS for nærmere opplysninger.

Tilbehør

Trådløs ladeplate og armbånd kan bestilles hos Knopp Elektronik A/S.

Tekniske data RX900A:

Batteri:	1 stk. Li-Ion 3,7V 225 mAh.
Drift tid på batteri:	Ca. 3 døgn med 50 alarm oppanrop pr. døgn.
Lading:	Trådløst, ca. 4 timer.
Frekvens:	869.2125 MHz.
Rekkevidde:	75m, utendørs, avhengig av forholdene.
Display:	Grafisk LCD.
Meny tekster	3 språk: Dansk, Norsk, Svensk.
Loggfunksjon:	Lagrer de siste 50 alarmanrop.
Omgivelse miljø:	Innendørs bruk. <90 % fuktighet ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C.
Kabinettype:	Hvit ABS.
Kabinett dimensjoner:	45 x 55 x 16 mm.
Tetthet:	IP65.
Vekt inkl. Batterier:	50g.

Retten til endringer forbeholdes.

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr
Tlf: 66 99 60 00
bestilling@cantec.no
www.cantec.no

