

Brukerveiledning for

RX900B



Innhold

Tiltenkt anvendelse av RX900B.....	3
Begynn å bruke	3
Generelt om betjening	4
Startskjerm	4
Hovedmeny.....	5
Betjening.....	6
Slukk enheten	7
Grunninnstillinger	7
Innkoding av navn.....	7
Innstilling av klokke.....	7
Innstilling av Språk.....	7
Slå lyd av eller på	7
Slå vibrator av eller på	7
Innkoding av en sender	8
Endring av en innkodet sender.....	8
Nøddanrop.....	8
Erstatt en innkodet sender med en ny sender	8
Slett en innkodet sender	8
Mottak av alarm.....	9
Liste over siste anrop.....	9
Send et Nøddanrop.....	9
Batteri alarm RX900B.....	9
Batterialarm fra sender	10
Oppdatering av RX900B.....	10
Rengjøring	10
Avhending :.....	10
Kontrol av dækningsområde:	10
Tilbehør.....	10
Tekniske data RX900B:	11

Tiltenkt bruk av RX900B

RX900B er en mottaker, som er designet til å fungere sammen med trådløse enheter i KNOP's 900-serie. Enheten kan bæres i lommen eller i en snor om halsen.

Der kan innkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn etter eget valg.

De siste 50 anrop spares i en liste hvor man kan se tidspunktet for kallet, samt hvor kallet er kommet fra, og om kallet er besvart.

Med RX900B er det mulig å foreta et Nødanrop til en annen kollega med et enkelt trykk.

Betjeningen er menyoppbygget i en grafisk LCD skjerm og betjenes på et tastatur med klikk. RX900B er med oppladbart batteri og trådløs ladning.

Produktet er vanntett (IP65).

Begynn å bruke

Det anbefales at RX900B lades til 100 %, før den tas i bruk.

Den medfølgende trådløse lader tilsluttes nettadapteren via USB kablen.

RX900B legges på ladeplaten, og displayet på RX900B tennes og viser batteriets ladetilstand i prosent.

Pakkens innhold:



RX900B på ladeplaten:



Generelt om betjening

Første gang enheten skal slås på etter utpakking, skal den legges på ladeplaten.

Når RX900B ikke ligger på ladeplaten, slukker skjermen ca. 10 sekunder etter siste betjening.

Startskjerm

Ved trykk på en av tastene tenner displayet slik at klokke og dato vises. Øverst vises navnet på brukeren / personalet, hvis det er innkodet. Se side 7. Nederst vises en statuslinje med ikoner.



Følgende symboler kan vises i statuslinjen:



Batteritilstand.

Grønn: Batteri ok.

Gul: Ladning anbefales.

Rød: Batteriet er nesten tomt, skal lades snarest.



Alarmlyd av/på.

Grønn: Alarmlyd er på.

Rød: Alarmlyd er av.



Vibrator av/på.

Grønn: Vibrator er på.

Rød: Vibrator er på.

Hovedmeny

Ved å trykke på **V** og **^** samtidig, enten ved slukket skjerm eller i startskjermen, fremkommer en Hovedmeny. Den grønne pilen på venstre side viser hvilken linje i menyen som kan velges.



Betjening

Valg av meny punkt:

Med piltastene, **V** og **^** kan den grønne pilen på venstre side av menyen flyttes opp og ned. Med **Ent** velges den linje hvor den grønne pilen står.

Med **Esc** går man tilbake til forrige meny.



Inntasting av tekster:

Med piltastene kan den grønne pilen i menyen flyttes fra side til side for å velge tall eller bokstaver.

Med **Ent** velges det tegnet den grønne pilen peker på. Med

Esc sletter man det siste inntastede tegnet.

Ved å holde **Esc** nede i 2 sekunder forlates menyen uten å slette eller lagre endringer.

Når den Grønne pil beveges over  vises lagre?:



Med **Ent** lagres det inntastede.



Slukkenheten

Der finnes både en dvaletilstand og en slukket tilstand.

Slå av(sove):

I slå av(sove) tilstand, er det slukket for mottak av alarmer.

RX900B tennes enten ved å trykke på en av tastene eller ved å legge enheten på ladeplaten.

Ønsker man fortsatt at RX900B skal være i Slå av(sove) tilstand, skal man igjen velge Slå av(sove) i Hovedmenyen. Slå av(sove) velges i "Hovedmeny" => "Slukk(sove)".

Slå av:

I Slå av - tilstand er RX900B helt slukket og kan kun tennes ved å legges på ladeplaten.

OBS: Klokke og dato blir nullstilt.

Slå av velges i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Slå av"

Grunninnstillinger

Innkoding av navn

Hvis det er viktig at en bruker personale alltid bruker den samme RX900B, kan det innkodes et navn som vises i Hovedmenyen.

Navn inntastes i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Endre navn"

Innstilling av klokke

Klokke og dato innstilles i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Still klokke"

Innstilling av Språk

Språk kan innstilles i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Språk"

Slå lyd til eller fra

Lyd kan slås av eller på ved alarmer i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Lydsignal"

Slå vibrasjon av eller på

Vibrator kan slås til eller fra ved alarmer i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Vibrasjon"

Innkoding av en sender

Det kan innkodes 250 sendere.

En sender innkodes ved å gå inn i "Hovedmeny" => "Sendere"

Hvis det er første sender man innkoder, blir man bedt om å aktivere den senderen man ønsker å innkode. Hvis det allerede er innkodet en eller flere sendere, skal man trykke "Legg til ny", før man så blir bedt om å aktivere ny sender.

Når senderen er akseptert, kan man taste inn et navn på senderen, som f.eks. kan være brukerens navn. Inntastingen skjer som beskrevet under Betjening, side 6.

Deretter kan det tastes inn en valgfri tekst, som f.eks. kunne være etternavn eller leilighetsnummer.

Heretter kan sender type endres, hvis f.eks. en PIR900 er plassert ved en dør, kunne man skrive Dør.

Til sist velges 1 av 5 forskjellige "Signal tone" for alarm for den gjeldende sender.

Endring av en innkodet sender

Navn, Tekst, Type og Lydsignal kan endres på en innkodet sender, samt man kan velge om en sender skal være "Normal anrop" eller "Nødanrop".

Normal anrop: Brukes "Normal anrop", kan man slå lyd og vibrator av under "Innstillinger", som beskrevet under Grunninnstillinger, side 3.

Nødanrop: Er en eller flere sendere satt til "Nødanrop", vil der alltid komme lyd og vibrator signal ved alarm fra disse sendere, selv om lyd og vibrator under "Innstillinger" er slått fra.

Endring av Navn, Tekst, Type og Lydsignal, samt oppsett av "Normal anrop" eller "Nødanrop" skjer via

"Hovedmeny" => "Sendere" => velg den ønskede sender med **V** og **^** og **Ent**.

I "Sender info" => Trykk **V** inntil den grønne pil står ved den ønskede linje => Trykk **Ent**.

Tekster kan heretter tastes inn eller endres som under **Betjening** side 6



Erstatt en innkodet sender med en ny sender

Det er mulig å erstatte en allerede innkodet sender med en ny, uten man må taste inn navn, tekst velge signaltone igjen.

Dette kan skje under "Hovedmeny" => "Sendere" => Velg den ønskede sender => "Erstatt"

Slett en innkodet sender

Man kan slette en innkodet sender under "Hovedmeny" => "Sendere" => Velg den ønskede sender => "Slett"

Mottak av alarm

Når RX900B mottaker en alarm fra en innkodet sender, vises navn, type samt tidspunkt for mottak.

Man kan nå velge enten å akseptere eller avvise alarmen med hhv. **Ent** eller **Esc**. I "standalone" systemer, hvor senderne er kodet direkte sammen med mottakerne, håndteres alarmkallet uanset om kallet aksepteres eller avvises.

Dog vil avviste anrop være markert med rødt i listen over siste anrop (side 9).

Er RX900B tilmeldt et "Alarm Håndterings System", vil man f.eks. kunne sette opp systemet til å viderestille avviste anrop til andre mottakere.

Hvis det ligger ubesvarte oppkall i RX900B, vil det komme et par korte pipelyder ca. hvert 5. minutt.



Liste over siste anrop

I "Hovedmeny" => Siste anrop" finnes en liste over de 50 siste anrop med den nyeste øverst. Om kallet er grønt, er det et akseptert anrop, hvis kallet er rødt, er det et avvist anrop.

Et ubesvart oppkall, vil vises med gult.

Ved valg av et anrop på listen, vises senderens navn, type, tidspunkt for kallet samt om kallet er akseptert, avvist eller ubesvart.

Listen kan slettes ved å rulle ned i nederste linje og velge "Slett alle"

Sende et Nødanrop

Det er mulig å sende et Nødanrop fra RX900B, hvis f.eks. pleieren trenger rask hjelp hos en bruker.

Nødkallet sendes ved å trykke på "KNOP-knappen".

Når Nødkallet sendes, vibrerer RX900B en gang, og når Nødkallet er mottatt hos en annen i personalet, vibrerer RX900B 3 ganger.



Batterialarm RX900B



Når batterisymbolet skifter farge fra grønn til gul, skal RX900B snart lades.

Skifter symbolet til rødt, bør man straks legge enheten på ladeplaten, som vist under Begynn å bruke, side 3. Samtidig kommer det et par korte pipelyder ca. hver 5. minutt som indikerer lav batteri, samtidig med at nedenstående skjerm vises:



Hvis RX900B fortsatt ikke blir lades, vil nedenstående skjerm vises, når batterispenningen blir kritisk. RX900B slukker og kan kun tennes ved å bli lagt på ladeplaten.



Batterialarm fra sender

Når der mottas en alarm fra en sender som har dårlig batteri, vises teksten "Lavt batteri".



I listen "Siste anrop" vil man også kunne se "Lavt batteri" for senderen.



Oppdatering av RX900B

Det er mulig å oppdatere softwaren i RX900B, samt laste ned og laste opp oppsett med KNOPTool. For nærmere beskrivelse henvises til veiledningen for KNOPTool.

Rengjøring:

Produktet kan rengjøres med en fuktig klut eller spritserviett.

Avhending:

Produktet må ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall.



Kontroll av dekningsområde:

En person aktiverer en sender (f.eks. TX900-1) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i området og avmerker på en skisse over bygning og område, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret slik at alle som skal betjene systemet kan se hvor man har dekning. Utenfor dekningsområdet kan man ikke motta alarmer.

Dekningsområdet kan økes ved bruk av et repeatersystem fra KNOP Elektronik.

Kontakt Cantec AS for nærmere opplysninger.

Tilbehør

Trådløs ladeplate og halssnor kan bestilles hos Knop Elektronik A/S

Tekniske data RX900B:

Batteri:	1 stk. Li-Ion 3,7V 450 mAh
Drift tid på batteri:	Ca. 3 døgn med 50 alarm anrop pr. døgn.
Ladning:	Trådløst, ca. 4 timer.
Frekvens:	869.2125 MHz
Rekkevidde:	75m, utendørs – avhengig av forholdene.
Display:	Grafisk LCD.
Meny tekster	3 språk: Dansk, Norsk, Svensk.
Loggfunksjon	Lagrer de siste 50 alarmkall.
Omgivelse miljø:	Innendørs bruk. <90 % fuktighet ikke kondenserende.
Omgivelse temperatorklokke:	0-40° C
Kabinett type:	Hvid ABS
Kabinett dimensjoner:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. halssnor med sikkerhetslås, som bryter ved trekk i snoren.
Tetthet:	IP65
Vekt inkl. Batterier:	56g

Retten til endringer forbeholdes.

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr
Tlf: 66 99 60 00
bestilling@cantec.no
www.cantec.no

