


Brukerveiledning

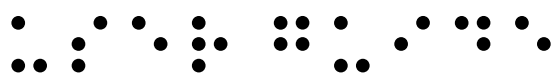

Victor Reader Stratus 2

Cantec AS
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr
Postboks 626, 1411 Kolbotn
www.cantec.no
syn@cantec.no
Ring Cantec support på +47 66 99 60 00

h

Victor Reader Stratus 2

Brukerveiledning fra HumanWare

Versjon 1.5.1 2025-08-04

©Opphavsrett 2025. Alle rettigheter forbeholdt, Technologies HumanWare Inc.

Denne håndboken er beskyttet av opphavsrett som tilhører Technologies HumanWare Inc., med alle rettigheter forbeholdt. I henhold til lov om opphavsrett kan håndboken ikke kopieres helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Technologies HumanWare Inc.

Innhold

OM VICTOR READER STRATUS 2.....	4
KOMME I GANG-ØKT MED VICTOR READER STRATUS 2.....	5
Slik setter du inn og spiller av en ny bok	6
Tastebeskrivelse-modus.....	6
1. OVERSIKT OVER VICTOR READER STRATUS 2	7
1.1 Pakke ut spilleren	7
1.2 Stratus 2 funksjoner.....	7
1.3 Stratus 2 deksel.....	7
1.4 Fysisk beskrivelse av Victor Reader Stratus 2	7
1.4.1 Toppen av spilleren	7
1.4.2 Venstre side av spilleren.....	8
1.4.3 Høyre side av spilleren	8
1.4.4 Forsiden av spilleren.....	8
1.5 Lading av batteriet	8
1.6 Slå på/av	9
1.7 Registrering av bøker	9
1.8 Bokhulle struktur	9
1.9 Andre reserverte filnavn	10
1.10 HumanWare Companion	10
2. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER.....	11
2.1 Lydkontroller	11
2.2 Spill av/stopp	11
2.3 Spol bakover og spol fremover	11
2.4 Tastebeskrivelse-modus.....	11
3. NAVIGASJONSFUNKSJONER	12
3.1 Beskrivelse av taster	12
3.1.1 Angre navigasjon	12
3.2 Bokhulle	12
3.3 Navigasjonsmodus for tidshopp.....	12
3.4 Ti sider eller ti kapitler Hopp	12
3.5 Tekst-til-tale-navigasjonsnivåer	13
3.6 Stavemodus for tekstbokhulle.....	13
3.7 Stratus 2 og tekstinntastingsfelt.....	13
3.8 Brukerveiledning — Bokhyll tast (trykk og hold)	13
3.9 Bokhyllenavigasjon — Bokhyll tast	13

3.10	Slette bøker – Trykk på bokbehandlingstasten.....	13
3.11	Informasjon.....	13
3.11.1	Tilgjengelige informasjonselementer	14
4.	AVANSERTE FUNKSJONER	15
4.1	Kunngjøring om lesetid og klokkeslett	15
4.2	Bokmerker	15
4.2.1	Sette inn bokmerker.....	15
4.2.2	Gå til et bokmerke.....	15
4.2.3	Slette bokmerker.....	15
5.	BOKHYLLESTRUKTUR OG EGENSKAPER.....	16
5.1	Lydbøker	16
5.1.1	Lydbøker struktur.....	16
5.1.2	Talebøker kjennetegn	16
5.2	Andre bøker.....	17
5.2.1	Andre bøker Struktur	17
5.2.2	Andre bøkens kjennetegn.....	17
5.3	Musikk bokhylle	17
5.3.1	Musikkens struktur.....	17
5.3.2	Musikk kjennetegn	18
5.3.3	Spillelister	18
5.3.4	Kunngjøring av mappe- og filnavn	18
5.4	Lagrede podcaster Bokhylle	18
5.4.1	Lagret podcaststruktur	18
5.4.2	Egenskaper for lagrede podcaster	18
5.5	Tekst bokhylle	19
5.5.1	Tekstfilstruktur	19
5.5.2	Egenskaper for tekstfil	19
5.5.3	Navigere i HTML/XML/DOCX-overskrifter	19
6.	KONFIGURASJON MENY	20
6.1	Menyer og menyelementer-liste	20
6.2	Generelle innstillinger	21
6.2.1	Språk	21
6.2.2	System.....	22
6.3	Navigasjon og avspilling	22
6.3.1	Tidshopp.....	22
6.3.2	Lagre sist brukte navigasjonsnivå for hver bok	22
6.3.3	Varsel om bokmerke	23
6.3.4	Lydjusteringsmodus.....	23
6.3.5	Kontinuerlig.....	23
6.3.6	Musikk	23
6.4	Trådløs	23
6.4.1	Fly-modus.....	23
6.4.2	Wi-Fi	23
6.4.3	blåtann.....	25

6.5	Om.....	25
6.6	Online innstillinger	26
6.6.1	Oppdatering av programvare	26
6.6.2	Varslingsmodus	27
6.6.3	Bestill tjenester	27
7.	DAISY ONLINE.....	28
7.1	Konfigurasjonsmeny for Daisy Online.....	28
7.2	Bruke Daisy Online Service	28
7.3	Last ned metoder.....	29
7.4	Navigering i DAISY-bokhyllene dine på nett.....	29
8.	OPPDATERING AV STRATUS 2-PROGRAMVARE	30
9.	FEILSØKING	31
9.1	Beskriv navigasjon.....	31
9.2	Batteri og lading.....	31
9.3	Generelt.....	31
10.	KUNDESTØTTE.....	33
11.	TEKNISKE SPESIFIKASJONER.....	34
12.	SIKKERHETSTILTAK	35
12.1	Kontraindikasjoner.....	35
12.2	Advarsler	35
12.3	Stell og vedlikehold.....	35
12.4	Lagring og transport	35
12.5	Tilleggsinformasjon.....	35
12.6	Informasjon om tjenesten	35
12.7	Mottakelighet for interferens	35
12.8	Advarsel om lyd.....	36
12.9	Forholdsregler for batterisikkerhet	36
12.10	Instruksjoner for avhending.....	37
13.	PRODUSENTENS GARANTI.....	38
14.	LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE.....	39

Om Victor Reader Stratus 2

HumanWare er stolte av å introdusere Victor Reader Stratus 2, den oppdaterte og forbedrede versjonen av Stratus 4M-spilleren. Som Stratus 4M er Stratus 2 den enkle og vennlige digitale talebokspilleren du lette etter, aktualisert for å oppfylle dagens behov. Stratus 2 er ikke lenger en CD-spiller, noe som gir mer plass til dematerialisert innhold gjennom en kasett (Cardridge enhet denne medfølger ikke), eksternt medieinnhold og nettbiblioteker. Dessuten ble Stratus 2-menyene standardisert med Stream 3s menyer, som vil sikre en mer praktisk navigering.

Victor Reader Stratus 2 ble designet for fritidslesing som bestselgere, romaner og magasiner. Den lar deg enkelt navigere i strukturen og raskt gå til ønsket informasjon.

Med sine brukervennlige funksjoner kan du se innholdsfortegnelsen, gå til en seksjon eller gå tilbake til et bokmerke.

Vi ønsker deg mange hyggelige timer med å oppdage alle fasettene til vår digitale lydbokspiller!

Komme i gang-økt med Victor Reader Stratus 2

Velkommen til Victor Reader Stratus 2, din nye digitale lydbokspiller.

Pakken inneholder følgende elementer:

- En Victor Reader Stratus 2, med et tastaturdeksel (dekselet kan fjernes for å avsløre enhetens navigasjonstaster);
- En strømadapter med en USB-A til USB-C kabel, og
- En plastpose med dokumentasjon.

Første gang du bruker Victor Reader Stratus 2, bør du koble spilleren til et strømuttak.

For å koble til en stikkontakt, koble den ene enden av den medfølgende USB-C-en til USB-C-porten. Den er plassert nær høyre hjørne på høyre side av spilleren. Koble USB-A-delen av kabelen til vekselstrømmen som du vil koble til en stikkontakt. Når du mottar spilleren for første gang eller etter en lengre lagringsperiode, er det best å la spilleren være koblet til strømuttaket over natten for å sikre at batteriet er fulladet.

Strømknappen vil lyse jevnt når enheten brukes, og den vil blinke når den er av, men lades opp, blinkene indikerer at batteriet lades. Når det slutter å blinke, er batteriet fulladet. Når spilleren er slått på, lyser strømknappen grønt, enten den er koblet til eller ikke. Under vanlige omstendigheter tar batteriet opptil 3 timer å lade opp og vil gi opptil 20 timers spilletid for de fleste DAISY-bøker.

Vær oppmerksom på at du kan bruke Victor Reader Stratus 2 mens du lader batteriet.

Du kan pause og gjenoppta lesingen ved å trykke på **Spill/Stopp-tasten**, som er plassert nederst i midten av spilleren mellom **spol bakover** og **spol fremover**-tastene.

Vi starter nå Komme i gang-økten. Plasser spilleren foran deg med bærehåndtaket til venstre. Vær oppmerksom på at denne beskrivelsen er gyldig hvis dekselet er fjernet. Hvis dekselet er på enheten, er de tilgjengelige alternativene begrenset.

Over håndtaket øverst til venstre er det en innebygd høyttaler.

Øverst i midten av spilleren er det tre par opp- og ned-taster. Fra venstre til høyre er dette **tone-**, **volum-** og **hastighetstastene**.

Under tone-, volum- og hastighetskontrollene, omtrent i midten av spilleren, finner du navigasjonstastene, som peker **OPP**, **NED**, **VENSTRE** og **HØYRE**. Disse lar deg bevege deg gjennom strukturen til en bok. I midten av disse navigasjonstastene er informasjonstasten. **Informasjonstasten** kunngjør din nåværende leseposisjon, informasjon om boken, og brukes til å åpne menyen ved å trykke langt trykk.

Til venstre for de fire navigasjonstastene, omtrent midtveis ned i spilleren, er ytterligere tre taster justert vertikalt. Den første tasten er bokhylletasten. Du kan bruke bokhylletasten i kombinasjon med de 4 piltastene for å få tilgang til bøkene du kanskje har organisert i forskjellige bokhyller. Rett under **bokhylletasten** er bokmerketasten. **Bokmerketasten** brukes til å sette inn bokmerker for å lagre viktige sider eller avsnitt for fremtidig referanse. Den tredje og nederste tasten er **bokbehandlingstasten** og brukes til å administrere bøker. Med et langt trykk kan du også få informasjon om batteristatus og status på aktuelle nedlastinger.

Til høyre for de fire navigasjonstastene er **av/på-tasten**. Den er innfelt for å forhindre utilsiktet trykk. **Av/på-tasten** brukes til å slå Stratus 2 PÅ og AV. Merk at når Stratus 2 er av og du kobler den til strømuttaket, vil det ta noen øyeblikk før **av/på-tasten** blir operativ.

Under de fire navigasjonstastene er en gruppe på 4 taster. Tre av dem er stilt opp langs underkanten av spilleren. Disse er, fra venstre til høyre, **tastene Spol bakover, Spill av/stopp og Spol fremover**. Til slutt, over **Spill/Stopp-tasten** er Lesetid-tasten. Det er en rund tast med et månesymbol og har en LED-indikator til høyre. Trykk på den flere ganger for å stille inn forskjellige tidsintervaller, hvorefter Stratus 2 automatisk slår seg av. Trykk og hold nede tasten for å få dato og klokkeslett.

På høyre side av spilleren finner du fra topp til bunn følgende komponenter: en USB-C-port (brukes til lading), en USB-A-port og hodetelefonkontakten, som også kan brukes til en ekstern høyttaler.

På forsiden av spilleren er kassettporet for å sette inn en kassett (Cardridge enhet med bøker..

Slik setter du inn og spiller av en ny bok

Slå på Victor Reader Stratus 2 ved å trykke og holde inne **av/** på-tasten. Du vil høre et pip og en velkomstmelding.

Sett inn kassetten eller en ekstern lagringsstøtte (USB) hvis du har en. Etter noen sekunder, hvis omslaget er på enheten, vil Victor Reader Stratus 2 kunngjøre tittelen og begynne å spille boken. Hvis ikke, vil fokuset være på den første boken. Trykk på Spill/Stoppp-tasten for å starte lesingen.

Du kan justere tone, volum og hastighet ved å trykke tastene opp eller ned. Kontrolltastene Tone, Volum og Hastighet er plassert øverst midt på enheten.

Hvis du vil bevege deg bakover eller fremover i høy hastighet i boken, trykker du på og holder inne **Spol tilbake** eller **Spol fremover** til du kommer til ønsket sted, og slipp deretter. Den normale spillehastigheten vil bli gjenopptatt.

For å sette en leseøkt på pause, trykk ganske enkelt på **Spill/Stopp-tasten**. Hvis du vil fortsette å lese der du slapp, trykker du på **Spill/Stopp-tasten** igjen. Vær oppmerksom på at hvis spilleren ikke er koblet til et strømuttak, og hvis den forblir i pausemodus i mer enn 30 minutter, vil den slå seg av automatisk for å spare batterilevetid.

For å avslutte en leseøkt, slå ganske enkelt av spilleren ved å trykke og holde inne **av/** på-tasten til spilleren kunngjør at den lukkes. Victor Reader Stratus 2 vil huske hvor du slapp i boken for din neste leseøkt.

For å starte en ny leseøkt i samme bok, slå på Victor Reader Stratus 2 ved å trykke og holde inne **av/** på-tasten. Etter noen sekunder, hvis omslaget er på enheten, vil du høre tittelen på boken, et pip og lesingen starter der du slapp i den siste leseøkten. Hvis ikke, når du starter opp Stratus 2, vil du høre tittelen på boken. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å starte lesingen.

Tastebeskrivelse-modus

Når det ikke er noen bok til stede, settes Stratus 2 automatisk til Tastebeskrivelse-modus. I denne modusen, hver gang en tast trykkes, kunngjør spilleren en kort beskrivelse av funksjonen. Dette kan være nyttig når du skal lære å bruke spilleren.

Dette fullfører Komme i gang-økten. Brukerveiledningen følger.

1. Oversikt over Victor Reader Stratus 2

1.1 Pakke ut spilleren

Pakken inneholder følgende elementer:

- En Victor Reader Stratus 2, med et tastaturdeksel (dekselet kan fjernes for å avsløre enhetens navigasjonstaster);
- En strømadapter med en USB-A-kabel, og
- En plastpose med dokumentasjon.

Denne håndboken inneholder en kort Komme i gang-økt etterfulgt av brukerhåndboken.

Før du bruker Stratus 2 for første gang, bør du koble spilleren til et strømuttak for å lade batteriet. Du kan bruke Victor Reader Stratus 2 mens du lader batteriet.

1.2 Stratus 2 funksjoner

Stratus 2-spilleren kan spille av innhold som finnes på kassetter og USB-flashminne. Stratus 2 har også tilgang til bøker på Internett via en Wi-Fi-tilkobling.

1.3 Stratus 2 deksel

Spilleren har et tastaturdeksel installert. Dekselet forhindrer bruk av boknavigasjonstaster for de brukerne som kanskje ikke ønsker å bruke dem. Hvis du ønsker å dra full nytte av boknavigasjonsfunksjonene til Stratus 2, kan du fjerne dekselet. Dekselet skal normalt ikke være festet ved levering, bare å lett ta det av.

Tastaturdekselet er festet i de fire hjørnene av spilleren. Dekselet holdes på plass av en flik i hvert hjørne.

Tastaturdekselet hindrer bruk av følgende taster: **Bokhylle**, **Bokmerke**, de **fire navigasjonspiltastene** og informasjonstasten.

Hvis du ønsker å fjerne tastaturdekselet:

- Hold spilleren med bærehåndtaket med venstre hånd.
- Bruk høyre hånd til å finne øvre høyre hjørne av dekselet. Fanen er midt i hjørnet.
- Plasser siden av høyre pekefinger under fliken.
- Bruk tommelen som innflytelse på siden av spilleren, og trykk for å løfte tappen litt fra siden av spilleren.
- Bruk samme metode, løft tappen litt i nedre høyre hjørne av dekselet.
- Med begge hjørnene hevet, bør du kunne løfte dekselet av. Løft om nødvendig nedre venstre hjørne og fjern tastaturdekselet.

Hvis du ønsker å installere tastaturdekselet på nytt, må du justere dekselet riktig over Stratus, og sørge for at bærehåndtaket på Stratus og dekselet overlapper hverandre.

Trykk deretter ned dekselet til alle fire hjørnene klikker på plass.

OBS: etter at dekselet er fjernet eller satt inn, vil en melding be deg om å starte Stratus 2 på nytt. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å bekrefte.

1.4 Fysisk beskrivelse av Victor Reader Stratus 2

1.4.1 Toppen av spilleren

Den innebygde høyttaleren er plassert i øvre venstre hjørne av spilleren.

Øverst i midten er det tre par opp- og nedtaster. Fra venstre til høyre er dette **tone-, volum- og hastighetskontrollene**.

Under kontrollene for tone, volum og hastighet finner du de fire pilformede navigasjonstastene **OPP, NED, VENSTRE** og **HØYRE** slik at du enkelt kan bevege deg gjennom strukturen til en bok. I midten av disse navigasjonstastene er *informasjonstasten*. **Informasjonstasten** kunngjør gjeldende leseposisjon og generell informasjon om boken. Når du trykker langt trykk, lar den deg gå direkte til menyen.

Til venstre for de fire navigasjonstastene, omtrent midtveis ned i spilleren, er ytterligere tre taster justert vertikalt. Den første tasten er bokhylletasten. Rett under **bokhylletasten** er bokmerketasten. Bokmerketasten brukes til bokmerker, som er viktige posisjoner i boken din som du vil merke for fremtidig referanse. Trykk på **bokmerketasten** flere ganger for å velge å vise bokmerkelisten, fjerne alle bokmerker, eller trykk og hold bokmerketasten for å sette inn et bokmerke.

Den tredje og nederste tasten er bokbehandlingstasten. Når du er i en bokhylle, kan denne tasten brukes til å returnere boken eller til å kopiere den til en USB-minnepinne. I et skrivefelt brukes denne tasten til å avbryte operasjonen.

Til høyre for de fire navigasjonstastene er **av/på-tasten**. Den er litt innfelt for å forhindre utilsiktet trykk. **Av/på-tasten** brukes til å slå Stratus 2 PÅ og AV.

Under de fire navigasjonstastene er en gruppe på 4 taster. Tre av dem er stilt opp langs underkanten av spilleren. Disse er, fra venstre til høyre, **tastene Spol bakover, Spill av/stopp** og **Spol fremover**. Til slutt, over **Spill/Stopp-tasten** er Lesetid-tasten. Den er halvmåneformet og har en oransje LED-indikator til høyre. Lesetid-**tasten** brukes til å få tidskunngjøringer og aktivere Lesetid-nedtelling. Du kan trykke og holde inne denne **Lesetid-tasten for å kunngjøre klokkeslettet, eller trykke flere ganger for å angi forskjellige lesetidintervall, hvorefter spilleren automatisk slås av**.

1.4.2 Venstre side av spilleren

På venstre side av spilleren finner du det innebygde håndtaket og høyttaleren.

1.4.3 Høyre side av spilleren

På høyre side av spilleren, nær midten, finner du fra topp til bunn følgende komponenter: USB-C-port (brukes til lading), USB-A-port og hodetelefonkontakt.

1.4.4 Forsiden av spilleren

Du finner sporet for å sette inn en kassett. (Cardridge medfølger ikke).

1.5 Lading av batteriet

For å lade batteriet, koble ganske enkelt Stratus 2 til vekselstrøm. Hvis spilleren er på når du kobler til, vil du høre en kort klokke som bekrefter at strømmen er tilkoblet. Du vil høre lyden igjen når du kobler fra stikkontakten. Spilleren vil imidlertid lade opp uavhengig av om den er på eller av. Batteriet lades automatisk opp når spilleren er koblet til vekselstrøm. Spilleren kan brukes under lading.

Under normale forhold kan det fulladede batteriet vare i opptil 20 timer for kontinuerlig avspilling av DAISY-bøker. Batteriets spilletid kan imidlertid reduseres i følgende tilfeller:

- Hvis batteriet er ladet i mindre enn 3 timer.
- Utstrakt bruk av boknavigasjonskommandoer.
- Høyt volumnivå eller høyhastighets avlesning.
- Tilkobling til internett.
- Bruk av eksterne Bluetooth-høyttalere.

NOTAT: Når spilleren ikke er koblet til et strømuttak og forblir i pausemodus i mer enn 30 minutter, vil den slå seg av automatisk for å spare batteriet.

1.6 Slå på/av

For å slå spilleren på, trykk og hold **inne av/** på-tasten. Du vil høre et pip og en velkomstmelding.

For å slå av spilleren, trykk og hold **inne av/** på-tasten igjen. Du vil høre en "slå av"-melding, etterfulgt av to pip som indikerer at spilleren slår seg av. Merk at når Stratus 2 er av og du kobler den til strømuttaket, vil det ta noen øyeblikk før **av/på-tasten** blir operativ.

1.7 Registrering av bøker

Vær oppmerksom på at følgende beskrivelse gjelder hvis tastaturdekselet er på enheten.

Når Stratus 2 er slått på, vil den se etter den siste boken som er lest. Hvis denne boken ikke blir funnet, vil den åpne den første boken den finner i det tilgjengelige mediet i henhold til følgende rekkefølge: kassett, USB-A og internminne. Hvis den siste boken du leste, blir funnet, spilles den av automatisk.

Hvis tastaturdekselet ikke er på enheten ved oppstart av Stratus 2, vil det plassere fokuset ditt på den sist åpnede boken. Hvis den sist åpnede boken din ikke er til stede, vil du bli dirigert til den siste bokhyllen som ble brukt hvis det er noe innhold; Hvis ikke, vil du bli sendt til neste bokhylle som inneholder innhold.

1.8 Bokhylle struktur

Stratus 2 gjenkjenner ulike boktyper som er lagret i separate mappestrukturer kalt bokhyller. Du kan velge bokhyllen du vil lese ved å trykke flere ganger på bokhylltasten. Flytt frem og tilbake langs hver bokhylle ved hjelp av **høyre** og venstre tast. Bokhyllelisten er sirkulær. På kassetten eller USB-kilden er hver bokhylle lagret i et reservert mappenavn som begynner med "\$VR". Innenfor hver av disse reserverte mappene (bokhyller) kan det være brukerdefinerte undermapper som inneholder separate bøker eller kategorier av filer. Du kan legge andre mapper og filer på mediene dine, men det er bare innholdet i de \$VR reserverte mappene som definerer Stratus 2-bokhyllene.

Bokhyllestrukturen og bruken er definert som følger:

Bokhylle: Talebøker (\$VRDTB mappe).

Boktyper: DAISY 2.x, NISO Z39.86 (DAISY 3), EPUB 2

Bruk: Filene som utgjør hver av DAISY- eller NISO-bøkene dine skal lagres i separate undermapper under denne mappen. Bruk **høyre** /venstre-tastene for å navigere gjennom boklisten i bokhyllen hvis mer enn én bok er til stede. Trykk på **Spill** av for å velge boken. I denne bokhyllen lagres gjeldende leseposisjon og bokmerker separat for hver bok.

Bokhylle: Andre bøker (\$VROtherBooks mappe).

Boktyper: Ikke-DAISY- eller ikke-NISO-innspilte bøker som består av en av de Stratus 2-støttede lydfiltypene.

Bruk: Filene som utgjør hver bok skal lagres i separate undermapper under denne mappen.

Mapper kan være nestet. Eventuelt kan enkeltfilbøker plasseres direkte i rotmappen. Bruk **høyre** /venstre-tastene for å navigere gjennom bøkene. Trykk på **Spill** av for å velge boken. I denne bokhyllen lagres gjeldende leseposisjon og bokmerker separat for hver bok. Avspillingen stopper på slutten av den siste filen i hver bok.

Bokhylle: Musikk (\$VRMusic mappe).

Boktyper: Innspilte filer som består av en av de Stratus 2-støttede lydfiltypene.

Bruk: En musikkbok er enten en spilleliste eller hele musikkstrukturen (referert til som All musikkbok). Gjeldende leseposisjon og bokmerker lagres separat for hver bok. Naviger mellom musikkbøker ved hjelp av **høyre** /venstre-tastene i bokhyllen. All Music-boken består av nestede mapper som inneholder lydfiler. Strukturen kan for eksempel være sjanger, artist, album og spor. Naviger i All Music-boken ved å bruke **opp** / ned-tastene for å velge mappe- eller filnavigasjonsnivå, og flytt deretter innenfor det nivået ved å bruke **høyre** /venstre-tastene. Avspillingen fortsetter fra den siste filen i en mappe til den første filen i neste mappe.

Bokhylle: Lagrede podcaster (\$VRPodcasts)

Boktyper: Alle lydfiltypene som støttes av Stratus 2.

Bruk: Hver podcastfil er definert som en egen bok, noe som betyr at du må flytte fra fil til fil ved å bruke **høyre** /venstre-tastene mens du er i bokhyllen. Leseposisjon og bokmerker lagres separat for hver bok (fil). Avspillingen stopper på slutten av hver bok (fil).

Bokhylle: Tekst (\$VRText mappe).

Boktyper: Tekstfiler i et av disse formatene: docx, fb2, html, lxf, pdf, rtf, txt, xml.

Bruk: Hver tekstfil er definert som en egen bok, noe som betyr at du må flytte fra fil til fil ved å bruke **høyre** /venstre-tastene mens du er i bokhyllen. Leseposisjon og bokmerker lagres separat for hver bok (fil). Avspillingen stopper på slutten av hver bok (fil).

Bokhylle: Notater (\$VRNotes mappe, kun USB-minnepinne)

Boktyper: Innspilte lydnotater

Bruk: Dette er en enkelt liste over filer registrert av et annet Victor Reader-produkt (Stream) der hver fil ble gitt et inkrementelt nummer eller et tilpasset filnavn. Hvert notat er definert som en enkelt bok, noe som betyr at det er én gjeldende leseposisjon og et sett med bokmerker for hvert notat. Hvis det finnes en undermappe (for eksempel den generiske mappen), trykker du på Spill av/stopp-tasten for å åpne denne undermappen, og naviger deretter med høyre- og venstretastene gjennom notatfilene. Trykk på Spill/Stop-tasten for å begynne å lese et notat. Trykk på Spill/Stop-tasten for å stoppe lesingen. Avspillingen stopper på slutten av hver bok (fil).

1.9 Andre reserverte filnavn

Stratus 2 kan opprette andre filnavn som begynner med "\$VR" på mediet ditt. Hvis du fjerner eller endrer disse filene, kan det føre til uforutsigbar oppførsel.

1.10 HumanWare Companion

HumanWare Companion er en PC-programvare som kjører på Microsoft Windows-operativsystemet som brukes sammen med Victor Reader Stratus 2 og andre Victor Reader-produkter for å administrere bøker, musikk, podcaster og tekstfiler. Du kan bruke HumanWare Companion til å kopiere bøker, musikk, podcaster og tekstfiler til enheten, eller fjerne disse filene fra enheten ved hjelp av en datamaskin. For å laste ned og installere HumanWare Companion-programvaren, vennligst besøk: https://www.humanware.com/en-international/support/humanware_companion/

2. Grunnleggende funksjoner

2.1 Lydkontroller

Hver av **Tone-**, **Volum-** og **Hastighetskontrollene** har en Opp- og Ned-tast. Det høres et pip for å markere det øvre og nedre området for hver kontroll. Hvis boken ikke spilles av (eller tastaturdekselet er festet) vil Stratus 2 kunngjøre innstillingsposisjonen. For tone og hastighet høres det også et pip for å markere normal eller 0-posisjon. Dette indikerer enten en flat toneinnstilling eller normal hastighetsinnstilling.

2.2 Spill av/stopp

For å begynne å spille av en bok, trykk på **Spill/Stopp-tasten**.
Hvis du vil stoppe avspillingen av en bok, trykker du på **Spill/Stopp-tasten** igjen.

2.3 Spol bakover og spol fremover

Disse tastene lar deg gå raskt bakover eller fremover. Du vil høre opptaket med en raskere hastighet.

Trykk og hold inne **Spol tilbake-** eller **Spol fremover-tasten** til du kommer til ønsket sted, bevegelsen av tastene **Spol tilbake** eller **Spol fremover** vil akselerere jo lenger du holder tasten nede. For hvert par sekunder du holder tastene, vil du gå fremover eller bakover 1 minutt, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og så videre. Det største hoppet er 5 minutter. Stratus 2 vil kunngjøre tidshoppene og spille av et klipp med normal hastighet mellom hvert tidshopp. Du kan også trykke på **tastene Spol fremover** og **Spol tilbake** én gang for å hoppe 5 sekunder fremover eller bakover eller for å hoppe til neste eller forrige linje i tekstbaserte dokumenter.

2.4 Tastebeskrivelse-modus

Med Tastebeskriver-funksjonen kan du lære funksjonen knyttet til Stratus 2-tastene. Dette er spesielt nyttig når du lærer å bruke spilleren.

Hvis ingen bok er til stede: blir tastebeskrivelsesmodus aktivert automatisk.

Hvis det finnes en bok: Du kan aktivere tastebeskrivelsesmodus ved å trykke på **av/** på-tasten. Trykk på **av/på-tasten** igjen for å gå ut av tastebeskrivelses-modus.

Mens du er i tastebeskrivelse-modus, kan du trykke på en hvilken som helst tast for å høre funksjonen til tasten.

3. Navigasjonsfunksjoner

3.1 Beskrivelse av taster

Under tone-, volum- og hastighetskontrollene finner du de fire navigasjonstastene: **Opp**, **Ned**, **Venstre** og **Høyre**. Disse tastene lar deg enkelt velge nivået på boknavigasjon for å flytte fra ett bokelement til et annet, og raskt gå til ønsket informasjon.

Eksempler: flytte etter nivå 1 (kapittel), nivå 2 (inndeling), side og så videre. Disse navigasjonsnivåene defineres av bokens produsent, så de kan variere fra bok til bok.

Velg først et boknavigasjonsnivå. Trykk på **Opp-** eller **Ned-tasten** suksessivt til du hører ønsket nivå. Det siste nivået som snakkes er det som er valgt.

Deretter bruker du **Høyre-tasten** til å gå fremover eller **Venstre-tasten** til å gå bakover fra ett element til et annet til du kommer til ønsket bokelement. Det siste elementet som snakkes er det som er valgt. Lesingen starter i det valgte bokelementet.

3.1.1 Angre navigasjon

Angre-funksjonen lar deg reversere et uønsket trekk hvis du ved et uhell trykker på **venstre** eller **høyre** navigasjonstast. Hvis du for eksempel ved et uhell trykker på høyretasten og hopper til neste bokelement, kan du trykke **på venstretasten** for å angre flyttingen og gå tilbake til der du var. På samme måte kan du trykke på **høyre** tast for å reversere et utilsiktet trekk gjort med **venstre** tast.

OBS: For å angre en uønsket handling, må du trykke på motsatt knapp innen 10 sekunder etter handlingen.

3.2 Bokhylle

Hvis det er flere titler tilgjengelig på mediet ditt, kan du trykke på Bokhylle for å få tilgang til boklisten. Venstre- og **høyretastene** lar deg gå fra tittel til tittel for å velge boken du vil ha. Bekreft bokvalget ditt med **Spill/Stopp-tasten**. Stratus 2 vil begynne å spille av den valgte boken.

3.3 Navigasjonsmodus for tidshopp

Tidshoppnavigasjon kan aktiveres ved hjelp av **opp-** eller **ned-tastene**.

Trykk på **Opp-** eller **Ned-tasten** for å velge navigasjonsnivå, til **Stratus 2 kunngjør "Tidshopp" etterfulgt** av hoppintervallet. Tidshoppintervallet kan stilles inn til 30 sekunder, 1, 5, 10 eller 30 minutter i delen Navigasjon og avspilling i konfigurasjonsmenyen (**trykk og hold inne informasjonstasten**).

3.4 Ti sider eller ti kapitler Hopp

Høyre- og **venstretastene** lar deg flytte i 10-siders hopp for raskt å komme til en bestemt side.

Velg Sidenavigasjonsnivå ved å trykke på **Opp** eller **Ned-tasten** til du hører "Side".

Trykk deretter og hold inne **høyre eller venstre** tast. Du vil høre Victor Reader Stratus 2 hoppe bakover eller fremover i 10-siders hopp.

Slipp tasten når du er nær ønsket side, og videresend deretter en side om gangen ved å trykke på **høyre eller venstre** tast suksessivt til du kommer til ønsket side. Hvis boken din ikke tilbyr sidenavigering, vil ikke "Side"-elementet bli annonsert når du trykker på **Opp/ Ned-tastene**.

Merk: Det er også mulig å hoppe bakover eller fremover ti elementer mens nivå 1 til 6 er valgt, som beskrevet ovenfor.

3.5 Tekst-til-tale-navigasjonsnivåer

Når Stratus 2 er i tekst-til-tale-modus, vil det bli lagt til flere tekstnavigasjonsnivåer i **opp**/ ned-tastrotasjonen. Disse inkluderer tekstnivåene: skjerm, avsnitt, linje, setning, ord, stavemåte og tegn. Skjerm- og linjenivåer defineres vilkårlig som 25 linjer per skjerm og maksimalt 80 tegn per linje. Som med andre navigasjonsnivåer, flytt mellom elementer på det valgte nivået ved hjelp av **høyre** /venstre-tastene. Merk at skjermnivået bare vil være tilgjengelig når ingen sider er definert i boken.

3.6 Stavemodus for tekstbokhylle

Stavemodus kan velges ved hjelp av **Opp** / Ned-tastene. Stavemodus finner du mellom Ord- og tegnnavigasjonsnivåene. Bruk **høyre** /venstre-tastene til å flytte ord for ord. Stratus 2 vil kunngjøre ordet og stave det. Merk at store bokstaver er angitt og at ord vil bli stavet med normal hastighet, uavhengig av TTS-hastighetsinnstilling.

3.7 Stratus 2 og tekstinntastingsfelt

Når du er i tekstinntastingsfelt, kan du navigere gjennom tegnene med opp- og ned-tastene. Tegnene er sirkulære: små bokstaver vises først, deretter store bokstaver, tegnsettinger, symboler osv. Hvis du vil gå direkte til en bestemt kategori, bruker du bokmerketasten. Hvis du vil skrive inn et tegn, trykker du på høyretasten. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på Spol tilbake-tasten. For å få Stratus 2 til å indikere all teksten som er skrevet i tekstinntastingsfeltet, trykk på Spol fremover-tasten. Til slutt, for å avslutte skrivingen, trykk på Spill/Stopp-tasten.

3.8 Brukerveiledning — Bokhyll tast (trykk og hold)

Du kan når som helst få tilgang til den innebygde brukerhåndboken ved å trykke og holde inne bokhylltasten. Trykk og hold **inne Bokhylle** igjen for å avslutte.

3.9 Bokhyllenavigasjon — Bokhyll tast

Trykk på **bokhylltasten** flere ganger for å rotere gjennom den sirkulære listen over bokhyller. Tomme bokhyller vil ikke bli annonsert. Bokhyller inneholder forskjellige typer bøker og filer som definert i [avsnitt 1.7 "Bokhyllestruktur"](#). Du kan bevege deg frem og tilbake langs en bokhylle ved å bruke **høyre og venstre** tast. Når du kommer til ønsket bok, trykker du på **Spill** av for å åpne den.

3.10 Slette bøker – Trykk på bokbehandlingstasten

Når du navigerer i bokhyllen, kan du slette en bok på mediet eller i internminnet (unntatt All musikkbok) ved å trykke **på bokbehandlingstasten**.

Merk: For å slette en bok, må du være plassert på den boken i bokhyllen eller mens du leser denne boken.

3.11 Informasjon

Informasjonstasten kunngjør din posisjon i din nåværende bok eller, mens du er i en bokhylle, gir informasjon om boken der fokuset ditt er plassert. Ved å trykke og holde inne informasjonstasten

vil du lede deg til enhetens meny. Trykk på informasjonstasten for å kunngjøre tilgjengelige informasjonselementer.

3.11.1 Tilgjengelige informasjonselementer

Bokinformasjonselementer varierer avhengig av boktype. Informasjonen vil vanligvis omfatte følgende:

- *Bokbeskrivelse (hvis tilgjengelig)*
- *Bokens emne (hvis tilgjengelig)*
- *Boktype (hvis tilgjengelig)*
- *DAISY/NISO talebøker: Nåværende posisjon, nåværende side (hvis tilgjengelig), nåværende overskrift, gjenværende tid i gjeldende seksjon*
- *Musikkbokhylle: Nåværende posisjon, gjeldende mappe, gjeldende fil i denne mappen, total tid, medgått tid, gjenværende tid*
- *Andre bøker bokhylle: Nåværende posisjon, gjeldende fil, filnavn, total tid for denne filen, tid medgått for denne filen, gjenværende tid for denne filen*
- *Lagrede podcaster bokhylle: Nåværende posisjon, total tid, medgått, gjenværende tid*
- *Tekstfiler: Nåværende posisjon, gjeldende side (hvis tilgjengelig), gjeldende overskrift*
- *Notatbokhylle: Nåværende posisjon, gjeldende mappenavn (hvis noen), gjeldende notatnavn/nummer, total tid for dette notatet, tid som har gått for dette notatet, gjenværende tid for dette notatet, opprettelsesdato*

OBS: For å vite mer om enhetsstatusen din (batteristrøm og om den lades eller ikke, status for gjeldende nedlasting hvis noen og Stratus 2-versjon), trykk og hold inne Bokbehandlings-tasten.

4. AVANSERTE FUNKSJONER

4.1 Kunngjøring om lesetid og klokkeslett

Med Lesetid-knappen kan du få tidskunngjøringer og stille inn Lesetid nedtelling.

Trykk og hold for å høre klokkeslett og dato.

Lesetid-funksjonen gjør at Stratus 2 kan settes til å slå seg av automatisk etter ulik tid: 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter, 60 minutter.

Trykk på **Lesetid** flere ganger for å velge ønsket lesetid. For å deaktivere lesetid-funksjonen, trykk **på Lesetidtasten** gjentatte ganger til du kommer til AV-alternativet.

Når lesetid-nedtellingen er aktiv, slås LED-lampen til høyre for Lesetid-knappen PÅ. Ett minutt før tidtakeren slår av spilleren, vil lyset begynne å blinke og du vil høre en melding som informerer deg om at 1 minutt med lesetid gjenstår. Når tidtakeren utløper, kunngjør spilleren "Lesetid av", deretter slår den seg av uten å pipe.

4.2 Bokmerker

Bokmerke-tasten markerer posisjoner i boken, slik at du kan gå tilbake til dem senere.

4.2.1 Sette inn bokmerker

Trykk og hold **bokmerketasten** for å sette inn et bokmerke. Et nummer vil bli tildelt hvert bokmerke. En melding vil bekrefte innsetting av bokmerke og informere deg om det tildelte nummeret.

4.2.2 Gå til et bokmerke

Trykk på **bokmerketasten** til du hører meldingen "Bokmerkeliste". Trykk deretter på **høyre** eller venstre tast for å velge ønsket bokmerke, og avspillingen av den bokmerkede posisjonen starter automatisk. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å stoppe lesingen. Hvis du vil forlate bokmerkelisten, bruker du Opp eller Ned-tasten til å velge et annet nivå, og deretter trykker du på Spill/Stopp-tasten for å begynne å lese fra gjeldende posisjon.

MERK: Bokmerkelisten inneholder alltid ett bokmerke for begynnelsen og slutten av boken. Bokmerker sorteres etter plassering i boken, ikke etter bokmerkenummeret.

4.2.3 Slette bokmerker

Trykk på **bokmerketasten** to ganger for å slette alle bokmerker fra gjeldende bok. Spilleren vil be deg om å bekrefte slettingen. For å bekrefte, trykk **på Spill/Stopp**. En melding vil indikere at bokmerkene er slettet. For å avbryte, trykk på en hvilken som helst annen tast.

MERK: Bokmerker og gjeldende posisjon lagres alltid separat for hver bok.

5. Bokhyllestruktur og egenskaper

For filer i alle bokhyller er maksimal filnavnlengde, inkludert filbanen, 512 tegn (inkluderer media/bokbane). Når du skanner USB-nøkkelen ved innsetting, vil alle mapper eller filer med et fullstendig banenavn større enn 512 tegn bli ignorert.

De følgende avsnittene gir generelle regler og informasjon for å lytte til bokhyllene.

5.1 Lydbøker

5.1.1 Lydbøker struktur

Talebøker er DAISY-, NISO- eller EPUB 2-bøker og lagres i \$VRDTB bokhyllemappe. DAISY og NISO krever én mappe per bok. EPUB 2-bøker er enkeltfiler.

Mappe: \ \$VRDTB.

Regler: Hver EPUB 2-fil eller DAISY-mappe er definert som en bok med egen leseposisjon og bokmerker. Bøker kan slettes ved å trykke **på Returner bok** (bokbehandlingstast) mens du blar gjennom bokhyllen eller når de er plassert direkte i boken for å slette.

Fil: \ \$VRDTB\Book1.EPUB 2

Regler: Dette er en EPUB 2-bok ved roten av \$VRDTB.

Mappe: \ \$VRDTB\Book1

Regler: Dette er en mappe som inneholder et sett med DAISY- eller NISO-bokfiler. Dermed definerer den en DAISY- eller NISO-bok ved roten av \$VRDTB.

Mappe: \ \$VRDTB\Drama.

Regler: Dette er en valgfri mappe for å kategorisere boktypen. Den vil inneholde flere undermappekategorier, EPUB 2-bøker eller DAISY/NISO-bokmapper.

Mappe: \ \$VRDTB\Drama\BookA.EPUB 2

Regler: Dette er en EPUB 2-bokfil i kategorien Drama.

Mappe: \ \$VRDTB\Drama\BookB.

Regler: Mappen som inneholder DAISY- eller NISO-bokfilene. Hele mappen er definert som boken.

Mappe: \ \$VRDTB\Mystery.

Regler: Dette er en valgfri mappe for kategorisering av boktype.

Mappe: \ \$VRDTB\Mystery\BookC.

Regler: Samme som bok B.

5.1.2 Talebøker kjennetegn

Bla gjennom bokhylle: Naviger mellom hver bokfil med høyre og venstre tast. Trykk på bokbehandlingstasten til du hører "**Returner bok**" for å slette en bok.

Lesing: Naviger i boken ved hjelp av **høyre** og venstre tast. Velg navigasjonsnivå med **opp**- og ned-tastene. Navigasjonsnivåene overskrifter, sider, uttrykk og tidshopp er tilgjengelige.

Informasjon: Rapporterer informasjon for gjeldende bok.

5.2 Andre bøker

5.2.1 Andre bøker Struktur

Mappe: \SVROtherBooks.

Regler: Hver fil i roten eller hver mappe er definert som en bok med egen leseposisjon og bokmerker. Hver enkelt fil i roten regnes som en egen bok. Hvis en bok er i en mappe, er alle filene i denne spesifikke mappen bestanddelen av den samme boken. Enkeltebokfilene i roten og enkeltmappene kan slettes ved å trykke **på Return Book** (bokbehandlingstast) mens du blar gjennom bokhyllen.

Mappe: \SVROtherBooks\Drama.

Regler: Dette er en valgfri mappe for å kategorisere boktypen.

Mappe: \SVROtherBooks\Drama\BookA.

Regler: Dette er mappen som inneholder bokfilene. Hele mappen er definert som boken med én leseposisjon og bokmerkesett. Mens du blar gjennom bokhyllen, kan du trykke **på Returner bok (bokbehandlingstast)** for å slette boken, noe som betyr at hele bokmappen blir slettet.

Mappe: \SVROtherBooks\Drama\BookB.

Regler: Samme som bok A.

Mappe: \SVROtherBooks\Mystery.

Regler: Dette er en valgfri mappe for kategorisering av boktype.

Mappe: \SVROtherBooks\Mystery\BookC.

Regler: Samme som bok A.

5.2.2 Andre bøkens kjennetegn

Bla gjennom bokhylle: Naviger gjennom listen over andre bøker med høyre og venstre tast. Trykk på bokadministrasjonstasten til du hører "**Returner bok**" for å slette en bok.

Lesing: Avspillingssløyer mellom filene i en bestemt bok. Naviger mellom filer i en bok ved hjelp av **høyre** og venstre tast. Navigasjonsnivåene Fil og Tidshopp er tilgjengelige.

Informasjon: Rapporterer informasjon for gjeldende fil i boken.

5.3 Musikk bokhylle

Musikkbokhyllen er i den reserverte mappen \$VRMusic. Den inneholder en mappestruktur med lydfiler, og hele denne strukturen er definert som All Music-boken. Med mindre du oppretter spillelister, vil dette være den eneste musikkboken. Hvis du legger til spillelistefiler (M3U) i roten av \$VRMusic, vil hver spilleliste være en ekstra musikkbok.

5.3.1 Musikkens struktur

Du kan navigere i opptil 8 nivåer av mapper i musikk. Bruk **opp-** og **ned-tastene** til å velge mappe- eller filnavigasjonsnivå. Deretter kan du gå bakover eller fremover på det valgte nivået med **høyre** og venstre taster. Hvis du har mer enn 8 mappenivåer, vil disse ekstra nivåene bli lagt til i nivå 8-listen over mapper.

Hvis du velger navigasjonsnivået 'Fil', vil du høre navnet på den gjeldende filen. Hvis du velger en mappenivånavigasjon, vil du høre navnet på gjeldende mappe på det nivået. Når som helst i strukturen kan du alltid velge det dypeste navigasjonsnivået. Hvis den gjeldende mappen er på et høyere nivå enn det dypeste nivået, blir ikke mappenavnet kunngjort. La oss for eksempel si at

du har en musikkstruktur som inneholder \$VRMusic\Classic\Mozart og \$VRMusic\Classic\Beethoven\Ninth_symphony. Hvis du for øyeblikket befinner deg i Klassisk\Mozart mens avspillingen er inaktiv, vil endring av navigasjonen fra Fil til Nivå 1 kunngjøre 'Klassisk'. Endring fra nivå 1 til nivå 2 vil kunngjøre 'Mozart'. Endring fra nivå 2 til nivå 3 vil ikke kunngjøre noe siden det ikke er noe mappenavn for en nivå 3-mappe i Klassisk\Mozart. Hvis den er plassert i Klassisk\Beethoven mens avspillingen er inaktiv, vil endring fra nivå 2 til nivå 3 kunngjøre 'Ninth_symphony'.

Hvis du plasserer filer i roten av \$VRMusic, vises de bare på filnavigasjonsnivået.

5.3.2 Musikk kjennetegn

Bla gjennom bokhylle: Bruk **høyre** og venstre tast for å flytte mellom hver musikkbok. Merk at bare 1 musikkbok (All musikk) vil være i musikkbokhyllen med mindre du oppretter flere spillelistebøker. Du kan ikke bruke bokbehandlingstasten til å slette en bok.

Lesing: Hvis sløyfe er aktivert, avspillingssløyfer i filene til en musikkbok. Avspillingen fortsetter fra den siste filen i en mappe til den første filen i neste mappe. Du kan bruke **opp-** og **ned-tastene til å velge mappe- eller filnavigering**.

Informasjon: Rapporterer informasjon for den gjeldende musikkboken, for eksempel totalt antall mapper og filer og total tid for boken.

Hastighet: Stratus 2 vil tilbakestille den variable hastighetskontrollen til normal hastighet og gå tilbake til forrige hastighetsinnstilling når du går ut av musikkbokhyllen. OBS: Det er bare mulig å lytte til stereomusikk med normal hastighet. Hvis du øker eller senker hastigheten på musikken, vil den spille i mono.

5.3.3 Spillelister

Musikkbokhyllen kan inneholde spillelister. En spilleliste er en tekstfil som inneholder en liste over støttede lydfiler som skal spilles av. Den må ha filtypen "m3u". En spilleliste kan ikke lenke til andre spillelister.

5.3.4 Kunngjøring av mappe- og filnavn

Når du blar gjennom Musikk-bokhyllen, vil du kanskje høre kunngjøringer om fil- og mappenavn. Stratus 2 vil gi denne informasjonen hvis spilleren er i stoppmodus, men vil utelate kunngjøringene hvis spilleren er i spillmodus. Derfor, hvis du ønsker å bruke **høyre** eller venstre tast, naviger frem og tilbake mellom musikkfiler og ikke vil høre mappen/filkunngjøringene, trykker du bare på Play-tasten først for å sette spilleren i avspillingsmodus.

5.4 Lagrede podcaster Bokhylle

Bokhyllen Lagrede podcaster inneholder en struktur med lydfiler der hver lydfil representerer en episode av en podkaststrøm. Hver fil (episode) er definert som en egen podcastbok.

5.4.1 Lagret podcaststruktur

Lagrede podcaster kan organiseres etter mapper og undermapper, men Stratus 2 vil bare vurdere filene i disse mappene/undermappene da disse filene vil være på roten. Hver fil vil bli behandlet separat, uten å ta hensyn til mappen eller undermappen der den er plassert.

5.4.2 Egenskaper for lagrede podcaster

Bla gjennom bokhyllen: Bruk **høyre** og venstre tast for å flytte mellom hver podcastbokfil (episode). Trykk på bokadministrasjonstasten til du hører "**Return Book**" for å slette en Book file.

Lesing: Avspillingen stopper på slutten av hver fil. Navigasjonsnivået Tidshopp er tilgjengelig på **opp-** og **ned-tastene**. Hvis kapitler er til stede i en podcastfil, vil det være mulig å navigere etter kapitelnivå.

Informasjon: Rapporterer informasjon for gjeldende podcastbok (fil).

Hvis du ikke vil høre alle taggene, trykker du på **Play** for å avbryte og gjenoppta avspillingen.

5.5 Tekst bokhylle

Stratus 2 kan også lagre tekstfiler gruppert i den \$VRText reserverte mappen. Hvis det er mapper eller undermapper, vil Stratus 2 lese hver tekstfil som om de ville vært på roten av \$VRText-mappen. De spilles med Stratus 2 tekst-til-tale. Hver tekstfil i den \$VRText mappen regnes som en bok. Støttede formater inkluderer: txt, html, xml, rtf, ses3 og DOCX. Merk at når de er til stede, vil bildebeskrivelseskoder bli annonsert i html- og xml-dokumenter.

5.5.1 Tekstfilstruktur

Tekstfilene kan enten være ved roten av \$VRText eller organisert i undermappekategorier, men i så fall vil Stratus 2 behandle dem som om de var på roten.

5.5.2 Egenskaper for tekstfil

Bla gjennom bokhylle: Bruk **høyre og venstre** tast for å flytte mellom hver tekstfil. Trykk på bokbehandlingstasten til du hører "**Returner bok**" for å slette en tekstfil.

Lesing: Avspillingen stopper på slutten av hver fil. Navigasjonsnivåene på tastene **opp** eller **ned** inkluderer: side (hvis det er sideindikatorer i filen), skjerm (hvis ingen sideindikatorer), avsnitt, linje, setning, ord, stavemåte og tegn.

Informasjon: Rapporterer informasjon for gjeldende tekstfil.

5.5.3 Navigere i HTML/XML/DOCX-overskrifter

For html/xml-filer som har overskriftskoder (<H1> til <H6>), vil disse tilsvare tilsvarende navigasjonsnivå 1 til 6 på **Opp-** og **Ned-menyen**. Vær oppmerksom på at noen html/xml-filer ikke bruker disse overskriftskodene konsekvent. Filen kan for eksempel ha en H1- og H3-overskrift uten H2-overskrift. I dette tilfellet vil Stratus 2 bare presentere nivå 1 og nivå 3 på **Opp** og **Ned-menyen**. En HTML/xml-fil kan også ha en enkelt H1-overskrift for en tittel uten andre H1-tagger i filen. I dette tilfellet vil Stratus 2 hoppe til slutten av filen hvis du trykket på **høyretasten** etter å ha valgt nivå 1-navigasjon.

6. Konfigurasjon Meny

Stratus 2 kan tilpasses ved hjelp av konfigurasjonsmenyen.

For å åpne menyen, trykk og hold inne informasjonstasten. Hvis du vil gå til neste eller forrige menyelement og velge det, trykker du på høyre eller venstre tast. For å gå til forrige menynivå, trykk på Opp-tasten. Hvis du vil velge en verdi og gå tilbake til innholdet, samhandler du med elementet og lukker menyen. For å lukke menyen, trykk og hold **inne** informasjonstasten, eller trykk på Opp-tasten når du er på det første menynivået.

6.1 Menyer og menyelementer-liste

De tilgjengelige menyene, menyelementene og verdiene er oppført i sin respektive rekkefølge nedenfor.

- Menynivå 1: Generelle innstillinger.
 - Menynivå 2, Generelle innstillinger: Språk, System.
 - Menynivå 3, språk: Last ned språk og stemmer, Velg innholdsstemme (fra stemmene som er installert på enheten, veksle).
 - Menynivå 4, Last ned språk og stemmer: endre menystemme (gjeldende menystemme, kan endres fra de tilgjengelige stemmene på systemspråket), endre tilleggsstemme (gjeldende tilleggsstemme, kan endres fra hvilken som helst stemme på alle tilgjengelige enhetsspråk), bytt stemmer (mellom de to stemmene som er installert på enheten), endre systemspråk (fra språkene som er tilgjengelige for enheten)
 - Menynivå 3, System: tastatur, dato og tid, lesetid.
 - Menynivå 4, tastatur: tastelyd
 - Menynivå 5, tastelyd: PÅ, AV, kun avspilling
 - Menynivå 4, Dato og klokkeslett: endre tid (angi time, angi minutt, AM-PM eller 24 timer), endre dato (år, måned, dag), avanserte tidsinnstillinger
 - Menynivå 5, avanserte tidsinnstillinger: tidsformat (12 timer, 24 timer, veksle), datoformat (år-måned-dag, dag-måned, dag-måned-år, måned-dag, måned-dag-år), sommertid (PÅ eller AV, veksle), klokkeslett og datokunngjøring (kunngjør både klokkeslett og dato, kunngjør kun tid, veksle)
 - Menynivå 4, Lesetid: Lesetidmeldinger (PÅ eller AV).
- Menynivå 1, Navigering og avspilling
 - Menynivå 2, Navigering og avspilling: Tidshopp, Lagre sist brukte navigasjonsnivå (PÅ eller AV, veksle), Bokmerkevarsel (PÅ eller AV), Lydjusteringsmodus (Tone eller Tonehøyde, veksle), Kontinuerlig (PÅ eller AV, veksle), Musikk.
 - Menynivå 3, Tidshopp: 30 sekunder, 1 minutt, 5 minutter, 10 minutter, 30 minutter (PÅ eller AV for hver verdi)
 - Menynivå 3, Musikk: Tilfeldig: AV, Tilfeldig: PÅ, Sløyfe: Mappe, Sløyfe: Singel
- Menynivå 1, Trådløs
 - Menynivå 2, trådløst: Flymodus (PÅ eller AV, veksle), Wi-Fi, Bluetooth.

- Menynivå 3, Wi-Fi: Wi-Fi (PÅ eller AV, veksle), Status, Ny tilkobling, Laster tilkobling, Slett tilkobling, Importer Wi-Fi-konfigurasjon, Valider tilkobling.
- Menynivå 3, Bluetooth: Bluetooth (PÅ eller AV, veksle), Parre en ny enhet, Koble til enhet, Koble fra enhet, Slett parret enhet.

Merk: Når flymodus er slått på, kan du ikke få tilgang til alle Wi-Fi- og Bluetooth-alternativer. Når Wi-Fi eller Bluetooth er slått av, er alle relaterte alternativer deaktivert.

- Menynivå 1, om: versjonsnummer, modell (Stratus V2), serienummer, opphavsrett, lisenser
- Menynivå 1, Online-innstillinger
 - Menynivå 2, Online-innstillinger: Programvareoppdatering, varslingsmodus, bestille tjenester.
 - Menynivå 3, Programvareoppdatering: Kontroller automatisk (PÅ eller AV, veksle), Se etter oppdatering
 - Menynivå 3, varslingsmodus: pip, melding og tittel, ingen varsling, kun lydsignal, pip og melding
 - Menynivå 3, Bestill tjenester: Bookshare, DAISY Online, Eole

6.2 Generelle innstillinger

6.2.1 Språk

6.2.1.1 Last ned språk og stemmer

6.2.1.1.1 Endre menystemme

Bruk dette elementet til å endre stemmen som skal lese menyene. Bruk høyre og venstre tast for å bla gjennom de tilgjengelige variantene av systemspråket ditt. Trykk **på Spill/Stop** for å godta varianten du ønsker. Bruk deretter høyre og venstre tast, velg ønsket stemme og trykk deretter på Spill av/Stop for å velge den. Nedlastingen og installasjonen av den valgte stemmen starter automatisk, og den nye stemmen vil gjelde når du starter enheten på nytt.

6.2.1.1.2 Endre ekstra stemme

Bruk dette elementet til å legge til en ekstra tekst-til-tale-stemme (merk at den ekstra stemmen leser innhold, ikke menyer). Bruk høyre og venstre tast til å bla gjennom de tilgjengelige språkene som støttes av enheten og deres eventuelle varianter, og trykk deretter på Spill/Stop-tasten på ønsket språk/variant. Til slutt, bruk høyre og venstre tast, bla gjennom de tilgjengelige stemmene, og trykk deretter på Spill/Stop-tasten på ønsket stemme. Nedlastingen og installasjonen av den nye stemmen starter automatisk, og den nye stemmen gjelder når enheten startes på nytt.

6.2.1.1.3 Bytt stemmer

Bytt stemmer-funksjonen lar deg raskt bytte innholdsstemmen med menystemmen. Bruk høyre og venstre tast for å velge "Bytt stemmer" og trykk deretter på Spill/Stop for å bekrefte stemmebytte (merk at enheten automatisk slår seg av etter bekreftelse). Vær også oppmerksom på at dette alternativet bare fungerer hvis de to stemmene er på samme språk og på systemspråket ditt.

6.2.1.1.4 Endre systemspråk

Funksjonen Endre systemspråk lar deg endre systemspråket. Bruk høyre- og venstretastene til å bla gjennom de tilgjengelige språkene som støttes av enheten. Når det er valgt, vil dette utløse en programvareoppdatering. Se [avsnitt 6.6.1.3 "Last ned og installer en programvareoppdatering"](#) for detaljer.

6.2.1.2 Velg innholdsstemme

Bruk Velg innhold-stemmen til å velge stemmen som brukes til å lese innhold. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å veksle mellom de to lydene. Endringen trer i kraft umiddelbart.

6.2.2 System

6.2.2.1 Tastatur

6.2.2.1.1 Tastelyd

Du kan slå på eller av pipelydene som høres når du trykker på tastene. Hvis du slår av dette alternativet, undertrykkes også det andre pipetonen som høres når avspillingen startes. Du kan også sette alternativet "tastelyd" til "kun avspilling". I dette tilfellet deaktiveres alle pipelydene bortsett fra pipetonen som høres når avspillingen gjenopptas etter en pause i en bok. Tone-, **volum-** og hastighetstastene vil alltid pipe ved minimum, normal og maksimum posisjon uavhengig av denne menyinnstillingen.

6.2.2.2 Dato og klokkeslett

6.2.2.2.1 Endre tid

Velg dette elementet for å endre tiden på enheten. Du kan stille inn timer, minutter og bytte fra AM til PM (hvis i 12-timers format). For å endre verdien som er angitt, bruk opp- eller ned-tastene, og trykk deretter på Spill/Stopp-tasten for å bekrefte eller bokbehandlingstasten for å avbryte.

6.2.2.2.2 Endre dato

Velg dette elementet for å endre datoen på enheten. Du kan angi år, måned og dag. Hvis du vil endre verdien som er angitt, bruker du opp- eller ned-tastene. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å bekrefte eller Bokhåndteringsstasten for å avbryte.

6.2.2.2.3 Avanserte tidsinnstillinger

Velg dette elementet for å endre formatet på klokkeslett og dato.

Du kan endre tidsformatet: (12t/24h); datoformatet (måned/dag/år, år/måned/dag, dag/måned/år); sommertid/standardtid; klokkeslett- og datokunngjøringene (Bare kunngjør klokkeslett, kunngjør både klokkeslett og dato).

6.2.2.3 lesetid

6.2.2.3.1 Meldinger om lesetid

Lesetid timerens 1 minutters advarsel og lesetid av-meldinger kan slås på eller av.

6.3 Navigasjon og avspilling

6.3.1 Tidshopp

Du kan velge å slå på eller av noen eller alle følgende tidsopp: 30 sekunder, 1 minutt, 5 minutter, 10 minutter eller 30 minutter. Bare tidshoppintervallene du slår på vil vises i navigasjonsmenyen opp og ned (taster når du spiller bøker).

6.3.2 Lagre sist brukte navigasjonsnivå for hver bok

Velg dette elementet hvis du vil lagre navigasjonsnivået for en bok du leser. Med denne funksjonen, når du åpner boken på nytt, forblir gjeldende navigasjonsnivå det samme som det som ble brukt før du lukket den.

6.3.3 Varsel om bokmerke

Alternativet "Bokmerkevarsel" er Av som standard, så når du kommer til et sted i boken din der et bokmerke er lagret, vil du ikke bli advart. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å slå den på.

6.3.4 Lydjusteringsmodus

Når du lytter til lydinnhold unntatt musikk, lar dette alternativet veksle mellom tone og stemmeleie. Som standard er alternativet "Tone" valgt. Hvis du bytter "Lydjustering" til stemmeleie og deretter bruker Tone-tasten, vil du kunne justere stemmeleie i stedet for tonen.

6.3.5 Kontinuerlig

Avspilling spilles av gjentatte ganger når kontinuerlig modus er valgt. Den starter automatisk på nytt i begynnelsen når den kommer til slutten av en bok.

6.3.6 Musikk

6.3.6.1 Tilfeldig og kontinuerlig

Velg denne menyen for å konfigurere musikkinnstillingene på enheten. Du har valget mellom å spille musikk tilfeldig eller ikke, å sløyfe en mappe eller å sløyfe en enkelt fil.

6.4 Trådløs

Her er noen punkter du bør merke deg før du går gjennom menyen for trådløs konfigurasjon:

- Flymodus brukes til å slå av all trådløs kommunikasjon i situasjoner der du ikke har lov til å bruke en trådløs enhet. Hvis flymodus er slått på, er den trådløse kommunikasjonen slått av. Du kan også slå på flymodus i situasjoner der du vet at du ikke trenger trådløs kommunikasjon for å spare batteristrøm. I menyen, når du slår på flymodus, vil du ikke ha tilgang til Wi-Fi- og Bluetooth-innstillinger. På samme måte, når du slår AV Wi-Fi eller Bluetooth, vil du ikke ha tilgang til deres relaterte alternativer.
- *SSID* er navnet på en nettverksruter. Det kunngjøres når du utfører et *søk etter tilgjengelige tilkoblinger*. Det er mulig at en ruter er konfigurert til å skjule SSID-en. I så fall vil den ikke vises i listen over tilkoblinger når du utfører en skanning. For å koble til et slikt nettverk, må du bruke alternativet Opprett en ny tilkobling og angi SSID manuelt.
- Passordet er autentiseringsnøkkelen som brukes med nettverksruter. Det skiller mellom store og små bokstaver, så når du skriver inn med Stratus, kan du veksle mellom små bokstaver, store bokstaver og numeriske bare med **bokmerketasten**.
- *Kallenavnet* er et vennlig navn som skal brukes av Stratus for å identifisere et nettverk. Dette valgfrie navnet vil ikke bli stavet slik tilfellet er med SSID, så du bør skrive inn et lett uttalbart navn for den innebygde tekst-til-tale. Maksimal lengde på kallenavnet er 50 tegn langt.

6.4.1 Fly-modus

Det første elementet i Trådløs-menyen er "Flymodus". Bruk dette elementet til å slå på eller av flymodus. Som standard er flymodus på. Når flymodus er på, er de trådløse funksjonene og Bluetooth-funksjonene slått av. Når flymodus er slått av, slås de trådløse funksjonene på automatisk.

6.4.2 Wi-Fi

6.4.2.1 Wi-Fi

Det første elementet i Wi-Fi-undermenyen lar deg slå Wi-Fi på eller av.

6.4.2.2 Status

Bruk dette elementet til å høre informasjon om nettverksstatusen. Du kan bruke høyre og venstre tast til å navigere mellom de forskjellige tilgjengelige nettverksinformasjonene som SSID, signalstyrken og mer.

6.4.2.3 Ny tilkobling

Bruk denne menyen hvis du ønsker å opprette en ny Wi-Fi-tilkobling. Du får valget mellom å søke etter en tilkobling, opprette en WPS-tilkobling eller opprette en tilkobling manuelt.

6.4.2.3.1 Skann etter SSID

Bruk dette elementet til å søke etter Wi-Fi-rutere innenfor rekkevidden til Stratus. Etter noen sekunder skal en liste over tilgjengelige rutere vises. Bruk høyre og venstre tast for å bla gjennom de tilgjengelige ruter-SSID-ene som ble funnet. Trykk **på Spill/Stopp** for å bekrefte ruter du ønsker tilgang til. Du vil da bli bedt om å skrive inn passordet for den valgte ruter. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet på Stratus. Om nødvendig, utfør et kort trykk på av/på-tasten for å få tilgang til tastebeskrivelsesmodus. Bruk opp- og ned-tastene til å navigere gjennom tegn. For å gå direkte til en bestemt kategori, for eksempel symboler, bruk bokmerketasten. Avslutt oppføringen med **Spill/Stopp-tasten**. Hvis det lykkes, vil ruterens SSID og passord bli lagt til i listen over konfigurerte tilkoblinger (rutere), og den nye tilkoblingen vil bli startet som din aktive ruter. Du vil da bli bedt om å angi et valgfritt kallenavn for den nye tilkoblingen. Merk: For å skrive inn passord på din Stratus kan du også bruke et standard PC-tastatur ved å koble det til USB-ingangen på høyre side av Stratus. Dette gjør innskriving av passord enkelt og raskt.

6.4.2.3.2 WPS-tilkobling

Velg dette elementet for å koble til et beskyttet Wi-Fi-nettverk. Hvis et WPS-nettverk oppdages av Stratus, trykker du på WPS-knappen på ruter for å opprette forbindelsen.

6.4.2.3.3 Koble til manuelt

Bruk dette menyelementet i stedet for å skanne hvis du kjenner den spesifikke ruter-SSID-en du ønsker å konfigurere, eller hvis ruter ikke kringkaster SSID-en. Du vil bli bedt om å angi SSID. Bruk tastaturet til å angi SSID og trykk **på Spill/Stopp**. Du vil da bli bedt om å skrive inn ruterpassordet. Skriv den inn og avslutt med **Spill/Stopp-tasten**. Bruk bokmerketasten til å veksle mellom bare store og små bokstaver og numeriske. Om nødvendig, utfør et kort trykk på av/på-tasten for å få tilgang til tastebeskrivelsesmodus. Hvis det lykkes, vil ruterens SSID og passord bli lagt til i listen over konfigurerte tilkoblinger (rutere), og den nye tilkoblingen vil bli startet som din aktive ruter. Du vil da bli bedt om å angi et valgfritt kallenavn for den nye tilkoblingen. Vær oppmerksom på at både SSID og passord skiller mellom store og små bokstaver.

6.4.2.4 Laste tilkobling

Som standard vil Stratus automatisk koble til den beste tilgjengelige Wi-Fi-ruter innen rekkevidde. Eventuelt kan du bruke høyre og venstre tast til å velge fra en liste over Wi-Fi-rutere som du tidligere har konfigurert. Trykk **på Spill av/Stopp** for å bekrefte valget. Den valgte ruter vil deretter bli brukt til påfølgende trådløs dataoverføring. Du trenger bare å bruke dette elementet når du har konfigurert flere rutere og vil starte en alternativ ruter som din aktive tilkobling for dataoverføring.

6.4.2.5 Slette en tilkobling

Bruk høyre og venstre tast til å velge fra en liste over Wi-Fi-rutere som du tidligere har konfigurert. Trykk **på Spill av/Stopp** for å bekrefte valget. Den valgte ruter vil da bli slettet fra listen over konfigurerte Wi-Fi-rutere.

6.4.2.6 Importer Wi-Fi-konfigurasjon

Bruk dette elementet til å behandle en nettverkskonfigurasjonsfil generert med HumanWare Companion-programvaren. Trykk **på Spill/Stopp** for å behandle en nettverkskonfigurasjon fra en fil på en USB-minnepinne. Hvis du vil generere en nettverkskonfigurasjonsfil, velger du elementet Wi-Fi-konfigurasjon i Verktøy-menyen i HumanWare Companion. Skriv inn SSID og passord. Eventuelt kan du skrive inn et kallenavn for nettverket. Konfigurasjonen file vil bli lagret på USB-minnepinne som du deretter vil sette inn i Stratus.

6.4.2.7 Valider tilkobling

Bruk dette elementet til å validere din nåværende tilkobling til Internett. Stratus vil koble seg til en nettside, og hvis den lykkes, vil Stratus be om en kort melding som informerer deg om en vellykket tilkobling. Du kan spille av meldingen på nytt ved å trykke på Play-tasten .

OBS: Hvis du trenger MAC-adressen til Stratus for å konfigurere MAC-filtreringen til ruter din, kan du finne den i Status-undermenyen i Wi-Fi-undermenyen, under Trådløs-menyen.

6.4.3 blåtann

Bruk denne menyen til å konfigurere Bluetooth-innstillingene. Du har muligheten til å koble til, koble fra eller glemme Bluetooth-enheter.

6.4.3.1 blåtann

Bruk dette elementet til å slå Bluetooth på eller av. Slå den av for å spare på batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke Bluetooth.

6.4.3.2 Koble til en ny enhet

Først må du kontrollere at Bluetooth-enheten du vil pare med er slått på. Når du velger denne undermenyen, vil Stratus begynne å skanne etter tilgjengelige Bluetooth-enheter i nærheten. Rull til listen over tilgjengelige enheter ved hjelp av **høyre og venstre** tast, og trykk deretter **på Spill av/Stopp** for å pare med den. Du vil motta bekreftelse når du er koblet til.

Når du er sammenkoblet, vil Stratus huske Bluetooth-enheten din og pares med den når enheten er aktivert og i umiddelbar nærhet.

6.4.3.3 Koble til enheten

Når du velger denne undermenyen, vil Stratus vise en liste over Bluetooth-enhetene du er sammenkoblet med, hvis de er aktivert og plassert i nærheten. Bla gjennom enhetene dine ved hjelp av **høyre og venstre** tast, og trykk **deretter på Spill/Stopp** for å koble til den. Du vil motta bekreftelse når du er koblet til.

Når du kobler til en enhet, kobles Bluetooth automatisk til den hver gang du slår på enheten.

6.4.3.4 Koble fra enheten

I denne undermenyen vil Stratus vise navnet på enhetene du er koblet til. Bla til navnet på enheten du ønsker å koble fra ved hjelp av høyre og venstre tast, og trykk deretter **på Spill/Stopp** for å koble fra den. Du vil motta bekreftelse når du er koblet fra.

6.4.3.5 Slett sammenkoblet enhet

I denne undermenyen vil Stratus vise navnet på enhetene spilleren din har oppdaget. Bla til navnet på enheten du vil glemme ved å bruke **høyre og venstre** tast, og trykk deretter **på Spill/Stopp**. Du vil motta bekreftelse når enheten er glemt.

6.5 Om

I denne undermenyen finner du all informasjon relatert til Stratus-enheten din.

- Versjonsnummer;
- Modell: Stratus V2;

- Serienummer (på enheten din);
- Opphavsrett;
- Lisenser.

Bruk høyre og venstre tast for å navigere mellom tilgjengelig informasjon.

6.6 Online innstillinger

6.6.1 Oppdatering av programvare

Programvareoppdateringsmenyen inneholder to elementer: "Kontroller automatisk" og "Se etter oppdatering". Som standard vil Stratus automatisk se etter tilgjengelige oppdateringer hvis den er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Hvis du velger elementet "Se etter oppdatering", vil Stratus umiddelbart se etter tilgjengelige oppdateringer. Dette elementet kan brukes flere ganger selv om elementet "Kontroller automatisk" allerede er brukt én gang. Hvis "Kontroller automatisk" er satt til Av, er det nødvendig å bruke "Se etter oppdatering"-elementet for å se etter oppdateringer, da Stratus ikke vil gjøre det automatisk.

6.6.1.1 Kontroller automatisk

Når du åpner Programvareoppdatering-menyen, vil dette elementet være det første. Det er en bryter, som er slått på som standard, noe som betyr at enheten vil se etter oppdateringer automatisk etter at du har startet enheten og koblet til eller koble enheten til et Wi-Fi-nettverk på nytt.

6.6.1.2 Se etter oppdatering

Når du navigerer i Programvareoppdatering-menyen med høyretasten, vil det andre elementet være "Se etter oppdatering". Trykk på Spill/Stopp-tasten for å sjekke om en oppdatering er tilgjengelig. Merk at hvis alternativet "Kontroller automatisk" er satt av, vil det være nødvendig å se etter tilgjengelige oppdateringer ved å bruke "Se etter oppdatering"-funksjonen. Du kan når som helst se etter oppdatering når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

6.6.1.3 Last ned og installere en programvareoppdatering

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil en melding bli lest som indikerer at en oppdatering er tilgjengelig, build-versjonen og kunngjøre den nye versjonen som vil bli installert? og vil invitere deg til å trykke på Spill/Stopp-tasten for å laste ned oppdateringen, eller en hvilken som helst annen tast for å laste ned oppdateringen senere. Vær oppmerksom på at du kan bruke enheten mens du laster ned oppdateringen.

Når nedlastingen er fullført, vil det bli lest en melding som inviterer deg til å trykke på Spill/Stopp-tasten for å installere oppdateringen. Trykk på Spill/Stopp-tasten, og enheten starter automatisk på nytt for å installere oppdateringen. Vær oppmerksom på at hvis enheten din er på batteri, vil den slå seg av, og du må starte den på nytt manuelt for å installere oppdateringen. Prosentandeler av progresjon vil bli annonsert under installasjonsprosessen. Når installasjonen er fullført, vil enheten starte på nytt hvis den er koblet til, eller vil slå seg av hvis ikke.

Du kan også laste ned programvareoppdateringer fra HumanWare-nettstedet og kopiere filen direkte til roten av en USB-minnepinne. Deretter setter du inn USB-minnepinnen i enheten og en melding som spør om du vil installere oppdateringen vil bli lest. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å installere oppdateringen eller en annen tast for å installere oppdateringen senere. Vær oppmerksom på at etter installasjonsprosessen vil filen forbli på USB-nøkkelen til du starter enheten på nytt for første gang etter oppdateringsprosessen. Hvis du vil oppdatere mer enn én enhet ved hjelp av denne metoden, løser du bare ut USB-nøkkelen fra enheten etter at enheten er slått av og før du starter den på nytt.

MERK: Det anbefales sterkt å koble til enheten under en programvareoppdatering, for å være sikker på at den utføres riktig. Du kan også utføre en programvareoppdatering på batteri, men batteriet må være minst 50 % ladet når du starter installasjonsprosessen for

programvareoppdateringen. Hvis batteriet er for lavt til å oppdatere, leses en melding som indikerer dette, og du må koble enheten til strøm for å utføre installasjonen av programvareoppdateringen.

6.6.2 Varslingsmodus

I denne undermenyen kan du velge varslingsmodus som brukes til å overføre informasjon om net tjenestene. Som standard er alternativet "Pip, melding og tittel" valgt, noe som betyr at hvis et varsel om en net tjeneste vises, for eksempel fullføring av en bok som lastes ned fra en net tjeneste, vil et pip høres, en melding og boks tittelen vil bli lest. Du kan endre denne innstillingen til "Pip og melding", "Bare pip" eller "Ingen varsler".

6.6.3 Bestill tjenester

Bruk denne menyen for å få tilgang til alle boktjenestene som er tilgjengelige på enheten.

6.6.3.1 Bookshare (gjelder for enkelte land)

Bruk Bookshare-menyen for å administrere net tjenesten. Tjenesten kan slås på ved å gå til Online services-menyen, Bestill tjenester, deretter velge Bookshare-undermenyen og velge alternativet "Legg til konto". Trykk på Spill/Stopp-tasten for å validere dette alternativet. Du vil bli bedt om å skrive inn din registrerte e-postadresse og passord ved hjelp av Stratus-tastaturet. Passord skiller vanligvis mellom store og små bokstaver. Avslutt oppføringen med **Spill/Stopp-tasten**. Det er også mulig å bruke elementet "Importer konfigurasjon" for å importere Bookshare-kontoinformasjonen din med en fil opprettet ved hjelp av HumanWare Companion-programvaren. Når du har lagt inn kontoinformasjonen din, vil en Bookshare-bokhylle bli lagt til den elektroniske bokhyllen. For å fjerne Bookshare-net tjenesten, velg alternativet "Fjern konto". Bruk elementet "Autoriser på nytt" for å endre kontoinformasjonen din og autorisere kontoen på nytt. Til slutt er det mulig å velge bokformat ved å veksle mellom DAISY og BRF.

6.6.3.2 Daisy Online (gjelder for enkelte land)

Bruk denne menyen til å administrere Daisy Online-tjenesten. I menyen Nettjenester, Bestill tjenester og undermenyen DAISY net tjenester, velg elementet "Legg til konto", og velg deretter en tjeneste du vil legge til. Du vil bli bedt om å skrive inn brukernavn og passord. Du kan også bruke elementet "Importer konfigurasjon" for å importere en tilpasset Daisy Online-konfigurasjon til Stratus. Denne tilpassede konfigurasjonen kan opprettes med HumanWare Companion-programvaren ([se avsnitt 1.9 om HumanWare Companion for å vite mer](#)). Programvaren vil generere en fil som du vil kunne importere til Stratus ved å bruke alternativet "Importer konfigurasjon".

For hver konfigurerte DAISY-onlinetjeneste kan du bruke punktet "Endre påloggingsinformasjon" for å endre kontoinformasjonen din. Du kan også velge elementet "Nedlastingsmetode" for å velge måten Stratus vil laste ned bøker fra dette Daisy Online-biblioteket. Du kan velge mellom Automatisk nedlasting (som standard) og Manuell nedlasting. Med den automatiske nedlastingsmetoden vil de valgte bøkene dine eller de som er foreslått av biblioteket automatisk lastes ned på Stratus. Med den manuelle nedlastingsmetoden vil du kunne bruke alternativet "Last ned flere bøker" i den aktuelle Daisy Online-bokhyllen og manuelt velge hvilke bøker du vil laste ned og returnere andre bøker direkte uten å laste dem ned. I hvert DAISY-nettbibliotek som legges til, kan du bruke elementet "Fjern konto" for å fjerne denne Daisy Online-kontoen og slette alle tilknyttede bøker fra Stratus.

6.6.3.3 Eole

Eole er et fransk bibliotek som inneholder tilgjengelige bøker for funksjonshemmede. Du kan få tilgang til denne ressursen ved hjelp av følgende URL-adresse: <https://eole.avh.asso.fr/>
Mer informasjon om EOLE-biblioteket finner du i den franske brukerveiledningen til denne enheten. Alternativt kan denne brukerveiledningen lastes ned fra vår webnettstedet.

7. Daisy Online

7.1 Konfigurasjonsmeny for Daisy Online

For å administrere Daisy Online-tjenesten, gå til menyen og velg alternativet Online tjenester, deretter alternativet Bestill tjenester og varen DAISY online. Velg elementet "Legg til konto" for å velge en tjeneste du vil legge til. Du vil bli bedt om en liste over biblioteker du kan legge til, velg ett av dem. Du må skrive inn brukernavn og passord. Du kan også bruke elementet "Importer konfigurasjon" for å importere en tilpasset Daisy Online-konfigurasjon til Stratus. Ved å navigere med høyre- og venstretastene finner du en liste over biblioteker som allerede er lagt til på enheten din. Hvis du velger et av disse bibliotekene, vil du ha muligheten til å endre nedlastingsmetoden, endre påloggingsinformasjon og fjerne kontoen. Elementet "Nedlastingsmetode" tilbyr to måter å laste ned bøkene dine fra dette biblioteket: manuell nedlasting og automatisk nedlasting (som standard). Med den automatiske nedlastingsmetoden vil de valgte bøkene dine eller de som er foreslått av biblioteket automatisk lastes ned på Stratus. Med den manuelle nedlastingsmetoden vil du kunne bruke alternativet "Last ned flere bøker" i Daisy Online-bokhyllen og manuelt velge hvilke bøker du vil laste ned og returnere andre bøker direkte uten å laste dem ned. Elementet "Endre påloggingsinformasjon" gjør det mulig å endre brukernavnet og passordet som brukes til å koble til dette biblioteket. Til slutt bruker du elementet "Fjern konto" for å fjerne dette spesifikke biblioteket og slette alle tilknyttede bøker fra Stratus.

7.2 Bruke Daisy Online Service

Når Stratus er koblet til et trådløst nettverk, vil du kunne få tilgang til Daisy Online, en netttjeneste som brukes til å få tilgang til og laste ned bøker fra kompatible Daisy Online-biblioteker.

Slik aktiverer du Daisy Online-tjenesten:

- Trykk og hold inne Info-tasten for å få tilgang til konfigurasjonsmenyen.
- Bruk **høyre og venstre** tast for å få tilgang til elementet Online innstillinger, og trykk **på Spill av/stopp**.
- Bruk **høyre og venstre** tast for å få tilgang til elementet Bestill tjenester og trykk **Spill/Stopp**.
- Bruk **høyre og venstre** tast for å få tilgang til Daisy Online-menyen og trykk **på Spill/Stopp**.
- Velg elementet "Legg til konto" ved å bruke høyre og venstre tast etterfulgt av **Spill / Stopp**.
- Bruk høyre og venstre tast til å velge en tjeneste du vil legge til etterfulgt av **Spill av/stopp**.
- Skriv inn ditt Daisy Online brukernavn og passord.
- Alternativt kan HumanWare Companion-programvaren brukes til å lage en fil som inneholder dine Daisy Online-kontodetaljer, som kan importeres fra "Importer konfigurasjon"-elementet på DAISY Online-tjenestemenyen på Stratus.
- Når du har konfigurert en Daisy Online-konto og lagt den til fra den elektroniske konfigurasjonsmenyen, vil en Daisy Online-bokhylle med DAISY Online-tjenestenavnet bli lagt til din online bokhylle. Deretter og for hver konfigurerte konto vil en ny Daisy Online-bokhylle bli lagt til din online bokhylle. Hvis det er mer enn én konfigurert konto for samme DAISY Online-server, vil kontobrukernavnet bli lagt til tjenestenavnet når bokhyllen kunngjøres for å hjelpe deg med å skille kontoene dine.
- I Daisy Online-bokhyllene dine vil du kunne finne bøkene som er lastet ned fra kontoen din. Når en boks utløpsdato er kjent, vil den bli annonsert etter boks tittelen. Når en bok er utløpt og må returneres, vil den bli annonsert før tittelen. Ved å trykke på Info-tasten får du en bokbeskrivelse når den er tilgjengelig, enten en bok er lastet ned eller ikke. Fra en bok kan du også trykke på Info-tasten for å vite utløpsdatoen.

7.3 Last ned metoder

Hvis du valgte Manuell nedlastingsmetode i Daisy Online-menyen, vil du ha et alternativ i bokhyllen som heter "Last ned flere bøker". Bruk dette alternativet til å bla gjennom alle bøkene som er utgitt til kontoen din og som er tilgjengelige for nedlasting. Du kan velge å laste ned disse bøkene med **Spill/Stopp-tasten**, eller returnere dem direkte uten å laste dem ned ved å bruke "returnere"-alternativet på bokbehandlingstastenn. Du kan også returnere en bok mens du er frakoblet; Returen vil bli fullført når du er koblet til et trådløst nettverk.

Hvis du valgte Automatisk nedlastingsmetode i Daisy Online-menyen, vil Stratus med jevne mellomrom laste ned nye bøker utstedt til kontoen din i Daisy Online-bokhyllen din. Men hvis du vil at Stratus umiddelbart skal laste ned tilgjengelige bøker, kan du bruke alternativet i bokhyllen som heter "Synkroniser innhold nå". Når spillerens minne er fullt, vil nye bli lastet ned etter hvert som bøker returneres.

7.4 Navigering i DAISY-bokhyllene dine på nett

- Hver Daisy Online-tjeneste tilbyr en meny som kan variere fra en tjeneste til en annen. Noen tjenester tillater for eksempel muligheten til å kopiere bøker ved hjelp av bokbehandlingstastenn, mens andre ikke gjør det. Ulike nedlastingsmetoder kan angis som standard, mens forskjellige returregler kan gjelde for utløpte bøker.
- To søketyper er mulige: Enkel inngang og Flere innganger. Vanligvis støtter DAISY Online Service en av disse søketypene. De fleste tjenester bruker søketypen Enkelt inndata, mens bare noen få bruker søketypen Flere inndata.
- Med søketypen Enkelt inndata, vil du bli bedt om å skrive inn teksten din ved hjelp av tastaturet. Bruk **bokmerketasten** til å veksle mellom tekst- og numeriske inndatatyper mens du skriver inn teksten for å søke. Du kan redigere et tidligere søk ved å skrive inn nye søkeord som vil bli lagt til etter dine forrige søkekriterier. Trykk på **Spill av/Stopp** for å starte søket og vise søkeresultatlisten, eller trykk på **bokbehandlingstasten** for å avbryte søket. Du kommer tilbake til DAISY Online-bokhyllen din.
- Med søketypen Flere innganger kan du angi flere kriterier for å søke, for eksempel tittel, forfatter osv. Hvert tilgjengelige kriterium vil ha et distinkt inndatafelt, og du kan angi flere kriterier å søke etter samtidig. Trykk på **høyre og venstre** tast for å navigere mellom kriterier, og spill **deretter av/stopp** for å redigere ett av dem. Bruk **bokmerketasten** til å veksle mellom tekst- og numeriske inndatatyper mens du skriver inn teksten for å søke. Trykk på **Spill/Stopp** på bekreftelsesmeldingen etter de siste kriteriene for å starte søket og vise søkeresultatlisten, eller trykk på **bokbehandlingstasten** for å avbryte søket. Du kommer tilbake til DAISY Online-bokhyllen din.
- I tillegg, avhengig av hvilken Daisy Online-tjeneste du bruker, vil ulike funksjoner være tilgjengelige for deg fra bokbehandlingstastenn, spesielt alternativene "Returner bok", "Kopier gjeldende bok til USB" og "Last ned på nytt", men det avhenger av hva Daisy Online-tjenesten tilbyr.
- Info-tasten vil kunngjøre bokbeskrivelsen når den er tilgjengelig.
- Mens du laster ned en Daisy Online-bok, vil en "Lagt til i nedlastingskø"-melding høres. Trykk og hold inne **bokbehandlingstasten** for å høre en nedlastingsstatusrapport.

8. Oppdatering av Stratus 2-programvare

HumanWare kan fra tid til annen tilby nye versjoner av Stratus 2-programvaren. Det er to måter å oppdatere Stratus 2-programvaren på; trådløst, og ved å laste ned en oppdateringsfil på en USB-minnepinne.

For å oppdatere Stratus 2 trådløst, må du først ha en aktiv tilkobling til Internett ved hjelp av det innebygde Wi-Fi (se [avsnitt 6.4 for mer informasjon om menyen for trådløs konfigurasjon](#)). Koble Stratus 2 til et strømuttak med strømadapteren. Hvis Stratus 2 kunngjør at den er i flymodus, aktiverer du Wi-Fi ved å slå av flymodus (første element i Trådløs-menyen). Stratus 2 vil automatisk se etter tilgjengelige oppdateringer. Hvis en nyere versjon av programvaren er tilgjengelig, vil Stratus 2 informere deg om at det er en oppdatering tilgjengelig. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å starte oppdateringsprosessen eller en annen tast for å avbryte. Nedlastingen vil bli gjort sømløst, og du kan bruke Stratus 2 i løpet av denne tiden. For å høre nedlastingsprogresjonen, gå til undermenyen Programvareoppdatering som du finner i Online innstillinger-menyen. Nedlastingstiden kan variere avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen din. Når nedlastingen er fullført, vil Stratus 2 be om bekreftelse for å fortsette med oppdateringen. Trykk **på Spill** av for å starte oppdateringen eller avbryte med en annen tast. Vær oppmerksom på at hvis enheten din er på batteri, vil den slå seg av, og du må starte den på nytt manuelt for å installere oppdateringen. Batteriet må også være minst 50 % for å fortsette. Hvis den er koblet til, starter enheten automatisk på nytt. Under installasjonen vil Stratus 2 med jevne mellomrom kunngjøre oppdateringsstatusen i prosent. Når oppdateringen er fullført, vil Stratus starte på nytt hvis den er koblet til, eller slås av hvis den er på batteri.

Du kan også oppdatere Stratus 2 ved å laste ned en SWU-programvareoppdateringsfil fra HumanWare-nettstedet. Kopier SWU-filen til en USB-minnepinne. Koble Stratus 2 til et strømuttak med strømadapteren. Slå på spilleren og sett inn USB-minnepinnen som inneholder oppdateringsfilen. Stratus 2 vil informere deg om at det er en oppdatering tilgjengelig, med versjonsnummeret. Trykk på Spill/Stopp-tasten for å starte oppdateringsprosessen eller en annen tast for å avbryte. Hvis enheten er på batteri, vil den slå seg av, og du må starte den på nytt manuelt for å installere oppdateringen. Hvis den er koblet til, vil Stratus 2 starte på nytt og deretter installere oppdateringen. Den vil med jevne mellomrom kunngjøre oppdateringsstatusen i prosent. Når oppdateringen er fullført, vil spilleren starte på nytt hvis den er koblet til, eller slås av hvis den er på batteri. Vær oppmerksom på at hvis enheten er på batteri, er det mulig å utføre oppdateringen hvis batteriet er ladet med 50 % eller mer.

SWU-filen vil automatisk bli slettet fra USB-minnepinnen når du slår på Stratus 2 etter å ha utført en oppgradering. For å oppgradere flere spillere med samme USB-minnepinne, sørg for å fjerne minnepinnen fra den oppgraderte Stratus 2 før du slår på Stratus 2 igjen.

9. Feilsøking

9.1 Beskriv navigasjon

Q: Hvorfor annonserer ikke Victor Reader Stratus 2 alltid de samme DAISY-nivåene når jeg trykker på opp- og ned-tastene?

Svar: **Opp-** og **Ned-**tastene går gjennom DAISY-navigasjonsnivåene fra produsenten av boken. Ikke alle DAISY-bøker har samme navigasjonsnivåer. Det kan for eksempel hende at bokens produsent bare har satt inn nivå 1-merker (ofte brukt for kapitler) i boken. I dette tilfellet vil **opp-** og **ned-**tastene bare kunngjøre "nivå 1" og "frase". Et frasenivå er alltid inkludert. Victor Reader Stratus 2 kan bare navigere på nivåene gitt av bokprodusenten. Dessuten er ikke frasehoppet det samme for hver bok. Noen produsenter kan inkludere et setningsmerke for en enkelt setning, mens andre kan markere setning som et vilkårlig tidshopp. Atter andre har konvertert eldre kassettbøker og satt inn en setning som en hel side av en kassett. For bøker med få eller ingen DAISY-navigasjonsmerker, må du navigere med **tastene Spol fremover** og **Spol tilbake**. Spol tilbake-tasten er til venstre for **Spill/Stopp-tasten**, og **spol fremover-tasten** er til høyre for **Spill/Stopp-tasten**.

Q: Hvordan vet jeg hvilke DAISY-navigasjonsnivåer som er tilgjengelige i boken min?

A: Victor Reader Stratus 2 **opp-** og **ned-**tastene vil bla gjennom navigasjonsnivåene som er tilgjengelige i boken. Mange bokprodusenter inkluderer et avsnitt i begynnelsen av boken som beskriver hva DAISY-nivåene tilsvarer i den boken. Sjekk med bokprodusenten din hvis du er usikker på bokens navigasjonsfunksjoner.

Spørsmål: Hvordan hopper jeg raskt til begynnelsen eller slutten av en bok?

Svar: Victor Reader Stratus 2 har automatiske bokmerker for begynnelsen eller slutten av boken. Trykk på bokmerketasten til du hører Stratus 2 kunngjøre "Bokmerkeliste". Trykk deretter på venstre tast til du hører "begynnelsen av boken". Begynnelsen av boken er alltid til venstre for det første brukerbokmerket. På samme måte, for å komme til slutten av boken, trykk på høyre tast i bokmerkelisten til du hører "slutten av boken". Slutten av boken er alltid til høyre for det siste brukerbokmerket. Hvis du ikke har angitt noen bokmerker, trenger du bare å trykke på venstre tast én gang i bokmerkelisten for å komme til begynnelsen av boken eller trykke på høyre tast én gang for å komme til slutten.

9.2 Batteri og lading

Spørsmål: Kan jeg skade batteriet hvis jeg lar strømledningen være tilkoblet i lang tid?

Svar: Nei. Men hvis du ikke skal bruke Victor Reader Stratus 2 over lengre tid, for eksempel å være borte på ferie, er det best å koble den fra strømmettet for å unngå potensiell skade fra strømstøt.

Spørsmål: Kan jeg bytte ut batteriet?

Svar: Nei. Ta kontakt med HumanWare eller autoriserte forhandlere for batteribytte.

Spørsmål: Hvilke forholdsregler bør tas hvis jeg ikke planlegger å bruke spilleren over en lengre periode?

A: Spilleren og batteriene bør holdes innenfor en temperatur på -20 til 35 Celsius og fuktighetsnivåer mellom 5 og 90 % uten kondens.

9.3 Generelt

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis **av/på**-tasten ikke fungerer?

A: Hvis det ikke høres noe pip når du trykker på **av/på-tasten**, må du først kontrollere at spilleren er koblet til vekselstrømkilden. Hvis **av/på-tasten** fortsatt ikke fungerer, trykk og hold den nede i

10 sekunder. Dette vil tilbakestille spilleren. Trykk deretter på den igjen og Victor Reader Stratus 2 skal pipe og starte normalt.

Spørsmål: Kan den interne Victor Reader Stratus 2-programvaren oppdateres?

Svar: Ja. Hvis du er koblet til et trådløst nettverk og **alternativet Kontroller automatisk søk etter oppdatering** er slått på, vil du bli bedt om å oppdatere enheten til den nyeste versjonen hver gang HumanWare lanserer en ny versjon av Victor Reader Stratus 2-programvaren. Alternativt kan du besøke HumanWare-nettstedet på en datamaskin og kopiere den nyeste programvareoppdateringen til en USB-minnepinne, og deretter sette den inn i Stratus 2. Se [kapittel 8](#) for mer informasjon.

Spørsmål: Bør jeg slette bokmerker for å spare minneplass?

Svar: Nei. Victor Reader Stratus 2 kan lagre over 1500 bokmerker fordelt på mange bøker. Selv om du overskrider dette store tallet, vil Stratus 2 erstatte bokmerkene som ble brukt minst ofte. Så du trenger bare å slette bokmerker hvis du ikke vil ha dem.

10. Kundestøtte

For kundestøtte, vennligst kontakt HumanWare-kontoret nærmest deg eller se vår nettside på:

www.humanware.com

Nord-Amerika: 1(800) 722-3393 eller send en e-post til us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 eller send en e-post til eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600 eller send en e-post til au.sales@humanware.com

11. Tekniske spesifikasjoner

- Dimensjoner: 21.15. X 20.02 X 4.06. cm (8.33 X 7.88 X 1.6 tommer)
- Vekt: 0,89 kg (1,95 lbs) med batteri
- DAISY-formater som støttes: DAISY 2.0 og 2.0.2
DAISY NISO Z39.86 2002 og Z39.86 2005
- Batteri type: Oppladbart Li-ion-batteri. 6600 mAh
- Ladetid: 2,5 timer
- Driftstid: 20 timer for kontinuerlig avspilling av DAISY MP3-bok i flymodus
- Strømforsyning: Den medfølgende strømadapteren oppfyller strømkravene kun for landet der det ble solgt. Sjekk med forhandleren din for alternative strømadaptere som brukes for andre land.
- DRM: 2002 PDTB1 (såkalt I.P.P.) og 2006 PDTB2
- Lydformater som støttes: AAC (.mp4, .m4a, .m4v), AMR-WB+ (.3gp), Flac, MPEG2, MP3, OGG Vorbis (.ogg), Opus, Speex (.spx), Wav P.C.M.
-
- Tekstfiler som støttes: docx, fb2, html, lrf, pdf, rtf, txt, xml.
- Tekst-til-tale: Acapela for Linux Embedded
- Strømforsyning: Byttetype AC/DC. Inngang 100V – 240V, 50Hz – 60Hz. Utgang: Type A USB-kontakt, 5VDC, 1.5A
- Øretelefon-kontakter 3,5 mm

Miljømessig

- Driftstemperatur 0 til 45 °C
- Transport- og lagringstemperatur -20 til 60 °C
- Luftfuktighet ved drift 5 % til 95 % (relativ luftfuktighet)
- Transport- og lagringsfuktighet 5 % til 95 % (RF)

Trådløs

- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac som opererer i 2.4 GHz- og 5 GHz-båndene

12. Sikkerhetstiltak

12.1 Kontraindikasjoner

Det er ingen spesiell kontraindikasjon for bruk av enheten.

12.2 Advarsler

- Bruk aldri husholdningsrengjøringsmidler til å rengjøre Victor Reader Stream.
- Bruk aldri rengjøringsprodukter som inneholder etylalkohol, etylsyre, ammoniakk, aceton eller metylklorid.
- Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med utstyret skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.
- Ikke bruk hodetelefoner mens du går på gaten.

12.3 Stell og vedlikehold

For å holde Stratus 2 ren, anbefaler vi at du tørker av overflaten på enheten med jevne mellomrom med en myk damp klut. Klem klut for å fjerne overflødig fuktighet. Bruk kun varmt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler. Produktet er ikke ment å desinfiseres.

12.4 Lagring og transport

Produktet skal ikke brettes eller demonteres under lagring eller transport.

Produktet kan bæres som en hvilken som helst elektronisk enhet i en bil eller et fly. Den har ingen spesifikke begrensninger.

12.5 Tilleggsinformasjon

Etter lang eksponering for solen kan overflatetemperaturen øke.

Produktet har utført nedsenkings- og elektromagnetiske immunitetstester og skal ikke forårsake forstyrrelser eller påvirkes av andre produkter.

Produktmaterialet har en V-0 nivåvurdering til tenning.

Produktet er designet for å ha en levetid på over 5 år. Batteriet er designet for å ha en levetid på 3 år.

12.6 Informasjon om tjenesten

Ingen vedlikehold, kalibrering eller forebyggende inspeksjon er nødvendig på spilleren.

Hvis brukeren finner ut at batteriets autonomi er redusert, kan en erstatningsforespørsel sendes til HumanWare (mot et gebyr).

Kontakt HumanWare eller din distributør for spørsmål om reparasjon eller funksjonsfeil.

Service skal kun utføres av HumanWare eller dets autoriserte distributør.

12.7 Mottakelighet for interferens

Det kan være midlertidig forringelse av lyden når Stratus utsettes for et sterkt radiofrekvensfelt, elektrostatisk utladning eller forbigående elektrisk støy.

FCC-advarsel

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

OBS: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Uttalelser fra Industry Canada

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

12.8 Advarsel om lyd

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt på høye volumnivåer over lengre perioder. Vær forsiktig når du holder enheten nær øret mens høyttaleren er i bruk.



12.9 Forholdsregler for batterisikkerhet

Batteriet blir varmt under lading. Ikke lad batteriet i nærheten av en varmekilde. Batteriet lades ikke opp hvis den interne temperaturen er for høy. Bruk kun medfølgende adapter og kabel for å lade

Victor Reader Stream. Hvis batteriet er utladet over lengre tid, vil det være en forsinkelse på opptil noen minutter før enheten viser noen aktivitet, inkludert lading. Ikke senk produktet – det er fare for overoppheting, brann eller til og med eksplosjon hvis batteriet blir satt i brann, oppvarmet, utsatt for støt, helt nedsenket i lang tid eller hvis batteripolene er kortsluttet. Ikke demonter eller modifier enheten. Ikke slå, kast eller slå enheten frivillig. Ikke slå enheten med skarpe gjenstander eller stumpe gjenstander.

I tilfelle batteriet lekker fra enheten og kommer på huden din, vask med fersk ren og søk legehjelp for å forhindre skader. Hvis batteriet lekker og væsker kommer i kontakt med øynene, IKKE GNI, skyll med rent rennende vann og søk øyeblikkelig legehjelp.

12.10 Instruksjoner for avhending

Ved slutten av denne enhetens levetid må dens interne komponenter kastes i samsvar med lokale myndigheter.

Denne enheten inneholder ingen farlige materialer. For avhending, gå tilbake til HumanWare eller følg lokale forskrifter eller sykehusprosedyrer.

13. Produsentens garanti

Denne enheten er et produkt av høy kvalitet, bygget og pakket med omhu. Alle enheter og komponenter er garantert mot eventuelle driftsfeil som følger:

USA og Canada: Ett (1) år

Kontinental-Europa og Storbritannia: To (2) år

Australia og New Zealand: Ett (1) år

Andre land: Ett (1) år

Garantien dekker alle deler (unntatt batteri) og arbeid. Hvis det skulle oppstå en defekt, vennligst kontakt din lokale distributør eller produsentens tekniske assistanselinje.

OBS: Garantivilkårene kan endres med jevne mellomrom, se vår webnettsted for den nyeste informasjonen.

Betingelser og begrensninger:

Ingen erstatning eller reparasjon som dekkes av garantien vil bli utført med mindre enheten er ledsaget av en kopi av den originale kjøpsregningen. Ta vare på originalen. Hvis enheten må returneres, vennligst bruk originalemballasjen. Denne garantien gjelder i alle tilfeller der skaden ikke er et resultat av feil bruk, feilbehandling, uaktsomhet eller Guds handlinger.

14. Lisensavtale for sluttbrukere

Ved å bruke dette produktet (Victor Reader Stratus 2) godtar du følgende minimumsvilkår.

1. Tildeling av lisens. HumanWare gir sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett og lisens til å bruke programvaren på dette produktet.
2. Eierskap til programvare. Sluttbruker erkjenner at HumanWare beholder alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til originalen, og eventuelle kopier, av programvare som er innlemmet i dette produktet. Sluttbrukeren samtykker i å ikke: modifisere, portere, oversette, dekompile, demontere, reversere eller offentliggjøre programvaren til dette produktet på noen måte.

Dette produktet inkluderer programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)

Customer support

For customer support, please contact the HumanWare office nearest you or view our Web site at:
www.humanware.com

North America : 1 (800) 722-3393
or e-mail to us.support@humanware.com

Europe : (0044) 1933 415800
or e-mail to eu.support@humanware.com

Australia / Asia : (02) 9686 2600
or e-mail to au.sales@humanware.com

www.humanware.com

