

**CANTEC**

- helping people

# Fall Sensor



## Bruksanvisning

### Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn  
Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

[bestilling@cantec.no](mailto:bestilling@cantec.no)  
[www.cantec.no](http://www.cantec.no)



## Innhold

Les først: sikkerhetsinformasjon .....	4
Viktig informasjon.....	4
pakningens innhold .....	5
Beskrivning av Fallsensoren.....	5
Funksjonsbeskrivelse .....	6
installasjon.....	6
Bruk .....	7
vedlikehold .....	8
Tekniska data .....	9

## Les først: sikkerhetsinformasjon

Batteribytte får kun utføres av autorisert person. Får kun brukes med anbefalt batteritype. FORSIKTIGHET - risiko for eksplosjon om feil type brukes. Brukte batterier skal tas hånd om etter instruksjon.



Les og følg alltid sikkerhetsinformasjonen som følger dette symbol.

## Viktig informasjon

I alla system som **benytter** radio og nettverkskommunikasjon finnes risiko for **støt** som **brukeren** ikke kan **påvirke**.

CareTech's produkter er konstruerade for å minimera dessa risker. Man **må** trots **dette** vara medveten om **at** delar av systemet kan utsättas for **støt** eller annan påverkan så **at funksjonen** försämras eller upphör.

Det **er** därför viktigt **at** regelbundet kontrollera alla systemets delar og spesielt **at** radiokommunikationen **fungerer** i alla utrymmen. Kontakta omedelbart er leverantör **ved** misstanke om felaktighet.

**brukeren** bör vara spesielt uppmärksam for störningsrisiken **fra** produkter som kommuniserar inom samma eller närliggande radio frekvenser.

**Fallsensoren** er en mycket tillförlitlig produkt men den kan **ikke** larma i situationer som liknar dagliga aktiviteter og det **finnes også** dagliga aktiviteter som kan utlösa fallarm for **at** de etterliknar **et** fall.

for ytterligere informasjon, vänligen kontakta din leverantör eller gå in på [www.caretech.se](http://www.caretech.se).

## **pakningens innhold**

- Fallsensor
- Bruksanvisning

## **Beskrivning av Fallsensoren**

Belteklips  
brukes også for å feste  
Fallsensoren i  
midjebeltet.



Indikeringslampe  
Rødt lys indikerer sending  
fra fall eller trykk.  
Grønt indikerer bekreftelse.



Alamknapp brukes for  
å manuelt tilkalle hjelp.

## **Funksjonsbeskrivelse**

Fallsensoren inneholder avansert elektronikk som registrerer og behandler bevegelser i alle retninger og hastigheter.

ved "kraftig" bevegelse beregnes bevegelsens retning og hastighet etter en utarbeidet modell for å avgjøre om det er et fall.

Fallsensoren fungerer også som en alarmknapp for selv å kunne tilkalle hjelp. Den er også utstyrt med automatisk batteriovervåking samt automatisk testalarm. ved uteblitt testalarm fra Fallsensoren sendes en lydløs alarm til alarmtakeren (kreves at funksjonen er aktivert i trygghetsalarmen).

## **installasjon**

Fallsensoren er kompatibel med trygghetstelefon Gloria+, CareIP og CareIP Mobile. for å aktivere og installere Fallsensoren på trygghetsalarmen, følg samtlige steg.

### **1. aktivere Fallsensoren**

når Fallsensoren leveres er den ikke aktivert og må først aktiveres før bruk. dette gjøres ved å holde ned den røde alarmknappen på Fallsensoren inntil indikeringslampe lyser grønt (ca 5 sekunder).

er knappen aktivert allerede trenger dette å gjøres. Om du er usikker, kontroller ved å trykke ned knappen i ca 1 sekund. Blinker den da rødt er sensoren allerede aktivert, om den ikke blinker må sensoren aktiveres.

### **2. Rekkeviddekontroll**

En rekkeviddekontroll ska alltid gjøres ved installasjon. dette gjøres ved at holde ned grønn knapp på trygghetsalarmen til et pip høres (etter ca 4 sekunder). Gå rundt i boligen og trykk på fallsensorens alarmknapp. Om indikeringslampe på Fallsensoren lyser rødt og går over til grønt er sensoren innen rekkevidde. Blinker sensoren derimot rødt er den utenfor rekkevidde. Forsøk da å flytte trygghetstelefonen om mulig for å forbedre rekkevidden.

### 3. Les in Fallsensoren

for at Fallsensoren ska fungera kreves det at den er innlest til en trygghetstelefon. dette gjøres ved å holde ned grønn knapp på trygghetstelefonen til et pip høres (etter ca 4 sekunder), tryck på fallsensorens alarmknapp og kvittera sen med den røde knappen på trygghetstelefonen. Gör sen et provlarm på Fallsensoren for å kontrollera at den fungerer og er innlest i trygghetstelefonen.

### Bruk

for best og sikrest funksjon bær Fallsensoren i midjehøre og i vertikalposition, slik at sensoren følger overkroppen. Den festes enklest med klipsen midt foran på en vanlig belte, eller i et spesiallaget midjebelte (medfølger ikke).

Midjebeltet spennes fast ruddt midjen og skal bæres med pilen pekende oppover. Fallsensoren plasseres i en lomme og gestes med hjelp av klipsen på fallsensoren, med den røde alarmknappen opp. Midjebeltet er et ekstra tilbehør som kan bestilles i følgende størrelser: S (95cm), M (100cm), L (110cm), XL (125cm) og XXL (140cm).



når Fallsensoren ska tas av er det viktig at dette gjøres med forsiktighet slik at ikke alarmen går av.

## vedlikehold

### Rengjøring

Fallsensoren rengjøres med en lett fuktig klut. Løsemiddel må ikke benyttes.

Midjebeltet kan vaskes i opp til 95°C, men normalt holder det å vaske på 60°C. Borelåsbåndet skal festes sammen ved vask slik at det beholder sin styrke.



Bomull 85% / Lycra 15%



Fallsensoren må ikke utsettes for væske og skal alltid tas ut ved vask av midjebeltet.

Viktig! når Fallsensoren tas ut for vask av midjebeltet er det viktig at den plasseres riktig når man setter den tilbake i beltet. Se BRUK

### Batteribytte

Lavt batterinivå sendes automatisk til trygghetstelefonen når batteriene bør byttes. Batteriet bør umiddelbart byttes av en autorisert person.



Se avsnitt "Les først: sikkerhetsinformasjon" på s 4 for mer informasjon.



## Tekniska data

Dimensjoner:	52 x 33 x 24mm (HxBxD)
Batteri:	3V Litium batteri CR2450
Batterilengde:	Upp til 1 er
Kommunikasjon:	Radio, 869,2125MHz
Vanntetthet:	etter IP65 (Striltät)

**Utrustningsklasse** Klasse 1 radioutrustning

Class **1**

## Miljø

Produktet er tiltenkt innebruk i normalt bomiljø

Temperatur:	Drifttemperatur +5 til +35°C
Fukt:	0 til 75 % relativ fuktighet (ikke
Miljøklass:	kondenserende kondenserende) 1

## Miljøinformasjon

dette produkt oppfyller kravene i EU-direktivet, 2002/96/EC (WEEE).

WEEE regulerer produsentasvar for elektrisk og elektronisk utrustning med formål å øke gjenvinningen og minimere avfall. Produktet er merket med en overkrysset søppelkasse, som betyr at den omfattes av eu-direktivet og skal overlates til gjenvinning.



Produktet kan, uten avgift, overlates til en gjenvinningsentral som CareTech eller er leverandør er forbundet med, direkte eller via et retursystem. for detaljert instruksjon, kontakt din leverandør eller besøk vår hjemmeside, [www.cantec.no](http://www.cantec.no)

Produsert etter EU-direktivet 2002/95/EC (RoHS).

Materialet i midjebåndet oppfyller kravene for "Trygg Textil", Øko-Tex standard 100.







[www.caretech.se](http://www.caretech.se)