

Beskrivelse av knapper og tilhørende funksjoner.

- A. Tone bass/diskant opp/ned
Justerer tonehøyde bass diskant opp eller ned.
- B. Lydstyrke opp/ned
Justerer lydstyrken opp eller ned.
- C. Hastighet opp/ned
Justerer hastigheten på stemmen i boken opp eller ned. Det høres et kort pip når den er på 0.
- D. 4 piltaster med info tast i midten.
pil opp flytter opp i nivåer i boken. Pil ned flytter til lavere nivå i boken. Pil venstre flytter bakover på valgt nivå. Pil høyre flytter fremover på valgt nivå. Kort trykk på infoknappen gir info om hvor en er i boken. Langt trykk på info knappen tar deg inn i innstillinger menyene. Du flytter frem og tilbake i innstillinger med pil venstre høyre, du gjør valg med spill/Stop. Du kan komme et nivå tilbake med pil opp. Du kan gå helt ut med langt trykk på info tasten.
- E. Bokhylletast
Denne trykkes for å komme til bokhyllen (Tibi) Du flytter mellom bøker på bokhyllen med pil venstre eller høyre, trykk Spill/stopp for å starte avspilling av ønsket bok.
- F. Bokmerke
Denne tasten brukes til å sette inn bokmerker i boken du leser om dette er nødvendig.
- G. Bokbehandling
Et kort trykk på tasten lar deg returnere/slette boken du er i. Trykk Spill/stopp for å bekrefte valget.
Trykkes tasten 2 ganger kan du kopiere valgt bok til USB-A porten om det står en USB-lagringsenhet i USB-porten.
Trykkes tasten langt trykk får du vite batteri status, og om det er nedlastinger og programversjonen til Stratus 2.
- H. Spol fremover Spill/stopp spol bakover
Nederst finner du 3 tydelige knapper fra høyre mot venstre er dette Spol fremover flytter deg fremover, trykk og hold flytter deg fremover 30 sekunder 1 minutt 2 minutter osv. Spill/stopp starter og stopper avspilling av bok. I menyer brukes den til å bekrefte valg som må gjøres. Spol tilbake fungerer på samme måte som spol fremover.
- I. Lesetid
Gjentatte korte trykk på denne lar deg aktivere lesetid 15, 30, 45 eller 60 minutter. Stratus vil da slå seg av etter ønsket lesetid valg. Trykkes lesetid knappen langt trykk vil den lese opp gjeldende klokkeslett og dato.
- J. USB-C / ladeport
Her skal medfølgende USB-C kabel og lader kobles til.
- K. USB-A
Her kan en USB lagringsenhet settes inn for lagring av bøker eller den kan også brukes i forbindelse med service av autorisert personell.
- L. Hodetelefoner
Her kan kablede hodetelefoner med 3,5 mm Mini Jack kobles til.

M. Høyttaler

N. Tilbehør cartridge port ikke i bruk i Norge.

Av/På knapp

Trykk og hold knappen til du hører et kort pip slipp knappen og Stratus 2 vil da bli slått på.

For å slå av Stratus 2 trykk og hold knappen til du hører meldingen slår av, vennligst vent. Slipp knappen Stratus 2 slås nå av.

Når Stratus 2 er på kan en trykke kort og lett på På/av knappen da slår man på taste beskriver. Trykkes knappen kort en gang til slår en taste be skriver av. Tastebeskriver lar deg bli kjendt med de ulike tastene sine funksjoner.