

Hurtigguide for Basic Braille

Versjon 4.2

The logo for CANTEC, featuring the word "CANTEC" in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background.

- helping people

Les også den detaljerte brukerhåndboken som du finner på StartStick.

Plasser Basic Braille foran deg, vendt mot punktcellene på den øvre kanten. Håndflaten vender i din retning. Over punktcellene finner du for hvert punktelement en integrert markørrutetast. Med denne markørrutetasten kan du plassere markøren direkte på tekstposisjonen til punktmodulen. Til venstre og høyre ved siden av punktlinjen er det tre knapper hver. De tre knappene på venstre side er beskrevet fra topp til knapp som [1], [2] og [3]. På høyre side er disse tre knappene tilsvarende beskrevet som [4], [5] og [6]. Basic Braille uten Bluetooth drives kun av USB-grensesnittet. Enheten slås på automatisk når USB-grensesnittet er koblet til en PC som er slått på. Basic Braille med Bluetooth kan slås på ved å trykke og holde inne [4] i omtrent to sekunder. For å slå av Basic Braille, trykk [4] i 5 sekunder. Vi anbefaler å slå av Basic Braille når den ikke er i bruk, da dette vil øke levetiden til punktcellene.

På høyre side av Basic Braille finner du USB-kontakten for tilkobling av USB-kabelen.

Installasjon av programvare

Før du kobler Basic Braille til datamaskinen, bør du installere programvaren som følger med enheten. For å installere den nødvendige programvaren, kobler du den medfølgende USB-minnepinnen med påskriften StartStick til en ledig USB-port på PC-en. StartStick med HTStart-programmet er en USB-pinne som inneholder alle relevante drivere og dokumenter du trenger for å betjene Handy Tech-punktelisten. I tillegg inneholder den den gratis NVDA-skjermleseren, slik at du kan betjene PC-en umiddelbart, selv om ingen skjermleser (JAWS eller SuperNova) er installert.

Etter at du har koblet StartStick til PC-en, kjører du start.exe-programmet fra rotkatalogen. Hvis en skjermleser allerede er installert, er den tilgjengelig for bruk. Ellers gir den medfølgende skjermleseren NVDA tilgang via tale og punktskriftstøtte.

Tilkobling av USB-kabel

Koble den lille ovale magnetpluggen fra den medfølgende USB-tilkoblingskabelen til USB-kontakten på høyre side av Basic Braille. Koble den større, flate pluggen til USB-porten på PC-en. Når PC-en er slått på, gjenkjennes Basic Braille automatisk av USB-kompatible operativsystemer.

Strømforsyningen til Basic Braille sikres av USB-grensesnittet. Basic Braille uten Bluetooth slås på automatisk så snart USB-kabelen er koblet til og PC-en er slått på. I tillegg kan du slå på Basic Braille ved å trykke og holde inne [4] i omtrent to sekunder eller slå den av ved å trykke på [4] i omtrent 5 sekunder.

Bruk av USB og Bluetooth samtidig

Fra firmwareversjon 3 kan du bruke en USB- og Bluetooth-tilkobling samtidig. Hvis du har koblet Basic Braille til for eksempel PC-en eller den bærbare datamaskinen din via USB, kan du koble til en smarttelefon eller en annen PC parallelt via Bluetooth. For å veksle mellom disse to tilkoblingene, trykk på punkt [2] og [5] samtidig i ett sekund. Vær oppmerksom på at Bluetooth-innstillingen i konfigurasjonsmodus må være «PÅ» eller «AUTO». Hvis du velger «AUTO», vil Bluetooth-kanalen være aktiv i 15 minutter etter at Basic Braille er slått på. Hvis ingen tilkobling opprettes i løpet av denne tiden, vil Bluetooth-grensesnittet deaktiveres for å spare batteri..

Bruk som en leseлист

Sørg for at Basic Braille-enheten din er riktig tilkoblet og slått på før du starter skjermleserprogrammet, ellers vil ikke skjermleseren kunne oppdage den. Som regel vil skjermleseren vise den valgte posisjonen i det aktive vinduet på leselisten. Hvis du for eksempel beveger deg gjennom en meny, vises det valgte menyelementet. De ulike funksjonene i skjermleserprogrammet er tilordnet bestemte taster på Basic Braille-enheten din.

Braille-inntasting med funksjonstastene til Basic Braille

For å bruke denne funksjonen trenger du den nyeste driveren for skjermleseren din for Handy Tech-punkteskriftlesere. Vi anbefaler at du installerer driveren som finnes på den medfølgende StartStick.

Key Basic Braille	Function
1 or 4	Move the Braille display to the left.
3 or 6	Move the Braille display to the right.
2	Go to focus
5	JAWS: JAWS- or PC Cursor NVDA: Mouse to object
1 + 2 or 4 + 5	Line up (column wise)
2 + 3 or 5 + 6	Line down (column wise)
1 + 3	Beginning of line
4 + 6	End of line
1 + 4	Page up
3 + 6	Page down
1 + 6	Handy Tech configuration dialog
1 + 2 + 3	Top of file
4 + 5 + 6	End of file
1 + 3 + 5	Braille cursor tracking on/off, default: on
2 + 3 + 4 + 5	Top of window
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	Config mode Basic Braille (internal)
Any key	Wake up from sleep mode (falls to sleep after 30 minutes)
2 + 5 (1 second)	Toggle between USB- and Bluetooth-interface (if available)