

Focus 40 Blue – 5. generasjon leselist – uten tastatur

Hurtigstartveiledning

Cantec AS
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr
Postboks 626, 1411 Kolbotn
www.cantec.no

post@cantec.no

Ring Cantec support på +47 66 99 60 00

Introduksjon

Femte generasjon Focus Blue leselist gir et kompakt, taktilt grensesnitt til datamaskinen din. Brukt sammen med skjermleser programvare som JAWS® for Windows, kan Focus Blue forbedre dataopplevelsen din. Denne hurtigstartguiden er ment å gi den grunnleggende informasjonen du trenger for å gjøre deg kjent med Focus Blue og for å komme i gang. For mer detaljert informasjon, se Focus Blue-brukerveiledningen som er tilgjengelig på den medfølgende CD-en eller online på www.freedomscientific.com.

Fysisk oppsett

På venstre side av Focus, fra forsiden til baksiden, finner du strømknappen og en USB-C-port. USB-porten lar deg koble leselisten til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, eller til AC-adapteren.

Punktcellene er plassert mot fronten av enheten. Det er en markørhenterknapp over hver punktskriftcelle. I hver ende av leselistens overflate er det NAV-vippeknapper som brukes for enkel navigering. Plassert over hver NAV-vippeknapp er en NAV-modusknapp som blar gjennom de forskjellige navigasjonsmodusene.

På forkanten, rett under og i midten av leselisten, er det en menyknapp som brukes til å få tilgang til Focus konfigurasjonsmenyen samt vise fokusstatusinformasjon under en aktiv tilkobling.

På forsiden av leselisten er følgende kontroller, plassert fra venstre mot høyre: Venstre panoreringsknapp, **venstre vippebryter**, **venstre valgknapp**, venstre **skiftknapp**, høyre **skiftknapp**, høyre **valgknapp**, høyre **vippebryter** og **høyre panoreringsknapp**.

Merk: De følgende avsnittene beskriver hvordan disse kontrollene fungerer når du bruker Focus Blue med JAWS. Hvis du velger å bruke Focus Blue med en tredjeparts skjermleser på en datamaskin eller mobilenhet, kan du se dokumentasjonen som fulgte med programvaren, da funksjonene til disse kontrollene kan være forskjellige fra hvordan de fungerer med JAWS.

NAV-vippeknapper og NAV-modusknapper

Focus NAV vippeknapper lar deg bevege deg raskt gjennom filer, dialogbokser, lister og menyer. I en fil kan du flytte etter linje, setning, avsnitt eller panorere bakover og fremover. Hvis du vil bytte mellom de fire navigasjonsmodusene, trykker du på **knappen for NAV-modus** rett over hver NAV-vippeknapp. I en dialogboks kan du flytte mellom de tilgjengelige kontrollene, og til og med samhandle med dem. I en meny kan du flytte opp og ned gjennom menyelementene. Du kan også slå av NAV-vippeknappene helt ved å trykke på **venstre** eller **høyre NAV-modusknapp** og mellomromstasten. Utfør en **venstre** eller **høyre NAV-modusknapp CHORD** en gang til for å slå dem på igjen.

Panoreringsknapper

Focus panoreringsknappene panorerer én leselist bredde til venstre eller høyre hver gang de trykkes. Trykk venstre **panoreringsknapp**, knappen med et hevet dobbelt venstre pilsymbol, for å panorere til venstre. Trykk **på høyre panoreringsknapp**, knappen med et hevet dobbelt høyre pilsymbol, for å panorere til høyre. Hvis du bruker JAWS, kan funksjonene til panoreringsknappene reverseres slik at når du trykker på **venstre panoreringsknapp**, panoreres Focus til høyre, og når du trykker på **høyre panoreringsknapp**, panoreres den til venstre. Se hjelpen for JAWS tastaturverktøy for detaljer om hvordan du endrer disse og andre kontrolltilordninger.

Vippebrytere

Vippebryterne gir bevegelse opp eller ned etter linje. Trykk på toppen av vippebryteren for å flytte opp én linje; trykk på bunnen av vippebryteren for å gå ned én linje. Vippebryterne i kombinasjon med panoreringsknappene, flytter til begynnelsen eller slutten av linjen som markøren er plassert på. Trykk på en panoreringsknapp og toppen av en vippebryter for å gå til starten av linjen. Trykk på en panoreringsknapp og bunnen av en vippebryter for å gå til slutten av linjen.

Valgknapper

Brukt av seg selv, styrer de konkave valgknappene hastigheten på automatisk lesing. Trykk på begge valgknappene samtidig for å slå automatisk lesing på eller av. Trykk på **venstre valgknapp** for å redusere hastigheten for automatisk lesing, eller trykk på **høyre velgerknapp** for å øke hastigheten for automatisk lesing.

Når de trykkes i kombinasjon med andre kontroller, utfører valgknappene flere funksjoner. Hvis du for eksempel trykker på en **valgknapp** og øverst eller nederst på en vippebryter, utføres en side opp eller side ned. Du kan også trykke på en **valgknapp** og **høyre** eller **venstre panoreringsknapp** for å flytte til toppen eller bunnen av en fil.

Skift-knapper

Skift-knappene brukes sammen med de andre kontrollene for å angi kommandoer.

Markørhenter-Knapper

Det er en markørhenter-knapp plassert over hver punktskriftcelle. Trykk på en **markørhenter-knapp** for å flytte markøren til det punktet, eller for å velge en kobling i en nettside eller e-postmelding. I linjemodus trykker du på en **markørhenter-knapp** for å åpne en meny eller velge menyelementer.

Trykk og hold venstre eller **høyre panoreringsknapp** samtidig som du trykker på en **markørhenter-knapp** for å simulere et høyre museklikk på det stedet.

Du kan også bruke markørhenterne til å velge tekst i dokumenter. For å velge med markørhenter-knappene, trykk og hold venstre **Skift-knappen**, og trykk deretter **på markørhenter-knappen** over teksten der du vil starte markeringen. Slipp begge tastene. Flytt dit du vil avslutte markeringen, og trykk på **venstre Skift-knapp** pluss **markørhenter-knappen** på det stedet. Bruk navigasjonskommandoer til å flytte fra startpunktet til sluttpunktet for teksten du markerer, til og med NAV-vippeknappene.

Av / på-knapp

Av/på-knappen slår fokus på eller av når den ikke er koblet til USB. Trykk og hold den i omtrent to sekunder for å slå på Focus, og trykk og hold den i omtrent tre og et halvt sekund for å slå av Focus.

Installere Focus Blue-leselist drivere

JAWS installerer automatisk filene som er nødvendige for å bruke Focus Blue under JAWS-installasjonen. Hvis du imidlertid velger å bruke Focus med et annet skjermleser, må du installere driveren fra Companion-CD-en ved å gjøre følgende:

Notat: Koble Focus fra datamaskinen når du utfører følgende trinn. Å ha Focus tilkoblet under denne prosessen resulterer i feil installasjon og svikt i at Focus fungerer som den skal.

1. Sett inn Focus Blue Companion CD. Når dialogboksen Freedom Scientific Focus Setup åpnes, velger du Installer Windows-driver. Du vil høre en rekke klikk når driveren er installert.
2. Når installasjonen er fullført, velg OK knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Konfigurere USB-tilkoblingen

Gjør følgende for å konfigurere Focus Blue-leselisten til å fungere med JAWS over USB:

Merk: Hvis du bruker et tredjeparts skjermleser, kan du se dokumentasjonen som fulgte med programvaren, da denne fremgangsmåten kan være annerledes.

1. Opprett en USB-forbindelse mellom Focus og datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
2. Windows vil oppdage Focus og installere de riktige driverne.

3. Når Windows har bekreftet at maskinvaren ble installert, lukker du og starter JAWS på nytt. JAWS oppdager automatisk og begynner å bruke Focus Blue-leselisten.

Konfigurere Bluetooth-tilkoblingen

For å bruke Focus Blue trådløst over Bluetooth, må du først konfigurere et Bluetooth-partnerskap mellom Focus og datamaskin.

Gjør følgende for å sette opp et Bluetooth-partnerskap mellom Focus og datamaskinen:

1. Sørg for at Bluetooth er aktivert på datamaskinen som kjører JAWS. Hvis du bruker en ekstern USB Bluetooth-adapter, sett den inn og sørg for at den oppdages riktig.
2. Slå på Focus. Informasjon om klokkeslett og batteristatus vises.
3. Gå til kontrollpanelet på datamaskinen og skriv "bluetooth" i søkeredigeringsboksen.
4. Trykk på **TAB** for å gå til Legg til Bluetooth-enhet og trykk **ENTER**. Datamaskinen vil begynne å søke etter Bluetooth-enheter. Dette kan ta flere sekunder. Du blir plassert i listen over enheter når søket er fullført.
5. Bruk PIL-tastene til å velge Focus fra listen, for eksempel Focus 40 BT, og trykk deretter **ENTER**. Hvis Focus ikke ble funnet, sørg for at den er slått på og velg deretter Prøv på nytt-knappen.
6. Når du blir bedt om å angi en sammenkoblingskode, skriver du inn 0000 i redigeringsfeltet, og trykker deretter på **ENTER** for å fullføre sammenkoblingen av Focus.

Du må nå konfigurere JAWS til å bruke Bluetooth-tilkoblingen. Merk at det ikke er nødvendig å først opprette en USB-tilkobling før du bruker Bluetooth. Hvis du ennå ikke har konfigurert en USB-tilkobling med Focus, gjør du følgende:

Merk: Hvis du bruker et tredjeparts skjermleser, kan du se dokumentasjonen som fulgte med programvaren, da disse prosedyrene kan være forskjellige.

1. Trykk **INSERT+J** for å åpne JAWS-vinduet.
2. Trykk **ALT+I** for å åpne Innstillinger-menyen, og velg Leselist for å åpne dialogboksen Grunnleggende innstillinger for leselist.

3. Trykk **TAB** for å gå til knappen Legg til leselist, og trykk **ENTER**.
4. I listen over leselister velger du Fokus og trykker på **MELLOMROM** for å velge det, og deretter velger du Neste.
5. I kombinasjonsboksen Velg redigering av utgangsport velger du Bluetooth.
6. Velg neste og sørg for at Fokus er valgt som primær leselist.
7. Velg Fullfør og du blir bedt om å starte JAWS på nytt for at disse endringene skal tre i kraft. Velg OK for å lukke denne meldingen og en gang til for å lukke dialogboksen Grunnleggende innstillinger for leselist.
8. Avslutt og start JAWS på nytt, og Focus Blue kommuniserer nå med JAWS over Bluetooth.

Hvis du for øyeblikket bruker Focus over USB og du vil bytte tilkoblingen til å bruke Bluetooth, gjør du følgende:

1. Trykk **INSERT+J** for å åpne JAWS-vinduet.
2. Trykk **ALT+I** for å åpne Innstillinger-menyen, og velg leselist for å åpne dialogboksen Grunnleggende innstillinger for leselist.
3. I kombinasjonsboksen Standard leselist kontrollerer du at Fokus er markert, og deretter velger du Endre innstillinger.
4. I kombinasjonsboksen Velg redigering av utgangsport velger du Bluetooth.
5. Velg OK og du blir bedt om å starte JAWS på nytt for at disse endringene skal tre i kraft. Velg OK for å lukke denne meldingen og en gang til for å lukke dialogboksen Grunnleggende innstillinger for leselist.
6. Avslutt og start JAWS på nytt, og Focus Blue kommuniserer nå med JAWS over Bluetooth.

Paring med en mobilenhet

Du kan bruke Focus Blue som en Bluetooth leselist med mobile enheter som kjører Apples iOS og Googles Android-operativsystemer. Instruksjoner for å pare Focus med iOS- eller Android-enheter samt noen nyttige kommandoer er tilgjengelige på Focus Companion CD.

Merk: Apple-enheter må kjøre iOS 11 eller nyere for å kunne sammenkobles med Focus Blue.

Når du først parer Focus Blue med en annen Bluetooth-enhet, sørg for at leselisten er slått på og ikke koblet til USB. Når den er parert, kan du koble til USB-kabelen og deretter bruke leselistens tilkoblingsmeny, beskrevet i brukerveiledningen for fokus, for å flytte mellom aktive tilkoblinger.