

# Brukerveiledning

## IR-9MP COMFORT



IR mottaker IR-9MP COMFORT: HMS art. nr.: 028516

Best. nr: 2443015

IR-9MP COMFORT .....	1
Beskrivelse.....	2
Koplingsskjema .....	3
Rengjøring.....	4
Tekniske data.....	4
Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet.....	4

### Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn  
Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr  
Tlf: 66 99 60 00  
bestilling@cantec.no  
www.cantec.no

## Beskrivelse

IR-9MP er en programmerbar IR-mottaker tilpasset for å koples til sengemodellen Quintet. Maksimalt 6 funksjoner kan styres på sengen, hjertebrettet, bendelen og hev-senk av hele sengen.

## Tilkopling av IR-mottaker

Kople til IR-mottakerens to kabler til sengens elektronikk. Sengens håndkontroll kan koples til IR-mottakeren for å virke parallelt. Heng IR-mottakeren på sengens understell. Plasser IR-mottakeren slik at mottakerforholdene optimaliseres, rettet ut i rommet. På innsiden av festebraketten er det borrelås for å sikre at mottakeren forblir i riktig posisjon.

Se til at ingen av kablene kommer i klem! Fest kablene med strips som følger med. Kontroller at kablene er lange nok når sengen er hevet i øverste posisjon.

OBS! Rekkevidden avtar hvis detektor-øyet tildekkes av en eller annen grunn, som for eksempel av gardiner eller møbler.



## Programmering av kanaler

Mottakeren er fabrikkinnstilt på kanalene 16-23. Mottakeren er innstilt for å fungere sammen med en IR-sender med 8 funksjoner (IR-9SP eller IR-9SO). Hvis en annen sender eller andre kanaler skal benyttes, må IR-mottakerens kanaler programmeres om. Det gjøres på følgende måte:

Trykk inn en programmeringsknapp på IR-mottakerens kretskort og trykk samtidig på den tasten på senderen som skal aktivere respektive funksjon på IR-mottakeren. IR-mottakeren lærer seg nå hvilken kanal som sendes. Hvis programmeringsknappen holdes inne ca. 1 sekund, blir funksjonen monostabil. Hvis programmeringsknappen holdes inne i ca. 4 sekunder blir funksjonen bistabil. OBS! Ved betjening av seng får **ingen** funksjoner være bistabile. Mottakeren bekrefter innprogrammeringen ved at indikeringslampen blinker. Fortsett med å programmere de neste utgangene.

## Merking av tastene

Etiketter for merking av tastene følger med for senderne IR-9SP, IR-9SO, IR-5SP og IR-5SO. Fjern forsiktig fingerguiden. Ta bort beskyttelsesfolien på etiketten over tastene og klistre på etikettene. Legg deretter på beskyttelsesfolien over merkeetikettene. Sett på fingerguiden.

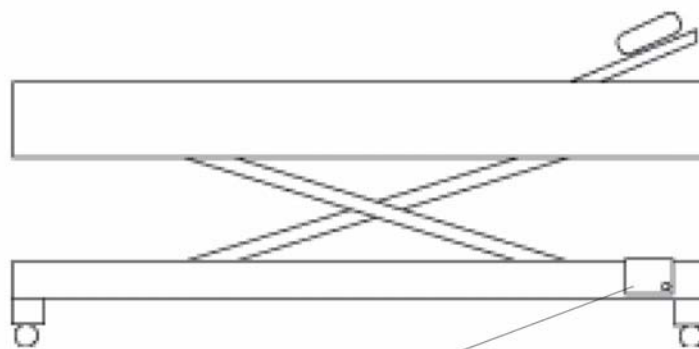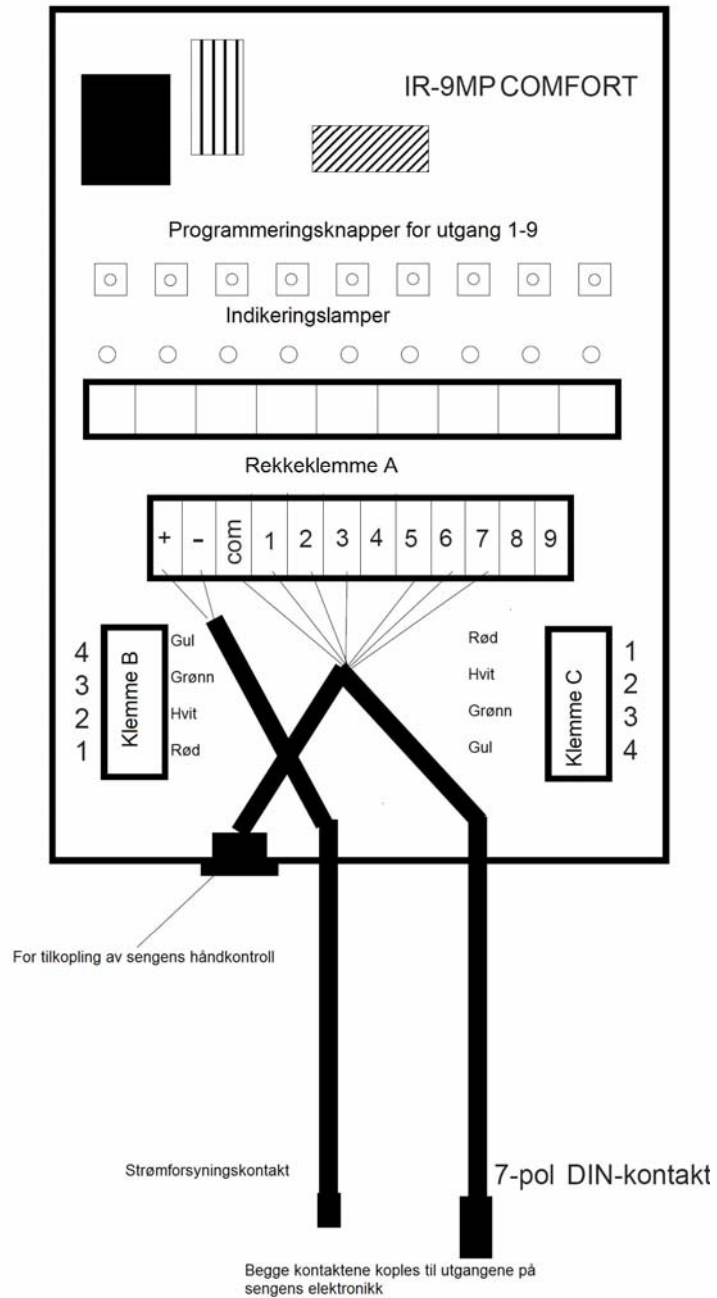

## **Rengjøring**

Mottakerens holdes ren ved å tørke av den med en **godt oppvridd klut** med mildt såpevann. Etter rengjøringen tørkes den av med en tørr klut.

## **Tekniske data**

Driftsspenning:	12-24 V DC
Maks. strømforbruk i hvile:	11 mA
Maks. relébelastning per utgang:	140 mA fra serienr. 497282 110 mA før serienr. 497282
Programmeringskanaler:	GewaLink-kanalene 0-127 (kanal 62 har ingen funksjon) og 4096 kode.
Omgivelsetemperatur:	-40° - +40°C,

## **Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet**

IR 9MP markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for handikappede og oppfyller kravene i det Medisintekniske direktivet 93/42/EEC noe som for eksempel inkluderer relevante krav for EMC og elektrisk sikkerhet.

