



PRIMO+

FORFRA

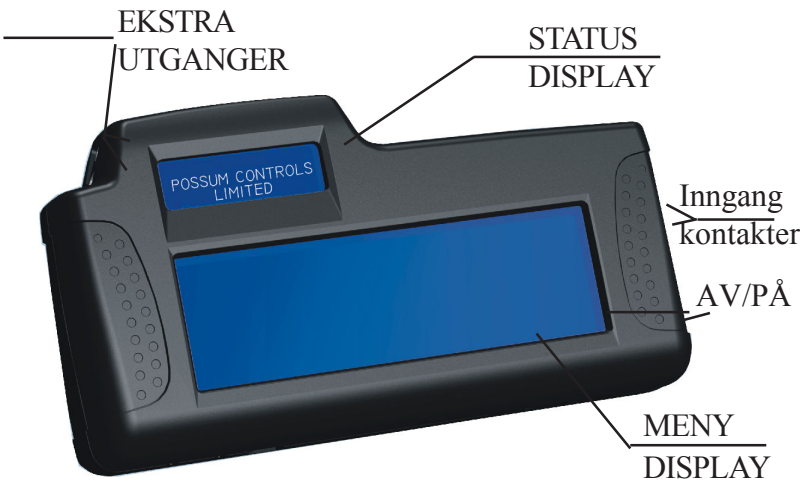

SETT NEDENFRA

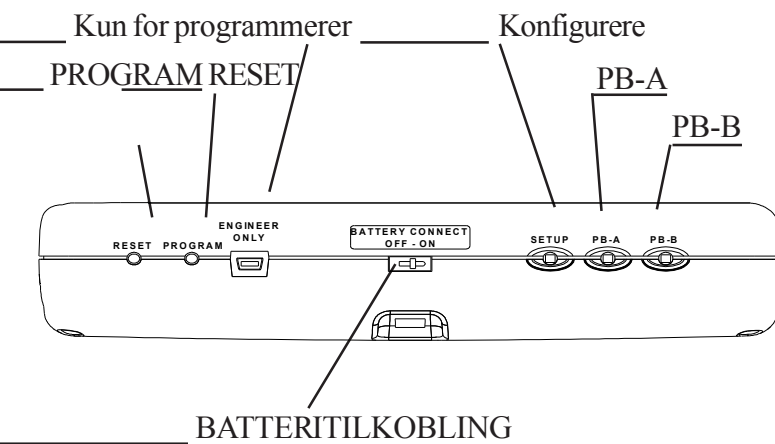

BRYTER FOR BATTERITILKOBLING

Bryteren brukes for å sette det interne batteriet i sikker stilling for transport av enhete. For å bruke enheten må bryteren settes på PÅ(I).

Vennligst merk: Bryteren for batteritilkobling er ikke en AV/PÅ-knapp for enheten.

VENLIGST MERK:

Alle funksjoner beskrevet i dette dokumentet er en del av den grunnleggende opplæringen. Videre assistanse er tilgjengelig fra Cantec (se adresse og telefonnummer på andre side av dette dokumentet).

PRIMO+ vill ha blitt satt opp for å møte dine behov. For å bruke apparatet, velg bare ønsket posisjon fra menyen.

MENYDISPLAY

Menydisplayet viser menyene som er forhåndsinstallert av installatøren. Menydisplayet har opp til 14 posisjoner. Hver posisjon kan ha blitt programmert av installatøren, og de fleste funksjonene vil være en enkelt handling som å bytte tv-kanal. Noen kan være mer komplekse, som å ringe et telefonnummer.

STATUS DISPLAY

Øverste del av statusdisplayet viser vanligvis menyens navn, og nederste halvdel viser batteristatus. Avhengig av installasjonen kan også andre, ulike statuser vises.

DVALETIMER

Etter en tid, som kan justeres av installatøren, vil displayet skru seg av. Dette forlenger batteriets levetid, og gjør også enheten mørk når den ikke er i bruk på natten. PRIMO+ vil starte opp igjen så fort man berører skjermen.

SKANNING

Funksjonene på den PRIMO+ velges normalt ved skanning. Når en skanningsprosedyre er valgt, vil de utvalgte posisjonene markeres etter hverandre. Ved å stoppe skanningene i en posisjon vil denne funksjonen normalt bli aktivert (muligens etter en forsinkelse). Du vil få opplæring i oppsett og bruk av din nye PRIMO+.

RESET BUTTON

Det er en liten, skjult knapp på bunnen (venstre side) av PRIMO+ som kan brukes dersom enheten slutter å svare på input. Knappen er merket RESET. Du trenger å vite hvor denne knappen befinner seg dersom du kontakter Cantec for råd dersom systemet ikke fungerer som det skal.

PROGRAMKNAPP

Det er en liten skjult knapp plassert på bunnen av PRIMO+ som kan brukes for å endre enhetsinnstillingene. Denne er merket PROGRAM. Du trenger å vite hvor denne knappen er plassert hvis du kontakter Cantec for råd om oppsett av systemet. Knappen må holdes i 6 sekunder til du hører et ping, og så holdt i nye 6 sekunder til displayet viser: "skriv inn funksjonskode fra Cantec".

OPPSETTSKNAPPER

Det er 3 små knapper lokalisert på bunnen (høyre side) av PRIMO+. Disse er merket SETUP, PB-A, PB-B og skal brukes av servicetekniker til å sette opp din PRIMO+.

EKSTRA UTGANGER

- 2 Det er to 3,5mm mono-jack-kontakter på toppen (venstre side) av PRIMO+ merket 1 og 2.
- ⊖ Volt-fri kontakt MAKS 12V 100mA. Ta kontakt med Cantec for ytterligere informasjon om bruk.

BRYTERINNGANGER



Inngangskontaktene er plassert på høyre side av enheten. Bryteren som brukes må være utstyrt med en mono 3,5 mm jack, og det må være en trykkebryter.

PRODUKTPLEIE

1. Slå av strømforsyningen og koble fra PRIMO+ enheten før du rengjør produktet.
2. Primo+ skal bare rengjøres med en myk, lofri klut lett fuktet med rent vann.
3. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
4. Ikke la fukt trenge inn i enheten. Sørg for at produktet er tørt før du slår på strømforsyningen igjen.
5. Primo+ er beregnet for innendørs bruk og er ikke dryppssikker, sprutsikker eller vanntett.
6. The PRIMO+ kan ikke steriliseres.

OM PROBLEMER OPPSTÅR

1. Om skjermen er blank, sjekk at det er en HC501 strømforsyning plagget inn i enheten, og at HC501 er koblet til strøm og slått på. (den grønne indikatoren på HC501 viser om den er koblet til strøm). Dersom dette ikke var problemet, vennligst vent i fem minutter før du trykker på "reset". Enheten skal nå starte opp. Dersom enheten ikke starter, vennligst kontakt service.
2. Dersom enheten ikke responderer på input, trykk på reset-knappen. Om enheten ikke resettes og det ikke er forandring i tilstanden, vennligst kontakt service.

Hvis du ikke klarer å løse eventuelle problemer med PRIMO+ systemet, kan du kontakte Cantec på adressen på neste side for å få hjelp.

PRIMO+

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

BRUKSOMRÅDER

PRIMO+ er klassifisert som et klasse 1 (lav risiko) medisinsk utstyr, beregnet for bruk av fysisk funksjonshemmede personer til å styre apparater eller utstyr i et boligmiljø. Enheten kan også brukes innen sykehjem og sykehus, gitt at nødvendige forholdsregler er tatt for å ivareta sikkerheten for hver enkelt installasjon. *Produktet er ikke godkjent for bruk i kristike komponenter i livsstøttende enheter eller systemer som opprettholder liv, og som ved feil, selv ved riktig bruk, kan forventes å volde skade eller død.*

GODKJENNIGER



PRIMO+ CE-merket i henhold til medisinsk utstyr 93/42 / EEC (som en hovedkontroll). Enheten har også blitt testet og godkjent i henhold til følgende standarder:

EN60601-1 (Elektrisk sikkerhet)
EN60601-1-2 (elektromagnetisk kompatibilitet)

Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi, og hvis ikke riktig installert, kan forårsake interferens med radio- og fjernsynsmottakere eller annet sensitivt utstyr. Dette utstyret kan være utsatt for radiofrekvensenergi eller nett gjennomført forstyrrelser generert av annet utstyr i nærheten. Interferens er usannsynlig å være et problem i et typisk hjemmemiljø, men hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Cantec for å få råd.



VEDLIKEHOLD

Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren i PRIMO+!
Merk at under direktivet for medisinske enheter kan kun servicepersonell godkjent av Cantec installere, reparere og tilkoble utstyr til PRIMO+ og dens tilbehør.



Den menneskelige figuren avbildet til venstre angir at PRIMO+ gir elektrisk støtbeskyttelse til EN 60601 type B.



INFO TIL SERVICEPERSONELL

SIKRE AT GUMMIBELAGT DEKSEL ER PÅ Plass OVER KONTAKTEN. IKKE KOBLE NOE TIL DENN EKONTAKTEN - SKADER KAN OPPSTÅ. OPPSETTET ER KUN FOR TEKNIKERE!



FORBRUKERINFORMASJON

Dette produktet kan inneholde stoffer som kan være skadelige for miljøet hvis det ikke behandles som spesialavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr må aldri kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men må samles separat for riktig behandling og gjenvinning. Symbolet med en avfallsdunk, plassert på produktet, minner deg om behovet for å avhende produktet på riktig måte på slutten av sitt liv. På denne måten vil du bistå i gjenvinning, resirkulering og gjenbruk av mange av materialene i dette produktet. På slutten av produktets levetid kan du kontakte din forhandler for informasjon om innsamlingsordninger. Der det er mulig, resirkulere emballasje. Med din hjelp er det mulig å redusere mengden av elektrisk og elektronisk avfall ender opp på en søppelfylling og for å forbedre livskvaliteten ved å hindre utslipp av potensielt farlige stoffer i miljøet.

SPESIFIKASJONER

STRØMKRAV

PRIMO+ er designet for å operere fra en HC501 strømforsyning (1A 12-18Vdc). Sett kontakten til HC501 i kontakten som merket på etiketten på undersiden av

PRIMO+. Koble strømforsyningen til en passende stikkontakt. Slå på forsyningen til HC501 enheten. Det interne batteriet vil operere PRIMO+ i ca 4 timer. Vær oppmerksom på at det kun er fulladet etter 16 timer med kontinuerlig lading.

INTERN BATTERIPAKKE

PRIMO+ inneholder en OPPLADBAR LITHIUM-ION batteripakke. IKKE åpne batteripakken! Ikke kast batteripakken i søpla. Alle batteripakker bør returneres til Cantec for kontrollert avhending, eller leveres til kildesortering.

VENNLIGST MERK

Alle funksjonene osv beskrevet i dette dokumentet er demonstrert som en del av den innledende opplæringen. Ytterligere hjelp er tilgjengelig fra Cantec AS (se adresse og telefonnummer på andre siden av dette dokumentet).

DRIFTS-/LAGRINGSMILJØ

Temperatur:	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Luftfuktighet:	30% to 75% (non-condensing)
Høyde:	0m to 3,000m

VEKT OG FYSISKE MÅL:

Bredde:	190mm
Høyde:	100mm
Lengde:	45mm
Vekt:	539 grammes

CANTEC

- helping people