

IR-12S Mini



Brukerveiledning

IR-12S Mini



IR-sender 12S Mini: HMS art. nr.: 029139

Best. nr.: 2204012

INNHOLD

IR-12S Mini.....	1
Beskrivelse.....	2
Funksjon	2
Kanalinnstilling.....	2
Batteri	2

Beskrivelse

IR-12S Mini håndsender er en 12-kanals IR-sender som innvendig er omkopplbar mellom 15 forskjellige kanalgrupper på 12 kanaler hver. IR-12S Mini er en del av "Gewa Smart House" konseptet og kan derfor anvendes sammen med alle disse produktene.

Funksjon


Når senderen aktiveres, sendes IR-signaler fra senderen til IR-mottageren som deretter aktiveres. Ved innendørs bruk behøver senderen normalt ikke rettes mot mottageren, men utendørs eller ved lange avstander må senderen rettes mot mottageren. IR-signaler begrenses av vegger og faste materialer. Rekkevidden er 15-20 m avhengig av lysforholdene. En indikeringslampe ved tast 9 på senderen gir pulserende lys når IR-sending skjer.

Kanalinnstilling

Innstilling av kanaler gjøres på kretskortet over batteriet ved at man lodder eller fjerner loddetinn mellom loddepunktene. Se skisse og IR-tabell. 15 forskjellige grupper, hver på 12 kanaler, kan stilles inn. Senderen er innstilt på kanal 16-27 ved levering. Det eldre GewaLink området ligger mellom 16-31.

Batteri

Senderen får strøm fra et 6V Alkaline batteri (4LR44). Det er viktig at batteriet er av Alkaline type for å få maksimal sendeffekt og unngå batteri lekkasje. Kontroller nøye at polariteten blir korrekt ved montering av batteriet. Når indikeringslampen slukker, må batteriet skiftes.

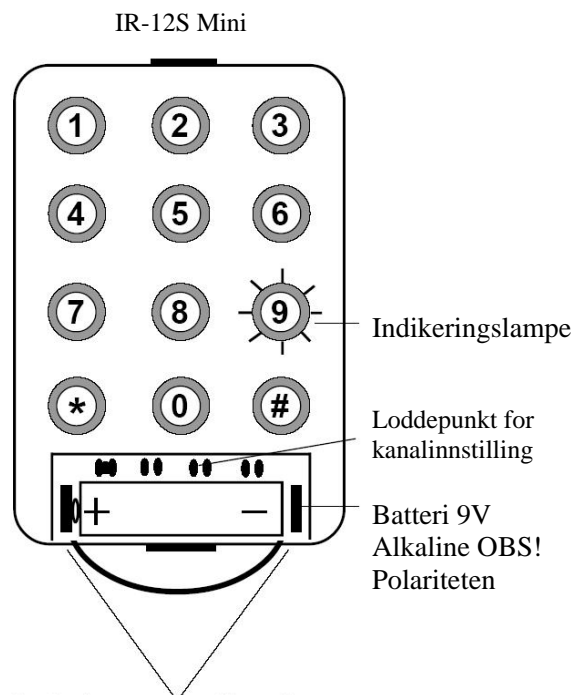

Åpne batteriluken med et lite skrujern ved å vri skrujernet i de to slissene som er ved senderens nøkkelringfeste.

		Loddepunkter	Kanalgrupper	Loddepunkter	Kanalgrupper
Eldre GewaLink område		00 00 00 00	00-11	00 00 00 00	32-43
		00 00 00 00	04-15	00 00 00 00	36-47
		00 00 00 00	08-19	00 00 00 00	40-51
		00 00 00 00	12-23	00 00 00 00	44-53
		00 00 00 00	16-27	00 00 00 00	48-59
		00 00 00 00	20-31	00 00 00 00	52-63
		00 00 00 00	24-35	00 00 00 00	56-67
		00 00 00 00	28-39		



Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no