

**CANTEC**

- helping people

# Timstock

## Visuellt tidshjelpmiddel



*Ny versjon* av vår velkjente Timstock. Våre visuelle hjelpemidler har gjennomgått en rekke forbedringer og oppdateringer.

*Fjerde generasjon* av Timstocken er nå klar til å gå inn på markedet.

Produsent av svenske kvalitetsprodukter for offentlige miljøer siden 1906

**Vi har all tid for deg**






Westerstrands Timstock visualiserer og gjør det lettere å forstå det abstrakte tidsbegrepet. Når tiden går, slukkes diodene i tidslinjen én etter én til tiden er ute og timeren lyder. Tidslinjen illustrerer begrepene tid som NÅR eller HVOR LENGE daglige rutiner og aktiviteter skal finne sted. Regelmessig bruk av loggen kan hjelpe deg med å utvikle oppfatningen av tid og redusere stress og frustrasjon i hverdagen.

## Beskrivelse

Produktet er utviklet i samarbeid med forskere som spesialiserer seg på tekniske hjelpemidler. Timstock finnes ni forskjellige versjoner som dekker tidsperioder fra 2 minutter til 8 timer. Hver Timstockversjon har 4 forhåndsprogrammerte tidsperioder å velge mellom. Se alle varianter på siste side. Alle varianter har gummierte hjørner for ekstra støtdemping og beskyttelse mot å skli.

Leveransen inkluderer halsbånd og bruksanvisning. Timeren drives av to AA-batterier. Batterier inkludert i leveransen. Disse rekker til ca 60 timers bruk før de må byttes. Stokken er støv- og vanntett og kan brukes innendørs, utendørs og i dusjen. Dersom stokken brukes til bading, er det også som tilleggsmateriale vår beskyttelsespose som inneholder en flytepute. Bruk av beskyttelseskofferten gjør at Timstock flyter.

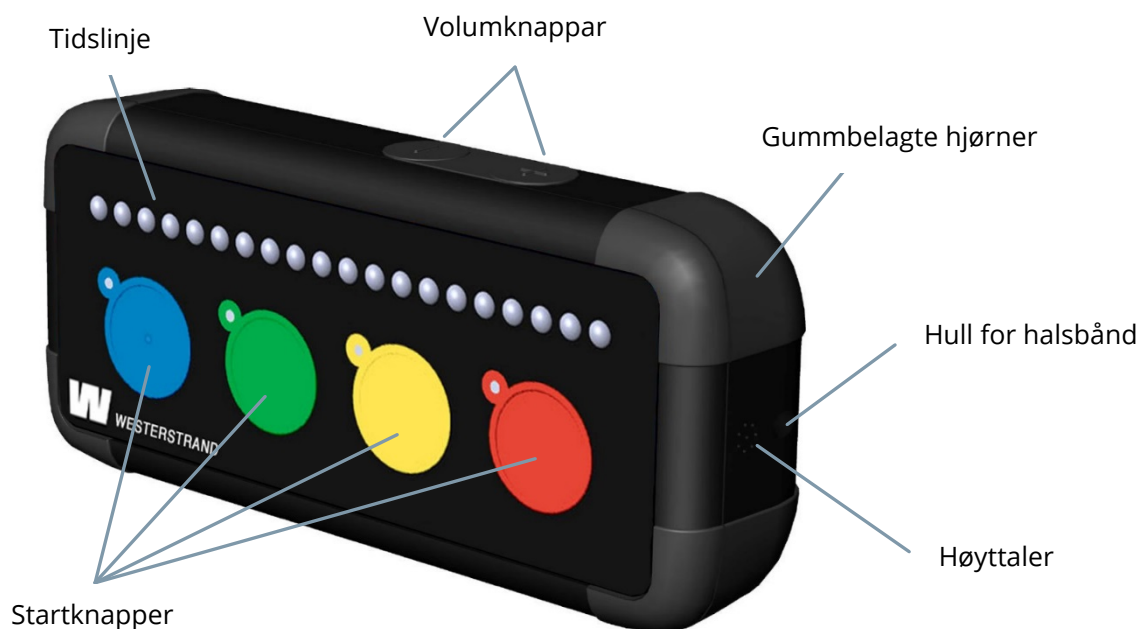



## Tekniske spesifikasjoner

<b>Dimensjoner</b>	105x47x28 mm
<b>Vekt</b>	75,2 g (eks. batterier)
	121 g (inkl. batterier)
<b>Strømkilde</b>	2 stk. 1,5V R6 / AA-batterier
<b>Omgivelsestemperatur</b>	-10°C till +40°C
<b>IP-grad</b>	IP67 (støv- og vanntett)

## Funksjon

Ved å trykke på en av startknappene (rød, gul, grønn eller blå) med valg av gjeldende tidsperiodenummer som tilsvarer ønsket tid, lyser antallet lysdioder som startknappen representerer og nedtellingen starter. Ved siden av hver startknapp er det en liten diode som lyser for å vise valgt tid. Starttiden kan slettes ved å trykke og holde den røde og blå startknappen samtidig i to sekunder og deretter slippe. Da kan en ny tid startes.

Nedtellingen visualiseres av en serie røde lysdioder som slukker, én etter én, etter hvert som tiden går. For å indikere at den valgte tiden har gått, signaliserer timeren med blinkende dioder, piping og vibrasjon. Displayet varer i noen sekunder, men kan slås av ved å trykke på en av startknappene. Lydnivået reguleres enkelt via + og - knappene på øvre langside av Timstock.

## Oversikt over de ulike utgavene

Artikelnummer	Versjon	
119628-02	8 min	
119622-02	20 min	  
119622-12	20 min utan siffror	
119622-22	20 min stående	
119620-02	60 min	 
119620-12	60 min utan siffror	
119623-02	80 min	 
119623-12	80 min utan siffror	
119630-02	8 tim	

# Produsent av svenske kvalitetsprodukter siden 1906



- helping people

## PRODUSENT

### Westerstrand Urfabrik AB

Verkstadsgatan 1  
545 31 Töreboda

[info@westerstrand.se](mailto:info@westerstrand.se)

0506-480 00

[www.westerstrand.se](http://www.westerstrand.se)

[Westerstrand Urfabrik AB](#)  
[Tid- & Resultatanläggningar](#)

Westerstrand Urfabrik AB



## DISTRIBUTØR I NORGE

### Cantec AS

Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR,  
postboks 626, 1411 KOLBOTN

[post@cantec.no](mailto:post@cantec.no)

66 99 60 00

[www.cantec.no](http://www.cantec.no)

[Cantec AS](#)

Timstock-gen4-Norsk