



Univox® AutoLoop 2.0

Helautomatisk teleslyngeforsterker for TV, musikk og mikrofon

Bruksanvisning



Univox® AutoLoop 2.0



romslynge



stoffslynge



teleslyngepute

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

Innhold

Introduksjon.....	3
Oversikt.....	3
Tilkobling til lydkilder.....	4
Koble til lydkilder	4
Koble til din TV	4
Koble til teleslyngen.....	4
Koble til romslynge	4
Koble til teleslyngematte eller stoffslyge	5
Innkobling av nettadapter.....	5
Innstillinger	5
Vedlikehold	5
Sikkerhetsforskrifter/ garanti.....	5
Feilsøking	6
Service	6
Teknisk informasjon	6
Miljø og gjenvinning	6
Tilbehør	7

Introduksjon

Takk for at du har valgt et Univox®-produkt. V håper at du kommer til å bli fornøyd med det.

Univox AutoLoop 2.0 er en helautomatisk teleslyngeforsterker for trådløs lytting via ditt høreapparat. Koble til din TV, Stereo, MP3, mikrofon eller annen lydkilde til AutoLoop:s 3,5mm kontakt.


forpakningen inneholder en teleslyngeforsterker med nettadapter, samt den teleslyngeløsning som du har valgt, se bildene på fremsiden. andre tilbehør til dette produkt finnes listet i avsnittet tilbehør.

Vennligst les denne bruksanvisning før du installerer produktet. Samtlige Univox® teleslyngeforsterkere har høy slyngestrømkapasitet noe som gjør produktet kraftfull og pålitelig for å oppfylle den internasjonale standarden for slyngesystemer, IEC 60118-4.

oversikt



Indikator for lydaktivitet på teleslyngen og nivåkontroll er plassert under forsterkeren.

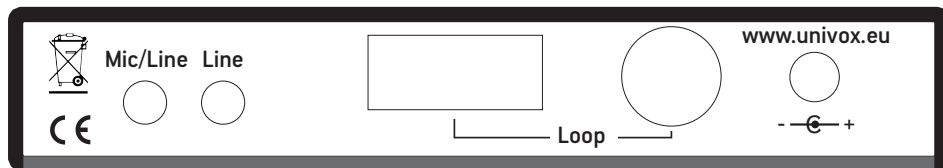

lydkilde 3,5mm ingånger

romslynge

teleslyngepute/
stoffslynge

nettadapter

tilkobling til lydkilder

koble til lydkilder

koble lydkilden til en av de to 3,5mm-inngangen på forsterkerens bakside.

- benytt først den venstre inngangen markert "Mic/Line" for mikrofoner.
- Øvrige lydkilder kobles først til den høyre inngangen merket "Line".
- Om du har to mikrofoner eller to andre lydkilder, kobles den andre lydkilden til den ledige inngangen.

Noter

Om du er usikker på eller misfornøyd med lyd kvaliteten, forsøk å koble din lydkilde til den andre inngangen noe som kan forbedre resultatet for din lydkilde. Utrustningen tar ikke skade av at du gjør dette. benytt en adapter om din lydkilde mangler en 3,5mm-kontakt.

Koble til din TV

når forsterkeren kobles til en TV, kan en lett forvrengning oppstå mellom lyden i TVns høyttaler og lydsignalene från TVns lydutgang, for å unngå den ekkoeffekt som kan oppstå, kan du trenge å forsinke lyden i teleslyngeforsterkeren for å få den til å passe med lyden som spilles i TVens høyttaler. Dette kan gjøres gjennom å benytte en Univox® TV Sync. koble TV:n til TV Sync 3,5mm-inngang eller SCART-kontakt. koble så TV Sync 3,5mm-kontakt til AutoLoop 3,5mm-inngang. Følg så instruksjonene som leveres med TV Sync.

koble in teleslyngen

koble in romslynge

Rolla ut slingkabeln (0,75mm²) rundt bruksområdet. fest kabelen i gulv- eller taknivå (ca 2,4m). Med romslyngen leveres 50st kabelclips for å feste kabelen, f.eks. over gulvlisten. Du kan også feste teleslyngen på annen måte.

koble kabelens ender til forsterkerens slingterminal, vilken er den venstre kopplingen på forsterkerens bakside merket "Loop".

Koble in teleslyngepute eller stoffslynge

plasser teleslyngeputen på den plass der brukeren vil sitte – på eller under stol-/sofaputen. stoffslyngen plasseres rundt sofaen på gulvet, for eksempel under et teppe. Plasser kabelen slik at ingen snubler eller festes i den. Koble teleslyngeputen/sofaslyngens DIN-kobling til forsterkerens DIN-kontakt, den høyre koblingen på forsterkerens bakside merket "Loop".


Tilkobling av nettadapter

koble til ledningen til kontakten på forsterkerens bakside markert - \underline{C} +. Koble så strømadapteret til eluttaket. ●

Innstillinger

Univox® AutoLoop 2.0 er helt automatisk, ingen innstillinger kreves.

Om du opplever at lyden i teleslyngen er for høy, kan du minske volumet i to steg via

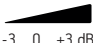merket for nivåkontroll  på produktets underside. Fabrikkinnstilling er +3dB.

Vedlikehold

Hånder produktet med forsiktighet for å forlenge livstiden.

Monter ikke produktet der den utsettes for regn, vann eller fuktige omgivelser samt sterkt sollys/varme.

Sikkerhetsforskrifter/garanti

Merk at produktgarantien ikke omfatter feil som har oppstått gjennom inngrep i produktet, uforsiktighet, feilaktig tilkobling/montering eller vedlikehold.

Feilsøking

Om teleslyngeforsterkeren ikke fungerer tilfredsstillende, kontroller følgende:

- forsikre deg om at ditt høreapparat er satt i T-position.
- kontroller at strømadapteret er ordentlig koblet til eluttaket samt til forsterkeren.
- Lyser aktivitetsindikatoren? Om ikke, kontroller at en signalkilde er koblet til forsterkeren samt at en lydssignal spilles. Fortsett til avsnittet Service om aktivitetsindikatoren fremdeles ikke lyser.
- Om aktivitetsindikatoren lyser og du fremdeles ikke hører noe i høreapparatet, fungerer ikke slyngeputen/stoffslynge/romslynge. kontroller tilkoblingen. Om dette ikke hjelper, er det sannsynligvis et brudd på slyngeputen/stoffslynge/romslynge. Følg instruksjonene i avsnittet Service.

Service

Om teleslyngeforsterkeren tross feilsøking ikke fungerer bør du overlate den til utsalgsstedet.

Teknisk informasjon

for fullstendige opplysninger henviser vi til datablad/brosjyre og CE-certifikat som kan lastes ned på www.cantec.no.

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt utsalgsstedet eller Cantec AS på kontakt@cantec.no.

Miljø og gjenvinning

Kast brukt produkt/batterier etter gjeldende miljøforskrifter.

Om du følger dette medvirker du til et bedre miljø.



tilbehør

Art nr	Beskrivelse
283002	teleslyngepute 400x400x5mm, 10m kabel
283210	skjøteledning, 10m til teleslyngepute/stoffslynge,
283220	stoffslynge 8m slynge, 10m kabel
283240	romslynge, 30m rulle, inkl. 50 clips
203060	TV Sync, lydsynkronisering for TV
281015	Lydkabel, 3,5mm hane til 2xRCA, 1,5m kabel
241205	Håndholdt mikrofon NX-9, XLR kontakt, kabel ingår ikke
281016	Mikrofonkabel til NX-9, XLR anslutning til 3,5mm kontakt, 2,5m kabel
581050	Myggmikrofon LM-90A, 3,5mm kontakt, 1,1 m kabel
241501	Konferansmikrofon 13T, 3,5mm kontakt, 3m kabel
241602	Svanhalsmikrofon M-2, 3,5mm kontakt, 1,5m kabel

Univox[©] AutoLoop 2.0

Art nr	Beskrivelse
201500	Univox AutoLoop 2.0, Automatisk teleslyngeforsterker
201500P/S/R	Univox AutoLoop 2.0, lydkabel og valg av teleslyngepute/sofaslynge/ romslynge. Eks. 201500P for teleslyngepute.

Selger

Bo Edin AB er en verdensledende innovatør og leverandør av høykvalitets hørselsprodukter. I 1969 lanserte vi verdens første teleslyngeforsterker med true constant current under varemerket Univox®. Vårt mål er å, med en høy servicegrad tilby våre kunder høykvalitets hørelseprodukter gjennom stadig å søke nye veier for å få frem forbedrede produkter ut fra både bruker- og miljøhensyn.

Bo Edin AB	Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö	Tel 08-767 18 18	E-post info@edin.se
Besök	Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö	Fax 08-767 18 20	Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

