


Monteringsanvisning

UniVox® 2A+

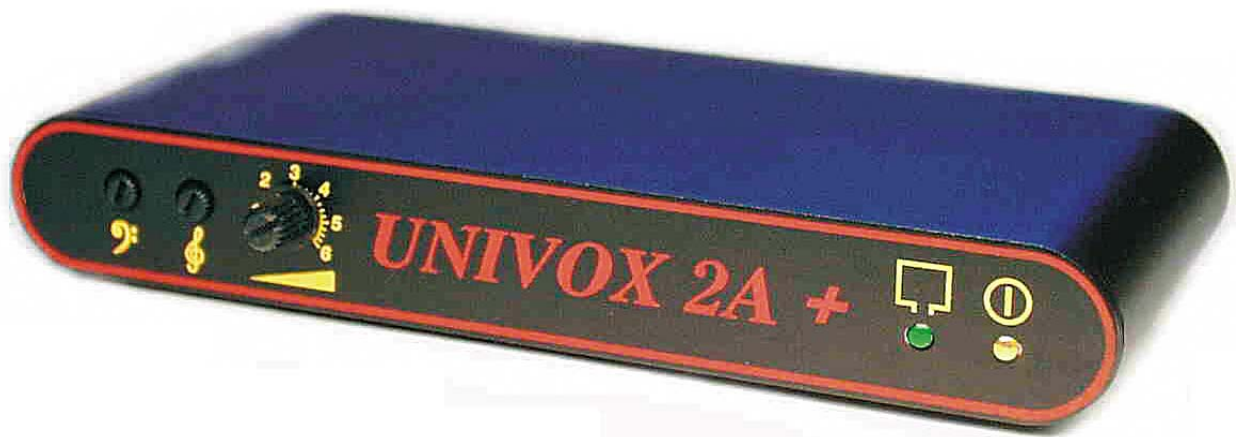

UniVox® 2A+:

Bestillingsnr.: 1104106


GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no



Monteringsanvisning *UniVox 2A+*

1. Plassering

Forsterkeren plasseres på et egnet sted, f.eks. ovenpå, under eller på siden av TV / Radio.
Benytt gummiføttene eller borrelåsen.

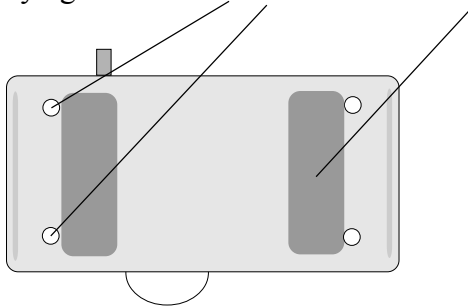


Om det brukes mikrofon, bør den plasseres på høyttalerfronten ved hjelp av borrelåsen (allerede montert på mikrofonen).

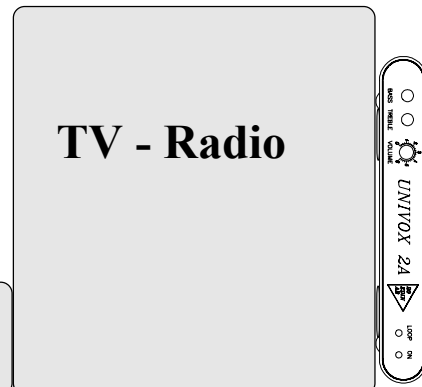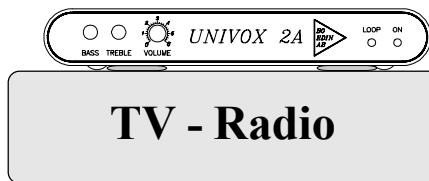

2. Tilkopling / innkopling

bakside

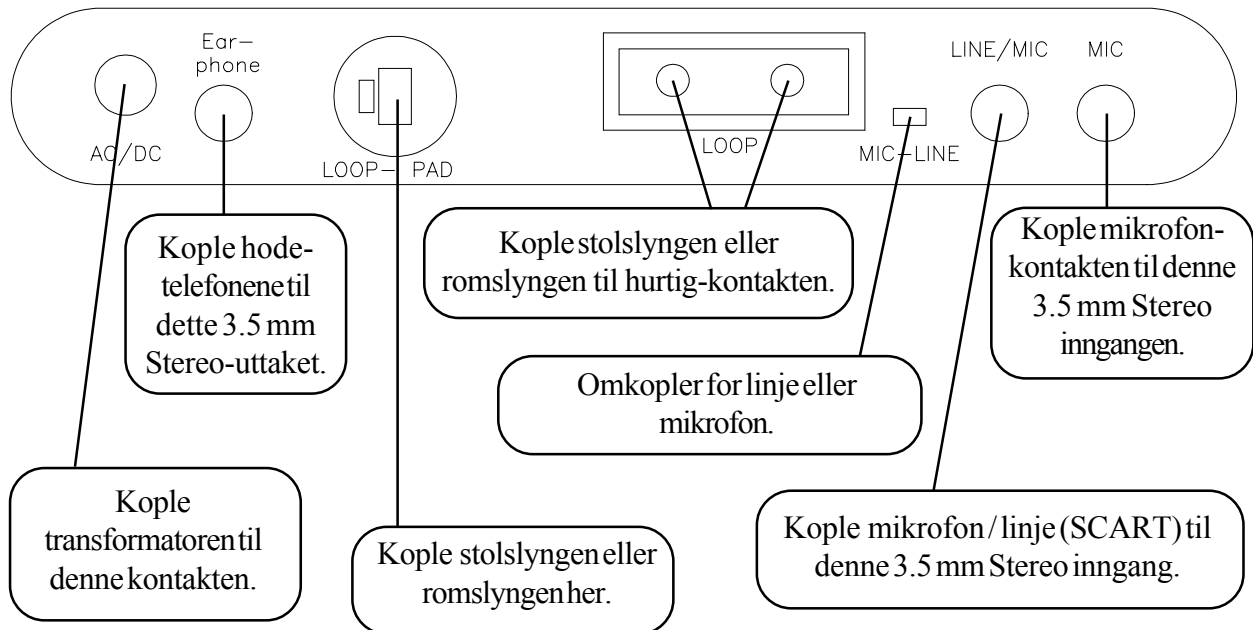

SIDE 1




Gewa AS
Postboks 626
Trollåsveien 8
N-1411 KOLBOTN

Tlf.: (+47) 6699 6000
Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: info@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no

3. Brukerveiledning / justering

Når tilkøplingene er gjort, skal "ON"-lampen lyse. Volum-kontrollen justeres slik at en oppnår et tilfredsstillende nivå. Er lyd kvaliteten dårlig, står volum-kontrollen for høyt. Juster bare unntaksvis bass- og diskant-kontrollene for en tilpasset frekvens-gjengivning.

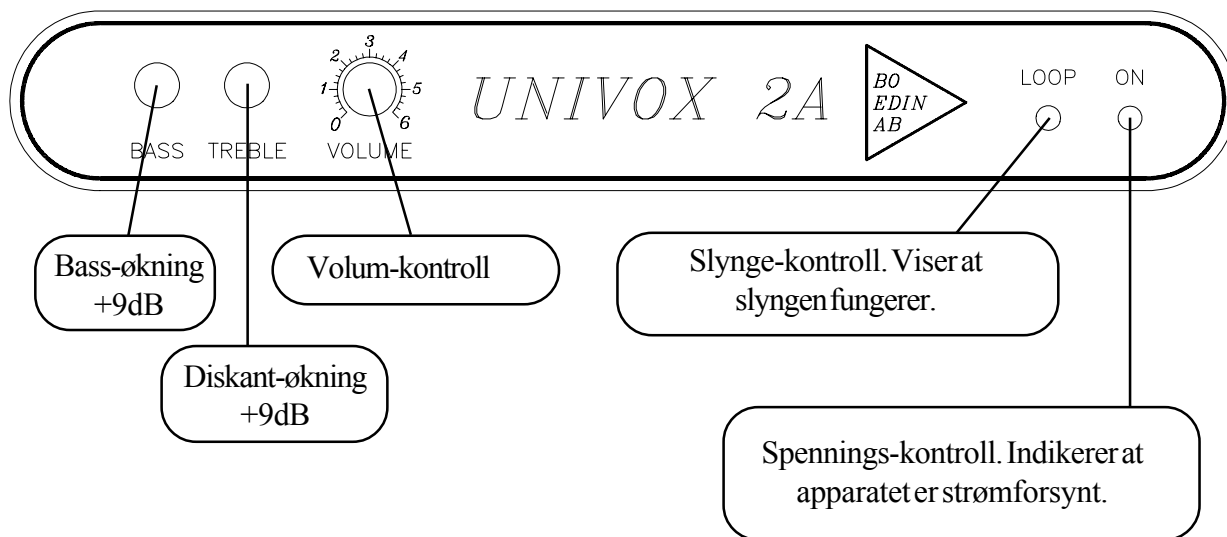

Om apparatet ikke fungerer tilfredsstillende, kontrolleres følgende:

- Lyser "ON"-lampen? Hvis ikke, kontroller at transformatoren er koplet til vegguttaket og forsterkeren.

- Lyser "LOOP"-lampen? At lampen lyser er en garanti for at alt fungerer. Hvis ikke, kontroller at stolslyngen/romslyngen er koplet til. Disse kan også være ødelagte. Kontroller også de andre tilkøplingene. OBS! Når riktig tilpassede høretelefoner benyttes, skal ikke "LOOP"-lampen lyse.

- "LOOP"-lampen lyser, men høreapparatet er stille.

Kontroller at høreapparatets omkøpler "M-T-O" står i posisjon "T" eller "MT". Kontroller også batteriene i høreapparatet.

- Dårlig lyd kvalitet? Juster volum, bass eller diskantkontroll. Bass- eller diskantøkning er vanligvis ikke nødvendig.