


KVALITET PÅ DET DU HØRER

Liten, avansert og bruker-
vennlig slyngeforsterker,
automatisk omkopling mellom
slynge eller høretelefon, med
funksjonsindikering.

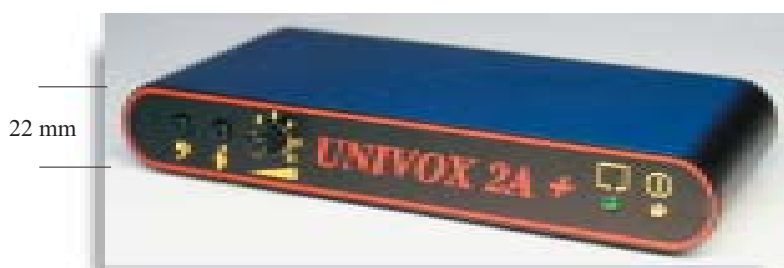

UniVox® 2A+
NY VERSJON

NÅ MED FORBEDRET DATA

UniVox®2A+ er en diskret, slyngeforsterker som er lett å plassere (bare 22 mm høy). Kan enkelt tilpasses stolslynge eller høretelefon. Fungerer utmerket i bil/campingvogn med strømforsyning fra sigaretttenner-uttaket. Se ekstra tilbehør.

Fleksibilitet og brukervennlighet sammen med høy kvalitet er prioriterte egenskaper hos UniVox® 2A+. En nyutviklet 2-steps AGC forhindrer lange frafall etter høye inn-nivåer, et vanlig problem for ordinære 1-kanals AGC. For å forenkle ytterligere for

brukeren finnes:

- En grønn lysdiode til funksjonskontroll av slyngen/puten.
- En gul lysdiode som viser at apparatet er koplet til vegguttaket.
- Støtsikker mikrofon som tilbehør.

Tre separate utganger:

Stolslynge: DIN-kontakt
Slynge: Hurtigkopling
Høretelefon: 3,5 mm Stereojack

- Ekstremt tynn, 22 mm.
- Kortslutningssikre utganger.

- 1 stk Mikrofon/Linjeinngang. (Omkoplingsbar).
- 1 stk Mikrofoninngang.
- Forbedret 2-kanals AGC.
- Mindre forvrengning (<0.5 %)
- Automatisk omkopling når UniVox®2A+ koples til puteslynge eller høretelefon.
- Bass- og diskantkontroller.
- Enkle symboler på panelene viser de forskjellige funksjonene.
- Volumkontrollen er avtagbar.
- Kan drive en mindre romslynge.



Gewa AS
Postboks 626
Trollåsveien 8
N-1411 KOLBOTN

Tlf.: (+47) 66 99 60 00
Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: info@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no

Tekniske data for UniVox® 2A+

Strømforsyning:		12V AC/20 VA fra transformator som koples til 230-240V AC 50Hz, 2-25W (inkludert transformator)
Dekningsområde:		12 - 14 m ² romslynge i hht. IEC 118-4
Slyngeutgang:	<i>Maks strøm</i>	3.7App, utgangen er kortslutningssikker. Til puteslynge eller romslynge.
	<i>Maks spenning</i>	5V RMS (åpen utgang)
	<i>Frekvensomfang</i>	100 - 5000 Hz (±3dB)
	<i>Forvrengning</i>	<1%
	<i>Tilkopling</i>	Tilkoples via rekkeklemme eller 2-pol-DIN-hunplugg.
Høretelefonutgang		Over 4Ω, monokoplet. Sluttsteget kopler automatisk om til spenningsmotkopling for korrekt frekvensgjengivning når impedansen overstiger ca. 5 Ω.
	<i>Tilkopling</i>	3.5mm-jack.
Innganger:	1. Mikrofon	10mV/5kΩ, med phantommatting for elektretmikrofoner, 3.5mm-jack.
	2. Mikrofon/Linje	Omkoplingsbar inngang. I mikrofonstilling: 10mV/5kΩ, med phantommatting for elektretmikrofoner. I linjestilling: 30mV-10V/10kΩ, 3.5mm-jack.
2-kanals-AGC:	<i>Reguleringsområde</i>	>70dB
	<i>Innsvingningstid</i>	2-500ms
	<i>Utsvingningstid</i>	0.5-20dB/s
Regulering/kontroll	<i>Basskontroll</i>	0 - +12dB, potmeter i frontpanelet.
	<i>Diskantkontroll</i>	0 - +9dB, potmeter i frontpanelet.
	<i>Volumkontroll</i>	Gradert 0-6, potmeter i frontpanelet.
Indikeringer	<i>Strømtilkopling</i>	Gul lysdiode i frontpanelet.
	<i>Slyngestrøm</i>	Grønn lysdiode i frontpanelet.
Annet:	<i>Dimensjoner</i>	140x22x65mm (LxHxD)
	<i>Vekt</i>	0.3 kg
	<i>Farge</i>	Svart Al-profil, rødt/gult trykk på frontpanelet, hvitt på bakre panelet.
	<i>Artikkelnummer</i>	1104108, UniVox® 2A+ inkl. transformator og kartong

Mrk.:	2-kanals-AGC	Tidene er avhengige av hvilken kanal som er aktiv.
	Om TV'n mangler Scartutgang	Benytt vår mikrofon art. nr. 1104141, som festes på høyttalerfronten.

Anbefalte slyngedata:

Slyngeområde i m ²	Kabelareal 1-tørnsslynge	Kabelareal 2-tørnsslynge
10-35 m ²	>= 1 mm ²	>= 1 mm ² *)
< 10 m ²	>= 0,75 mm ²	>= 1 mm ² *)

* = For best mulig resultat

Art. nr. Betegnelse

1104147 Enkel scartkontakt med 3.5mm-kontakt (standard).

1104151 AutoScart, kopler riktig lydkanal til hjelpemiddelet, med 3.5mm-kontakt.

1104141 Mikrofon med borrelås, med 3.5mm-kontakt (standard).



1104147
Scartkontakt



1104151
AutoScart



Art.nr. 1104141, mikrofon med 3.5mm-propp. Festes på høyttalerfronten.