


UniVox 2A+

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning



UniVox 2A+

Teleslynge for lite rom eller puteslynge.

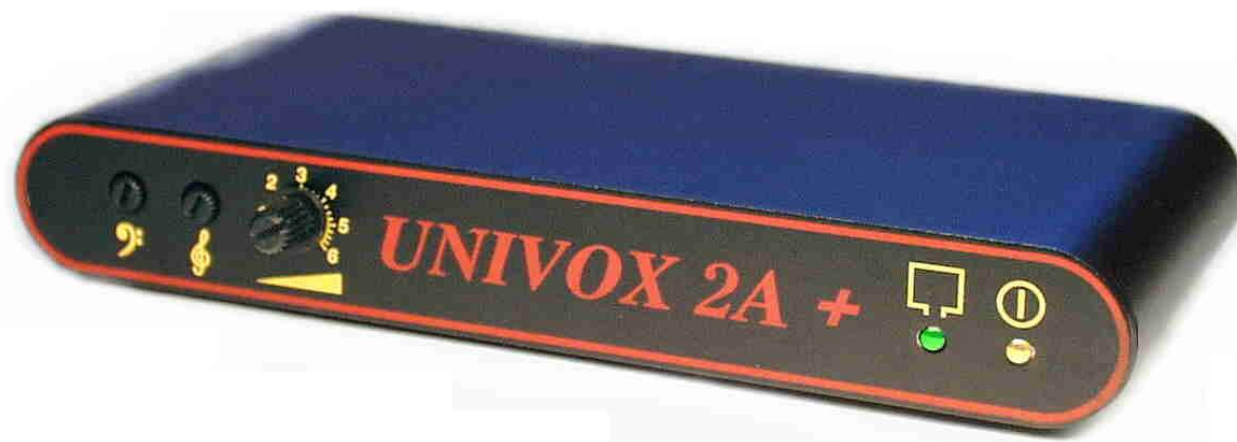

UniVox 2A+

Art. nr.: 1104106

INNHOLD

UniVox 2A+.....	1
Generelt om UniVox 2A+	2
Plassering	2
Tilkopling av signal	2
Tilkopling av teleslynge	2
Tilkopling av driftsspenning	2
Funksjonskontroll	2
Tilkopling/innkopling.....	3
Plassering	4

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Generelt om UniVox 2A+

UniVox 2A+ brukes enten med puteslynge eller med slyngetråd lagt rundt det området som ønsker dekket. Vær oppmerksom på maks området på 35 kvadratmeter.

Hvis forsterkeren skal installeres fast på ett sted, må IEC 60118-4 følges ved installering.

Metoden er spesifisert nærmere på www.gewa.no.

Høreapparatet settes i T- eller MT-stilling ved bruk av slyngen.

Plassering

Teleslyngeforsterkeren plasseres på et egnet sted i nærheten av de kildene som skal lyttes til. Den kan enten plasseres oppå en flate eller med borrelås på siden av TV/radio eller på veggen.

Tilkopling av signal

Linjesignal fra ønsket signalkilde (TV/radio/MP3 osv.) koples til inngangen merket LINE/MIC ved hjelp av kabel med 3.5 mm Jack og velgeren merket MIC-LINE settes i stilling LINE. Hvis TV/radio ikke har linjeutgang/Scart, festes den medfølgende mikrofonen foran på høyttaleren.

Mikrofon koples til inngangen merket MIC med 3.5 mm Jack. Skal det benyttes 2 mikrofoner, koples den andre til inngangen merket LINE/MIC og MIC-LINE velgeren settes i stilling MIC.

Skal det koples til flere enn to kilder, må det benyttes en signalvelger.

PS! På grunn av tekniske egenskaper med Scartkontakten kan det av og til være nødvendig med en automatisk scartomkopler av typen Autoscart (Gewa art. nr. 1104151), den sørger for at det kommer riktig lyd fra TV til teleslyngeforsterkeren.

Tilkopling av teleslynge

Puteslyngen koples til utgangen merket LOOP-PAD, eventuelt til LOOP hvis det ikke er riktig kontakt på puteslyngen. Brukes slyngekabel/romslynge, koples den til kontakten merket LOOP. Kablen må være lagt rundt det området som ønskes dekket, følg IEC 60118-4 ved fast installasjon.

Tilkopling av driftsspennning



Kople transformatoren til kontakt merket AC/DC. Ved bruk i bil eller på steder der det er 12V anlegg, benyttes en overgang (Gewa art. nr. 1104210) med +(pluss) i senter.

Funksjonskontroll

Nå skal ON lampen lyse og LOOP lampen hvis det er signal inn på teleslyngeforsterkeren.

Det bør nå være lyd i høreapparatet, hvis ikke sjekk at det er på og at det står i T- eller MT-stilling. Er lyden svak eller har dårlig kvalitet, justeres volum og bass og diskant (TREBLE) slik at lyden blir bra. Er det ikke mulig å få god lyd, så sjekk lyden fra signalkilden.


Tilkopling/innkopling

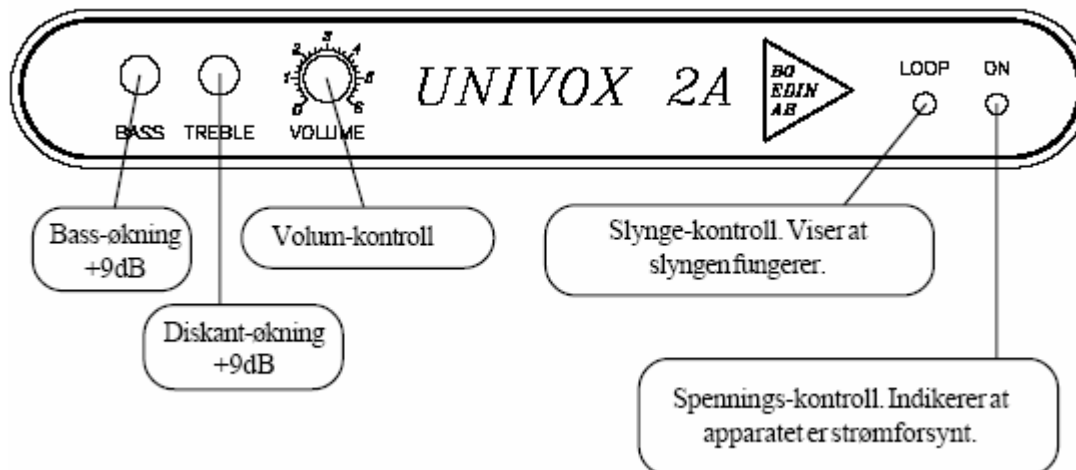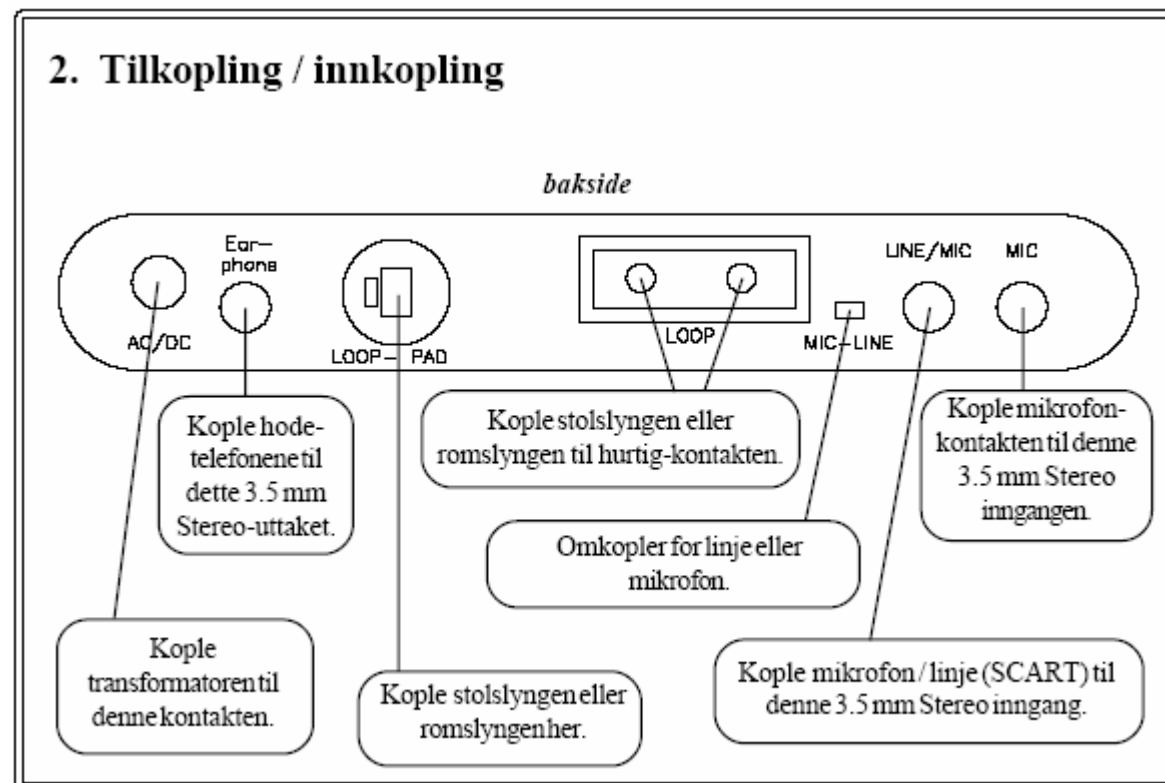

Plassering

1. Plassering

Forsterkeren plasseres på et egnet sted, f.eks. ovenpå, under eller på siden av TV / Radio.
Benytt gummifottene eller borrelåsen.

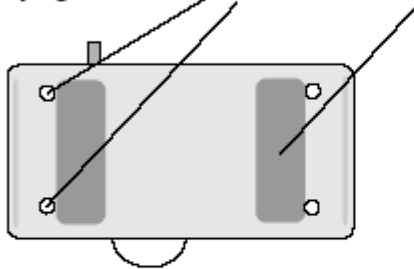

Om det brukes mikrofon, bør den plasseres på høyttalerfronten ved hjelp av borrelåsen (allerede montert på mikrofonen).

