

UniVox 1A

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

GEWA

- helping people

UniVox 1A

Teleslynge for pute eller headset



UniVox 1A

Art. nr.: 1104109

UniVox 1A	1
Generelt om UniVox 1A	2
Tilkopling generelt	2
Tilkopling til TV	2
Tilkopling til TV med DVD/Video/Satellitt osv.	2
Tilkopling til PC	2
Tilkopling til radio og lydanlegg	2
Tilkopling til utstyr uten linjeutgang	2
Plassering av teleslyngeputen	2
Justering av slyngen	3

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Generelt om UniVox 1A

UniVox 1A Brukes enten med puteslynge eller med headset. Høreapparatet skal settes i T- eller MT-stilling ved bruk med puteslynge. Forsterkeren tilkoples linjesignal fra enheten det skal lyttes til.

Tilkopling generelt

1A plugges rett i stikkontakten.

Inngangen på 1A er av typen Jack 3,5mm.

Utgang:2 pol Din Hun (Hodetelefon trenger overgang).

Tilkopling til TV

Benytt Scartkontakt eller annen linjeutgang hvis det passer bedre.

Tilkopling til TV med DVD/Video/Satellitt osv.

Benytt Scartkontakt eller annen linjeutgang hvis det passer bedre. På grunn av tekniske egenskaper ved Scartkontakten kan det oppstå problemer med å få riktig lyd på slyngen. Da bør det benyttes en automatisk lydvelger som plasseres mellom TV og andre signalkilder i en seriekopling . Vi har en slik automatisk lydvelger som heter AutoScart. Art. nr. 1104151.

Tilkopling til PC

Benytt linjeutgangen fra PC-en og kople til linjeinngangen på 1A ved hjelp av en Jack til Jack kabel med hankontakt i begge ender.

Tilkopling til radio og lydanlegg

Bruk linjeutgangen fra enheten og kopl til linjeinngangen på 1A ved hjelp av en kabel som passer i lydenheten og i teleslyngeforsterkeren.

Tilkopling til utstyr uten linjeutgang

Hvis utstyret som benyttes sammen med 1A ikke har linjeutgang kan det benyttes en mikrofon som monteres på høyttalergitteret. Mikrofonen som benyttes heter 13A med Art. nr. 1104141.

Plassering av teleslyngeputen

Puten legges i den stolen som ønskes benyttet. Kabelen legges slik at den er mest mulig skjult og slik at den ligger på en måte som gjør at den ikke blir snubletråd.

Justering av slyngen

Forsterkeren er forhåndsjustert til normalnivå. Hvis dette ikke passer, så brukes den medfølgende justeringspinnen eller et lite skrujern til å justere til ønsket nivå. Nivået kan variere fra lydkilde til lydkilde og fra person til person.

