

CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

GEWA

- helping people

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe



CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117



GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Innholdsfortegnelse	side
<u>Innledning</u>	3
<u>Grunnleggende om CL600</u>	
Bildeoversikt	4-5
Display, symboler og menyer	6
Kople til telefonen, batterier	7-8
Montere telefonen på vegg	9
<u>Innstillinger</u>	
Stille inn ringesignal	10
Stille inn alarm- og ringesignal	10
Stille inn tone- og pulsvalg	11
Stille inn språk	11
Forskjellige tidsformater	12
Innstilling av tid og dato	13
Justering av kontrast i displayet	13
Automatisk innstilling av tekststørrelse i displayet	14
Automatisk avslutning av en samtale	14
Time break tilbakeringing - "R"-funksjon	15
Justering av utgående volum	15
<u>Bruk av telefonen</u>	
Volum- og tonekontroll	16
Svare på innkommende samtaler	17
Ringe en samtale	18
Handsfree	18-19
Tilbakeringing til siste oppringte nummer	20
Tilbakeringing til tidligere oppringte nummer	20
Slette tidligere oppringte nummer	21
Mutefunksjon	21
Knappene R, * og #	21
Lagre et telefonnummer i minnet (direkte-/hurtigvalg)	22
Hurtigvalg	22
<u>Telefonbok</u>	
Opprette en kontakt i telefonboken	23-24
Opprette en kontakt fra innkommende telefonsamtale	24
Ringe en kontakt i telefonboken	25
Slette en kontakt fra telefonboken	25
Endre en kontakt i telefonboken	26

Innholdsfortegnelse	side
<u>Avanserte funksjoner</u>	
Alarmfunksjon	27
Lagre et alarmnummer	27
Lagre en alarmmelding	28
Spille av en lagret alarmmelding	29
Bruke en alarmfunksjon	29
Beskrivelse av fjernkontrollen	30
Bytte batterier i fjernkontrollen	30
Bruk av nummervisning - innkommende samtaler	30-31
Bruk av nummervisning - ringe opp et nummer	32
Bruk av nummervisning - slette et nummer	32
Bruk av nummervisning - slette alle nummer	32
Samtale venter	33
Melding venter	34
<u>Tilbehør CL600</u>	
Vibrator	34
Headset	34
Halsslynge	34
Slyngekrok	34
<u>Annet</u>	
Stell og vedlikehold	35
Når telefonen ikke fungerer	35
Teknisk informasjon	35
Miljø	35

Innledning

Takk for at du valgte å kjøpe en CL 600 telefon. Vi håper du blir fornøyd.

Advarsel

Denne telefonen er spesialtilpasset personer med nedsatt hørsel og er utstyrt med en volumkontroll for individuelle innstillinger. Det er viktig at telefonen er stilt inn på det riktige nivået for den respektive bruker og at hver bruker kjenner til denne funksjonen.

OBS!

For å redusere risikoen for at telefonen blir ødelagt av lynnedslag bør den koples ut ved kraftig tordenvær.


Bildeoversikt



Bildeoversikt



Display, symboler og menyer

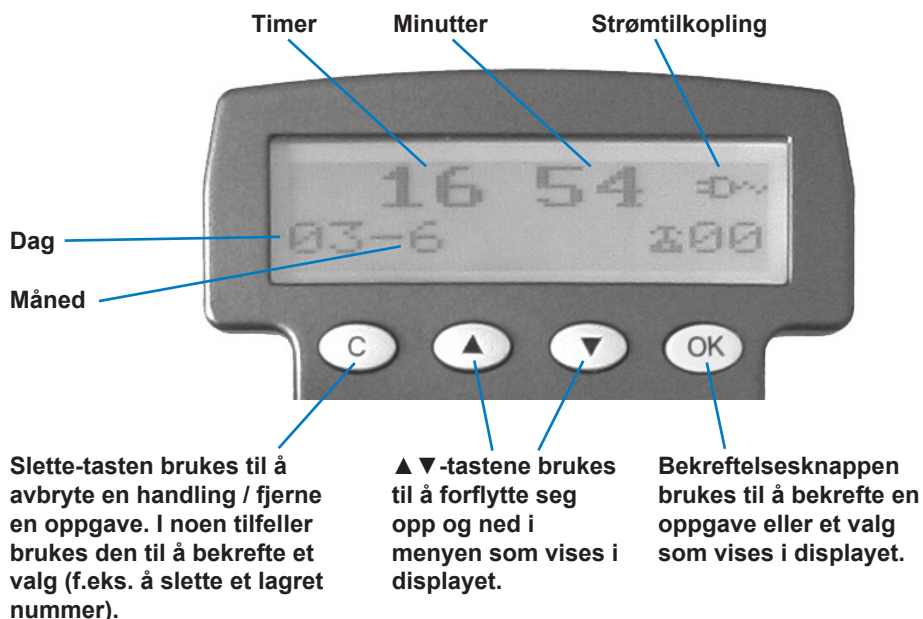

Når telefonen er koplet til telefon- og strømmettet, vises symboler i displayet som forenkler bruken av telefonen.



Batterinivået (symbolet vises hvis batterieliminatoren ikke er koplet til strømmettet eller ved strømbryt)




Tilkoplet til strømmettet



Minnelagring er nødvendig. OBS! Verifiser funksjonen.



Kontrast i displayet

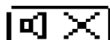

Mute-funksjonen er aktivert



Høytaleren er aktivert



Vises foran et telefonnummer som er registrert i nummeroversikten



Viser nye telefonnummer som registreres i nummeroversikten.

Kople til telefonen, batterier

- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Kast ikke batterier sammen med husholdningsavfallet, men kast dem i henhold til gjeldende miljøforskrifter.



1. Kople telefonrøret til telefonen.
2. Åpne batterilommen som finnes på undersiden av telefonen.
3. Plassere 4 blyfrie alkaliske batterier (AAA/LR03 1,5V). Batteriene er nødvendige som backup ved strømbrudd (for å beholde lagrede telefonnummer i minnet og ved bruk av telefonboken).

Ved strømbrudd eller dersom transformatoren ikke er tilkople, vises et batterisymbol i displayet. Dette symbolet vises også dersom batterinivået er lavt (fylt symbol = fulle batterier, tomt symbol = tomme batterier). **OBS!** Bruk ikke oppladbare batterier.


4. Sett tilbake lokket på batterilommen.
5. Kople telefonledningen til uttaket på telefonens bakside (se illustrasjon side 7) og kople den andre enden av ledningen til den medfølgende telefonkontakten. Kople deretter telefonledningen til telefonkontakten.
6. Kople telefonpluggen på batterieliminatoren til telefonen og deretter til el-uttaket. Bruk et el-uttak i nærheten av telefonen for å gjøre det lettere med en hurtig frakopling dersom det skulle oppstå problemer.

OBS!

Transformatoren må være tilkopleet for at alle telefonens funksjoner skal kunne brukes. Batterier er nødvendig som backup ved strømbrudd (se informasjon punkt 3 på forrige side).

Dersom transformatoren koples fra ved en feil og telefonen mangler batterier, eller hvis de er tomme, fungerer bare telefonenes basisfunksjoner, f.eks. å ringe og ta imot samtaler.

Montere telefonen på vegg

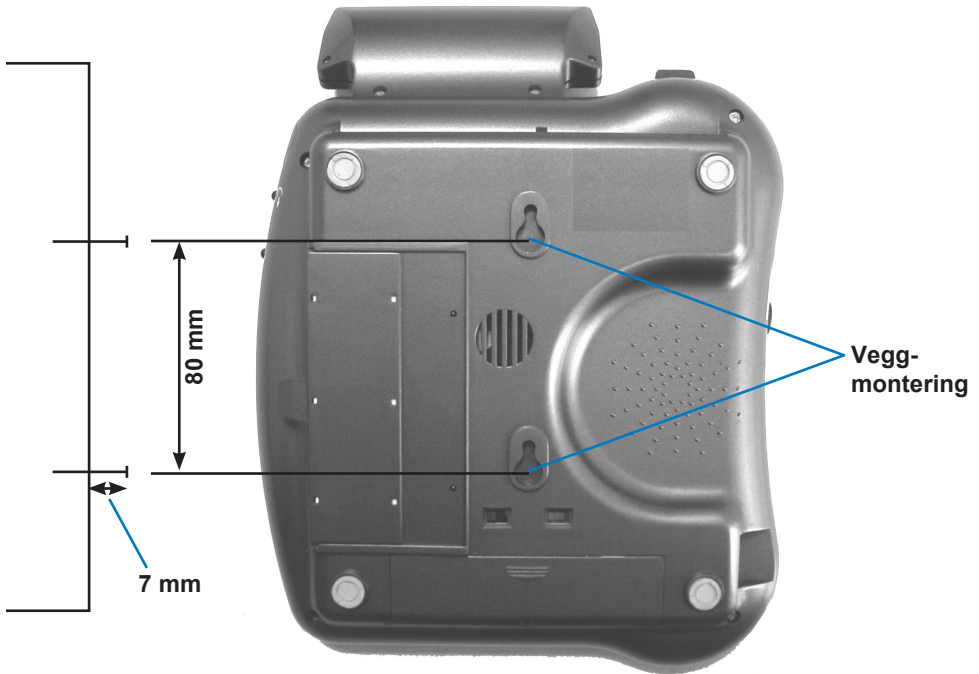

Skruene bør stikke ut 6-7 mm fra veggen. Heng opp telefonen på skruhodene og dra den forsiktig nedover for å hekte fast telefonen på veggen.



Ved veggmontert telefon - snu rørfestet for å forsikre deg om at røret henges opp sikkert.

Stille inn ringesignal

Ringesignalet (akustisk) kan endres til ønsket nivå ved å forandre på innstillingene ved hjelp av bryteren på telefonens høyre side (se illustrasjon side 5). Du kan velge mellom høy, lav eller avstengt:



Høyt ringesignal



Lavt ringesignal



Ikke noe ringesignal

Telefonen leveres med ringesignalet innstilt på høyt.

Hvis du ikke liker ringesignalet, kan du endre det ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på tasten
2. Bruk **▲▼** til du kommer till telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
4. Benytt **▲▼** for å stille inn ringesignalet ("STILL TONE").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Benytt **▲▼** og velg ett av ringesignalalternativene 1-4.
7. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte det alternativet du har valgt.
8. Det valgte signalet høres.
9. Trykk på tasten **C** tre ganger for å gå ut av menyen.

Stille inn alarm- og ringesignal

Alarm- og ringesignalet kan stilles inn i 3 kombinasjoner med hjelp av omkopleren på telefonens høyre side (se illustrasjon side 5).



Ringesignal og blitzlampe



Ringesignal og vibrator



Ringesignal, vibrator og blitzlampe

Stille inn tone- og pulsvalg

Telefonen leveres innstilt med tonevalg. Går det ikke an å ringe ut fra telefonen, så kan det hende at telefonsentralen din krever pulsvalg. Slik stiller du inn telefonen til pulsvalg. Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Bruk **▲▼** til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk **▲▼** for å velge tone-/pulsvalg ("DTMF/PULSE").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk **▲▼** og velg tone- eller pulsvalg ("DTMF"), ("PULSE").
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Velg språk

Det finnes 16 forskjellige språk å velge mellom (dansk, finsk, norsk, engelsk1, kinesisk, koreansk, gresk, australsk, tyrkisk, engelsk3, spansk, nederlandsk, fransk, tysk, polsk, svensk).

Velg språk ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Bruk **▲▼** til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk **▲▼** for å velge språk ("SET LANGUAGE").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk **▲▼** til du kommer til det språket du vil ha. Velg f.eks. "NORWAY" hvis du vil ha norsk.
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Forskjellige tidsformater – dato

Du kan velge mellom to typer datoformat; dag-måned eller måned-dag. Du endrer det ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Bruk   til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk   for å velge hvordan datoen skal vises ("DATO FORMAT").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk   for å velge dag-måned med 2 siffer ("DD-MM") eller måned-dag med 2 siffer ("MM-DD").
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Forskjellige tidsformater – tid

Du kan velge mellom to typer tidsformat: 12- eller 24-timersvisning. Endres ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Bruk   til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk   for å velge hvordan tiden skal vises ("TIDS FORMAT").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Velg mellom 12- eller 24-timersvisning ("12 TIMER"), ("24 TIMER").
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Hvis du velger 12-timersvisning, etterfølges klokkeslett FØR kl. 12.00 med "AM" og klokkeslett ETTER kl. 12.00 med "PM".

Innstilling av tid og dato

Tid og dato stilles inn i følgende rekkefølge; timer, minutter, dag, måned. Still inn tid og dato ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Bruk   for å velge å stille inn klokkeslett og dato ("STILL TID").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk   for å velge ønsket siffer og forflytte deg til neste siffer.
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte og komme til neste posisjon. Gjør som beskrevet i punkt 4 og 5 inntil ønsket tid og dato er stilt inn.
6. Trykk på knappen **C** én gang for å gå ut av menyen.

Justering av kontrast i displayet

Displayet har en bakgrunnsbelysning som stenges av automatisk 15 sekunder etter avsluttet aktivitet. Røret må være lagt på.

Kontrasten kan endres ved å gjøre som følger mens røret er lagt på:

1. Trykk på knappen .
2. Bruk   til du kommer till telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk   for å velge kontrast i displayet ("KONTRAST").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk   for å øke eller redusere kontrasten i displayet.
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte eller **C** for å gå ut av menyen.

Automatisk innstilling av tekststørrelse i displayet

Hvis denne funksjonen er aktivert, kan opptil 18 siffer i det nummeret du slår vises i displayet. Dersom funksjonen er deaktivert, vises bare 8 siffer i displayet. Telefonrøret må være lagt på.

Aktiver/deaktiver funksjonen ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Bruk **▲▼** til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Bruk **▲▼** for å velge tekststørrelse-funksjonen ("TEKST STØRR").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk **▲▼** og velg "TIL" eller "FRA" for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Automatisk avslutning av en samtale

Dersom denne funksjonen er aktivert, brytes samtalen automatisk etter 8 sekunder dersom linjen er opptatt. Aktiver/deaktiver funksjonen ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt **▲▼** til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Benytt **▲▼** for å velge automatisk brudd av samtale ("AUTO AVSLUTT").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk **▲▼** og velg "PÅ" eller "AV" for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Time break tilbakeringing - "R"-funksjonen


Kontroller at CL600 er korrekt innstilt. Telefonen leveres innstilt på 100 mS som er den korrekte verdien for Norge. I en del land benyttes 300 mS eller 600 mS.

Innstillingen endres ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret skal være lagt på.


1. Trykk på knappen 
2. Benytt   til du kommer til telefoninnstillinger ("OPPSETT").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Benytt   for å velge R-funksjonen ("VELG FLASH").
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Bruk   og velg ønsket alternativ ("FLASH100 mS"/"FLASH 300mS"/"FLASH600mS")
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
8. Trykk på knappen **C** to ganger for å gå ut av menyen.

Justering av utgående volum

Dersom du har svak stemme, eller den du prater med har vanskelig for å oppfatte hva du sier, kan du øke volumet. Volumet justeres med omkopplingsknappen som sitter på telefonens høyre side ved nedenforstående symbol (se side 5).

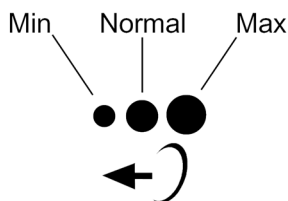

Volum- og tonekontroll

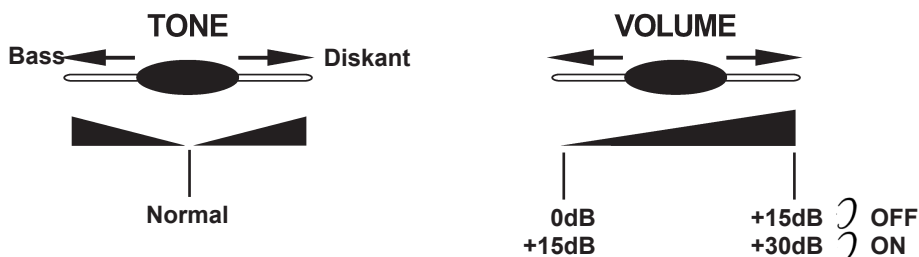

Aktivering av tone og volum under pågående samtale

Tasten for å aktivere eller deaktivere tone- og volumfunksjonen →  sitter oppe til høyre på telefonen (se illustrasjon side 4). Når den er aktivert, kan du justere tone- og volumknappen etter eget ønske (se illustrasjonene ovenfor).

Omkopleren på telefonens bakside

Når omkopleren  på telefonens bakside (se illustrasjon side 7) står i posisjon "ON", blir tone- og volumfunksjonen aktivert automatisk hver gang telefonen er i bruk. I posisjon "ON" justeres volumet 15-30dB og den røde lysdioden, som er plassert til venstre for tasten → , lyser.

Dersom omkopleren står i posisjon "OFF", kan tone- og volumfunksjonen aktiveres ved å trykke inn tasten → . I posisjon "OFF" justeres volumet 0-15dB og den røde lysdioden som er plassert til venstre for tasten →  er slukket.

Rørets kombinerte forsterker- og muteknapp

Man kan også få ekstra volum på innkommende lyd ved å trykke på telefonrørets forsterker- og muteknapp (se illustrasjon side 5). Volumet justeres da opp til 12dB. Når forsterker- og muteknappen er trykket inn, fungerer den samtidig som muteknapp for utgående lyd.

OBS!

Når både tone- (diskanten), volumkontrollen (se illustrasjon side 4) og utgående volum (se illustrasjon side 5) er innstilt i maks posisjon, og omkopleren  (se illustrasjon side 7) for tone- og volumfunksjonen er aktivert, kan en forstyrrende, hviskende lyd høres i røret. Reduser det utgående volumet hvis dette inntreffer. Kontroller også regulering av volum og tone i headset/halsslynge/slyngekrok.

Svare på innkommende samtaler

Når noen ringer, avgir telefonen et ringesignal og et blinkende rødt lys. Telefonnummeret og/eller navnet på den som ringer vises i displayet hvis du har nummervisning. Du kan velge å svare eller avslutte samtalen på følgende måte:

1. Løft av telefonrøret når det ringer og legg det tilbake når samtalen er avsluttet.
2. Trykk på -knappen og svar med handsfree-funksjonen. Trykk igjen på -knappen når du har avsluttet samtalen.
3. Du kan også svare i telefonen med fjernkontrollen på armen (se illustrasjon side 4).
Trykk på den røde -knappen på fjernkontrollen for å stille telefonen i handsfree-posisjon. Trykk på den svarte -knappen på fjernkontrollen når du har avsluttet samtalen.
4. Hvis du har et headset koplet til telefonen (se illustrasjon side 7) gjør du slik:
Trykk på -knappen og ring på vanlig måte. Trykk igjen på -knappen når du har avsluttet samtalen.

Ved bruk av halsslynge/slyngekrok

Du kan velge å svare eller avslutte samtaler på følgende 3 måter med en halsslynge koplet til telefonen (se illustrasjon side 7):

1. Trykk på -knappen for å aktivere halsslyngen og headsettet (og trykk på halsslyngens På/Av-knapp hvis halsslyngen har en slik). Snakk deretter i headsetsmikrofonen. Trykk på -knappen når du har avsluttet samtalen.
2. Trykk på -knappen for å aktivere halsslyngen. Snakk så i mikrofonen på telefonen (de små hullene ved siden av -symbolet).
3. Løft av telefonrøret og snakk på vanlig måte i mikrofonen på telefonrøret.

Ringe en samtale

1. Løft av telefonrøret.
2. Vent på summetone og slå ønsket nummer. Sifferne vises i displayet når du slår nummeret. Hvis du slår et siffer feil, kan du slette bakover med **C**-tasten.
3. Legg på røret når samtalen er avsluttet.

Slå nummeret først

1. Slå ønsket nummer mens røret er lagt på. Dersom du slår et siffer feil, kan du slette bakover med **C**-tasten.
2. Løft av røret. Telefonen ringer opp det slåtte nummeret.
3. Legg tilbake røret når samtalen er avsluttet.

Handsfree

CL 600 har innebygd høyttaler og mikrofon (se illustrasjoner side 4) for handsfree-funksjon, slik at også omgivelsene kan høre på samtalen. Du kan også kople headset/halsslynge/slyngekrok til telefonen (se illustrasjon side 7).

Høyttalervolumet justeres med reguleringsknappen som sitter på venstre side av telefonen ved siden av høyttaleren (se illustrasjon side 4 og 5).

For at lyden skal nå frem til den du snakker med, bør du sitte rettet mot mikrofonen. Mikrofonen er plassert lengst nede til høyre ved siden av

-symbolet på telefonen (se illustrasjon side 4).

Ringe med handsfree-funksjonen

1. Slå først ønsket nummer. Hvis du slår et siffer feil, kan du slette bakover med **C**-tasten.
2. Trykk på -tasten. Nå aktiveres høyttalerfunksjonen og telefonen ringer opp det slåtte nummeret.
3. Når du får svar, snakker du på vanlig måte rettet mot mikrofonen på telefonen (de små hullene ved siden av -symbolet). Juster høyttalervolumet ved behov.
4. Samtalen avsluttes ved at du igjen trykker på -tasten.

Svare med handsfree-funksjonen

1. Trykk på -tasten og snakk inn i mikrofonen på telefonen (de små hullene ved siden av -symbolet).
2. Samtalen avsluttes hvis du trykker på -tasten igjen.

Avslutte handsfree-funksjonen under en samtale

Løft av røret hvis du vil avbryte høyttalerfunksjonen under en samtale. Da slukker -symbolet i displayet og i stedet vises -symbolet. Fortsett samtalen.

Aktivere handsfree-funksjonen under samtalen

Trykk og hold inne -tasten samtidig som du legger på røret. Samtaletiden vises noen sekunder i displayet. Ta bort visning av samtaletiden ved å trykke på tasten **C**. Trykker du to ganger på **C**-tasten restarter du visningen av samtaletiden som da begynner på 0.

Bruke headset/halsslynge/slyngekrok

Du kan velge å svare på og avslutte en samtale på følgende 3 måter med headset/halsslynge/slyngekrok koplet til telefonen (se illustrasjon side 7):

1. Trykk på -tasten for å aktivere halsslynge og headset og trykk på halsslyngens På/Av-knapp (avhengig av hvilken halsslynge du har). Snakk deretter i headsetsmikrofonen. Trykk på -tasten når du har avsluttet samtalen.
2. Trykk på -tasten for å aktivere halsslyngen. Snakk så i mikrofonen på telefonen (de små hullene ved siden av -symbolet).
3. Løft av telefonrøret og snakk på vanlig måte inn i mikrofonen på røret.

Se ovenfor hvordan du skal avslutte eller aktivere halsslyngen/headsettet/slyngekroken under pågående samtale.

Tilbakeringing til siste oppringte nummer

Med denne funksjonen kan du automatisk ringe siste oppringte telefonnummer.

1. Løft av røret eller benytt høyttaleren (trykk på -tasten) eller benytt headset (trykk på -tasten).
2. Vent på summetone og trykk på tasten .
3. Det siste oppringte telefonnummeret ringes nå automatisk opp.
4. Trykk på tasten OK for å bekrefte.

Tilbakeringing til tidligere oppringte nummer

Med denne funksjonen kan du automatisk velge å ringe opp én av de 30 siste oppringte telefonnummere.

Velg en av de 30 siste telefonnummere ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Røret må være lagt på.

1. Trykk på **OK**-tasten. I displayet vises ”OPPRINGT”, siste oppringte nummer, totalt antall oppringte nummer samt dato- og tidsangivelse for når nummeret ble ringt opp.
2. Benytt   for å bla igjennom nummere og velg det nummeret du ønsker å ringe til.
3. Løft av røret eller bruk høyttaleren (trykk på -tasten) eller benytt headset (trykk på -tasten).
4. Valgte telefonnummer ringes nå opp automatisk.

Slette tidligere oppringte telefonnummer

Gjør på følgende måte for å fjerne ett eller flere av de 30 siste oppringte telefonnummerne. Røret skal være lagt på.

1. Trykk på tasten **OK**. I displayet vises ”OPPRINGT”, sist slåtte nummer, totalt antall slåtte nummer og dato- og tidspunkt for når nummeret ble ringt opp.
2. Benytt **▲ ▼** for å bla mellom nummerne og velg det nummeret du vil slette.
3. Trykk på tasten **C**. I displayet vises ”SLETTE?”
4. Trykk på tasten **C** igjen for å bekrefte sletting av telefonnummeret.
5. Trykk på tasten **OK** for å gå ut av menyen.

Mutefunksjon

Hvis du vil prate uforstyrret med noen ved siden av deg uten at personen i telefonen skal høre hva dere sier, så gjør du som slik:

1. Be personen vente og trykk på muteknappen .
2. På displayet vises nå symbolet . Nå kan ikke personen i telefonen høre hva du/dere sier, men du/dere hører hva personen i telefonen sier.
3. Trykk på -knappen igjen for å fortsette telefonsamtalen på vanlig måte.

Knappene R, * og

Disse knappene brukes for å utnytte de tjenestene som tilbys av din telefonoperatør. Detaljert informasjon fås av telefonoperatøren.

Lagre et telefonnummer i minnet (direkte-/hurtigvalg)

CL 600 kan lagre 9 direktenummer. De tre hurtigvalgsknappene (P1 rød/P2 blå/P3 grønn) er plassert lengst oppe på telefonen (se illustrasjon side 4). Hvert nummer kan inneholde maks 30 siffer.

Gjør på følgende måte for å lagre et telefonnummer i minnet:

1. Løft av telefonrøret.
2. Trykk på -knappen.
3. Slå det nummeret du vil lagre.
4. Trykk på den knappen du vil lagre nummeret på (minneknappene **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5** eller **M6** alternativt en av de fargede hurtigvalgs-knappene **P1**, **P2**, **P3**).
5. ”LAGRET” vises i displayet når nummeret er lagret.
4. Trykk på knappen **C** for å gå ut av menyen.

De lagrede nummerne kan noteres på listen under telefonen på høyre side.

OBS!

Hvis det ikke er noe batteri i telefonen, og du ved en feiltakelse drar ut ledningen eller det blir strømbrytning, forsvinner de lagrede nummerne. Hvis du legger inn et nytt nummer, forsvinner det gamle automatisk.

Hurtigvalg

Gjør på følgende måte for å ringe opp ett av de tre telefonnummerne som er lagret som hurtigvalg. Røret må være lagt på.

1. Løft av røret eller benytt høyttaleren (trykk på -knappen) eller bruk headset (trykk på -knappen).
2. Trykk på en av minneknappene **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5** eller **M6** alternativt en av de fargede hurtigvalgsknappene **P1**, **P2**, **P3**. Da ringes telefonnummeret automatisk opp.

De lagrede nummerne kan noteres på listen under telefonen på høyre side.

Opprette en kontakt i telefonboken

Opp til 99 kontakter kan lagres i den innebygde telefonboken med navn og telefonnummer. Gjør som beskrevet nedenfor for å opprette en kontakt i telefonboken. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt **▲ ▼** til du kommer til telefonboken ("TELEFON BOK").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Benytt **▲ ▼** til du kommer til "PLUSS"
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Slå telefonnummeret (maks 30 siffer pr. kontakt). Benytt knappen **C** for å slette et siffer som er feil.
7. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte telefonnummeret og skriv inn navnet på den personen telefonnummeret tilhører. Velg bokstav ved å trykke ned den nummerknappen hvor ønsket bokstav er påtrykket knappen. Se neste side for detaljert informasjon om flere tegn og hvordan bokstavsknappene brukes.
8. Trykk på knappen **OK** i tre sekunder for å lagre kontakten når du har skrevet inn navnet.
9. Når du har gjort dette, kan du enten opprette en ny kontakt eller trykke på knappen **C** for å gå ut av menyen.

Bruk av bokstavknappene

Når du skriver inn navnet, kan du benytte tabellen nedenfor for å velge riktig bokstav. En grunnoppsetning av bokstaver finnes trykket på nummerknappene. Å og ä kan p.t. ikke brukes. Erstatt disse med aa eller ae eller bruk kun bokstaven a.

Knapp	Bokstav	Knapp	Bokstav
1	. ? - " ' <	6	M N O m n o 6 Ö Ø
2	A B C a b c Æ Ø	7	P Q R S p q r s
3	D E F d e f	8	T U V t u v Ü
4	G H I g h i	9	W X Y Z w x y z
5	J K L j k l	0	+ & @ / \$ %

- Legge til et mellomrom: Trykk på knappen **OK** to ganger.

- Neste bokstav er den samme som den du akkurat har registrert (eller hvis bokstaven er på samme knapp): Trykk først på **OK**-knappen og velg deretter ønsket bokstav.
- Hvis du har valgt feil bokstav: Trykk på knappen **C**.
- Legg inn en pause i telefonnummeret: trykk på knappen  (en P vises i displayet).

Opprette en kontakt fra innkommende telefonsamtale

Hvis du har nummervisning, kan du opprette en kontakt fra en innkommende samtale. Hver innkommende samtale lagres som en egen post i nummervisningslisten.

Gjør som beskrevet nedenfor for å opprette/lagre en kontakt i telefonboken fra en post som finnes lagret i nummervisningen. Røret må være lagt på.

1. Innkommende samtale vises i displayet.
2. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge det nummeret du vil lagre i telefonboken.
3. Trykk på og hold nede knappen **OK** inntil det siste sifferet i det valgte nummeret blinker. Du kan også endre nummeret på denne måten.
4. Bekreft nummeret ved å trykke på knappen **OK**.
5. Nå kan du endre eller skrive inn navnet på den kontakten som du registrerte nummeret til eller trykke på og holde knappen **OK** nede i tre sekunder for å bekrefte lagring av foreslått telefonnummer og navn.
6. Trykk på knappen **C** for å gå ut av menyen.

OBS!

Du kan se i listen over innkommende samtaler under en pågående samtale ved å trykke på knappen **OK** og deretter knappene **▲ ▼** for å forflytte deg i listen.

Ringe en kontakt i telefonboken

Gjør på følgende måte for å ringe en kontakt i telefonboken. Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt **▲ ▼** til du kommer til telefonboken ("TELEFON BOK").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Benytt **▲ ▼** til du kommer til "GJENNOMGANG".
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge den kontakten du vil ringe til. Du finner kontakten raskere hvis du taster inn første bokstaven i navnet.
7. Løft av røret eller bruk høyttaleren (trykk på -knappen) eller benytt headset (trykk på -knappen).
8. Telefonnummeret ringes automatisk opp.

Slette en kontakt fra telefonboken

Gjør på følgende måte for å slette en kontakt fra telefonboken. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt **▲ ▼** til du kommer til telefonboken ("TELEFON BOK").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Benytt **▲ ▼** til du kommer til "GJENNOMGANG".
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
6. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge den kontakten du vil slette.
7. Trykk på knappen **C**. I displayet vises "SLETTE?".
8. Trykk på knappen **C** igjen for å bekrefte sletting av kontakten.
9. Trykk på knappen **OK** for å gå ut av menyen.

Endre en kontakt i telefonboken

Gjør som vist nedenfor for å endre en kontakt i telefonboken. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen **⊗**.
2. Benytt **▲ ▼** til du kommer til telefonboken ("TELEFON BOK").
3. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
4. Benytt **▲ ▼** til du kommer til "GJENNOMGANG".
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
3. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge den kontakten du vil endre.
4. Trykk og hold nede knappen **OK** til det siste sifferet i det valgte nummeret blinker.
5. Trykk på knappen **C** for å endre telefonnummeret og registrer et nytt nummer.
6. Trykk på knappen **OK**.
7. Nå kan du endre navnet på kontakten.
8. Trykk på knappen **C** for å fjerne en bokstav. For ytterligere informasjon om hvordan man registrerer en kontakt, se "Opprette en kontakt i telefonboken" på side 23.
9. Trykk og hold inne knappen **OK** i tre sekunder for å bekrefte lagring av telefonnummer og navn.
10. Trykk på knappen **C** for å gå ut av menyen.

Alarmfunksjon

Alarmfunksjonen gjør at du enkelt kan ringe etter hjelp i en nødsituasjon. For å aktivere alarmfunksjonen må du lagre et alarmtelefonnummer og legge inn en alarmmelding. Denne meldingen leses så automatisk opp for personen som svarer på det alarmtelefonnummeret du har lagret.

OBS!

Strømforsyningen i telefonen må være koplet til. Ved strømbryt er det nødvendig med backup-batterier for å sikre at alarmfunksjonen fungerer.

Lagre et alarmnummer

CL600 telefonen klarer å lagre 6 forskjellige alarmtelefonnummer i minnet, med maks 18 siffer i hvert nummer. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge å lagre alarm ("ALARM INST"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
3. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge alarmnummer ("SOS NUMMER"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
4. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge ett av de ledige alarmnummerplassene. Du kan velge mellom alarmnummerplass 1-6, f.eks. alarmnummer-plass 1 ("SOS NUMMER 1"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
5. Slå telefonnummeret du vil lagre. Bruk knappen **C** for å slette hvis et siffer er feil. Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
6. Bli værende i menyen hvis du vil lagre enda et alarmtelefonnummer på neste alarmnummerplass. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge neste alarmnummerplass, f.eks. alarmnummerplass 2 ("SOS NUMMER 2") eller en av de andre ledige alarmnummerplassene og gjør som beskrevet i punkt 4-5 ovenfor igjen.
7. Trykk på **C**-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.

Lagre en alarmmelding

Den alarmmeldingen du lagrer skal instruere den personen som svarer om hva han/hun skal gjøre (trykke en nummertast) for å kunne prate med deg. Hvis det ikke gjøres (trykkes), ringer telefonen automatisk opp neste alarmtelefonnummer som du har lagret. Varigheten av en alarmmelding kan ikke være lenger enn maks 10 sekunder. Du kan bare lagre én alarmmelding. Altså kommer samme alarmmelding til å bli lest opp uansett hvilket alarmtelefonnummer (1-6) som besvarer din alarm.

Eksempel på alarmmelding:

”Hei det er (si navnet ditt) som ringer. Jeg trenger hjelp. Slå hvilket som helst nummer mellom 0-9 slik at jeg kan fortelle hva som har hendt.

Din alarmkontaktperson kan slå et nummer mens meldingen din leses opp eller like etter at meldingen er lest opp. På den måten bekrefter din alarmkontaktperson at han/hun har mottatt din beskjed og kan hjelpe deg.

Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge å lagre alarm (”ALARM INST”). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
3. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge alarmmelding (”SOS LYD”). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
4. Benytt knappene **▲ ▼** for å lese inn alarmmelding (”SPILL INN”). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
5. Les inn din melding. Snakk inn i mikrofonen på telefonen (se illustrasjon side 4) med en avstand på ca. 20- 30 cm. Avslutt innspillingen ved å trykke på **OK**-knappen.
6. Trykk **C**-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.

Spille av en lagret alarmmelding

Røret skal være lagt på.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge lagret alarm ("ALARM INST"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
3. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge alarmmelding ("SOS LYD"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
4. Benytt knappene **▲ ▼** for å spille av meldingen ("SPILL LYD"). Trykk på **OK**-knappen for å spille av meldingen.
5. Trykk på **C**-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.

Bruke alarmfunksjonen


Når du har lagret alarmnummeret og lest inn alarmmeldingen, så er alarmfunksjonen klar til bruk.

1. Trykk på den røde -knappen på fjernkontrollen (1 pipelyd høres) eller på telefonenheten (se illustrasjon side 4).
2. Telefonen slår automatisk det første alarmnummeret.
3. Når alarmkontaktpersonen besvarer din samtale, så leses alarmmeldingen opp.
Dersom telefonen ikke blir besvart innen 30 sekunder, eller hvis linjen er opptatt, så slås automatisk det neste lagrede alarmnummeret. Dersom telefonen ikke blir besvart etter nye 30 sekunder, eller hvis linjen er opptatt, så slår den automatisk det neste lagrede alarmtelefonnummeret. Telefonen ringer et alarmnummer maks to ganger.
Alarmmeldingen spilles av maks 3 ganger hvis alarmkontaktpersonen ikke besvarer alarmsamtalen din.
4. Trykk på **X**-knappen på fjernkontrollen (2 pipelyder høres) for å avslutte alarmfunksjonen/alarmsamtalen. Alternativt kan du avslutte ved å trykke på **STOP**-knappen på telefonenheten (2 pipelyder høres).

Beskrivelse av fjernkontrollen

Den røde lysdioden lyser når batteriet må byttes

Stoppknapp

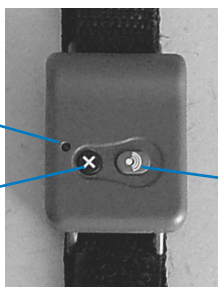

Alarmknapp


Bytte batteri i fjernkontrollen

Ta av håndleddsbandet på fjernkontrollen. Skru løs de 3 skruene på baksiden av fjernkontrollen og ta av lokket. Sett inn et nytt batteri i batterilommen som vist, sett på plass lokket og skru det fast igjen.

Ikke bruk oppladbare batterier. Kast ikke brukte batterier sammen med husholdningsavfall, men i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Ved å følge disse henstillingene om gjenvinning, medvirker du til et bedre miljø.

Bruk av nummervisning - innkommende samtaler

Dersom du har nummervisningstjeneste, vises innkommende samtaler i displayet. Når minnet er fullt, forsvinner det eldste telefonnummeret fra listen og det nye telefonnummeret legges til. Hver samtale lagres med dato, klokkeslett og rekkefølge.

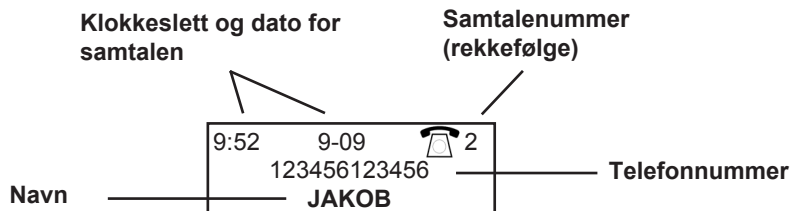




NB! Hvis den som ringer har et hemmelig nummer, vises ("PRIVAT") i displayet.




Hvis telefonnummeret er ukjent (f.eks. visse internasjonale samtaler), vises ("UKJENT NR") i displayet.

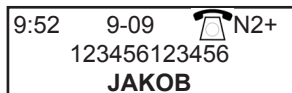


Dersom samme kontakt ringer flere ganger, lagres bare den siste samtalen i listen over innkommende samtaler og et **+**-tegn vises etter samtalennummeret.

OBS! En **N** vises i displayet foran de samtalennummerne i listen som du ikke har sett på.

Når en ny samtale er tatt imot, blinker indikeringslampen for innkommende samtale (se illustrasjon side 3) og i displayet vises "NYE" ("NEW"), se illustrasjonen på neste side. Lampen slukkes når du har bladd gjennom ubesvarte samtaler med **▲ ▼** knappene.

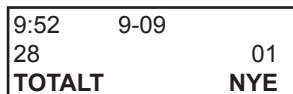


Dette eksemplet viser at totalt antall innkomne samtaler i listen er 28 hvorav 1 samtale er ny.

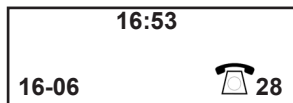

Benytt knappene **▲ ▼** for å bla mellom telefonnummerne i listen.

Når du har bladd igjennom alle samtalene, forsvinner "NEW" og etter noen sekunder går displayet tilbake i hvileposisjon.

Totalt antall innkomne samtaler i listen vises fortsatt i displayet.

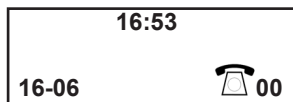

Når listen over innkommende samtaler er tom (f.eks. hvis du har slettet oversikten), vises **00** i displayet.

Bruk av nummervisning - ringe opp et nummer

Gjør følgende for å ringe en kontakt i listen. Røret skal være lagt på.

1. Benytt knappene **▲ ▼** for å bla i listen over innkommende telefonnummer og stopp på det nummeret du vil ringe opp.
2. Løft av røret eller benytt høyttaleren (trykk på -knappen) eller bruk headset (trykk på -knappen).
3. Telefonnummeret ringes automatisk opp.
4. Du kan også løfte av røret først. Benytt knappene **▲ ▼** for å bla i listen til du kommer til ønsket nummer. Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen. Det valgte telefonnummeret ringes automatisk opp.

OBS!

Opprigningsfunksjonen fungerer ikke for hemmelige/beskyttede telefonnummer som er ("PRIVAT") og noen internasjonale ("UKJENT NR").

Bruk av nummervisning - slette et nummer

Gjør følgende for å slette et telefonnummer fra listen. Røret må være lagt på.

1. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge den posten du vil slette.
2. Trykk på knappen **C**. I displayet vises ("FJERN")
3. Trykk på knappen **C** igjen for å bekrefte slettingen av posten.
4. Trykk på knappen **OK** for å gå ut av menyen.

Bruk av nummervisning - slette alle nummer


Gjør på følgende måte for å slette alle telefonnummerne fra listen. Røret må være lagt på.

1. Trykk på knappen **C** og hold den nede til ("FJERN ALT") vises i displayet.
2. Trykk på knappen **C** igjen for å bekrefte slettingen av alle nummerne.
3. Trykk på knappen **OK** for å gå ut av menyen.


Samtale venter

Med denne funksjonen får du informasjon om og kan besvare en ny samtale under en pågående samtale. Du kan også veksle mellom flere pågående samtaler. Disse funksjonene krever at din telefonoperatør tilbyr denne tjenesten og at du har bestilt den.

1. Trykk på knappen .
2. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge telefoninnstillinger ("OPPSETT"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
3. Benytt knappene **▲ ▼** for å velge ("SAMTALE VENT"). Bekreft ved å trykke på **OK**-knappen.
4. Benytt **▲ ▼** og velg "PÅ" eller "AV".
5. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte og trykk deretter på **C**-knappen to ganger for å gå ut av menyen.

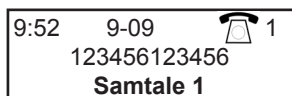

Når du prater med samtale 1, vises navn og nummer i displayet.

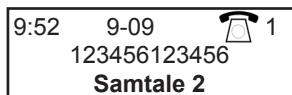


Du hører en pipelyd når du får en ny innkommende samtale. Samtale 2 vises nå med navn og nummer i displayet.

Kontakt din operatør for å få nødvendig informasjon om tjenesten.

Hvis du ikke besvarer samtale 2 under en pågående samtale, legges samtale 2 inn på listen over innkommende samtaler.

Melding venter

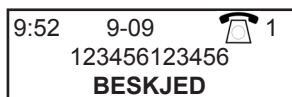

Med denne funksjonen kan den som ringer deg legge igjen en melding som vises i listen over innkommende samtaler. Meldingen blir merket annerledes enn andre innkomne samtaler, i displayet står det istedenfor ("BESKJED").

Lysdioden ved siden av ☒-symbolet lyser og ("BESKJED") står igjen i displayet til alle meldingene er blitt åpnet. Når alle meldingene er åpnet, forsvinner ("BESKJED") automatisk fra displayet.

Tilbehør CL600

Vibrator, Best. nr. 1104455.

OBS! Benytt kun denne originalvibratoren

Headset, Best. nr. 1104902

Slyngeskrokk, Best. nr. 1104958

Batteri, alkalisk, AAA/LR03 1,5V,

Kontakt Gewa AS eller gå inn på www.edin.se eller www.gewa.no for mer informasjon.

Stell og vedlikehold

Telefonen krever normalt ikke vedlikehold. Dersom enheten skulle bli skitten, tørkes den av med en fuktig klut. Ikke bruk løsningsmiddel eller sterke rengjøringsmidler.

Når telefonen ikke fungerer

- Kontroller at alle kontakter er satt ordentlig i. Ekstra viktig er det at telefonrørets modularkontakter er ordentlig inntrykte. Dra ut og sett inn igjen modularkontakten i telefonpluggen et par ganger dersom telefonen er "død".
- Du kan endre tone (+10dB) og volum (+30dB) når den røde lysdioden ved siden av knappen  lyser (se side 4). Hvis den ikke lyser, økes volumet bare med +15dB.

Dersom telefonen til tross for ovennevnte feilsøking ikke fungerer, bør Gewa AS kontaktes for videre instruksjoner (tlf. 66 99 60 00).

Teknisk informasjon

For mer utfyllende opplysninger henviser vi til datablad/brosjyrer og CE-certifikat som kan lastes ned fra "Produktdatabank" på www.edin.se. Ved behov kan annen teknisk dokumentasjon bestilles ved å ta kontakt med Gewa AS.

Miljø

Kast brukte batterier/produkter i henhold til gjeldende miljøforskrifter.

Hvis du følger ovenstående henstilling om gjenvinning, er du med på å medvirke til et bedre miljø.



