

**GEWA**

- helping people



UniVox® Listener

slyngemottaker/Testinstrument

Med UniVox Listener kan man raskt og enkelt kontrollere lyd kvaliteten/ slyngfeltet der hvor det er installert en teleslynge. Listener er et instrument som gjør at alle som er ansvarlige for lokaler kan kontrollere at teleslyngen fungerer før et møte eller en sammenkomst hvor teleslyngen skal brukes.

UniVox Listener er dessuten et hjelpemiddel som gjør det mulig for en person med nedsatt hørsel, men som ikke har høreapparat, å høre den lyden som sendes ut via en teleslynge.

UniVox Listener henges enkelt og praktisk rundt halsen i et mykt tekstil bånd som kan åpnes/lukkes. Du når alle funksjoner med et enkelt enhåndsgrep.

Egenskaper

- Slyngemottaker
- Testinstrument i hht. IEC-normen 60118-4
- Blå lysdiode indikerer at slyngen fungerer
- Gul/grønn lysdiode blinker når Listener er slått på
- Innebygd høyttaler
- Uttak for hodetelefon
- Praktisk, tekstilbånd som kan åpnes for komfortabel lytting
- Tonekontroll (bassdemping)
- Volumkontroll
- Alle betjeningskontroller nåes med et enkelt enhåndsgrep
- Drives med 2 stk. LR3 (AAA) batterier

Gewa AS
Trollåsveien 8
Postboks 626
1411 KOLBOTN



Tekniske spesifikasjoner

Strømforbruk:		4-10mA
Batteritype:		2 st. alkaliske AAA/LR3 1,5V
Batteriets levetid:		125-310 timer, basert på batteri med 1250 mAh
Hodetelefonutgang:		Standard stereo øreplugger impedans 10Ω-1kΩ, 3,5mm-plug
Indikering magnetfelt:	Gult lys	-6dB (re 400mA/m)
	Grønt lys	0dB = 400mA/m
	NB:	Toppene i en tale skal gå opp til +400mA/m+-3dB for å oppfylle IEC-normen 60118-4
	Av/På indikering	Rød lysdiode blinker når Listener er slått på
Annet:	Mål	98x64x19mm (LxBxD)
	Vekt	80g inkl. batterier
	Farge	Svart

UniVox® Listener

Best. nr. Beskrivelse

1104130 UniVox Listener



Grønn lysdiode:
Slyngen oppfyller
IEC-normen



Gul lysdiode:
Slyngen fungerer, men
oppfyller ikke normen



Lysdiode tennes ikke:
Slyngen fungerer ikke

Tilbehør/reservedeler

Best. nr. Beskrivelse

1104131 Hodetelefon

2241003 Batteri, alkalisk AAA/LR3 1,5V

NB!

En fullstendig måling av en teleslyngeinstallasjon skal utføres med en feltstyrkemåler, type UniVox FSM 2.0.



Best. nr. Beskrivelse

1104124 UniVox FSM 2.0 Feltstyrkemåler

