

UniVox P-Loop teleslyngekoffert

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

GEWA

- helping people

UniVox P-Loop teleslyngekoffert



UniVox P-Loop teleslyngekoffert

HMS nr.

Art. nr. 1104169

INNHOLD

UniVox P-Loop teleslyngekoffert	1
Generelt	2
Tilkopling av slynge	2
Kopling til strømmettet	2
Tilkopling av signalkilder (mikrofon; CD-spiller, mixer etc.)	2
Justering av signalkildenes inn-nivå	3
Trådløst mikrofonsystem	3
Viderekopling	3
Tekniske data	3
Tilbehør	3
Vedlikehold og renhold	3
Garanti	3

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Generelt

UniVox P-Loop teleslyngekoffert er et bærbart teleslyngeanlegg med innebygd teleslyngeforsterker, 50 m kabel og tilhørende Listener kontrollinstrument. Som tilleggsutstyr kan kofferten også utstyres med innebygd trådløst mikrofonsystem fra Okayo. Trådløse oppladbare høyttalere kan også leveres som tilleggsutstyr.


Tilkopling av slynge

Teleslyngekofferten plasseres på den ene yttersiden av det området den skal dekke. Sett inn kabelens kontakter i uttaket på oversiden av teleslyngeforsterkeren i henhold til figuren nedenfor. Legg kabelen rundt det området hvor du vil at høreapparatbrukerne skal kunne høre slyngen. Trekk bare ut så mye ledning som er nødvendig, den som er til overs kan være igjen på spolen.

Kopling til strømmettet

Kople strømledningen til uttaket merket "230-240V AC". Strømledningen skal trekkes ut gjennom hullet på siden av kofferten slik at den ikke blir liggende i klem. Lysdioden merket "ON" skal nå lyse.

UniVox P-Loop oversikt

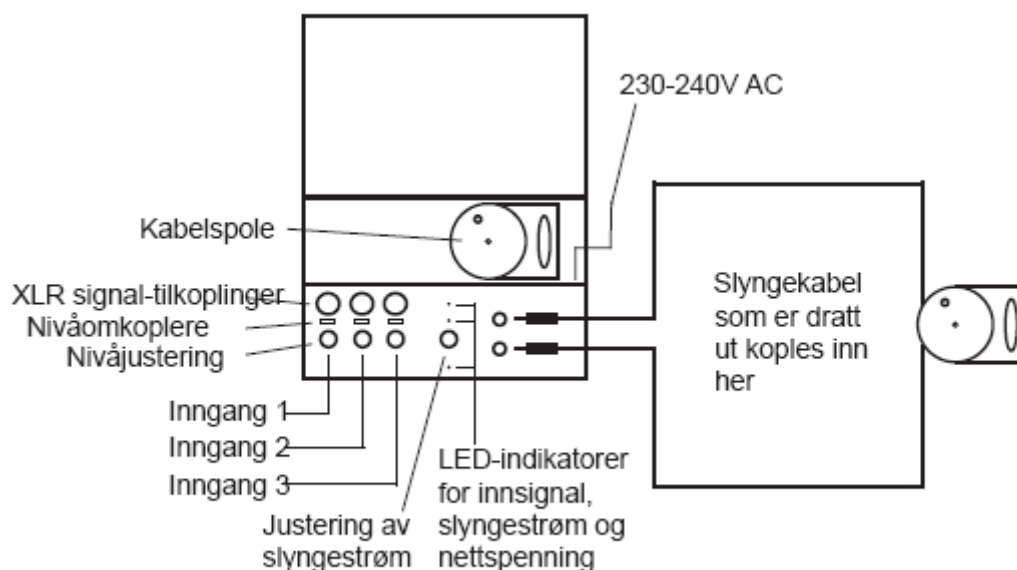

Tilkopling av signalkilder (mikrofon; CD-spiller, mixer etc.)

Kople signalkildene til inngang 1-3. Velg mikrofon eller linjefølsomhet for respektiv inngang ved hjelp av omkoplere under inngangens XLR-kontakt. Still omkoplere i "Mic" posisjon for mikrofonfølsomhet og i posisjon "Line" for linjefølsomhet (CD-spiller, mixer etc.)

Justering av signalkildenes inn-nivå

En oppnår best mulig resultat ved å justere nivået for den enkelte inngang hver for seg. Ved justering av signalkildenes inn-nivå må den signalkilden som skal justeres være slått på, mens de andre signalkildene må være slått av.

Begynn med å slå på signalkilden til inngang 1. Juster nivået ved å skru på bryteren merket "IN 1" til lysdioden merket "IN" tennes. Nivåjusteringen skal baseres på det svakeste signalet (for eksempel den taleren som har svakest stemme) og nivået skal ikke skrues ytterligere opp etter at lysdioden er tent. En risikerer rundgang hvis volumet (nivået) blir for høyt.

Når inngang 1 er justert, stenges signalkilden som er koplet til inngang 1. Hvis en signalkilde er koplet til inngang 2, slås denne på og justeres på samme måte som for inngang 1. Gjør så det samme for inngang 3 hvis det også er en signalkilde som skal koples til der.

Trådløst mikrofonsystem

Hvis kofferten er utstyrt med et trådløst mikrofonsystem, så ligger Okayo brukerveiledning i plastlommen på innsiden av koffertens skillevegg.

Viderekopling

Telekoffertens lyd kan koples videre til annet PA-utstyr via utgangen merket "0dB Out". Benytt kabel med phono-kontakt/RCA (er ikke inkludert).

Tekniske data

- Dekker inntil 150 m²
- 50 m kabel
- 3 innganger XLR
- Linjeutgang phone/RCA

Mer detaljerte tekniske data fremgår av produktinformasjonen som ligger i plastlommen på innsiden av koffertens skillevegg.

Tilbehør

- Listener teleslyngetester
- Teleslyngekabel
- Evt. trådløst mikrofonsystem

Ekstra tilbehør fremgår av produktinformasjonen som ligger i plastlommen på innsiden av koffertens skillevegg.

Vedlikehold og renhold

Teleslyngekofferten tørkes av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Apparatet skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet.

Garanti

Garantitiden er 24 måneder. Ved feil må kvalifisert personell kontaktes. Sjekk først at alle ledninger er riktig tilkoplet og at støpselet står i stikkkontakten.