

UniVox DLS-30

Teleslyngeforsterker for puteslynge med innebygd autoscart



UniVox DLS-30 Art. nr.: 1104352

INNHOOLD

UniVox DLS-30	1
Generelt om UniVox DLS-30	2
Plassering	2
Tilkopling av signal	2
Tilkopling av teleslynge	2
Tilkopling av driftsspenning	2
Funksjonskontroll	3

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Generelt om UniVox DLS-30


UniVox DLS-30 er en teleslyngeforsterker med integrert autoscart beregnet for puteslynge. Autoscart gjør at det alltid er den riktige lyden som kommer ut på slyngen fra TV, selv om det er koplet til andre bildeenheter via scart til TV.

Plassering

Teleslyngeforsterkeren plasseres i nærheten av TV slik at scartkabelen er lang nok.

Tilkopling av signal

Scartkabelen tilkoples til TV-ens scartkontakt, mens alle andre bildeenheter koples inn i teleslyngeforsterkerens scartkontakt. De eksterne bildeenheterne som Video, DVD, satellitt-tuner osv. koples i serie slik at DLS-30 kommer mellom dem og TV i rekken.

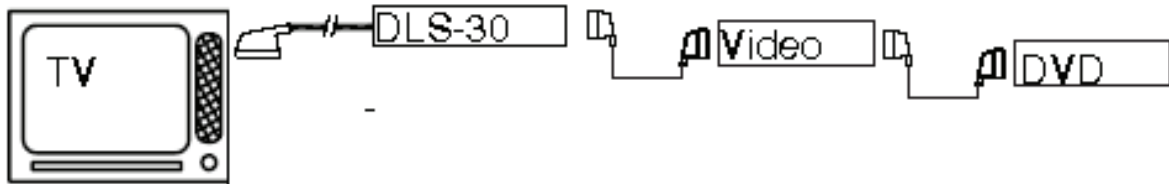

Mikrofon/linjeinngang

Mikrofon eller linjesignal koples til 3,5 mm jackplugg beregnet for dette.

Tilkopling av teleslynge

Puteslyngen koples til utgangen merket LOOP PAD. Den medfølgende puteslyngen har plugg som passer der. Plasser puteslyngen på en stol eller i en sofa slik at den ligger midt under baken når brukeren setter seg. Kabelen legges slik at den er ute av veien og ikke kan snubles i.

Tilkopling av driftsspenning

Kople den medfølgende transformatoren i kontakt merket 12V AC og i veggkontakten (240V). Den virker også med 12 DC som det er i bil eller fra solcellepanel. Da kan Gewa adapter (art. nr 1104210) benyttes eller en annen tilkopling med + i senter.

Funksjonskontroll

Når strømmen er koplet til og TV er skrudd på, skal det være lyd i slyngen og begge lysene i front skal lyse. Den er innstilt slik at det skal være riktig nivå på lyden, men hvis det ikke er det, kan det justeres med potensiometeret på fronten. Husk at det kan være forskjell på lydnivået på forskjellige kanaler og på program/reklame.

