

PL100 mobiltelefonforsterker



PL100 mobiltelefonforsterker med halsslynge HMS art. nr.: 020214 Best. nr.: 1104715


INNHOOLD

| | |
|--------------------------------------|---|
| PL100 mobiltelefonforsterker | 1 |
| Beskrivelse | 2 |
| Innsetting av batterier | 2 |
| Funksjon..... | 3 |
| Telefonere og ta i mot samtaler..... | 3 |
| Vedlikehold og renhold..... | 3 |
| Garanti | 3 |
| Tekniske spesifikasjoner..... | 3 |


GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Beskrivelse

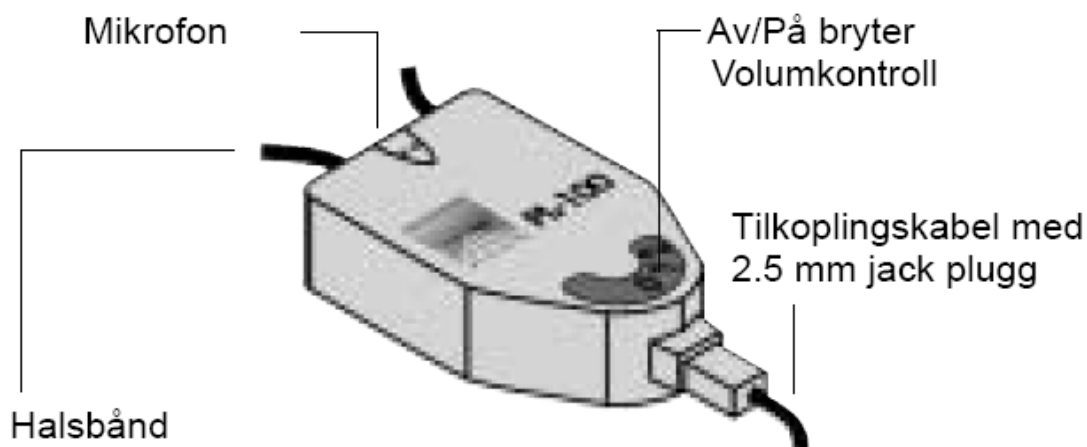

Innsetting av batterier

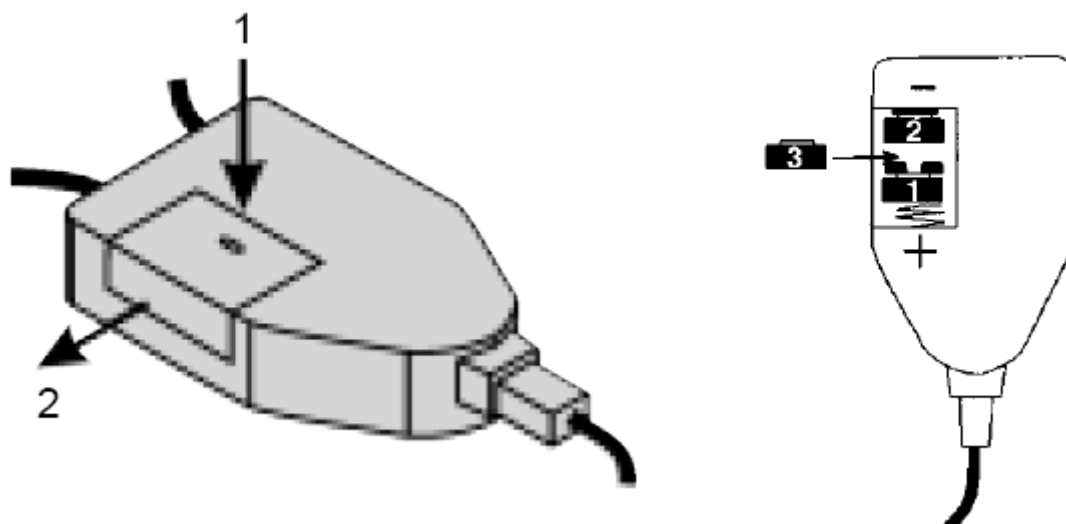

Innsetting av batterier PL-100 krever tre høreapparat batterier (type 675, LR44)1.

1. Åpne batteriluken på baksiden av PL-100 ved å skyve luken utover.
2. Sett inn de tre batteriene slik at + tegnet på batteriene matcher med + tegnet inne i batteriseksjonen.
3. **Sett inn batteriene i følgende rekkefølge:**
 - 1 Det første batteriet mellom + terminalen and plastikkholderen.
 - 2 Det andre batteriet mot - terminalen.
 - 3 Det tredje batteriet mellom det første og andre batteriet.
4. Sett på plass batterilokket.

Funksjon

PL-100 genererer et teleslynge-signal som kan taes i mot av et høreapparat med en innebygd halsslynge. Dette valget aktiveres ved å sette høreapparatet i "T" eller "MT"-stilling.

Telefonere og ta i mot samtaler

1. Plasser halsslyngen rundt halsen og kople til 2.5 mm jack pluggen til jack kontakten på mobiltelefonen din eller adapteren.
2. Skru på PL-100 og tilpass til ønsket volum.
3. Bruk så mobiltelefonen din på vanlig måte (ring og motta samtaler).

Når du er ferdig, skru av forsterkeren ved å dreie volumkontrollen mot klokken helt til du hører et klikk.

Viktig!

Still inn volumkontrollen på mobiltelefonen din på maks slik at du kan høre stemmen til personen du snakker med klart over all bakgrunnsstøy.

Vedlikehold og renhold

Vekkerklokke DS-1 er vedlikeholdsfri. For renhold tørkes apparatet av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Apparatet skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet.

Garanti

Garantitiden er 24 måneder. Ved feil må kvalifisert personell kontaktes. Sjekk først at alle styreledninger er riktig tilkopleet og at støpselet står i stikkontakten.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|------------------------|---------------------|
| Høyde: | 53 mm |
| Bredde: | 48 mm |
| Dybde: | 26 mm |
| Farge: | Grå |
| Vekt: | 41 g |
| Induktiv forsterkning: | Ca. + 35 dB +/- 10% |