

LPU-1 teleslynge bøylemottaker

## Bruker- og vedlikeholdsveiledning

**GEWA**

- helping people

## LPU-1 teleslynge bøylemottaker



LPU-1 teleslynge bøylemottaker: HMS art. nr.: 148421

Ladestasjon til LPU-1

Ladestasjon til 12 batterier

Hygiene-sett

Best. nr.: 1104716

Best. nr.: 1104717

Best. nr.: 1104931

Best. nr.: 1104767

### INNHOOLD

LPU-1 teleslynge bøylemottaker .....	1
Bruk .....	2
Lading av batterier .....	2
Spesialtilbehør .....	3
Dekningsområde .....	3
Rengjøring av hygiene-dekslene .....	3
Viktig informasjon om vedlikehold av din LPU-1 .....	3
Tekniske spesifikasjoner .....	4

**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN

Besøksadresse: Trollåsveien 8

Telefon: 66 99 60 00


Telefax: 66 80 94 90

Teksttelefon: 66 80 93 90


E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)

Website: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

## Bruk

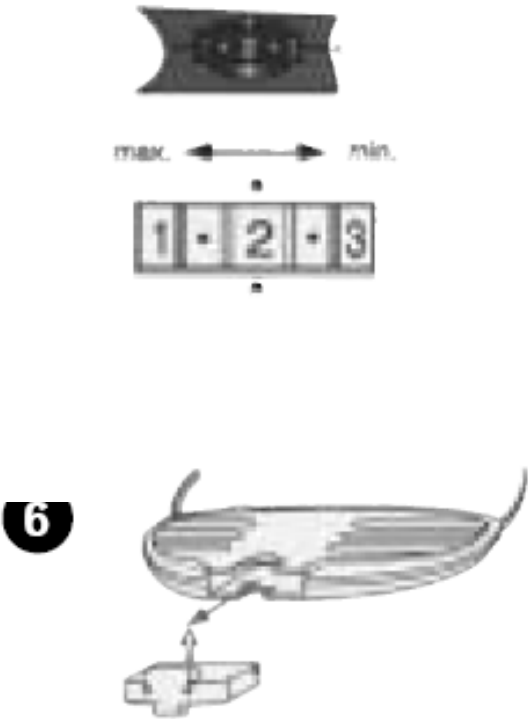	<p>Heng enheten i ørene. Den blir automatisk slått på når den tas i bruk. Det er volumkontroll på mottakeren, men ingen På/Av bryter.</p> <p>Hvis lyd kvaliteten på mottakeren blir dårlig og skurrer, bør batteriene erstattes med nye.</p> <p><b>Advarsel:</b> Ikke press batteriene ned i laderen eller mottakeren. De glir lett inn hvis de plasseres korrekt.</p>
---	--

## Lading av batterier

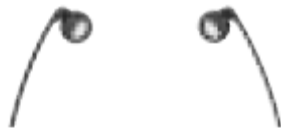

La batteriene stå til lading i minst 14 timer når de først blir ladet. Bruk ikke annet enn originale batterier.



Det er viktig at mottakeren/stetoskopet er plassert riktig i øret.



## Spesialtilbehør


LPU-1 teleslynge bøylemottaker  
Ladestasjon til LPU-1  
Ladestasjon til 12 batterier  
Plastikk deksel til 5 bøylemottakere  
Hygiene-sett

## Dekningsområde

LPU-1 teleslynge bøylemottaker kan motta signaler som blir sendt via et teleslyngeanlegg. Dette tilsvarer et høreapparat i T-stilling.

## Rengjøring av hygiene-dekslene

Hygienedekslene som blir levert som standard, må rengjøres ved behov. Til å gjøre dette bør man bruke det hygienesettet som leveres som tilleggsutstyr (Gewa bestillingsnr. 1104767).

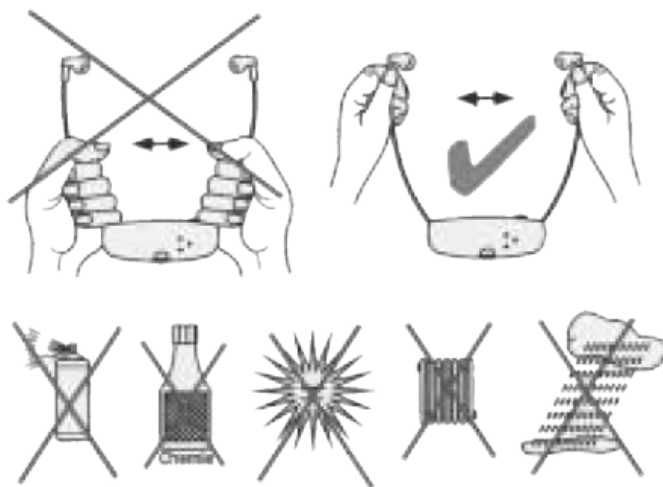

## Viktig informasjon om vedlikehold av din LPU-1

Hvis systemet trenger renhold, tørkes det av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Den skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet. Hvis øreproppene blir ødelagt må de byttes ut.

## Tekniske spesifikasjoner

Frekvensrespons	70 – 5400 Hz
Forvrengning	< 1 %
Støynivå	Typ. 60 dB
Ladetid for batteri	ca. 14 timer

Brukstid pr. ladning	ca. 6 timer
Maks. volum SPL	ca. 120 dBA
Vekt bølge	47 g
Vekt totalt	ca. 200 g

