

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

PL200 mobiltelefonforsterker



PL200 Mobiltelefonforsterker

HMS art. nr.: 025499

Best. nr.: 1104720


INNHold

PL200 mobiltelefonforsterker	1
Beskrivelse	2
Innsetting av batterier	2
Innsetting av batterier	2
Funksjon.....	3
Telefonere og ta i mot samtaler.....	3
Viktig	3
Vedlikehold og renhold.....	3
Garanti	3
Tekniske spesifikasjoner.....	3


GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Beskrivelse

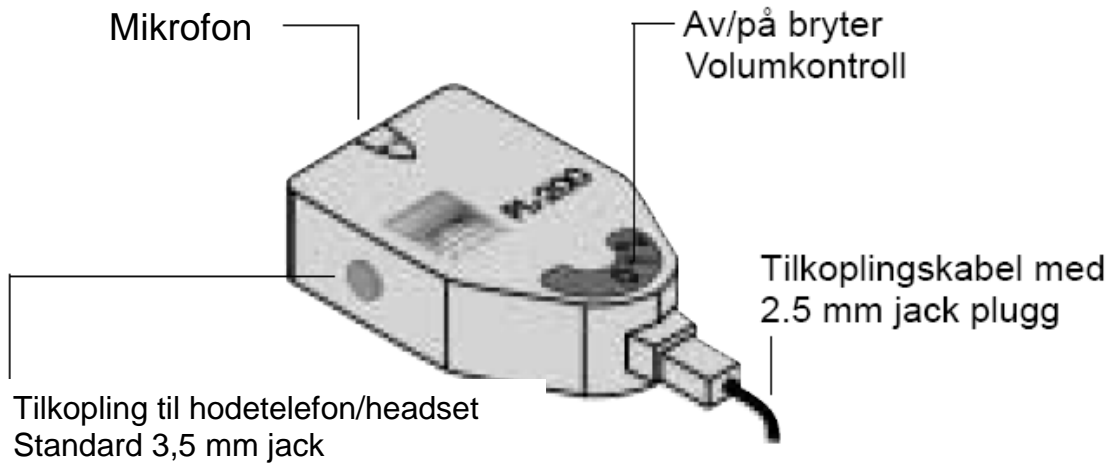

Innsetting av batterier

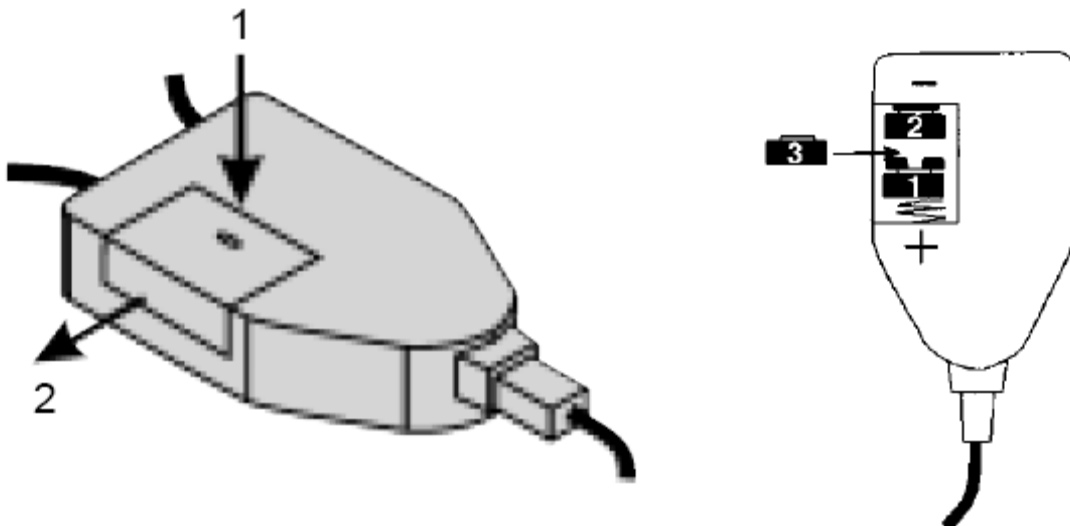

Innsetting av batterier

PL200 krever tre høreapparat batterier (type 675, LR44)1.

1. Åpne batteriluken på baksiden av PL200 ved å skyve luken utover.
2. Sett inn de tre batteriene slik at + tegnet på batteriene matcher med + tegnet inne i batteriseksjonen.
3. **Sett inn batteriene i følgende rekkefølge:**
 - 1 Det første batteriet mellom + terminalen and plastikkholderen.
 - 2 Det andre batteriet mot - terminalen.
 - 3 Det tredje batteriet mellom det første og andre batteriet.
4. Sett på plass batterilokket.

Funksjon

PL200 brukes sammen med hodetelefon/headset for å få høyere lyd som lettere oppfattes.

Telefonere og ta i mot samtaler

1. Sett på deg headsettet/hodetelefonen og kople til 2.5 mm jack plugg til jack kontakten på mobiltelefonen din eller adapteren.
2. Skru på PL200 og tilpass til ønsket volum.
3. Bruk så mobiltelefonen din på vanlig måte (ring og motta samtaler).

Etter bruk skrur du av forsterkeren ved å dreie volumkontrollen MOT klokken helt til hører et klikk.

Viktig

Still inn volumkontrollen på mobiltelefonen din på maks slik at du kan høre stemmen til personen du snakker med klart over all bakgrunnsstøy.

Vedlikehold og renhold

PL200 er vedlikeholdsfri. For renhold tørkes apparatet av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Apparatet skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet.

Garanti

Garantitiden er 24 måneder. Ved feil må kvalifisert personell kontaktes. Sjekk først at alle styreledninger er riktig tilkopleet og at støpselet står i stikkontakten.

Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	53 mm
Bredde:	48 mm
Dybde:	26 mm
Farge:	Grå
Vekt:	41 g
Akustisk forsterkning:	Ca. + 25 dB +/- 10 %