

## RadioLight FM – åpent system



RadioLight FM komplett m/bøylemottaker

HMS art. nr.: 020215

Best. nr.: 1104730

RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

HMS art. nr.: 025525

Best. nr.: 1104745

RadioLight FM sender for bøylemottaker - ÅPEN

HMS art. nr.: 020217

Best. nr.: 1104725

RadioLight FM sender for DIR og halsslyngemottaker

HMS art. nr.: 135140

Best. nr.: 1104985

RadioLight FM bøylemottaker - ÅPEN

HMS art. nr.: 020216

Best. nr.: 1104735

RadioLight FM halsslyngemottaker

HMS art. nr.: 025526

Best. nr.: 1104740

### INNHold

|   |   |
|---|---|
| RadioLight FM – åpent system .....                      | 1 |
| Tilkopling av RadioLight FM sender .....                | 2 |
| Hvordan virker halsslyngemottakeren? .....              | 3 |
| Mono- / stereo bryter .....                             | 4 |
| Kanalvelger – A, B, C .....                             | 4 |
| Innstilling av volumet på RadioLight FM mottakeren..... | 5 |
| Vedlikehold og renhold.....                             | 6 |
| Garanti .....   | 6 |
| Tekniske spesifikasjoner.....                           | 7 |
| Feilsøkingsskjema .....                                 | 8 |

**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN

Besøksadresse: Trollåsveien 8

Telefon: 66 99 60 00


Telefax: 66 80 94 90

Teksttelefon: 66 80 93 90

E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)

Website: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

## Tilkopling av RadioLight FM sender

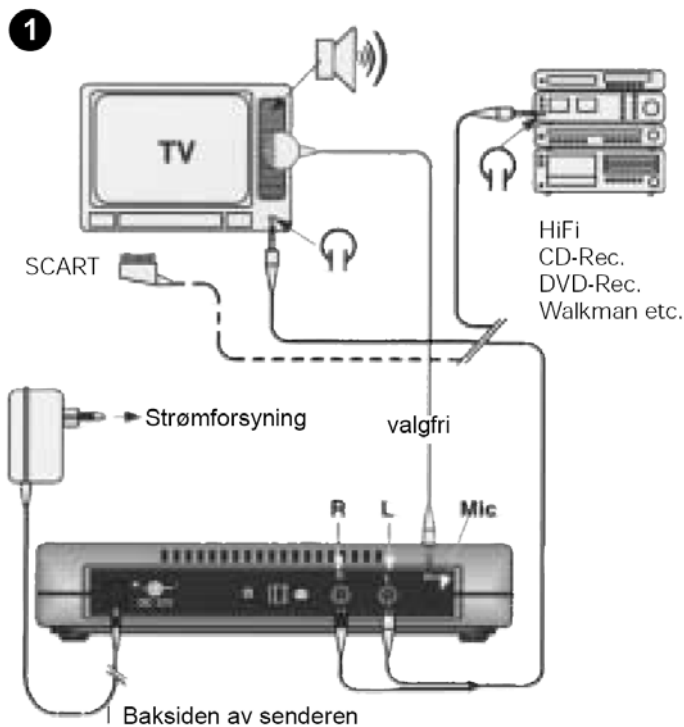


Enheten er uavhengig av volumkontrollen på TV'en. Volumkontrollen på TV, HIFI, CD bør stilles inn på et nivå som også er behagelig for de andre medlemmene av familien.

**2**

Når du første gang skal lade batteripakkene til hodetelefon mottageren, så lad dem opp i minimum 14 timer. Bruk ikke andre batterier enn InfraLight II batteripakker.


RadioLight FM pakke inkluderer to batteripakker og et plastdeksel.

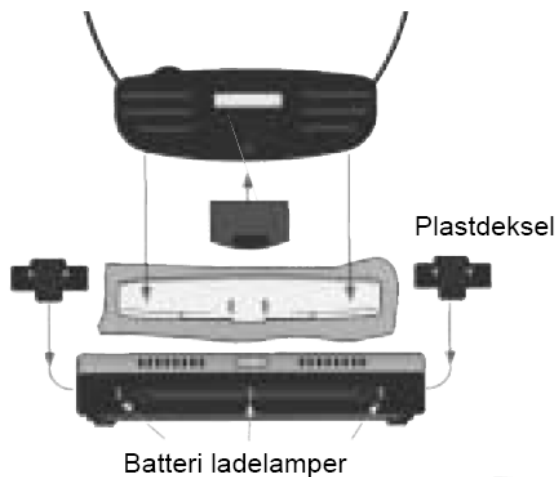

## Hvordan virker halsslyngemottakeren?

Første gangen halsslyngemottakeren lades skal den stå til lading i minst 14 timer. Det må kun benyttes originale ladeceller.

Enheten inneholder 2 ladeceller og 1 ”dummy”.

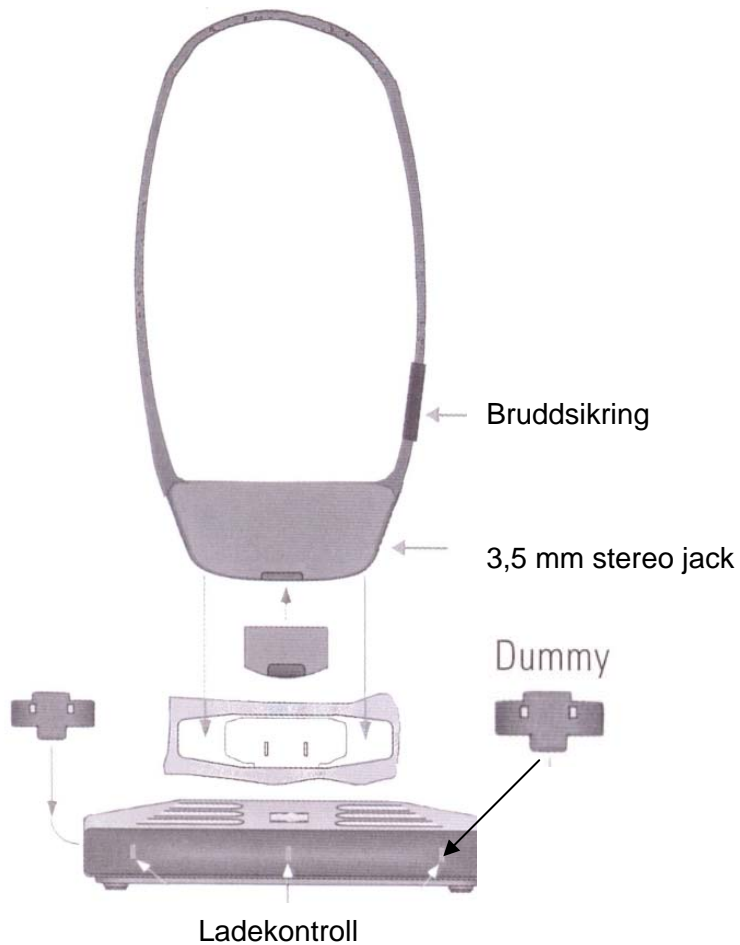

Bruddsikringen minsker faren for uhell samt gjør det enklere å ta halsslyngen på seg.


Bruk Av/på knappen på baksiden til å slå enheten av og på.

**Viktig:** Slå alltid AV mottakeren etter bruk da den ellers vil gå tom for strøm.

”Dummien” gjenkjennes lett da den ikke har noe kontaktflate i metall.

4

### Mono- / stereo bryter

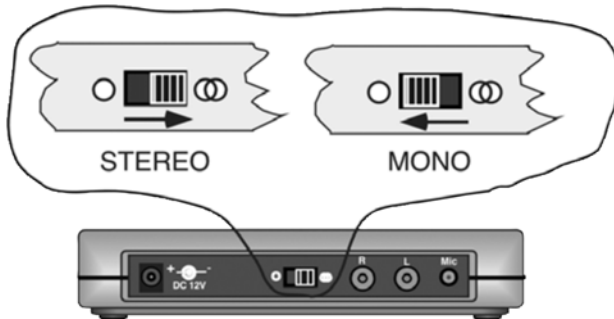


#### **NB!**

Hvis RadioLight FM er innstilt på "Stereo", men koplet til en lydkilde via en mono-plugg, så vil lyden bare kunne høres i ett øre. Hvis dette oppstår, sett bryteren i "Mono" posisjon.

5

### Kanalvelger – A, B, C

Med kanalvelgeren kan du endre frekvensen på senderen. Hvis kanal A er forvrengt, kan du skifte til en annen kanal.

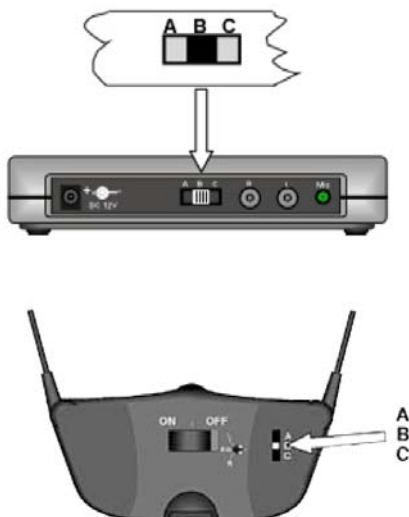

#### **NB!**

Hvis senderen stilles på en annen kanal, må også mottakeren stilles inn på denne kanalen. Sender og mottaker må være innstilt på samme kanal.

Kanalvelgeren er plassert på baksiden, både på senderen og mottakeren.


6

## Innstilling av volumet på RadioLight FM mottakeren


Halsslyngemottakeren skrus Av/På ved hjelp av volumkontrollen. Bryteren vil "kneppe" når det skrus Av/På.

Hodetelefon mottakeren slår seg automatisk på når den brukes. (Det er en bryter som aktiveres når hodebøylen presses litt fra hverandre.)

Mottakeren slår seg automatisk på når den brukes.

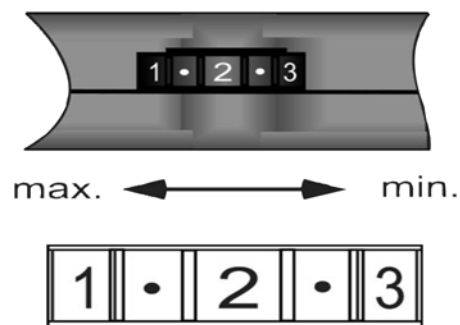

7

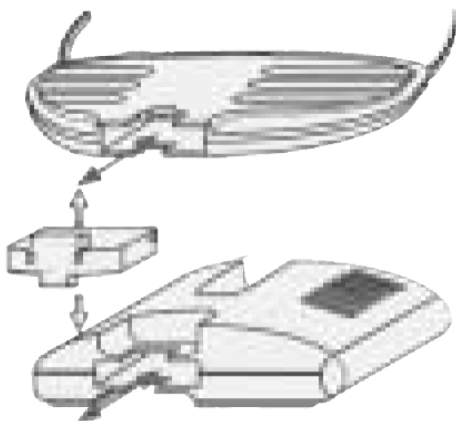


Hvis lyd kvaliteten på mottakeren blir støyende og forvrengt, bør du bytte batteripakken med en som er fulladet eller lade mottakeren med batteriet i.

**Advarsel: Ikke press batteripakken inn i laderen eller mottakeren. Den er enkel å plassere hvis den settes inn riktig.**

## 8

### Vedlikehold og renhold

Hvis anlegget trenger renhold, tørkes det av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Anlegget skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet.

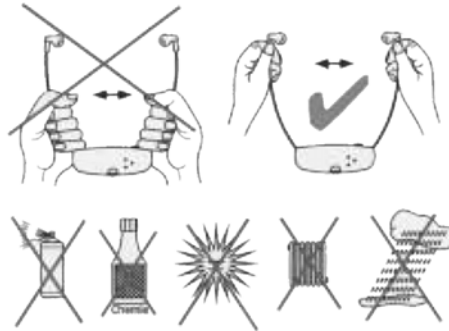

## 9

### Garanti

Garantitiden er 24 måneder. Ved feil må kvalifisert personell kontaktes. Garantien gjelder ikke ved uforsiktig bruk eller feil lagring.

## Tekniske spesifikasjoner

|                     |  |
|---------------------|--|
| Modulasjon          | FM   |
| Frekvens            | Kanal A: 863,5 Mhz<br>Kanal B: 864,0 Mhz<br>Kanal C: 864,5 Mhz |
| Frekvensrespons     | 15 – 20000 Hz  |
| Forvrengning        | < 1 %  |
| Støynivå            | Typ. 60 dB   |
| Ladetid for batteri | ca. 14 timer   |

### Hodebøyle mottaker

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Brukstid pr. ladning | ca. 5 timer |
| Maks. volum SPL      | ca. 120 dBA |
| Vekt                 | 61 g        |

### Sender

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Strømforbruk       | ca. 3.6 VA     |
| Apparatspenning    | 12 Volt DC     |
| Forsyningsspenning | 230 Volt 50 Hz |
| Vekt               | ca. 200 g      |

## Feilsøkingsskjema

| Symptom Årsak   |   | Løsning   |
|---|---|---|
| Kontrolllampene lyser ikke selv om batteriene er plassert korrekt i batteriskuffen.                   | Senderen er ikke koplet ordentlig til strømadapteren eller strømuttaket.                  | Sjekk at strømadapteren er koplet til strømkontakten og til senderen.   |
| Kontrollampene lyser ikke på den siden av senderen hvor batteriet er satt inn.                        | Det er ingen kontakt mellom batteriet og ladekontaktene i senderens batteriskuff.         | Batteriet er ikke satt inn korrekt i batteriskuffen.  |
| Det midterste ladelyset lyser ikke selv om mottakeren er plassert på senderen.                        | Det er ingen kontakt mellom batteriet i senderen og ladekontaktene i skuffen på senderen. | Mottakeren har ikke blitt satt inn riktig i skuffen. Sjekk at det er satt inn riktig vei.   |
|   | Det er ikke satt inn noe batteri i mottakeren.  | Sett inn batteri i mottakeren.  |
| Mottakeren fungerer ikke. Det blir ikke mottatt noe lydsignal.  | Senderen er ikke koplet riktig til TV eller HI-FI lydutgang.                              | Sjekk ordentlig at lydkablene er koplet riktig til TV eller HI-FI. Les gjennom bruksanvisningene til dette utstyret for å kontrollere at utgang for hodetelefon eller lydutgang er tilkoplet og fungerer korrekt. |
|   | Ditt TV eller HI-FI utstyr er ikke skrudd på.   |   |
| Mottakeren fungerer ikke, den mottar ingen lydsignaler.   | Det er ikke satt inn noe batteri i mottakeren.  | Sett inn batteri i mottakeren.  |
|   | Batteriet er utladet.   | Erstatt batteriet med et fulladet batteri.  |
| Lydoverføringen er av dårlig kvalitet, støyende, forvrengt, uklar eller ingen lydsignal blir mottatt. | For langt unna senderen.  | Gå nærmere  |
|   | Batteriet er utladet.   | Erstatt dette batteriet med et fulladet batteri.  |
| Batteripakken gir ikke lenger den brukstiden som er forventet pr. lading.                             | Batteripakken er ikke fulladet.   | Lad batteriet på nytt med korrekt ladetid.  |
|   | Batteripakken har nådd maks antall ladinger.  | Erstatt batteripakken med en ny.  |