

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

InfraLight




InfraLight komplett – sender og bøylemottaker
InfraLight komplett – sender og halsslyngemottaker
InfraLight sender til bøylemottaker - ÅPEN
InfraLight DIR sender til DIR- og halsslyngemottaker
InfraLight bøylemottaker - ÅPEN
InfraLight halsslyngemottaker

HMS art. nr.: 020218	Best. nr.: 1104755
HMS art. nr.: 020221	Best. nr.: 1104760
HMS art. nr.: 148428	Best. nr.: 1104850
HMS art. nr.: 135146	Best. nr.: 1104970
HMS art. nr.: 020219	Best. nr.: 1104765
HMS art. nr.: 020220	Best. nr.: 1104750

INNHold

IR-anlegg <i>InfraLight</i>	1
Tilkopling av <i>InfraLight</i> sender	2
Hvordan virker halsslyngemottakeren?	3
Dekningsområde.....	4
Mono-/stereo bryter	4
Innstilling av volumet på <i>InfraLight</i> mottakeren	5
Vedlikehold og renhold.....	6
Garanti	6
Tekniske spesifikasjoner.....	6
Feilsøkingsskjema	7

Tilkopling av InfraLight sender

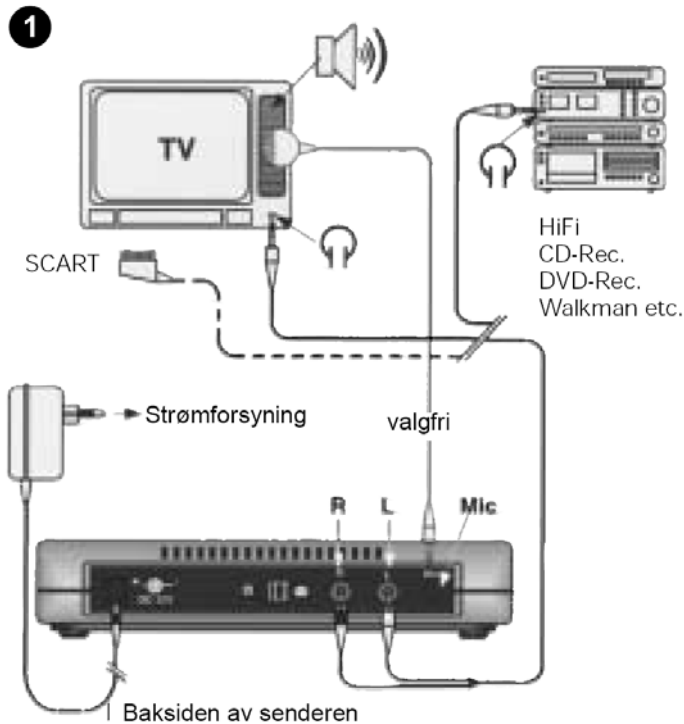


Ved bruk av scart er enheten uavhengig av volumkontrollen på TV'en. Still lyden på tuneren nesten helt opp. Bruk volumkontrollen på TV til å justere lyden, da sikrer du at lydnivået blir riktig.

2

Når du første gang skal lade batteripakkene til bøylemottakeren, så lad dem opp i minimum 14 timer. Bruk ikke andre batterier enn InfraLight batterier.


InfraLight setter inkluderer to batterier.

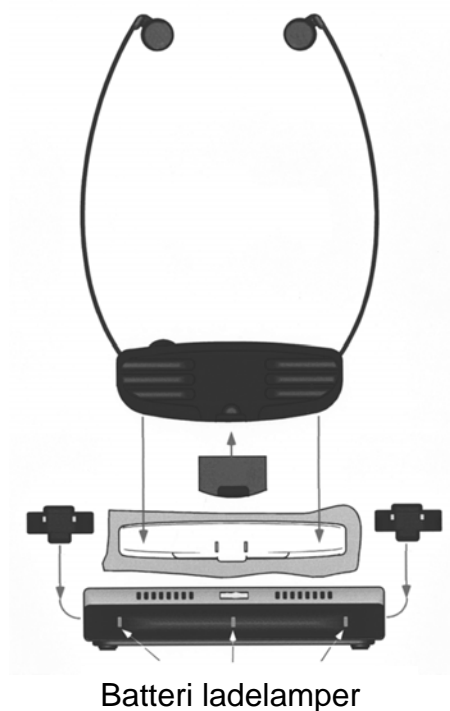

Hvordan virker halsslyngemottakeren?

Første gangen halsslyngemottakeren lades skal den stå til lading i minst 14 timer. Det må kun benyttes originale ladeceller.

Enheten inneholder 2 ladeceller og 1 "dummy".

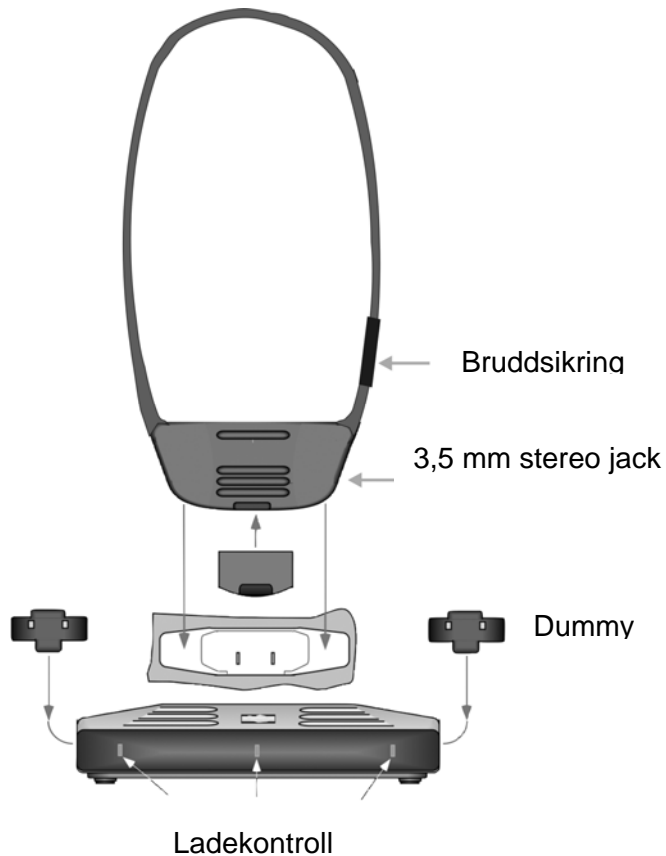

Bruddsikringen minsker faren for uhell samt gjør det enklere å ta halsslyngen på seg.


Bruk Av/På knappen på baksiden til å slå enheten av og på.

Viktig: Slå alltid AV mottakeren etter bruk da den ellers vil gå tom for strøm.

"Dummien" gjenkjennes lett da den ikke har noe kontaktflate i metall.

4

Det er viktig å passe på at ingen ting hindrer "synslinjen" mellom senderen og mottageren din.

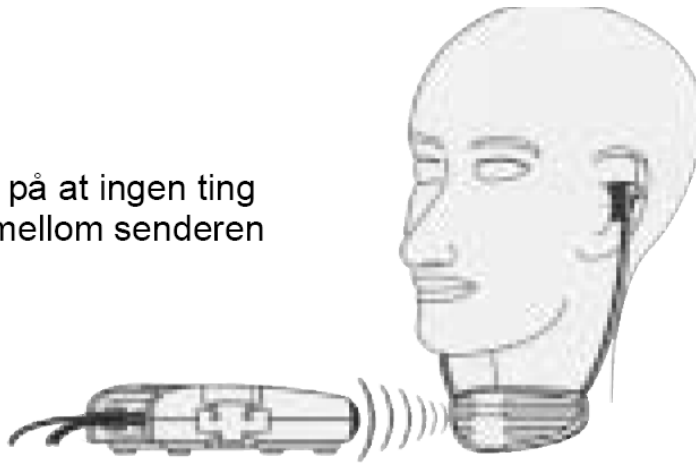


5

Dekningsområde

Dekningsområdet for InfraLight testes ved at man tilfører lyd i senderen, tar på seg mottakeren og beveger seg rundt i området foran senderen. Plasser senderen slik at du har best mulig lyd der du vanligvis sitter / oppholder deg.

6

Mono-/stereo bryter

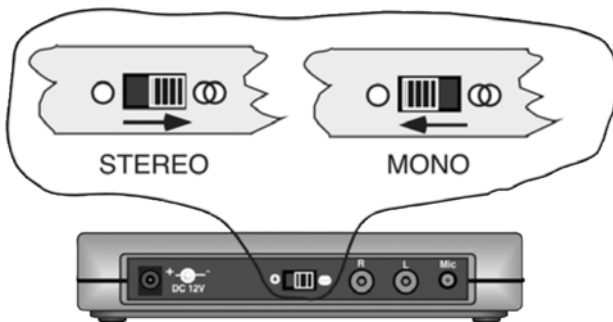

NB!

Hvis InfraLight er innstilt på "Stereo", men koplet til en lydkilde via en mono-plugg, så vil lyden bare kunne høres i ett øre. Hvis dette oppstår, sett bryteren i "Mono"-posisjon.


7

Innstilling av volumet på InfraLight mottakeren


Halsslyngemottakeren skrur av/på ved hjelp av AV/PÅ bryter.

Hodetelefon mottakeren slår seg automatisk på når den brukes. (Det er en bryter som aktiveres når hodebøylen presses litt fra hverandre.)

Volumet justeres med volumknappen.

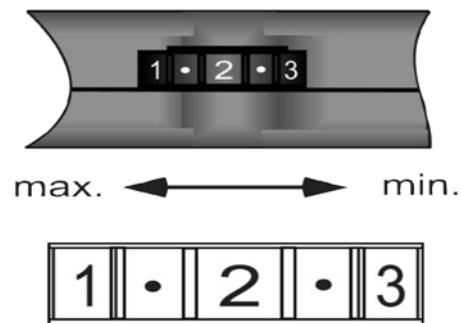

8

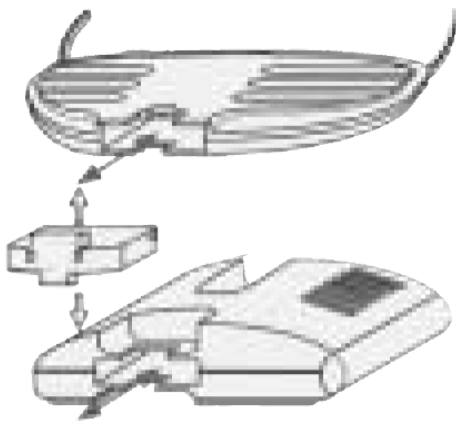


Hvis lyd kvaliteten på mottakeren blir støyende og forvrengt, bør du bytte batteripakken med en som er fulladet eller lade mottakeren med batteriet i.

Advarsel: Ikke press batteripakken inn i laderen eller mottakeren. Den er enkel å plassere hvis den settes inn riktig.

9

Vedlikehold og renhold

Hvis anlegget trenger renhold, tørkes det av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Anlegget skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet.

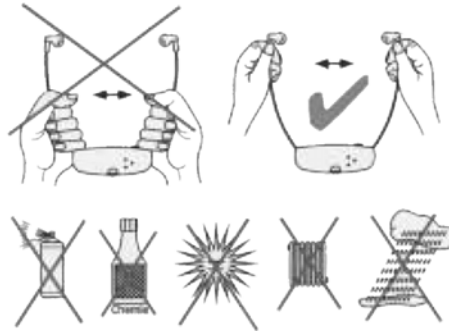

10

Garanti

Garantitiden er 24 måneder. Ved feil må kvalifisert personell kontaktes. Garantien gjelder ikke ved uforsiktig bruk eller feil lagring.

11

Tekniske spesifikasjoner

Sendeteknikk	IR
Frekvens	2,3 / 2,8 MHz
Frekvensrespons	15 – 20000 Hz
Forvrengning	< 1 %
Støynivå	Typ. 60 dB
Ladetid for batteri	ca. 14 timer

Mottaker

Brukstid pr. ladning	ca. 6 timer
Maks. volum SPL	ca. 120 dBA
Vekt	62 g

Sender

Strømforbruk	ca. 3.6 VA
Apparatspanning	12 Volt DC
Forsyningsspenning	230 Volt 50 Hz
Vekt	ca. 200 g

Feilsøkingsskjema

Symptom	Årsak	Løsning
Kontrolllampene lyser ikke selv om batteriene er plassert korrekt i batteriskuffen.	Senderen er ikke koplet ordentlig til strømadapteren eller strømuttaket.	Sjekk at strømadapteren er koplet til strømkontakten og til senderen.
Kontrolllampene lyser ikke på den siden av senderen hvor batteriet er satt inn.	Det er ingen kontakt mellom batteriet og ladekontaktene i senderens batteriskuff.	Batteriet er ikke satt inn korrekt i batteriskuffen.
Det midterste ladelyset lyser ikke selv om mottakeren er plassert på senderen.	Det er ingen kontakt mellom batteriet i senderen og ladekontaktene i skuffen på senderen.	Mottakeren har ikke blitt satt inn riktig i skuffen. Sjekk at det er satt inn riktig vei.
	Det er ikke satt inn noe batteri i mottakeren.	Sett inn batteri i mottakeren.
Mottakeren fungerer ikke. Det blir ikke mottatt noe lydsignal.	Senderen er ikke koplet riktig til TV eller HI-FI lydutgang.	Sjekk ordentlig at lydkablene er koplet riktig til TV eller HI-FI. Les gjennom bruksanvisningene til dette utstyret for å kontrollere at utgang for hodetelefon eller lydutgang er tilkoplet og fungerer korrekt.
	Ditt TV eller HI-FI utstyr er ikke skrudd på.	
Mottakeren fungerer ikke, den mottar ingen lydsignaler.	Det er ikke satt inn noe batteri i mottakeren.	Sett inn batteri i mottakeren.
	Batteriet er utladet.	Erstatt batteriet med et fulladet batteri.
Lydoverføringen er av dårlig kvalitet, støyende, forvrengt, uklar eller ingen lydsignal blir mottatt.	"Synslinjen" mellom senderen og mottakeren er brutt eller du er for langt unna mottakeren med senderen din.	Kontroller at forsiden av senderen ikke er skygget for og at det er en fri "synslinje" til å sende signaler. Sjekk at du ikke er plassert for langt fra senderen.
	Batteriet er utladet.	Erstatt dette batteriet med et fulladet batteri.
Batteripakken gir ikke lenger den brukstiden som er forventet pr. lading.	Batteripakken er ikke fulladet.	Lad batteriet på nytt med korrekt ladetid.
	Batteripakken har nådd maks antall ladinger.	Erstatt batteripakken med en ny.