

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Vekkerklokke DS-1 uten mottaker



Vekkerklokke DS-1 uten mottaker

HMS art. nr.: 135483

Best. nr.: 1104818



INNHold

Vekkerklokke DS-1	1
Skisser – forfra og bakfra.....	2
Generelt.....	3
Leveringsomfang	3
Idriftsettelse	3
Innstilling av tid.....	3
Innstilling av alarm/vekkertid	3
Slå Av/På alarmfunksjonen.....	4
Innstilling av tonefrekvens	4
Innstilling av lydstyrke	4
Gjentatt vekking ('snooze'/slumre-funksjon)	5
Spesielle egenskaper.....	5
Vedlikehold og renhold.....	5
Garanti	5
Tekniske data.....	5

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Skisser – forfra og bakfra

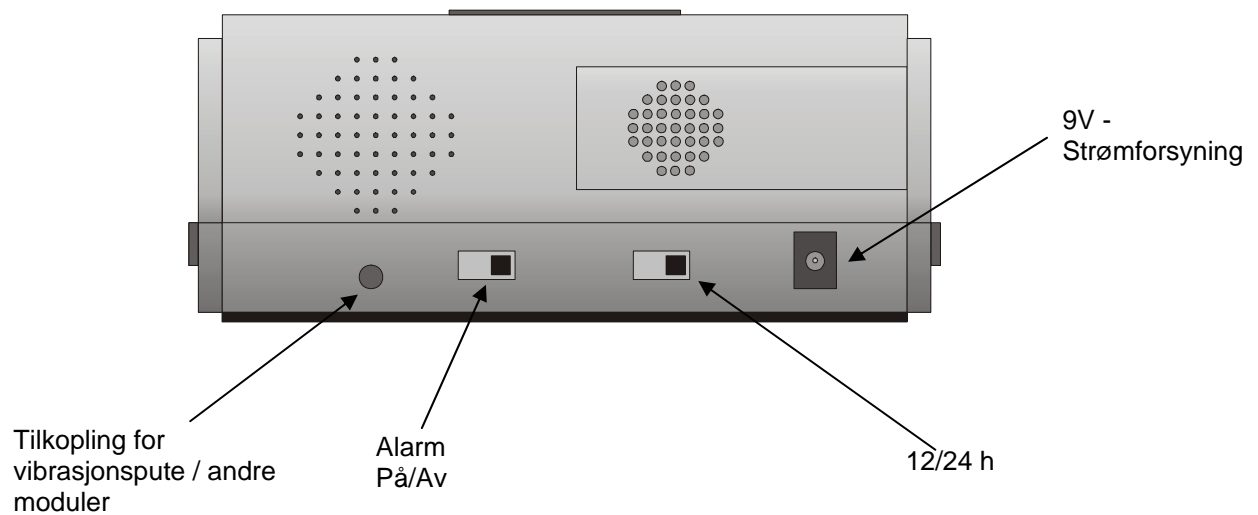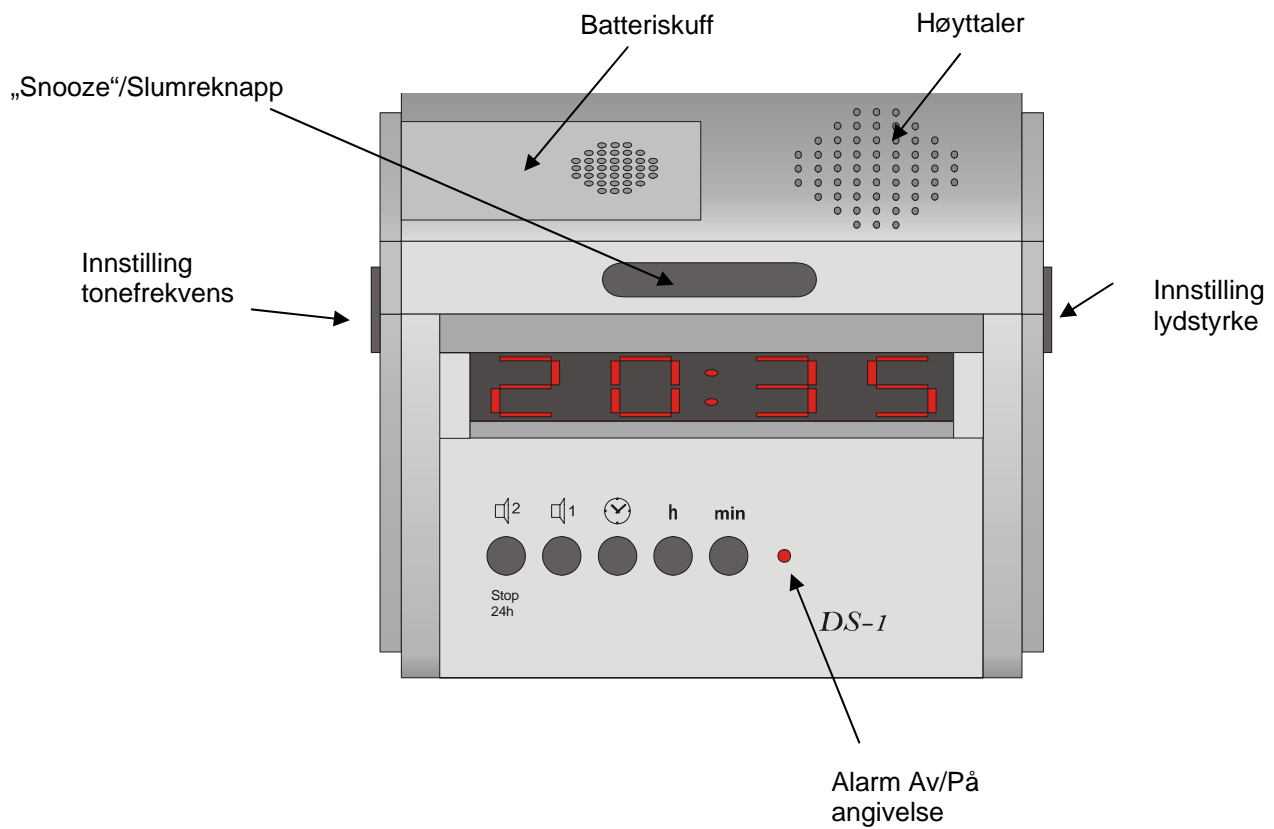

Generelt

Med vekkerklokke DS-1 har du et moderne og driftsikkert system. Vekkerklokken er et elektronisk ur med digital anvisning av tiden. Det vekker med et akustisk signal som kan reguleres både i tonehøyde og lydstyrke. Den kan tilkoples følgende utstyr:

- Vibratorpute
- Blitzlampe
- Switch enhet
- Akustisk modul

Leveringsomfang


Kontroller at følgende deler er mottatt:

- Vekkerklokke DS-1
- 9 V Strømforsyning
- Vibrator

Idriftsettelse

Sett strømforsyningen (9V) inn i vekkerklokken (på baksiden) og sett strømforsyningen i stikkontakten. De lysende tallene i displayet vil begynne å blinke. Dette angir at klokken har strøm og at tiden ikke er innstilt. Blinkingen forsvinner når tiden er innstilt.

Innstilling av tid

Tast  knappen samtidig med knappen for time (h-knappen), eller tasten for minutter (min-knappen). Still inn riktig tid for timer og minutter.


Merk:

Klokken kan innstilles slik at tiden vises i 12 timers- eller 24 timers modus. Dette velges med en skyvetast på baksiden av klokken merket 12/24h.


Innstilling av alarm/vekkertid

Klokka har mulighet for innstilling av 2 uavhengige tidspunkter.

Vekkealarm 1



Tast  1 og samtidig knappen for time (h) eller minutt (min) og still inn ønsket tidspunkt. Vekkesignalet varer i 3 minutter.

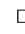Vekkealarm 2

Tast  2 og samtidig knappen for time (h) eller minutt (min) og still inn ønsket tidspunkt. Vekkesignalet varer i 3 minutter.

Merk:

Ved første gangs idriftsettelse er bare vekkealarm 1 aktiv.


Begge vekketidspunktene kan aktiveres uavhengig av hverandre. Hold inne tast  1 og tast  2 samtidig som du betjener ”snooze” knappen. Ved hvert trykk på ”snooze” knappen vil en av de 3 mulighetene for aktivering bli vist i displayet.

Du kan velge mellom følgende innstillinger:


Vekkealarm 1 aktiv:	Displayet viser: AL 1 -
Vekkealarm 2 aktiv:	Displayet viser: AL - 2
Vekkealarm 1 og Vekkealarm 2 aktiv:	Displayet viser: AL 1 2

I tillegg til displayet vil lysdioden vise hvilken alarm som er aktiv:

Vekkealarm 1 aktiv, korte blink:

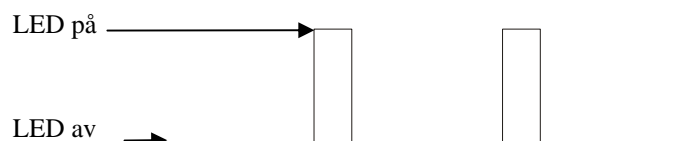

Vekkealarm 2 aktiv, lange blink med korte opphold:

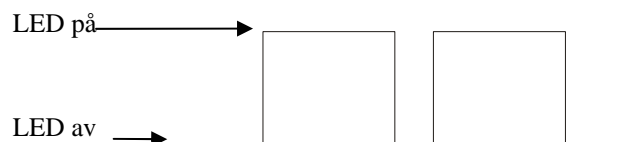

Vekkealarm 1 og 2 aktiv:

Lysdioden lyser hele tiden.

Slå Av/På alarmfunksjonen

Alarmfunksjonen slås av og på med skyvetasten på klokkens bakside. Står bryteren i stilling “Off” er begge alarmer deaktivert.

Innstilling av tonefrekvens

Tonehøyden kan reguleres ved å dreie på innstillingsknappen på venstre siden av klokka. Ved å dreie til venstre blir tonen lysere, og ved å dreie til høyre blir tonen dypere.

Merk:

Dreies innstillingsknappen mot venstre helt til den stopper, er vekketonen koplet ut.

Innstilling av lydstyrke

Lydstyrken reguleres ved å dreie på innstillingsknappen på høyre side. Ved å dreie til venstre blir lyden lavere, og ved å dreie til høyre blir lyden høyere.

Gjentatt vekking ("snooze"/ slumrefunksjon)

Ved å trykke på "snooze" knappen under alarmering stoppes alarmen og gjentas etter ca.5 minutter.

Stoppe alarm

Trykk på "stop 24h" knappen og alarmen stoppes.

Spesielle egenskaper

- Blir ikke alarmen stoppet ved å trykke på „snooze“ knappen eller knappen merket "stop 24h", vil alarmen gjentas automatisk etter 4 minutter (autosnooze).
- Ved strømbrudd vil klokken fungere og gi alarm hvis det er satt inn 9V batteri type 6LR61. For å spare strøm ved strømbrudd slås tallene på klokkes display midlertidig av.
- Batterikapasiteten kan sjekkes ved å trykke på "snooze" knappen. Ved lavt batteri vil det lyse "LO" på displayet. Batteriet må da byttes for sikre drift ved strømavbrudd.

Vedlikehold og renhold

Vekkerklokke DS-1 er vedlikeholdsfri. For renhold tørkes apparatet av med en lett fuktet klut. Benytt aldri alkohol, tynner eller andre organiske løsemidler. Apparatet skal ikke utsettes for sterkt sollys, varme eller fuktighet.

Garanti

Garantitiden er 24 måneder. Ved feil må kvalifisert personell kontaktes. Sjekk først at alle styreledninger er riktig tilkopleet og at støpselet står i stikkontakten.

Tekniske data

Strømforsyning: 9V nettadaptor

Effektforbruk: ca. 2,5 Watt