

Time flash analog vekkerklokke

Brukerveiledning

GEWA

- helping people

Time flash analog vekkerklokke m/vibrator, lys og lyd



Time flash analog vekkerklokke

HMS nr. 020232

Art. nr. 1104820

INNHold

Time flash analog vekkerklokke	1
Generelt	2
Skisser – forfra og bakfra	2
Standard komponenter	3
Oppstart	3
Stille klokken	3
Stille inn alarmtidspunkt	3
Aktivere vekkerklokke funksjonen	3
Skru på lydalarmer	3
Slumre-/repetisjonsalarm	3
Bakgrunnslys	4
Batteri back-up	4
Batteri-indikator	4
Spesielle egenskaper for denne vekkerklokken	4
Tekniske spesifikasjoner	4

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN

Besøksadresse: Trollåsveien 8

Telefon: 66 99 60 00

Telefax: 66 80 94 90

Teksttelefon: 66 80 93 90

E-post: gewa@gewa.no

Website: www.gewa.no



Generelt

Lisa Time Flash er en elektronisk klokke med analogt display. Når alarmen utløses blir du varslet med blinkende lys og/eller vibrering (vibrator følger med).

Skisser – forfra og bakfra

Lys / Slumre (repetisjon)

Høytaler til lydalarm

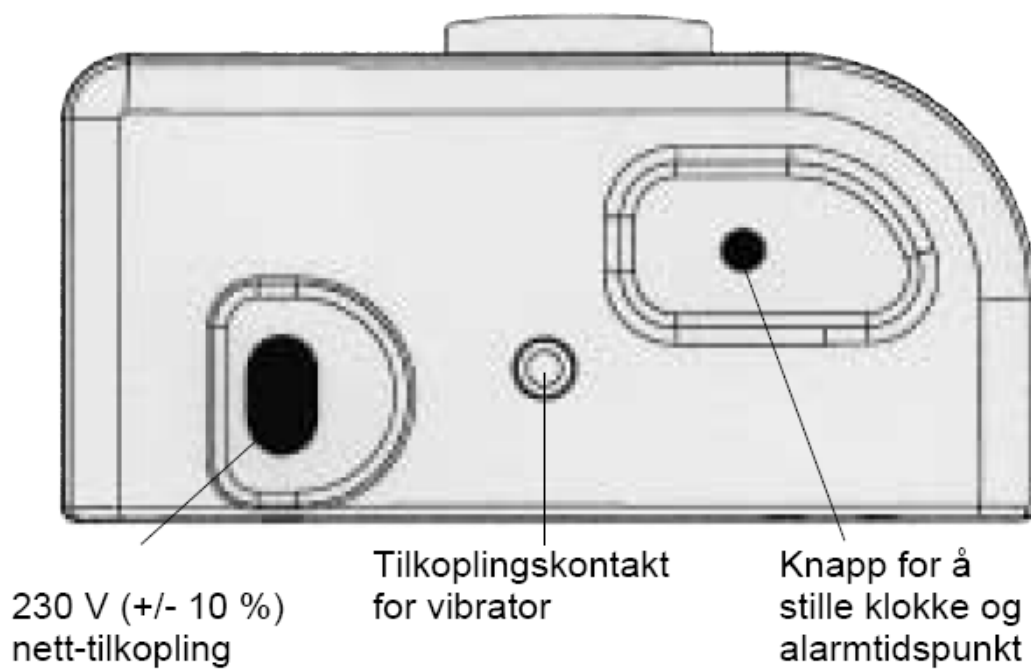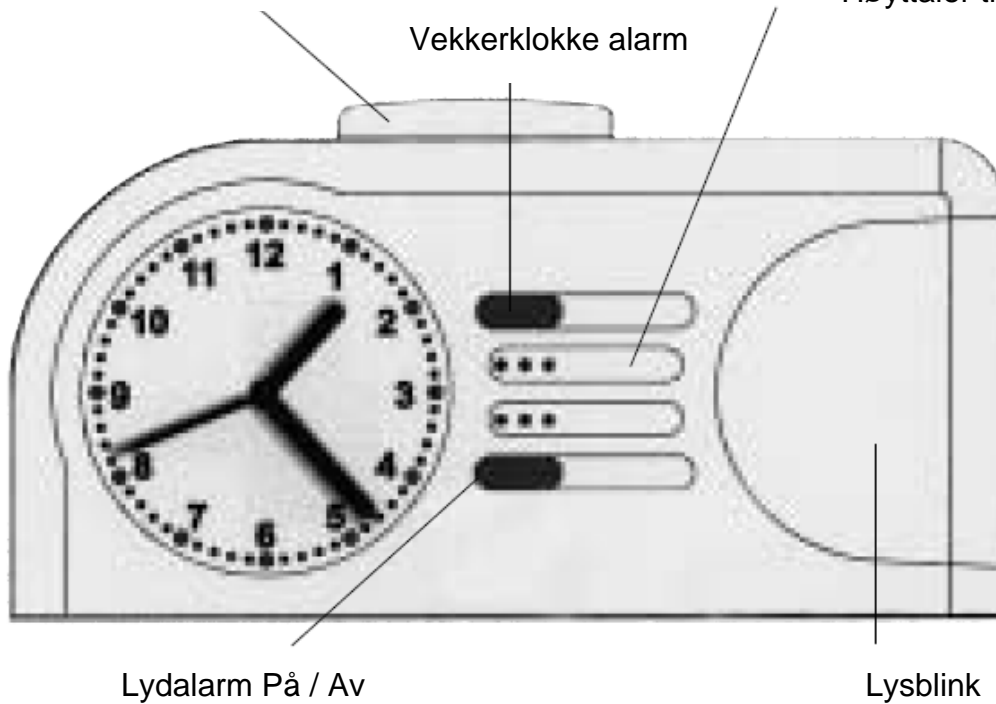

Standard komponenter

- Vekkerklokke
- 230 V strømtilkopplingsenhet
- Vibrator

Oppstart

Sett strømledningen i kontakten på vekkerklokken og stikkkontakten i støpslet. Sett i vibratoren i tilkoplingspunktet for denne og plasser vibratoren under puten.

Stille klokken

Trekk forsiktig ut knappen for å stille inn tid/alarm. Når knappen er ute, vris den i pilens retning til du kommer til ønsket tidspunkt.

NB! Ikke bruk stor kraft når knappen trekkes ut for innstilling av tid/alarm.

Stille inn alarmtidspunkt

Skru knappen for innstilling av tid/alarm i pilens retning til ønsket alarmtidspunkt.

Aktivere vekkerklokke funksjonen

Skru på vekkerklokkefunksjonen med Av / På bryter.

- Trykk inn knappen:
Vekkerklokke-funksjonen er skrudd på (grønn kontur er synlig rundt knappen).
- Trykk på knappen slik at den kommer ut:
Vekkerklokke-funksjonen er skrudd av.

Skru på lydalarmer

Skru på lydalarmer ved hjelp av knappen Lydalarm På/Av.

- Trykk inn knappen:
Lydalarmer er skrudd på (grønn kontur er synlig rundt knappen).
- Trykk på knappen slik at den kommer ut:
Lydalarmer er skrudd av.

Slumre-/repetisjonsalarm

Trykk på Lys-/slumreknappen for å slå av vekkerklokke alarmer som ringer. Alarmer blir utløst igjen etter ca. 5 minutter.

Bakgrunnslys

Trykk på Lys-/slumreknappen vil klokken bakgrunnslys lyse.

Batteri back-up

Det oppladbare batteriet vil forsyne klokken med strøm i opp til 8 timer ved strømavbrudd. Klokken vil fungere som normalt.

Batteri-indikator

Spenningen i det oppladbare batteriet er for lav hvis personsøker lampen lyser selv om det ikke er noe aktivt signal. Kople da vekkerklokken til strømuttaket.

Viktig!

Lise Time Flash klokke må lades opp i noen timer hvis den har vært lagret flere måneder (f. eks. i butikk) før alle dens funksjoner igjen blir aktivert (nødvendig for det innebygde batteriet å bli ladet opp).

Spesielle egenskaper for denne vekkerklokken

- Alarmsignalene blir repetert etter 4 minutter (automatisk repetisjon) hvis du ikke trykker på knappen Lys-/slumre eller Lydalarm På/Av.
- Kvartsmekanismen på vekkerklokken har strømforsynings back-up. Klokken vil fortsette å virke i ca. 2 timer ved for eksempel et strømavbrudd.
- Lyset på forsiden av klokken aktiveres når alarmen blir utløst.
- Både den grønne markeringen rundt Alarm Av/På og Repetisjons-/slumreknappen vil lyse når alarmen utløses.
- Du kan velge mellom to forskjellige alarmtypene på følgende måte:
 - Skru alarmen AV.
Trykk og hold inne **Slumre-/repetisjonsknappen** i 3 sekunder.
 - Slå alarmfunksjonen På igjen:
Slumre-/repetisjonsknappen blinker nå for å indikere at den andre alarmtypen har blitt valgt.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning: 230 v, 50 hZ

Strømforbruk: Ca. 1 watt