

Brukerveiledning

GEWA

- helping people

freeTEL 2

trådløs telefon med halsslynge og kraftig lyd



FreeTel 2 - komplett m/basestasjon (til venstre):

Best. nr. 1104905

FreeTel 2 - håndsett m/lader (til høyre);

Best. nr. 1104906

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHETSFORSKRIFTER	4
STARTPROSEDYRE	5
<i>Emballasjens innhold</i>	5
<i>Telefontilkoblinger</i>	5
<i>Batterier</i>	6
<i>Batteriladerens status skjerm</i>	6
<i>Dekningsområde</i>	7
<i>Betjeningspanel for håndsett</i>	8
<i>Betjeningspanel for basestasjon</i>	9
STARTMENY	10
TASTATURLÅS	10
HVORDAN BRUKE TELEFONEN.....	11
<i>Ringe</i>	11
<i>Svare på anrop</i>	11
<i>Gjenta oppringing</i>	11
<i>Slå mikrofon av / på</i>	12
<i>Innstilling av høyttaler volum- / diskant- / basskontroll</i>	12
TELEFONBOKEN	13
<i>Hvordan bruke telefonboken</i>	13
<i>Lagring av navn / nummer</i>	14
<i>Tastenes konfigurasjon</i>	15
<i>Hvordan ringe direkte fra telefonboken</i>	16
<i>Endre navn / nummer som allerede er lagret i telefonboken</i>	17
<i>Hvordan slette en oppføring fra telefonboken</i>	17
HVEM RINGER	18
<i>Hvordan det fungerer</i>	18
<i>Avlesing og oppringing av tapte anrop</i>	18
<i>Sletting av en post / tapt anrop</i>	19
<i>Lagre en post i telefonboken</i>	20
INNSTILLING AV TELEFONSVARER	21
<i>Generelt</i>	21
<i>Angivelse av Dag / Tid</i>	21
<i>Innstilling av telefonsvarerens (TAM) funksjoner</i>	22
<i>Innspilling av talemelding</i>	23
<i>Hvordan lytte til en talemelding</i>	24
BESKJEDER.....	25
<i>Avspilling av beskjed</i>	25
<i>Viktig betjeningsselementer i beskjed menyen</i>	26
<i>Sletting av gamle beskjeder</i>	26
<i>Lagring av notater</i>	27
<i>Melodi- / ringevolum</i>	27
<i>Endring av navn på den mobile enheten</i>	28
<i>Endring av språket i menyen</i>	29
<i>Registrering av telefon / basis stasjon</i>	30
<i>Fjerne en mobil enhet fra basis stasjonen</i>	31
SOS FUNKSJONER / ENDRING AV INNSTILLINGER	32

<i>Generelt</i>	32
<i>Aktivering / Deaktivering av SOS funksjon</i>	33
<i>Lagring av SOS nummer</i>	33
<i>Endring av SOS nummer</i>	34
<i>Sletting av SOS nummer</i>	35
<i>Lytte til en utgående SOS melding</i>	37
NETTVERKETS EGENSKAPER: RINGEMODUS / TIDSINTERVALL FOR LYSSIGNAL / RINGEPAUSE	38
<i>Innstilling av ringemodus</i>	38
<i>Innstilling av tidsintervall for lyssignal</i>	38
<i>Innstilling av ringepause</i>	39
FLERE SETT MOBILE ENHETER	40
<i>Interne samtaler</i>	40
<i>Overføring av samtale mellom trådløse telefoner</i>	41
TILBAKEFØRING TIL TELEFONENS FABRIKKINNSTILLING	42
NÅR TELEFONEN IKKE FUNGERER (<i>FEILSØKING</i>)	43
<i>Generelt</i>	43
<i>Telefonen ringer; men telefonnummeret er ikke synlig på skjermen</i>	43
<i>Varseltone under samtale</i>	43
<i>Telefonen virker ikke</i>	44
SUPPLERENDE OPPLYSNINGER (<i>APPENDIX</i>)	45
<i>Bruk og vedlikehold</i>	45
<i>Garanti</i>	45
<i>CE – merket</i>	45
<i>Tekniske data</i>	47

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les nøye igjennom sikkerhetsinstruksjonene og da særlig avsnittet merket „Startprosedyre“ før du betjener og tar i bruk telefonen. Disse instruksjonene er ment å øke sikkerheten.

- Plasser basis stasjonen på et sklisikkert underlag.
- Legg tilslutningskabelen slik at ingen snubler over den.
- Sørg for at telefonen aldri blir eksponert for forstyrrende elementer som:
 - varmekilder
 - direkte sollys
 - fuktighet
 - andre elektroniske apparater
- Beskytt telefonen mot fuktighet, damp, støv og etsende væsker.
- Pass på at tilslutningskablene bare kobles til strømkilder som angitt på produktet.
- Bruk bare tilbehør som er godkjent for bruk sammen med telefonen.
- Prøv aldri på å
 - åpne basis stasjonen eller den mobile enheten på egen hånd!
 - foreta telefonsamtaler under ekstreme værforhold som f.eks. storm.


STARTPROSEDYRE

Emballasjens innhold

Følgende deler er inkludert med produktet:

- Telefon (mobil enhet)
- Basis stasjon
- Nettadapter
- Telefonkabel
- 2 batterier (NiMH)
- Brukerveiledning
- Garantibevis

Telefontilkoblinger

1. Koble strømenheten til vegginntaket og kontakten til basis stasjonen.
2. Koble telefonkabelens ene plugg til basis stasjonen.
3. Koble telefonkabelens andre plugg til sokkelen for din telefonlinje.
4. Sett de to batteriene på plass i den mobile enheten og legg deretter på dekslet.
MERK: Sjekk polene på batteriene!
5. Plasser den mobile enheten og nøkkelputen slik at de står med fronten i basis stasjonen. Så snart den mobile enheten er korrekt plassert, vil batterisymbolet og den røde ladelampen på den mobile enheten, starte og lyse  på skjermen.


FORSIKTIG!

Plasser **aldri** basis stasjonen i nærheten av f.eks. TV, video, andre telefoner, ventilatorer etc. Dette for å minimalisere risikoen for forstyrrelser. Eksponer aldri basis stasjonen for direkte sollys eller plassering i nærheten av et varmelement.

Batterier

Telefonen leveres med NiMH batterier. Hvis batteriene blir korrekt ladet og utladet, vil de ha en lang levetid.

Fullt ladede batterier har en standby tid på ca. 100 timer eller en maksimum taletid på 10 timer. Beregnet ladetid for fullt utladede batterier er ca. 14 timer.

Indikatorlampen for batteriladerens status blinker mens telefonen lader. Så snart ladingen er fullført, vil symbolet  vises på skjermen. Telefonen er utstyrt med en automatisk ladekontroll, hvilket motvirker batteriene fra å bli overladet.

Viktig!

Batteriene **må** lades i 24 timer første gangen telefonen er tilkoblet.

NB: Sørg for å ta ut batteriene som sitter i den mobile enheten, dersom telefonen ikke er i bruk over en lengre periode (= *mer enn 6 måneder*).

Batteriladerens status skjerm

Når batteriene virtuelt er tomme, vil symbolet  vises på skjermen til den mobile enheten. I tillegg høres et varselsignal. Hvis telefonen ikke lades omgående, og batteriet er helt tomt vil, den mobile enheten slå seg av automatisk og forbli avslått til batteriene igjen er ladet.


Dekningsområde







Telefonens dekningsområde kan variere mellom 30 og 300 m. Radiosignalene for sending kan forstyrres av en rekke faktorer.

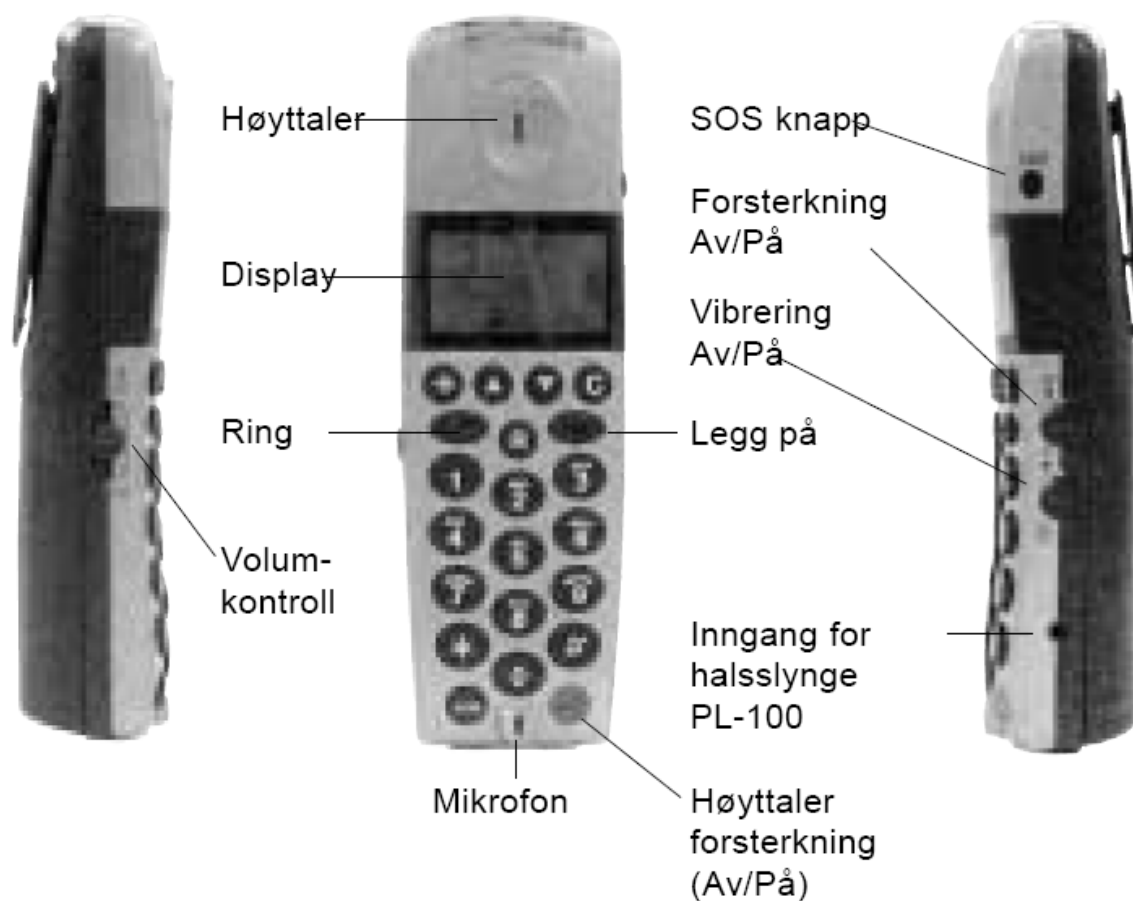Maksimum dekning er kun oppnåelig dersom det ikke er noen forstyrrende elementer mellom telefonen og basis stasjonen (*ved ideelle forhold er dekningen 300 m*). Dekningen begrenses av vegger inne i hus eller leilighet. Ideelt sett, bør basis stasjonen plasseres i en skråstilt posisjon.



Dersom den mobile enheten taes med utenfor rekkevidde under en samtale, vil et varselssignal høres. Dersom det ikke er mulig å bringe den mobile enheten nærmere basis stasjonen, vil du kanskje oppleve at samtalen brytes.

Betjeningspanel for håndsett




-  Menyvalg / bekreft valg
- C** Slett
-   Pil opp  ned 
-  Gå til startmeny

Betjeningspanel for basestasjon

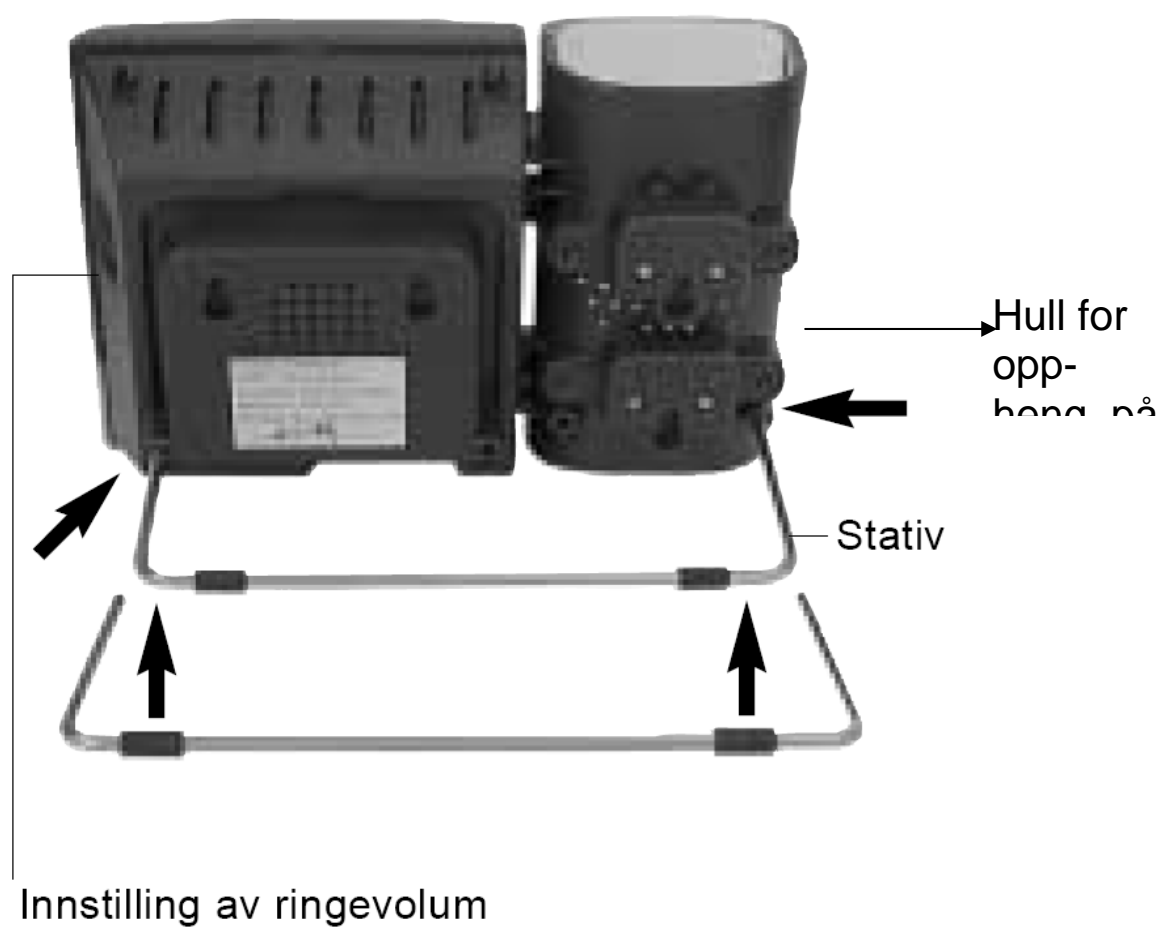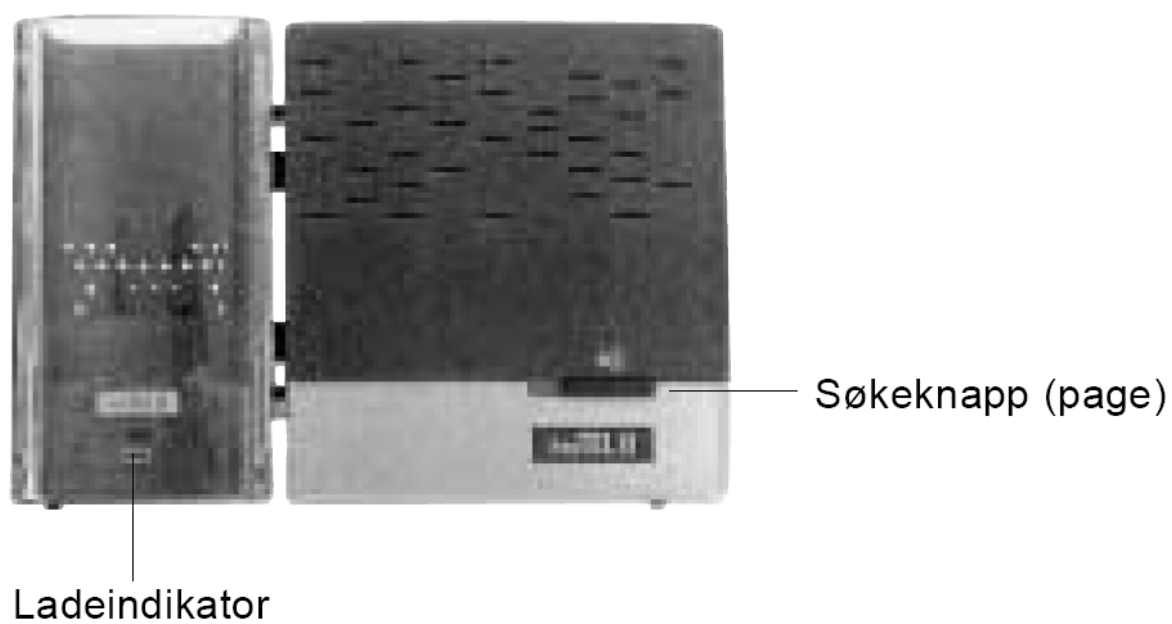



STARTMENY

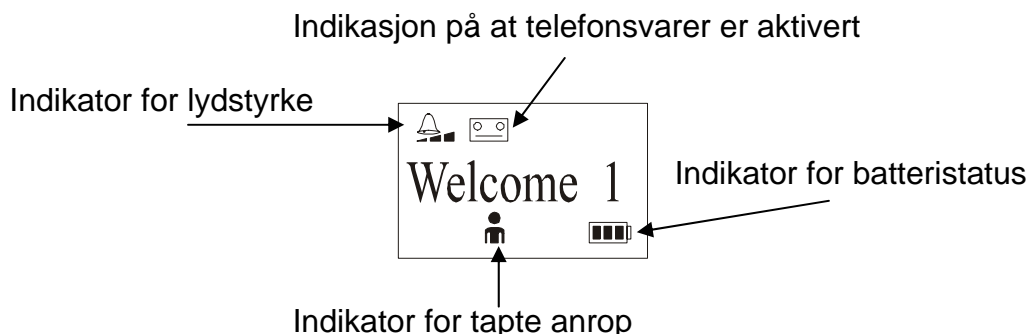



TASTATURLÅS

For å aktivere tastaturlåsen, gjør følgende:

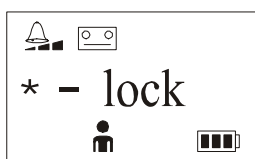


1. Trykk og hold nede tasten merket * - lock til teksten „Tastaturlås PÅ“ (*Key Locked*) dukker opp på skjermen.
2. Trykk på tasten merket  for å bekrefte. Deretter vil teksten „Tastaturlås PÅ“ (*Key Locked*) vil dukke opp på skjermen og tastaturfeltet låst. Teksten „Tastaturlås PÅ“ (*Key Locked*) vil ikke komme opp igjen før SOS funksjonen har blitt deaktivert på skjermen.

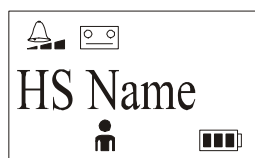


3. For å frigjøre tastaturlåsen, trykk og hold nede tasten merket * - lock helt til teksten „Tastaturlås AV?“ (*Key Unlocked*) dukker opp på skjermen.
4. Trykk tasten merket . Telefonen vil nå gå tilbake til Start menyen og tastaturfeltet er igjen aktivert.


HVORDAN BRUKE TELEFONEN


Ringe

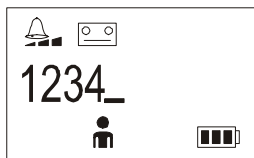


1. Tast inn ønsket telefonnummer (maks. 20 siffer). Ved feil inntasting, trykk **C** for å fjerne.

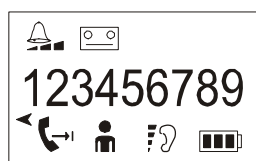

2. Trykk på tasten merket . Telefonen har registrert nummeret, og ringer ut.


3. Samtalen avsluttes ved å trykke tasten merket .

Svare på anrop

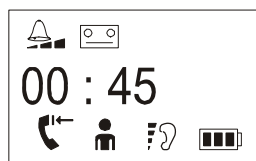





1. Telefonen ringer.

2. Trykk tasten merket  for å svare.

3. Avslutt samtalen ved å trykke tasten merket .

Gjenta oppringing

Ved å trykke tasten merket  vil du få en oversikt over tidligere oppringte nummer.


1. Trykk tasten  og bla opp og ned ved å bruke tastene   til du finner det ønskede nummeret.

2. Ved å trykke en gang til på tasten  ringer du ut.

Slå mikrofon av / på


Du kan slå mikrofonen av og på den mobile enheten under en telefonsamtale.

Prosedyren for å slå mikrofonen AV er:

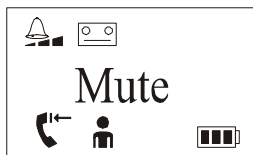

1. Trykk på **C** tasten. Mikrofonen er nå slått AV, og teksten „Mute“ dukker opp på skjermen.
2. Trykk en gang til på **C** tasten for å på mikrofonen igjen.

Innstilling av høytaler volum- / diskant- / basskontroll

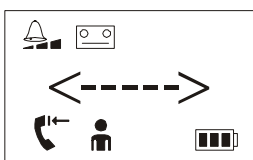

Høytalerens volum kan stilles inn under telefonsamtalen ved å benytte piltastene på fronten av den mobile enheten.

Høytalerens volum kan økes eller senkes i et fem 4 dB intervall ved å trykke på tastene merket ▲ og ▼.

Det er også mulig med en ytterligere forsterkning av telefonen. Dette kan gjøre ved å trykke på tasten merket ➔📞 og skyvebryteren **V**.


MERK: Forsterkningen ved hjelp av skyvebryter fungerer bare når mottaker er aktivert.

Trykk ➔📞 tasten (*knappen lyser rødt*) og sett **V** skyvebryteren til posisjon ● eller til posisjon ○.


Høytalerens volum kan nå endres ved å bruke de to ▲ ▼ tastene på forsiden av utstyrsenheten.


Du kan også endre på diskant- og basstonene i intervaller på 10 dB ved å bruke tonekontrollen (*skyvebryter på venstre side av apparatet*).

MERK:

Tilleggsfunksjonen som gir muligheten til ytterligere forsterkning og tonekontroll oppheves ved å trykke på tasten merket  (tasten lyser ikke).

Timer

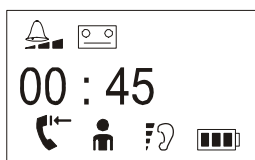

Så snart  tasten er trykket ned, vil en tidsangivelse vises på skjermen.

Denne funksjonen gir deg muligheten til å overvåke samtalens lengde.

SØKING ETTER MOBIL ENHET (*PAGINERING*)

1. Trykk på basis stasjonen tast merket med **PAGE**.
2. Alle de mobile enhetene som er koblet til basis enheten blir nå kalt opp.
3. Søkingen avsluttes ved å trykke på hvilken som helst tast på en av de mobile enhetene som blir kalt opp.

TELEFONBOKEN

Hvordan bruke telefonboken


Opp til 50 inngangsadresser med navn og telefonnummer kan lagres i telefonboken. Dersom et telefonnummer allerede er lagret, kan oppringing aktiviseres bare ved å trykke på noen knapper. Hvert navn kan inneholde opptil 10 tegn, og nummeret inntil 20 tall.

Lagring av navn / nummer


Følgende prosedyre benyttes ved lagring av nye navn og nummer i telefonboken:




1. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge "Phone Book" (*Telefonbok*) i menyen og trykk deretter på ↵ tasten.

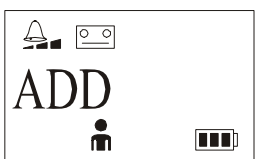

2. Velg „ADD“ ut fra menyen og trykk på tasten merket ↵.

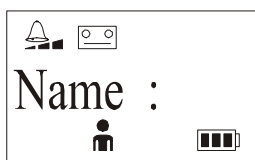

3. Skriv inn det nye navnet. Trykk på relevant siffer en gang eller gjentakende helt til den bokstaven du leter etter kommer opp på skjermen (*se i tabellen nedenfor*).
For å avslutte, trykk på ↵ tasten.

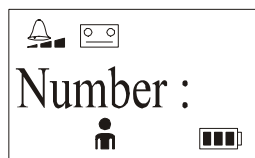

4. Skriv så inn hele telefonnummeret.
For å avslutte, trykk ↵ tasten.







5. Teksten „ADD“ (*legge til*) dukker nå opp på skjermen.
6. Trykk på ↵ tasten dersom du ønsker å legge til ytterligere informasjon, eller tast **C** tasten for å gå tilbake til tidligere meny.

Tastenes konfigurasjon

Tast	Bokstaver / Tegn
1	[Mellomrom] – 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

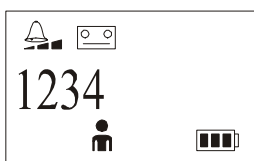
Lagring av telefonnummer hentet via "Gjenta oppringing" meny






1. Hvis du trykker på  tasten, vil en liste over de sist oppringte telefonnumrene dukke opp på skjermen.
2. Ved bruk av de to   tastene, kan du lett bla deg gjennom numrene til du finner det du søker.

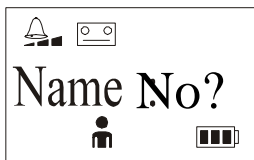


3. Ved å taste , vil du få spørsmål om å lagre (*Store No?*).




4. Bekreft lagring ved å trykke en gang til på  tasten. Teksten "Name No?:" dukker opp på skjermen. Skriv inn navnet ved å benytte de relevante tastene og trykk en gang til på  tasten for å bekrefte lagring.

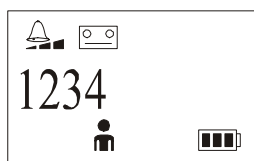


5. Telefonnummeret vil igjen vises på skjermen. Trykk  tasten for å bekrefte lagring.
6. Trykk på **C** tasten for å gå ut av menyen.


Hvordan ringe direkte fra telefonboken



Bruk tastene ▲ ▼ til å bla deg igjennom telefonbokens menyvalg (*Phone Book*) og trykk deretter på  tasten.




1. Velg menyvalget "Find" og trykk deretter på  tasten.

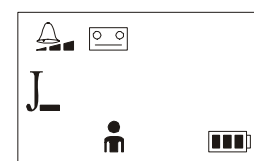

2. Det første punktet i telefonboken dukker opp. Du kan veksle mellom punktene i menyen ved å benytte ▲ ▼ tastene.

I stedet for å søke deg igjennom hele telefonboken for å finne ønsket navn, kan du benytte søkefunksjonen. Hvis du leter etter et navn som starter med for eksempel bokstaven J trykk 5.




3. Etter at du har søkt frem nummeret til den personen du ønsker å ringe i telefonboken, trykker du på  for å ringe.

MERK:

Ved å trykke på **C** tasten kan du når som helst avbryte søket.


Endre navn / nummer som allerede er lagret i telefonboken

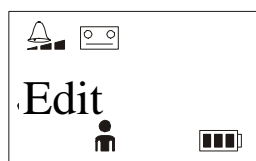

1. For å kunne gjøre endringer i telefonboken, følg prosedyrene beskrevet under punktet "Hvordan ringe direkte fra telefonboken" helt til du kommer frem til det stedet hvor endringen ønskes. Trykk deretter på tasten.



2. Bruk tastene ▲ ▼ for å velge „Edit“ menyen og trykk deretter på tasten for å bekrefte endring.

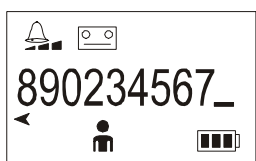


3. Du kan nå gjøre den nødvendige navneendringen. Trykk **C** tasten for å slette en bokstav. Trykk deretter på tasten for å lagre navnet.


4. For å endre nummeret, følg samme prosedyre som nevnt ovenfor i pkt. 3, og trykk på tasten for å bekrefte endringene dine.

Hvordan slette en oppføring fra telefonboken

1. For å slette en oppføring i telefonboken, følg prosedyrene beskrevet under punktet "Hvordan ringe direkte fra telefonboken" helt til du kommer frem til det stedet hvor endringen ønskes. Trykk deretter på tasten.

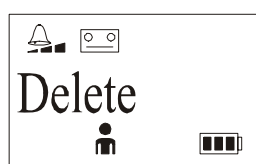

2. Bruk tastene ▲ ▼ for å velge „Delete“ menyen og trykk deretter på tasten for å bekrefte sletting.

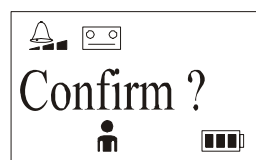

3. Teksten "Confirm?" dukker opp på skjermen.
4. Trykk en gang til på tasten for å bekrefte sletting.




5. Den endelige slettingen bekreftes ved at teksten „Deleted“ dukker opp på skjermen.

HVEM RINGER

Hvordan det fungerer

Telefonen kan lagre opptil 50 tapte anrop.

De sisteoppringningene vises først, og symbolet  blinker på skjermen for å indikere tapte anrop.

VIKTIG!




Skjermbildet for tapte anrop fungerer bare dersom din teleoperatør tilbyr denne formen for service. For nærmere informasjon, ta kontakt med din teleoperatør.

Avlesing og oppringing av tapte anrop



1. Trykk ▼ tasten for å velge punktet på menyen som heter „Caller ID“ (*viser tapte anrop*).







2. Ved å trykke på  tasten, vil alle tapte anrop vises på skjermen i form av navn og nummer, samtidig som at symbolet  blinker. Ved å trykke på  tasten kan du ringe opp direkte.

NB:

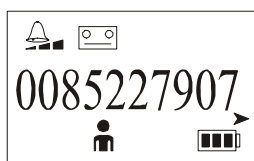


Bare de navnene som allerede er lagret med navn og nummer i telefonboken, vil dukke opp med fullstendig data.


3. Bruk ▲ ▼ tastene for å veksle mellom punktene i menyen.





4. Trykk på  tasten for å synliggjøre nummeret. Inneholder nummeret mer enn 10 sifre, vil et lysende symbol  dukker opp på skjermen. Ikonet  kommer umiddelbart opp på skjermen for å indikere at flere sifre følger fortløpende.







For ytterligere detaljer, trykk  så snart navn eller nummer på ønsket mottaker dukker opp på skjermen. Bruk deretter   tastene for å bla mellom ringte nummer, navn, dato og tidspunkt for mottatt anrop.

5. Trykk på  tasten mens listen over tapte anrop er synlig, for å velge eller ringe lagrede nummer.

Sletting av en post / tapt anrop

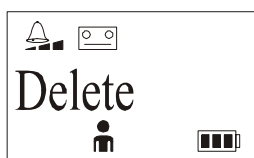1. Følg de samme prosedyrene som under punktet „Avlesing og oppringing av tapte anrop“ til du kommer frem til ønskede post. Trykk på  tasten hvis innringers navn eller nummer vises på skjermen.
2. Trykk en gang til på  tasten for å klargjøre menyvalget.




3. Bruk deretter tastene   til å velge „Delete“ fra menyen og trykk  tasten. Du kan nå slette ytterligere poster eller trykk **C** for å gå ut av menyen.



4. Hvis det ikke er flere poster igjen, vil teksten "No CLI" dukke opp på skjermen, og ikonet  slutte å lyse.


Lagre en post i telefonboken

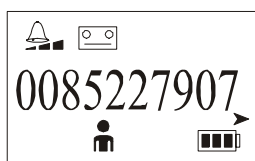




1. Rull deg frem til ønsket post ved å bruke fremgangsmåten vist under punktet "Avlesing og oppringing av tapte anrop". Trykk deretter 2-to ganger på  tasten.

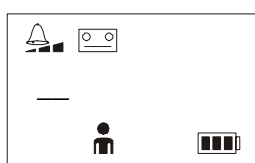


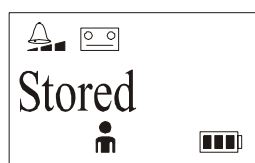
2. Bruk deretter   tastene til å velge "Store" i menyen.




3. Trykk  tasten, gi den nye menyvalget et navn og trykk en gang til på  tasten for å bekrefte.

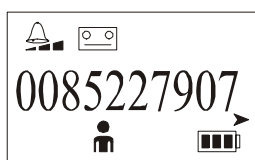

4. Telefonnummer dukker opp på skjermen. Trykk en gang til på  tasten.



5. "Stored" (*lagret*) dukker opp på skjermen, og menyvalget er nå lagret i telefonboken.

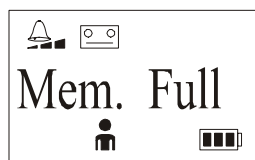

MERK


Så snart minnet er oppbrukt, vil teksten "Mem. Full" dukke opp på skjermen.

INNSTILLING AV TELEFONSVARER


Generelt

Din freeTEL 2 telefon har integrert telefonsvarer.

Angivelse av Dag / Tid

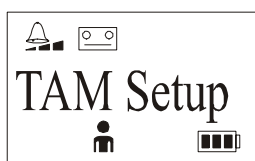

1. Bruk ▲ ▼ tastene til å velge „TAM Setup“ i menyen og trykk deretter på ↵ tasten.

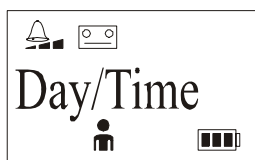


2. Velg "Day/Time" fra menyen og trykk på ↵ tasten.



3. Teksten som angir dag vises på skjermen, og du kan taste inn riktige data ved hjelp av sifertastene (se tabellen på neste side).

4. Så snart den korrekte dagen er funnet, trykk på ▼ tasten.

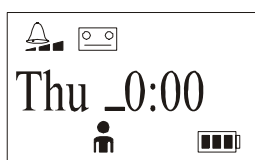

5. Markøren er plassert helt til venstre, under det første tallet. Skriv inn det første tallet ved hjelp av sifertastene og trykk deretter på ▼ tasten for å gå videre til neste tall. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor for å taste inn resten av tallene.

6. Så snart tiden er korrekt innstilt, trykk på ↵ tasten. Et signal vil bekrefte at innstillingen er lagret.

Sifertastenes konfigurasjon


TAST	UKEDAG
1	Mon (<i>mandag</i>)
2	Tue (<i>tirsdag</i>)
3	Wed (<i>onsdag</i>)
4	Thu (<i>torsdag</i>)
5	Fri (<i>fredag</i>)
6	Sat (<i>lørdag</i>)
7	Sun (<i>søndag</i>)

Innstilling av telefonsvarerens (TAM) funksjoner


Du kan velge mellom 4 forskjellige innstillinger:



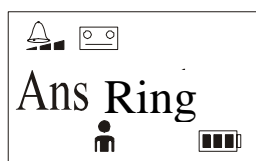

ANN off	Telefonsvareren er slått av. Telefonen svarer ikke på anrop.
ANS only	Telefonen spiller bare av en kontinuerlig beskjed når den mottar anrop. Den som ringer kan ikke legge igjen beskjed.
ANS / 2Ring	Telefonsvareren kobles inn etter 2 ring og svarer på anropet.
ANS / 6Ring	Telefonsvareren kobles inn etter 6 ring.

Prosedyre for definering av for eksempel "ANS/2Ring":

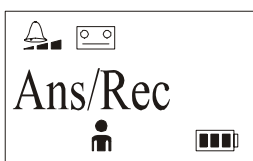





1. Følg prosedyren angitt under punktet valget "Angivelse av Dag / Tid" til du kommer til punktet i menyen som heter "Funksjoner".



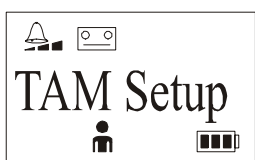


2. Trykk på  tasten for å bekrefte.
3. Nå velger du   knappene for å velge ønsket funksjon.
4. Trykk på  for å bekrefte. Så snart telefonsvareren er aktivert, vil dette bli synliggjort ved at symbolet begynner å lyse på skjermen.



Innspilling av talemelding




1. Bruk   tastene for å velge "TAM Setup" (*opptak*) fra menyen og trykk deretter på .tasten






2. Bla med   tastene til menyvalget „OGM” og trykk deretter på  tasten for å bekrefte.

3. Du kan velge mellom talemelding 1ste og 2dre ved å bruke   tastene.
 - a. 1ste talemelding avspilles nå i "ANS/2Ring" eller "ANS/6Ring" modus.
 - b. 2dre talemelding spilles bare tilbake i "ANS only" modus.

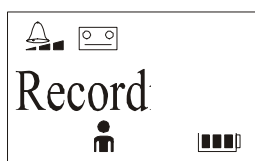
4. Så snart valgt den ønskede talemelding er foretatt, trykk på  tasten.



5. Bruk tastene   til å velge „Record“ fra menyen og trykk deretter på  tasten.



6. Så snart ordet „Recording” dukker opp på skjermen kan du diktere inn ønsket beskjed.

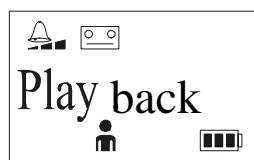


7. Så snart beskjeden er ferdig innspilt, trykker du på **6** tasten. Den innspilte beskjeden vil nå spilles av automatisk, samtidig som at ordet „Playback” dukker opp på skjermen.


8. Trykk på **6** en gang til for å stoppe avspillingen.
9. Dersom du ønsker å endre på den innspilte beskjeden, er det bare å gjenta punktene 6 – 8.




MERK!

Den 1ste talemeldingen spilles bare av i ”Answer/Record” modus, og 2dre talemelding spilles bare av i ”OGM only” modus.

Hvordan lytte til en talemelding

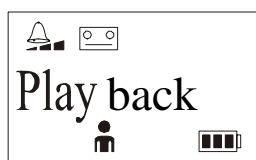1. Bla deg frem til ønskede talemelding ved å følge anvisningen titt under punktet ”Innspilling av talemelding” og trykk deretter på  tasten.







2. Bruk så   tastene for å finne „Play” i menyen og trykk deretter på  tasten velge.
3. Ordet „Playback.” dukker opp på skjermen, og innspillingen du akkurat gjorde, repeteres nå automatisk.

4. Trykk **6** tasten for å stoppe avspillingen.

BESKJEDER

Et symbol i form av en konvolutt, vil lyse på skjermen så snart en ny beskjed er mottatt.

Avspilling av beskjed

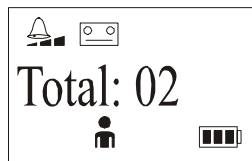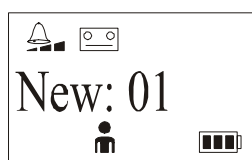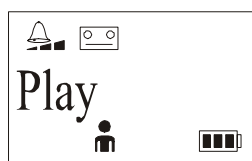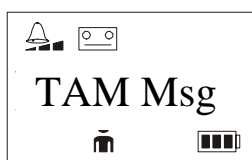


1. Trykk en gang på ▼ tasten. Velg deretter "TAM Msg" fra menyen.
2. Bekreft ved å trykke på ↵ tasten. Ordet „Play“ vil dukke opp på skjermen.
3. Trykk nok en gang på ↵ tasten. Antall nye og gamle lagrede beskjeder vil nå vises på skjermen.
4. Beskjedene spilles av.
 Nummeret på beskjeden vil være synlig på skjermen, i tillegg til informasjon som dag og tidspunkt for innspillingen.
5. Trykk **2** å stoppe avspillingen midlertidig. På skjermen synliggjøres dette ved at ordet "Pause" dukker opp.
6. Trykk en gang til på **2** tasten for å fortsette avspillingen.

Viktig betjeningselementer i beskjed menyen

1. Trykk en gang på **1** tasten for å starte en ny beskjed.
2. Trykk to ganger på **1** tasten for å starte forrige beskjed.
3. Trykk en gang på **3** tasten for å gå til neste beskjed.
4. Trykk på **4** tasten for å slette en beskjed.
5. Trykk på **6** tasten for å stoppe avspillingen av beskjeder.


Sletting av gamle beskjeder

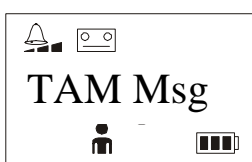

1. Trykk en gang på ▼ tasten for å finne valget "TAM Msg" i menyen.
2. Trykk deretter på ⬅ tasten.




3. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge "Del Old" i menyen og trykk deretter på ➡ tasten.

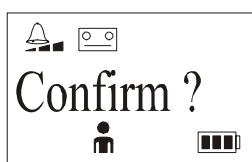

4. Så snart spørsmålet "Confirm?" dukker opp på skjermen, trykk på ➡ tasten for å bekrefte. Konvoluttsymbolet forsvinner automatisk så snart alle mottatte beskjeder er slettet.


Lagring av notater

Du kan lagre notater eller memoer ved å bruke samme fremgangsmåten som ved innspilling av talemelding.

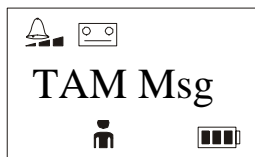

1. Trykk en gang på ▼ tasten for å komme til menyvalget "TAM Msg".

2. Trykk deretter på ↗ tasten.

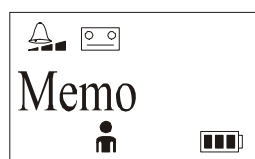

3. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge „Memo“ fra menyen, og trykk på ↗ tasten.



4. Ordet „Recording“ dukker opp på skjermen, og du kan nå spille inn notatet.


5. Trykk på **6** tasten for å avslutte innspillingen.

6. For å lytte til notatet, følger du samme fremgangsmåte som beskrevet under punktet "Avspilling av beskjed"


DEN MOBILE ENHETENS INNSTILLINGER

Melodi- / ringevolum

Den mobile enhetens melodi- og ringevolum kan stilles inn ved å bruke følgende fremgangsmåte:

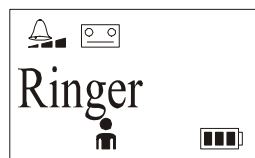

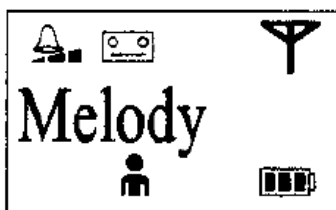


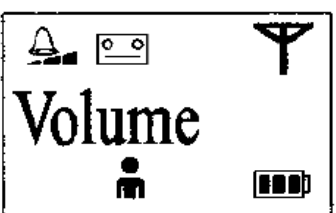
1. Bruk ▲ ▼ tastene til å velge "Ringer" fra menyen, og trykk på ↗ tasten.


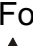


2. Trykk en gang til på  tasten for å velge "Melody" fra menyen.






3. Bruk   tastene for å velge en av de åtte melodiene og bekreft valget ved å trykke en gang  tasten.




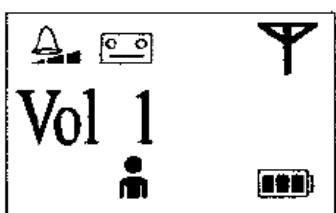
4. For å finne "Volume" benytt tasten  eller  mens du står i menyen.

5. Trykk på  tasten for å velge volum.

6. Still inn på ønsket volum ved å bruke tasten  eller  og bekreft valget ved å trykke en gang på  tasten.


MERK:




Symbolet  på skjermen, gir hele tiden informasjon om volumets innstilling.




Endring av navn på den mobile enheten

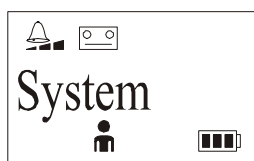
Dersom du ønsker en mer personlig velkomsttekst på den mobile enheten, kan du endre dette på følgende måte:




1. Bruk   tastene til å velge "System" fra menyen og trykk deretter på  tasten.

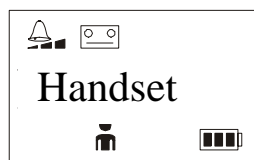

2. Velg så teksten "Handset" fra menyen og trykk på  tasten.

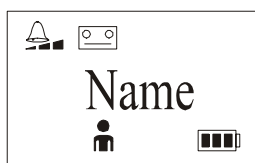

3. Så snart ordet "Name" dukker opp på skjermen, trykk en gang til på .




4. Skriv inn ønsket navn ved først å trykke på **C** tasten for å slette eksisterende tekst, for deretter å skrive inn det nye navnet ved hjelp av siffertastene.

5. Trykk på  tasten for å lagre ny tekst.

MERK:


I tillegg til navnet vil, avhengig av hvor mange mobile enheter som er koblet til basisstasjonen, et nummer mellom 1 og 6 vises på skjermen.

Endring av språket i menyen

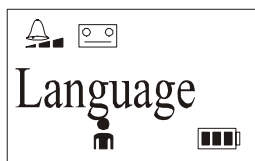

1. For å endre språket i menyen, følg samme prosedyre som beskrevet under pkt. "Endring av navn på den mobile enheten" frem til valget merket "Language" i menyen

2. Trykk på  tasten.

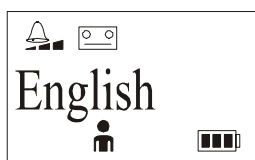


3. Velg ønsket språk og trykk på  tasten for å bekrefte.

Registrering av telefon / basis stasjon


Dersom en skal bruke mer enn en trådløs telefon, må disse først registreres i basis stasjonen.

For hver ekstra trådløs telefon, må det foretas en separat registrering. Hele seks trådløse telefoner kan være koblet opp imot en basis stasjon samtidig.

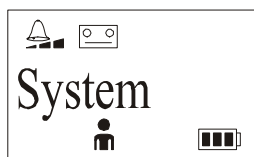

1. Bruk ▲ ▼ tastene til å velge "System" fra menyen og trykk deretter på ⏏ tasten.


2. Velg så teksten "Hanset" fra menyen og trykk på ⏏ tasten.

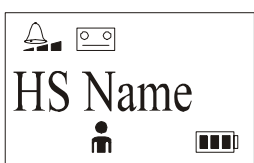

3. Bruk ▲ ▼ tastene til å velge "Register" fra menyen.

4. Trykk deretter på ⏏ tasten.


5. Tast deg frem til teksten "New Base" i menyvalget og trykk ⏏ tasten.

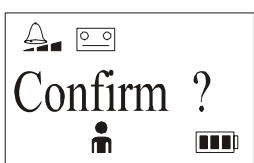


6. Teksten "Confirm?" dukker opp på skjermen. Trykk på ⏏ tasten for å bekrefte valget.



7. Telefonen søker nå etter basis stasjonen og "Finding 1" dukker opp på skjermen så snart denne er funnet.

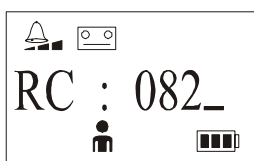



8. Trykk tasten merket **PAGE** på basis stasjonen og hold den nede til teksten "RC:" dukker opp på skjermen til den mobile enheten.
9. Tast inn RC koden (1590).
10. Trykk  tasten for å bekrefte ditt valg. Den mobile enheten vil etter kort tid automatisk returnere til startmenyen, samtidig som at et nytt symbol dukker opp på skjermen til den mobile enheten.


MERK:


Den mobile enheten som følger med basis stasjonen er allerede registrert. Du trenger derfor ikke registrere den.

Fjerne en mobil enhet fra basis stasjonen

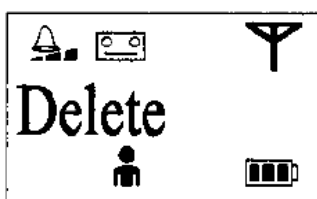

1. For å slette en mobil enhet, følger du prosedyren nevnt i avsnittet "Registrering av mobil enhet" frem til punktet "Delete" i menyen. Trykk så på  knappen.

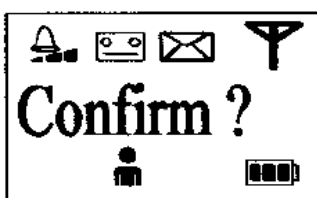


2. Spørsmålet „Confirm?“ dukker opp på skjermen. Trykk  tasten for å bekrefte.

Den mobile enheten er nå slettet fra basis stasjonen.


DEAKTIVERE DEN PERMANENTE RF-STRÅLINGEN

På telefonen din kan du definere en sett enten basis stasjonen og den mobile enheten er sletter eller om det er permanent RF-stråling.


Prosedyre for å koble ut denne funksjonen:

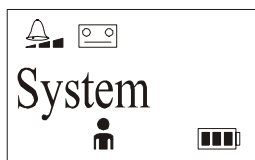

1. Bruk ▲ ▼ tastene til å velge "System" fra menyen og trykk deretter på ➡ tasten.

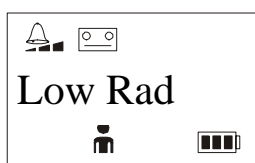

2. Rull i menyen til du kommer fremt il teksten "Low Rad" og trykk ➡ tasten for å bekrefte.

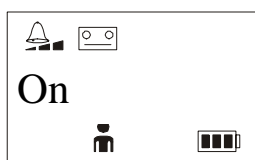

3. Her velger du mellom "On" (på) eller "Off" (av).
 - a. *On*: RF strålingen slås av så snart den mobile enheten er plassert i basis stasjonen.
 - b. *Off*: RF strålingen er permanent.
4. Etter at ønsket valg er foretatt, trykk ➡ tasten for å bekrefte.


SOS FUNKSJONER / ENDRING AV INNSTILLINGER

Generelt


Du kan lagre opptil 8 SOS nummer. Disse numrene ringes fortløpende dersom en SOS blir utløst. En utgående SOS melding vil automatisk avspilles til mottaker idet anropet besvares.

SOS funksjonen i den mobile enheten aktiveres ved å trykke på SOS tasten.

Aktivering / Deaktivering av SOS funksjon

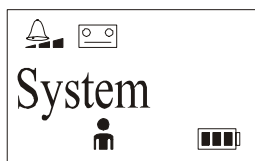


1. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge punktet "System" i menyen og trykk på ↵ tasten.

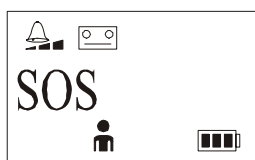


2. Rull frem til punktet "SOS" i menyen og trykk på ↵ knappen.

3. Skriv inn PIN koden (1590) og trykk på ↵ knappen for å bekrefte.

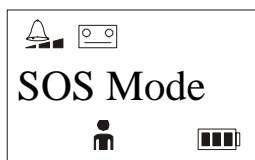


4. Menyvalget "SOS Mode" dukker opp på skjermen. Trykk på ↵ knappen.

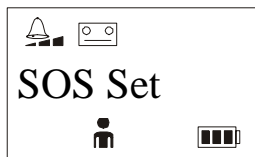

5. Velg "SOS Set" for **aktivering** eller "SOS Clear" for **deaktivering** av SOS funksjonen.

6. Trykk på ↵ tasten for å bekrefte lagring.


Lagring av SOS nummer

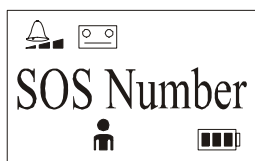

1. For å lagre en SOS funksjon, følge prosedyren beskrevet under avsnittet "Aktivering/Deaktivering av SOS funksjon" frem til du når punktet "Number" i menyen. Trykk deretter på ↵ tasten.



2. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge punktet „Add“ i menyen og trykk på ➡ tasten.

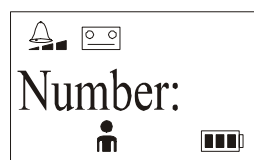


3. Skriv inn det nye SOS nummeret og trykk deretter på ➡ tasten.



4. Det eneste du trenger å gjøre nå er å tildele det nye nummeret en plass mellom 1 og 8 og bekrefte posteringen ved å trykke på ➡ knappen.


På denne måten kan du spesifisere i rekkefølgen og hvilket telefonnummer som skal ringes opp først (2, 3, 4..8)

Endring av SOS nummer

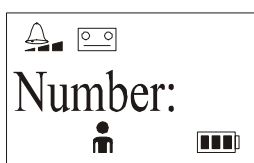




1. For endring av et SOS nummer, følg prosedyren beskrevet under avsnittet "Aktivering/Deaktivering av SOS funksjon" frem til punktet "Number" i menyen.

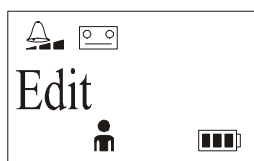
2. Trykk på ➡ tasten.

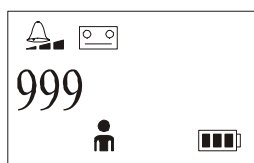


3. Bruk ▲ ▼ tastene til å velge "Edit" i menyen og trykk på ➡ tasten for å bekrefte.




4. Velg nå det nummeret som du ønsker å endre og trykk på  tasten. Gjør nødvendige endringer og trykk på  tasten for å lagre endringene.

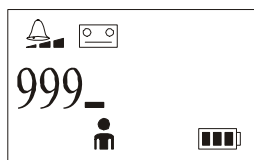


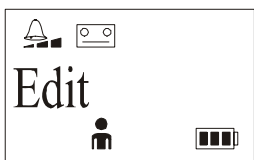
5. Tildel det nye nummeret en plass mellom 1 og 8. Når du er ferdig trykk på  knappen for å bekrefte endringen.

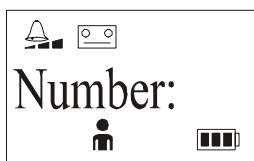


Sletting av SOS nummer




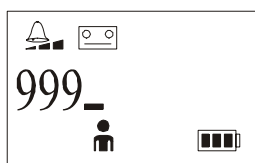
1. For sletting av et SOS nummer, følg prosedyren beskrevet under avsnittet "Aktivering/Deaktivering av SOS funksjon" frem til punktet "Number" i menyen.

2. Trykk på  tasten.





3. Bruk   tastene til å velge "Edit" i menyen og trykk deretter på  tasten for å bekrefte.


4. Velg nummeret du ønsker å slette og trykk på  tasten.



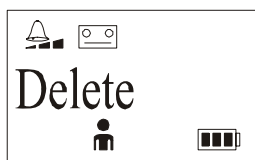

5. En sort linje vil blinke etter nummeret. Trykk C for å slette helt til det ikke er flere nummer igjen på skjermen.

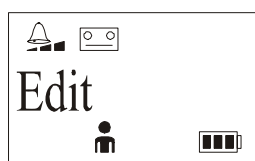

6. Trykk på  tasten for å bekrefte slettingen. Spørsmålet "Delete?" dukker opp på skjermen.




7. Trykk på  knappen for å bekrefte. Ordet "Edit" dukker opp på skjermen. Trykk på  knappen for å slette andre nummer eller på C tasten for å gå tilbake et menyvalg.


Innspilling av utgående SOS melding



1. Ved innspilling av utgående SOS melding, følg prosedyren beskrevet under avsnittet "Aktivering/Deaktivering av SOS funksjon" frem til punktet "OGM" i menyen.

2. Trykk på  tasten.

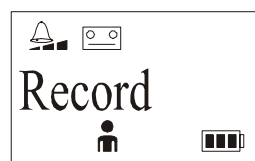


3. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge "Record" fra menyen og trykk på  tasten.




4. Så snart teksten "Recording_" dukker opp på skjermen kan du spille inn din utgående SOS melding.


5. Så snart du er ferdig med å diktere inn utgående beskjed, trykk **6**.

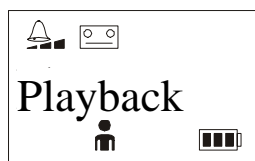


6. Den innspilte meldingen avspilles nå automatisk, og teksten „Playback“ dukker opp på skjermen.
7. Trykk på **6** tasten for å stoppe avspillingen.

Lytte til en utgående SOS melding

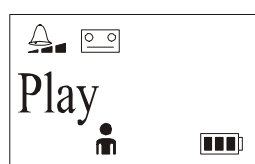

1. For å lytte til utgående SOS meldingen, følge prosedyren beskrevet i avsnittet ”Innspilling av utgående SOS melding” frem til punktet ”Play” i menyen.
2. Trykk på  tasten. Teksten ”Playback” dukker nå opp på skjermen samtidig som at den innleste beskjeden avspilles.

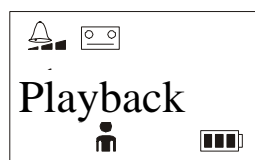

SOS melding – beskrivelse av forløp


1. **SOS** aktiveres ved å trykke på **SOS** tasten.
2. Telefonen ringer fortløpende opp de opptil **8** lagrede **SOS** numrene.
3. Mottageren av oppringningen hører den innspilte beskjeden, kort etterfulgt av et pip.
4. Etter pipet kan mottakeren trykke på **5** tasten for å identifisere hvem meldingen kommer fra.

Avbryte en feilaktivert SOS sending

For å avbryte en feilaktivert oppringing, bruk tastaturfeltet til å taste inn følgende kode:
 ” * , # , * .

NETTVERKETS EGENSKAPER: RINGEMODUS / TIDSINTERVALL FOR LYSSIGNAL / RINGEPAUSE


Innstilling av ringemodus

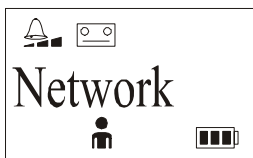


1. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge „System“ menyen og trykk ↗ for å bekrefte. Rull frem til menyvalget „Network“ ↗.



2. Velg „Dial Mode“ fra menyen og trykk på ↗ tasten.

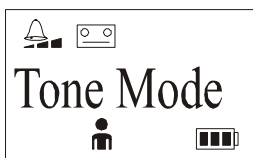

3. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge mellom „Tone“ og „Puls“ modus, og trykk på ↗ tasten for å bekrefte.

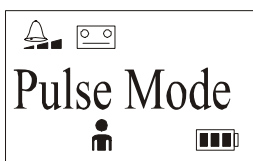

MERK


De fleste telefonene nå til dags bruker "Tone" oppringing.

Innstilling av tidsintervall for lyssignal


Hvis du bruker utstyret ditt tilknyttet et telefonsystem, vil det kanskje være ønskelig å endre på lyssignalet's tidsintervall.



1. For å endre på lyssignalet's tidsintervall, følg prosedyren beskrevet i avsnittet "Innstilling av ringemodus" frem til menyvalget "Dial Mode".

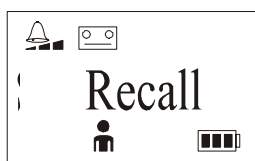

2. Bruk ▲ ▼ tastene til å rulle deg frem til menyvalget "Recall" og trykk deretter på ↵ tasten.

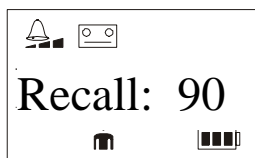

3. Velg ønsket tidsintervall og trykk deretter på ↵ tasten for å bekrefte.


MERK

Lyssignalet kan stilles inn på følgende tidsintervall: 90/110/130/260 ms.




Innstilling av ringepause


1. For å få en utgående linje i telefonsystemet, kan du taste inn en ringepause etter de første sifrene. Pausen kan settes til mellom 1 til 6 sekunder.

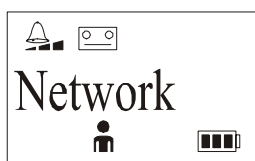

2. Bruk ▲ ▼ tastene for å velge „Network“ fra menyen og trykk ↵ tasten.

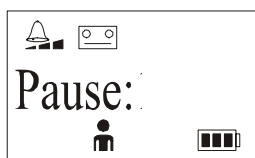

3. Velg „Pause“ fra menyen og trykk på ↵ tasten.

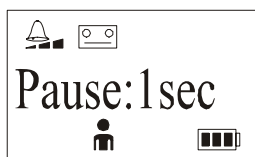

4. Tast inn ønsket pausetid og trykk deretter på ↵ tasten for å bekrefte.

Numrenes betydning:



NUMMER	PAUSETID
1	1 sekund
2	2 sekunder
3	3 sekunder
4	4 sekunder
5	5 sekunder
6	6 sekunder

FLERE SETT MOBILE ENHETER


Interne samtaler

Dersom flere mobile enheter er koblet opp mot basis stasjonen, er det mulig å foreta interne samtaler mellom disse telefonene.



1. Trykk på -tasten. Teksten „Intercom i tillegg til at symbolet , dukker opp på skjermen og angir at du nå foretar en utgående samtale.






2. Tast inn nummeret til den mobile enheten du ønsker å ringe.
3. Mottakeren (*av samtalen*) trykker på -tasten for å svare.


Overføring av samtale mellom trådløse telefoner

En innkommende samtale kan overføres fra en mobil enhet til en annen (NB! begge må være registrert mot samme basis stasjon).

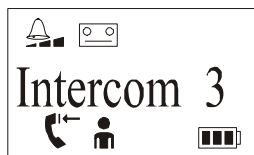1. Du har mottatt en innkommende samtale og ønsker å overføre denne til en annen mobil enhet.



2. Ring opp den aktuelle brukeren ved å benytte prosedyren beskrevet under avsnittet "Interne samtaler". Symbolet  dukker opp på skjermen og indikerer at en samtale blir overført. Mens dette skjer, vil innringeren hører en melodi bli avspilt.
3. For å kunne overføre en ekstern samtale til en intern bruker, trykk på den mobile enhetens tast merket . Samtalen vil bli overført så snart den interne brukeren svarer på anropet.

Dersom du **ikke** ønsker at samtalen skal overføres, trykker du direkte på den mobile enhetens tast merket .

TILBAKEFØRING TIL TELEFONENS FABRIKKINNSTILLING

1. Trykk og hold nede tasten merket * helt til følgende spørsmål dukker opp på skjermen: "Key Lock?".
2. Bruk deretter tastaturfeltet til å taste inn følgende kode: "4, 6, 1, 5, 3, 0, 5". Et bekreftende signal vil høres samtidig som at teksten "Waiting..." dukker opp på skjermen. Etter omtrent 10 sekunder vil startmenyen synliggjøres på skjermen. Telefonen er nå tilbakeført til opprinnelig fabrikkinnstilling.

TILKOBLING AV SPESIELT TILBEHØR

Telefonen freeTEL 2, har en standard tilkoblingsutgang med en 2.5 mm stikkontakt beregnet for hodetelefon. (*For tilkobling av for eksempel en PL-100/PL-200*).

NÅR TELEFONEN IKKE FUNGERER (*FEILSØKING*)

Generelt

Forsikre deg om at telefonledningen er uten skade og at den er korrekt tilkoblet. Koble fra alt annet tilbehør – som forlengelsesledning og andre telefoner. Dersom telefonen fremdeles fungerer, er dette en indikasjon på at feilen ikke ligger i apparatet med i selve utstyrsenheten.

Prøv å koble til telefonen i for eksempel nabohuset. Virker utstyret her, er det en indikasjon på at det kan ha oppstått en feil på telefonlinjen din. Ta kontakt med din teleoperatør.

Telefonen ringer; men telefonnummeret er ikke synlig på skjermen

- Fremvisning av anroperens nummer må støttes av din teleoperatør.
- Hvis tegnet --P-- dukket opp på skjermen, betyr det at anroperens ID informasjon ikke er tilgjengelig, eller at anroperen har skjult nummer.

Varseltone under samtale

- Batteriene er i ferd med å gå tomme – plasser den mobile enheten i laderen omgående.
- Telefonen er utenfor dekningsområdet – gå litt nærmere den mobile enhetens basis stasjon.

Telefonen virker ikke

- Forsikre deg om at batteriladerens enhet er korrekt koblet til basis stasjonen og støpslet.
- Sjekk at telefonledningen er korrekt koblet til basis stasjonen og telefonsokkelen.
- Sjekk at batteriene er fullt oppladede.
- Koble en annen telefon til telefonlinjen din. Fungerer den, skulle dette tilsi at det antageligvis er noe galt med din telefon.

VIKTIG INFORMASJON

Dette produktet er **ikke** beskyttet mot vannsprut. Plasser derfor **aldri** gjenstander fylt med vann, som for eksempel blomstervaser eller gjenstander med åpen flamme, så som lysestaker, på, ved eller i nærheten av produktet og dets utstyr.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER (*APPENDIX*)

Bruk og vedlikehold

Telefonen er vedlikeholdsfri. Blir den skitten, tørker du lett over den med en myk, fuktig klut. Bruk aldri alkohol, tynner eller annen form for organiske løsemidler.

Telefonen må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Videre, må den beskyttes mot høye temperaturer, damp og kraftige mekaniske vibrasjoner.

Garanti

Telefonen er meget driftsikker i bruk. Imidlertid, skulle det oppstå funksjonsfeil på tross av riktig installasjon og korrekt bruk av telefonen, ber vi deg om å ta kontakt med din lokale forhandler eller henvende deg direkte til produsenten.

Garantien inkluderer både reparasjon og returporto uten ekstra kostnader for øvrig. En klar forutsetning for dette er imidlertid at produktet returneres i originalemballasjen. Det er derfor **viktig at originalemballasjen ikke kastes**.

Garantien opphører å gjelde dersom skaden skyldes feil bruk eller forsøk på reparasjon er foretatt av uautorisert personale (*produktets forsegling er brutt*).

Videre er det **viktig** å merke seg at reparasjoner i garantiperioden blir bare utføres dersom produktet returneres sammen med et komplett garantikort med tillegg av en kopi av forhandlerens faktura/salgskvittering. Ved alle henvendelser, enten i skriftlig korrespondanse eller pr. telefon, er det viktig å sørge for at du **alltid** oppgir produktets serienummer.

CE – merket

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 1999/5/EG Directive in Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and Mutual Recognition of their Conformity. CE-merket er en bekreftelse på at produktet er i overensstemmelse med foran gitte direktiver.



Hensyn til miljøet / Avfallsdeponering



Når det gjelder avfallshåndtering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr henviser vi til EU's direktiver og norske retningslinjer som tilsier at slikt utstyr skal leveres direkte til egne deponier.

Både produktet og dens emballasje er tydelig merket med et symbol som indikerer at dette produktet ikke skal behandles som vanlig søppel. Det skal leveres direkte til egne deponier eller oppsamlingspunkter for resirkulering av elektrisk eller elektronisk utstyr.

Ved å sørge for at du følger de retningslinjer som er gitt for avfallsdeponering, gir du samtidig ditt bidrag til bevaring av miljøet og helsen til andre mennesker. Både miljø og helse settes i fare ved uriktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialer hjelper oss å redusere bruken av råmaterialer.

For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med ditt lokale kommunekontor, din lokale avfallsdeponi eller din leverandør.

Tekniske data

Standard:	DECT = D igital E nhanced C ordless T elecommunication Avansert digital standard for trådløse telefoner
Antall kanaler:	120 duplex kanaler
Rekkevidde for sendefrekvens:	1880 MHz til 1900 MHz
Duplex metode:	Multiplex tidsinndeling
Kanal frekvensområde:	1728 KHz
Overføringshastighet:	1152 kbps
Modulering:	GFSK
Rekkevidde for overføringskraft:	10 mW, gjennomsnittlig kraft pr kanal - opptil 30 m innendørs - opptil 300 m utendørs
Strømforsyning:	Basis stasjon: 220/230V 50 Hz Hoved-enhet: 220/230V 50 Hz / 60 mA Sekundær enhet: 6V DC / 600 mA Mobil enhet: NiMH, AA size, 1.2V, 1000 mAH
Strømforbruk:	ca. 7 W
Utnyttbar driftstid:	Standby (<i>i beredskap</i>): opptil 100 timer. Taletid: opptil 10 timer.
Dimensjoner (LxBxH):	Basis stasjon: 165 x 110 x 54 mm (<i>ekskl. understell</i>) Mobil enhet: 48 x 160 x 35 mm
Vekt:	Basis stasjon: ca. 265 g Mobil enhet: ca. 180 g (inkl. batterier)