

Brukerveiledning

Telefonforsterker AmpliPOWER40



AmpliPOWER40

HMS art. nr. 160777

Bestillingsnr.: 1106030

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

Telefonforsterker.....	1
Innledning	3
Advarsel	3
Skisser med beskrivelse	3
Kople til telefonen	5
Batterier	5
Ringsignaler – forskjellige kombinasjoner	6
Innstilling av ringsignal	6
Tone-/pulsvalg (T/P).....	6
TBR.....	6
Beskjed venter	7
Veggmontering	7
Teleslynge.....	8
Svare på innkommende samtaler	8
Volum- og tonekontroll (innkommende lyd)	8
Ringe en samtale.....	8
Ringe med headset.....	9
Ringe med handsfree / bruke høyttaleren.....	9
Repetisjon.....	9
Tastene med symbolene * og #	9
Sekretærfunksjon.....	9
Innstilling av hurtig- og kortnummer	9
Ringe til et hurtig- eller kortnummer.....	10
Tilbehør	10
Hvis telefonen ikke fungerer	10
Stell og vedlikehold	11
Teknisk informasjon	11
Miljø og gjenvinning	11

Innledning

Takk for at du har valgt å kjøpe en AmpliPOWER40 telefon. Vi håper du vil bli fornøyd med produktet. Vi anbefaler at du leser gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk.


Advarsel


Denne telefonen er tiltenkt personer med nedsatt hørsel og er utstyrt med volumkontroll for individuelle innstillinger. Det er viktig at telefonen er innstilt på det laveste nivået for andre brukere og at hver enkelt bruker kjenner til denne funksjonen.

NB!


For å redusere risikoen for at telefonen blir ødelagt av lynnedslag, bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær.

Skisser med beskrivelse

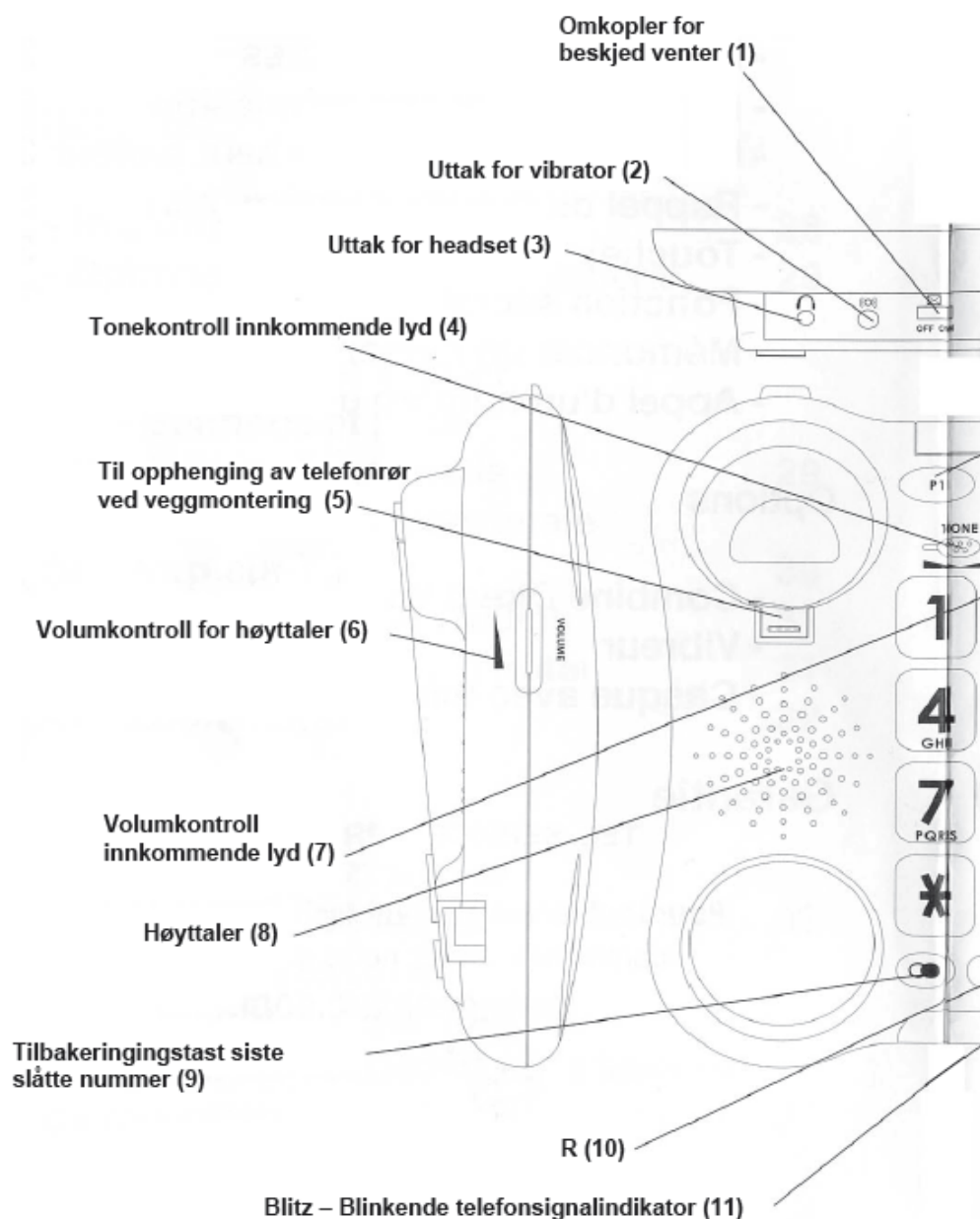

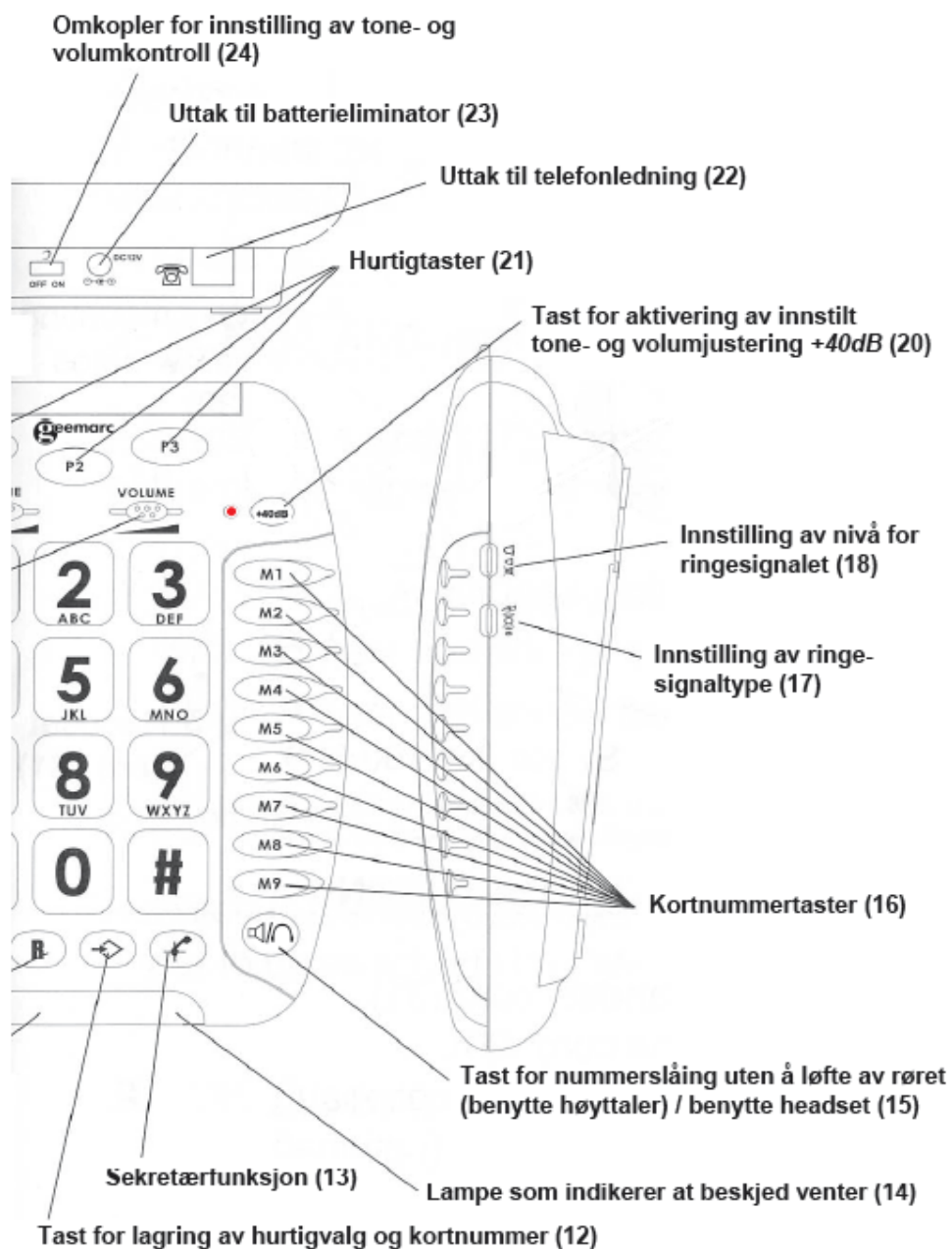

Kople til telefonen

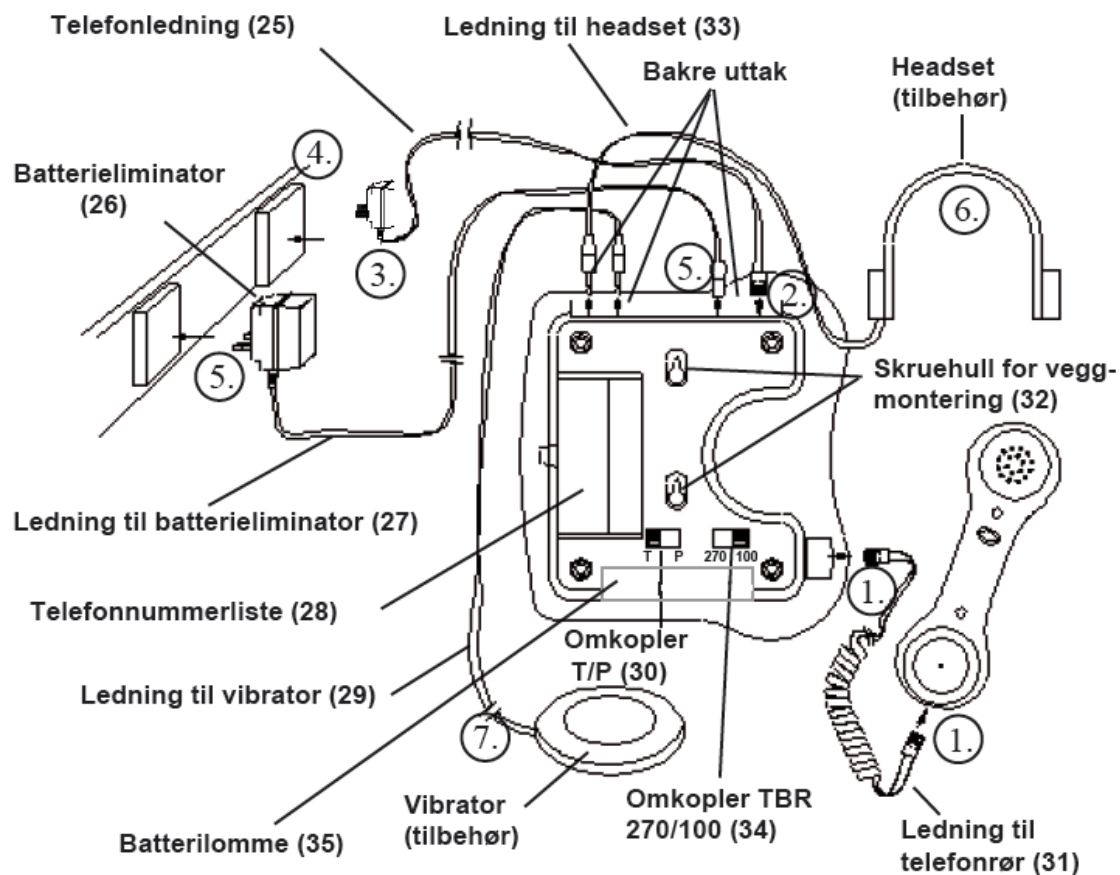


Batterier

For at ringesignalet også skal fungere ved strømavbrudd er det nødvendig med 4 stk. AAA/LR03 alkaliske batterier. Disse er ikke inkludert ved kjøp av telefonen.

OBS!

Ta ut batterieliminatoren fra vegguttaket før du setter inn batteriene. Åpne batterilommen (35) ved å trykke opp ”knepplåsen” forsiktig, f.eks. med en liten skrutrekker. Sett inn batteriene og sett på plass lokket.

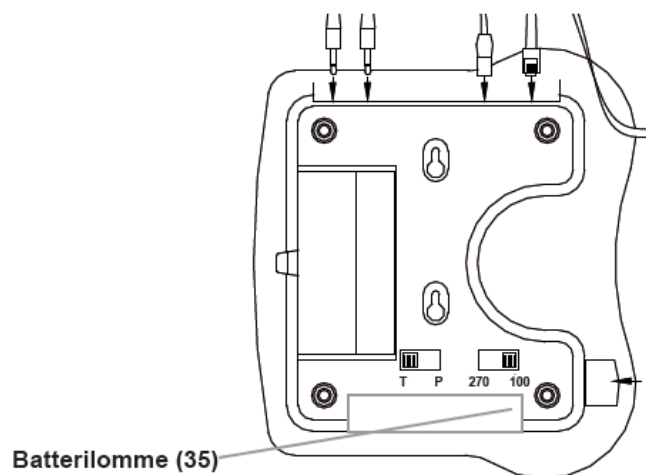

Ringesignaler – forskjellige kombinasjoner

En omkopplingsbryter (17) finnes på høyre side av telefonen. Med denne bryteren kan ringesignalet innstilles for 3 forskjellige funksjoner:

- 0 Bare ringesignal
- ((O)) Ringesignal og vibrator (tilbehør)
-  Ringesignal og blitzlampe

Innstilling av ringesignal

Ringesignalet kan stilles inn på 3 forskjellige nivåer (*stengt – svak – høyt*) med bryter 18 på høyre siden av telefonen:



Telefonen leveres med ringesignal innstilt på nivå *høyt* og melodi 6.

	Svak	Middels	Høyt
Melodi Nr 1	1	2	3
Melodi Nr 2	4	5	6 (fabrikkinnstilling)
Melodi Nr 3	7	8	9

Melodien kan endres ved å gjøre følgende:

- Løft av røret
- Trykk på tasten med symbolet  (12)
- Trykk på tasten med symbolet #
- Velg melodi ved å trykke på tastene nr. 1 – 9

Den valgte melodien aktiveres ved neste innkommende samtale.

OBS!

For at ringesignalet skal fungere også ved strømavbrudd, kreves 4 stk. AAA/LR03 alkaliske batterier.

Tone-/pulvalg (T/P)

Tone-/pulvalg (30) er innstilt fra fabrikken på tonevalg (T). Hvis du ikke får summetonen når du prøver å ringe ut, er telefonen antagelig koplet til en gammel telefonsentral. Dersom dette problemet oppstår, må omkopplingsbryteren stilles om til pulvalg (P).

TBR

TBR (34) skal være innstilt på 100 ms (fabrikkinnstilling).

Beskjed venter

Denne funksjonen benyttes dersom telefonen f.eks. koples til en moderne hotellsentral.

En bryter med symbolet  (1) sitter øverst på telefonen. Denne stilles i posisjon *ON* for å aktiveres at *beskjed venter*.


Den røde lampen (14) som sitter i telefonsignalindikatoren (11) lyser når du har en *beskjed som venter*.

Veggmontering

Hvis du vil montere telefonen på veggen, må du justere opphenget av telefonrøret.

Ta tak i rørfestet (5) som er den lille svarte plastbiten som sitter under den øverste fordypningen av høre delen på telefonrøret og vri den en halv omdreining. Dette gjør at røret festes på telefonen når den sitter på veggen.

Lag 2 hull i veggen med 80 med mer avstand. Skru inn skruene (og evt. en plugg)

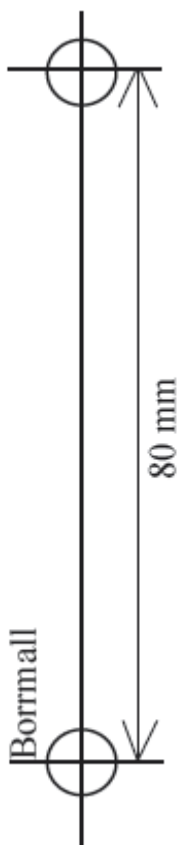

OBS!

Skru ikke skruene helt inn, la det være igjen 6-7 mm til veggen. Heng opp telefonen på skruhodene og dra telefonen nedover for å feste telefonen ordentlig.

Teleslynge

Hvis du bruker høreapparat, må høreapparatet stilles inn i T- eller MT-posisjon for at du skal kunne utnytte telefonens innebygde teleslynge.

Svare på innkommende samtaler

Med telefonrør

Løft av telefonrøret når telefonen ringer. Etter avsluttet samtale legges røret på plass igjen.

Med headset (tilbehør)

Når telefonen ringer og du vil bruke headset, trykker du på tasten med symbolet  (15) for å svare. Trykk på symbolet  igjen for å avslutte samtalen.

Volum- og tonekontroll (innkommende lyd)

Du kan øke volumet og justere tonen på den innkommende lyden etter dine egne behov. Tasten +40dB (20) brukes for å aktivere/deaktivere innstillingene i løpet av samtalen. Når innstillingen er aktivert, lyser den røde lampen ved siden av tasten +40dB (20).

Justere volum og tone

Kontroller at den røde lampen ved siden av tasten +40dB (20) lyser. Juster tonen og volumet med tastene TONE (4) og VOLUME (7).



OBS!

Når omkoplingstasten med symbolet  (24), som sitter øverst på telefonen, er i posisjon *ON* aktiveres de individuelle innstillingene du har gjort når noen bruker telefonen. Dersom omkoplingstasten med symbolet  står i posisjon *OFF*, må de individuelle innstillingene aktiveres ved å trykke på tasten +40dB (20) øverst til høyre på telefonen.

Ringe en samtale

Med telefonrør

1. Løft av telefonrøret og slå ønsket nummer
2. Etter avsluttet samtale legges røret på plass igjen.

Med headset (tilbehør)

1. Trykk på tasten med symbolet  (15) og slå ønsket nummer
2. Trykken på symbolet  igjen for å avslutte samtalen.

Ringe med headset

Trykk på tasten med symbolet  (15) og slå ønsket nummer

Trykk på symbolet  hvis ingen svarer eller når du ønsker å avslutte samtalen.

Ringe med handsfree / bruke høyttaleren

Trykk på tasten med symbolet  (15) for å aktivere høyttaleren. Snakk på vanlig måte. Høyttalerens volum kan justeres med volumtasten *VOLUME*, som sitter på venstre side av telefonen, mens samtalen pågår. Trykk på tasten med symbolet  igjen for å avslutte samtalen.

Løft av telefonrøret for å aktivere handsfree-funksjonen under en samtale.

Trykk på tasten med symbolet  (15) for å aktivere handsfree-funksjonen under en pågående samtale, legg på røret og fortsett samtalen.

Repetisjon

Løft av røret (eller benytt høyttaler/headset som beskrevet ovenfor) og trykk på tasten med symbolet  (9). Da ringes det sist slåtte nummeret opp automatisk (funger ikke hvis hurtigtaster eller kortnummer er brukt).

Tastene med symbolene * og

Disse tastene er satt av i forbindelse med nyere, digitale telefonsentraler. Vennligst ta kontakt med din telefonoperatør for nærmere informasjon.

Sekretærfunksjon

Hvis du vil si noe til en person ved siden av deg, som du ikke vil at den du snakker med i telefonen skal høre, holder du tasten med symbolet  (13) nedtrykket. Slipp opp tasten igjen for å gå tilbake til normal telefonsamtale.

Innstilling av hurtig- og kortnummer

Telefonen kan lagre 12 telefonnummer hvorav 3 hurtignummer (maks 21 sifre for hvert telefonnummer).

De 3 hurtignumrene er ekstra lett tilgjengelige ved de tydelige tastene P1, P2 og P3 (21) øverst på telefonen. Vi anbefaler at du legger inn disse numrene når du installerer telefonen. Disse tre tastene egner seg utmerket til å legge inn telefonnumrene til for eksempel hjemmetjenesten, nødnummer etc.

Slik legger du inn hurtig- og kortnummer

- Løft av røret (eller bruk høyttaler/headset i henhold til beskrivelse)
- Trykk på tasten med symbolet  (12)

- Velg og trykk på en av tastene P1, P2, P3 (21) eller noen av tastene M1, M2,9) (16)
- Slå nummeret
- Trykk på tasten med symbolet 
- Nummeret er nå lagret på den tasten du valgte.

OBS!

Hvis du kopler ut telefonen, forsvinner de lagrede numrene etter et par timer. Hvis du vil forandre et telefonnummer, forsvinner det gamle nummeret automatisk når du legger inn et nytt telefonnummer i henhold til forklaringen ovenfor.

Ringe til et hurtig- eller kortnummer

Løft av røret (eller bruk høyttaler/headset) og trykk en av hurtigtastene P1, P2, P3 (21) eller kortnummertastene M1, M2, ...M9 (16). Telefonen slår da det nummeret som er lagret på den respektive tasten.

Benytt telefonregisteret som finnes på undersiden av telefonen til å skrive opp de lagrede numrene.

Tilbehør

Telefonrør tilpasset konduktivt hørselstap (1104460)

Hvis du har et konduktivt hørselstap kan du komplettere telefonen med et spesialtilpasset telefonrør, Direct Vibe®. Plasser røret foran/nedenfor alternativt bak øret for å finne ut hva som fungerer best for deg. Hvis du ikke er hørselshemmet, kan dette røret brukes som et vanlig telefonrør.

Vibrator (art. nr.: 1104455)

Telefonen kan utstyres med vibrator . Når det ringer aktiveres vibratoren automatisk hvis telefonen er innstilt på *ringesignal og vibrator* ((O)).

Headset (art. nr.: 1104902)

Telefonen kan kompletteres med headset med mikrofon . Hvis det benyttes headset aktiveres høyttalertelefonen og høyttalerlyden (6) bør da stilles inn på *svak*. Snakk inn i mikrofonen som vanlig.

Batterier (art. nr.: 2241003)

Batteri, alkalisk, AAA/LR03 1,5V.

Hvis telefonen ikke fungerer

- Kontroller at alle kontakter sitter ordentlig i. Det er ekstra viktig at telefonrørets modulærkontakter er trykket inn ordentlig, ellers kan du risikere at den du snakker med ikke hører det du sier. Test ved å dra i ledningen, den skal ikke løsne.
- Kontroller omkopplingsbryterne på undersiden av telefonen
 - o TBR (34) skal være innstilt på 100
 - o Tone-/pulsvalg (30) skal være innstilt på T hvis telefonen er koplet til en moderne telefonsentral

- Du kan bare endre tone- og volum når den røde lampen ved siden av tasten +40dB (20) øverst på telefonen lyser.
- Vennligst kontakt stedet hvor du kjøpte telefonen dersom telefonen allikevel ikke fungerer.

OBS!

Produktgarantien gjelder ikke dersom feil har oppstått ved inngrep i produktet, ved uforsiktighet eller ved feil tilkopling/montering eller lynnedslag.

Stell og vedlikehold

Telefonen krever normalt ikke noe vedlikehold, men tørk av den med en lett fuktet klut hvis den blir skitten. Ikke bruk noen løsningsmidler eller sterke rengjøringsmidler. Plasser ikke telefonen der hvor den kan bli utsatt for sterkt sollys/varme eller fukt. Vær også forsiktig så du ikke mister telefonen på gulvet.

Teknisk informasjon

For mer informasjon viser vi til datablad/brosjyre m.m. som du finner på vår nettside www.gewa.no. Ta kontakt med oss dersom du trenger annen teknisk informasjon eller har behov for reservedeler.

Miljø og gjenvinning

Batterier eller telefonen må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men leveres til miljøstasjon eller andre som har avtale om resirkulering av slike produkter.

