

Telefon CL100 og CL100+

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

GEWA

- helping people

Telefon CL100 og CL100+



Telefon CL100:

Telefon CL100+ (med benleder):

HMS art. nr.: 160782

HMS art. nr.: 160776

Best. nr.: 1104119

Best. nr.: 1104118

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

INNHALDSFORTEGNELSE

Telefon CL100 og CL100+	1
Innledning	2
Bildeoversikter	3
Installasjon av telefonen.....	5
Tilkopling av telefonen	5
Innstilling av ringesignaler.....	5
Tone-/pulsvalg (T/P)	6
TBR omkoper	6
Veggmontering.....	6
Bruk av telefonen	7
Teleslynge.....	7
Svare på innkommende samtaler	7
Volum- og tonekontroll (innkommende lyd).....	7
Justere volum og tone.....	7
Ring en samtale	7
Justere utgående volum.....	8
Tilbakeringing.....	8
Tilbakeringing med tastene med symbolene * & #	8
Mute	8
Stille inn hurtigvalg og kortnummer	8
Ring hurtigvalg eller kortnummer	9
Annet	10
Stell og vedlikehold	10
Teknisk informasjon	10
Miljø og gjenvinning	10
Borrmal	10

Innledning


Takk for at du valgte å kjøpe en CL100 telefon. Vi håper du blir fornøyd.


Denne telefonen er spesialutviklet til personer med nedsatt hørsel og er utstyrt med en volumkontroll for individuelle innstillinger. Det er viktig at telefonen er stilt inn på det laveste nivået for respektive brukere og at hver bruker kjenner til denne funksjonen.

NB!


For å minske risikoen for at telefonen ødelegges lynnedslag, bør telefonen koples ut ved kraftig tordenvær.

Bildeoversikter

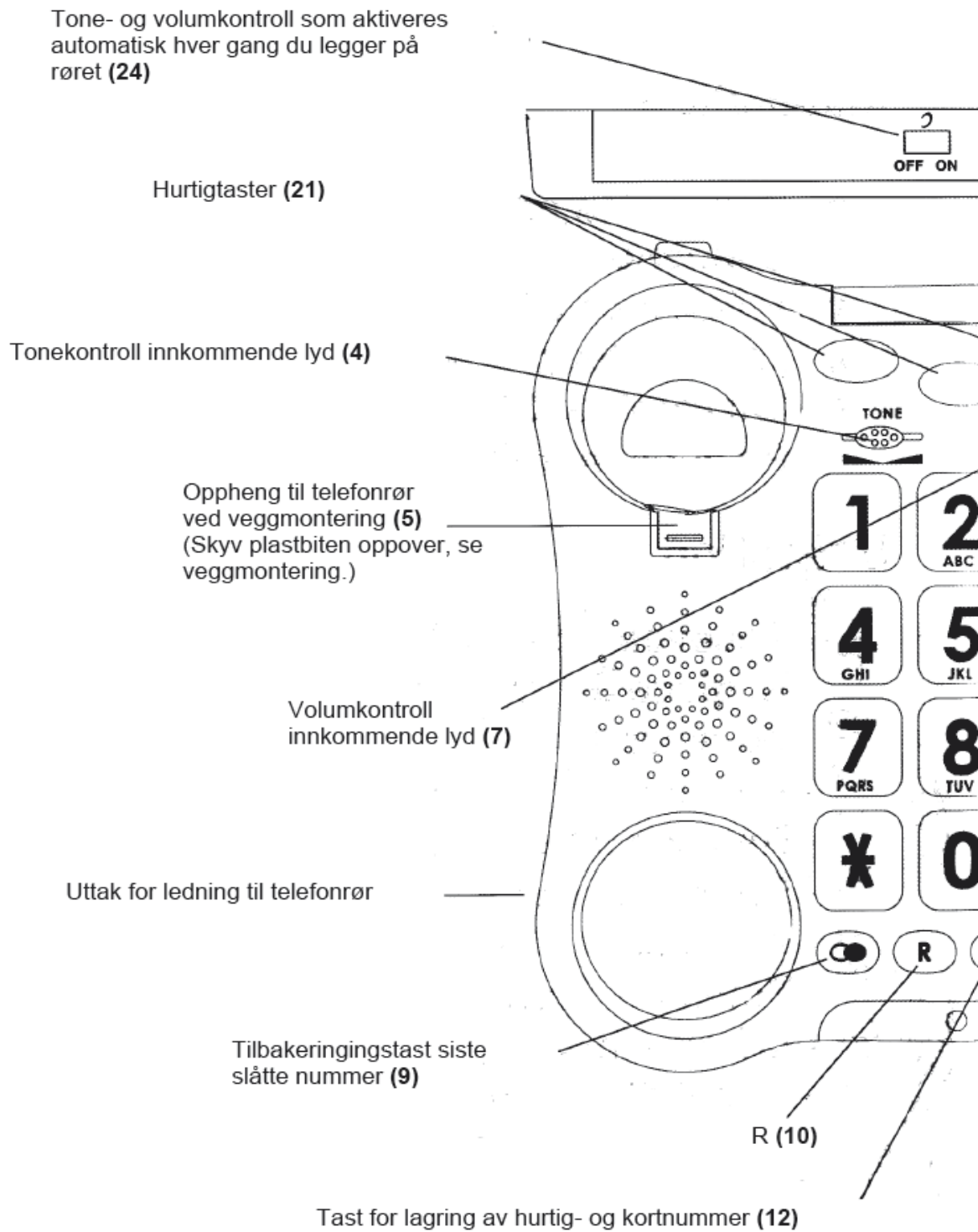

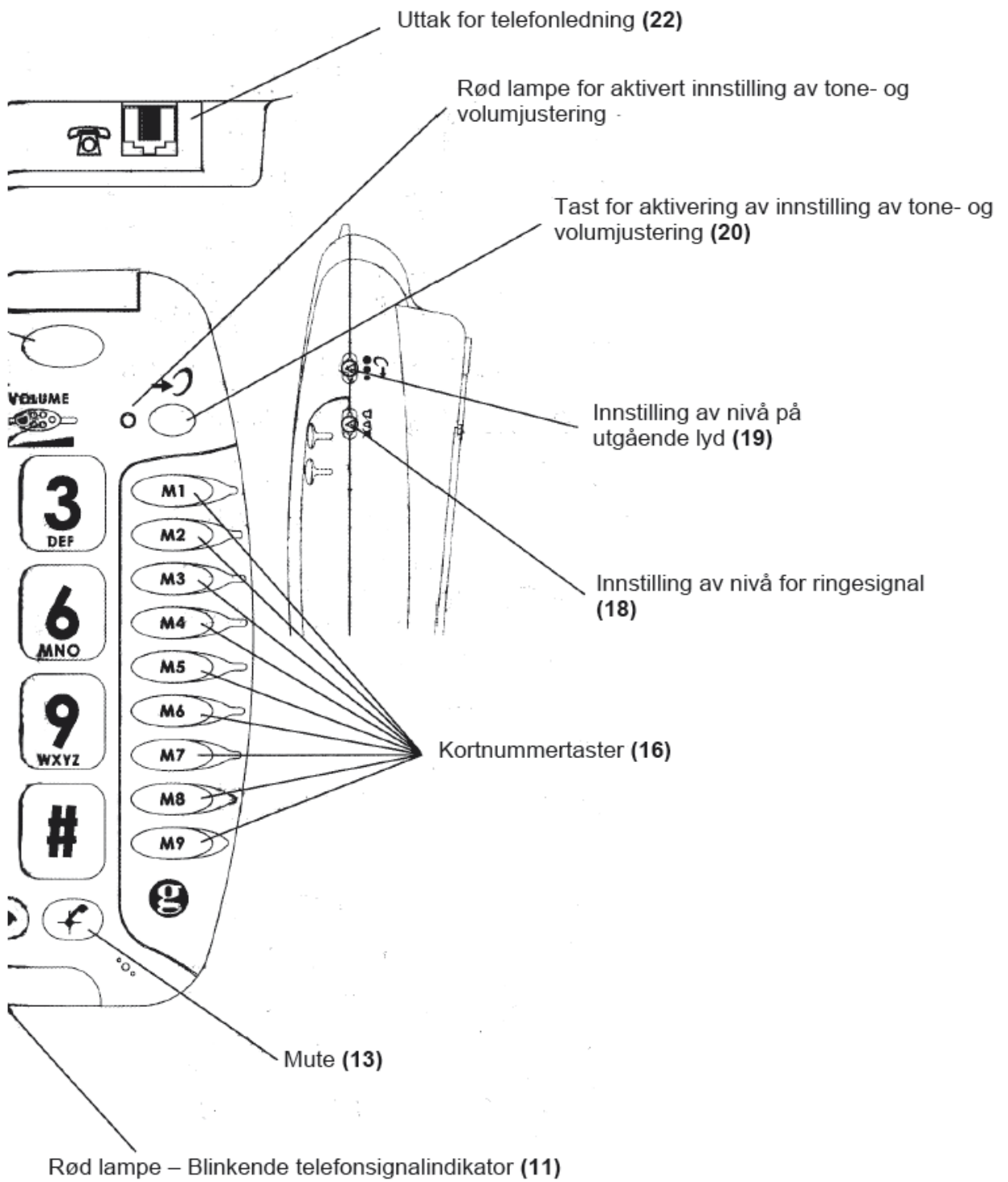

Installasjon av telefonen

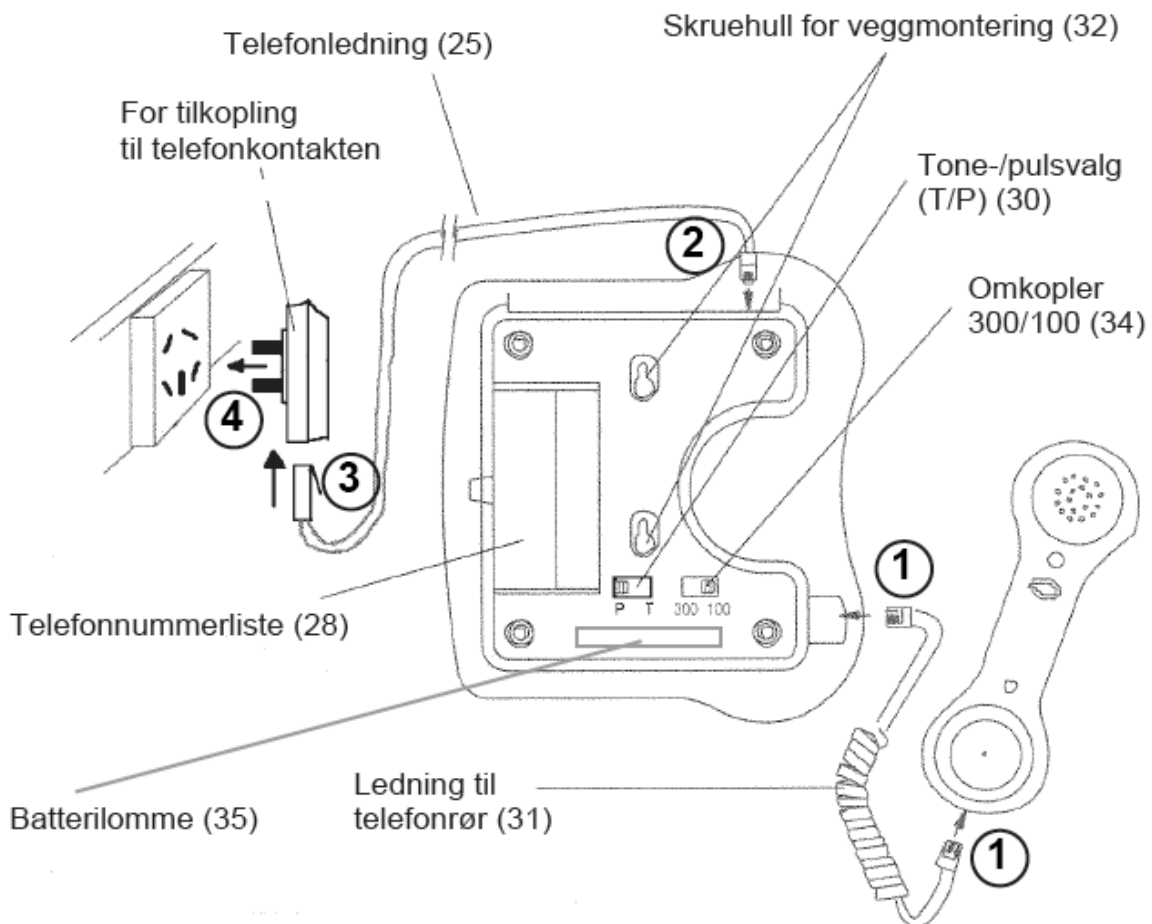

Tilkopling av telefonen

1. Kople telefonrøret til telefonen (31).
2. Åpne batterilommen ved å løsne skruen som holder fast lokket og dra lokket mot deg (35).
3. Sett inn 4 stk AAA 1,5V alkaline-batterier i batterilommen. Batterier er nødvendig hvis du vil øke nivået på ringesignalet (ca. 10dB).
4. Sett lokket tilbake på batterilommen og skru fast skruen.
5. Kople telefonledningen til telefonen (25).
6. Kople andre enden av telefonledningen til telefonkontakten.
7. Kople telefonledningen til telefonkontakten.

OBS!

Telefonledningen skal plasseres ytterst (sist), over evt. annet utstyr som f.eks. modem e.l.

Innstilling av ringesignaler


Ringesignalet kan stilles inn på tre nivåer; avslått (Off) – svak (Low) – sterk (Hi) med bryter (18) på høyre side av telefonen:



Telefonen leveres med ringesignalet stilt inn på “sterk” og melodi nr 6.

	Svak	Middels	Sterk
Melodi Nr 1	1	2	3
Melodi Nr 2	4	5	6 (fabrikkinnstilling)
Melodi Nr 3	7	8	9

Hvis du ikke liker melodien, kan Du velge en ny ved å gjøre følgende:

- Løft av røret
- Trykk på tasten med symbolet  (12)
- Trykk på tasten med symbolet #
- Velg melodi ved å trykke på tastene nr. 1-9

Den valgte melodien aktiveres ved neste innkommende samtale.

OBS!

Nivået på ringesignalet økes med ca 10dB når telefonen utstyres med batterier (se avsnitt ”Tilkopling av telefonen”).

Tone-/pulsvalg (T/P)

Tone-/pulsvalg (30) er fabrikkinnstilt på tonevalg (T). Hvis du ikke får koplingstone når du forsøker å ringe ut, er telefonen antagelig koplet til en gammel telefonsentral. Dersom dette problemet oppstår, må omkoplingsbryteren stilles om til pulsvalg (P).

TBR omkopler

TBR omkopleren (34) skal være innstilt på 100 ms (fabrikkinnstilling).

Veggmontering

Hvis du vil henge telefonen på veggen, må du justere opphenget for telefonrøret.

Ta tak i den riflete plastbiten som sitter på oversiden av telefonen, under lyttedelen av telefonrøret (5), og skyv den oppover / fra deg. Vri plastbiten 1/2 runde (fremdeles med den riflede overflaten oppover) og skyv den tilbake på plass. Ved å gjøre dette forsikrer du deg om at røret ikke faller ned når telefonen er festet på veggen.

Lag to hull i veggen med 80 mm avstand (bruk malen på siste side). Skru inn skruene (og evt. plugg).

OBS! IKKE skru dem helt inn, la det være igjen en avstand på 6-7 mm fra veggen. Heng opp telefonen på skruhodene og dra telefonen nedover for å sikre opphengingen.

Bruk av telefonen



Teleslynge

Hvis du bruker høreapparat, stiller du inn høreapparatet på T (teleslynge) for å utnytte den innebygde teleslyngen.


Svare på innkommende samtaler


Når telefonen ringer, løft av røret og svar på vanlig måte. Etter avsluttet samtale legges røret på plass.

Volum- og tonekontroll (innkommende lyd)




Du kan øke volumet og justere tonen på den innkommende lyden etter egne behov. Tasten med symbolet  (20) benyttes for å aktivere/inaktivere innstillingene under samtalen. Når innstillingen er aktivert, lyser den røde lampen ved siden av tasten med symbolet .

Justere volum og tone

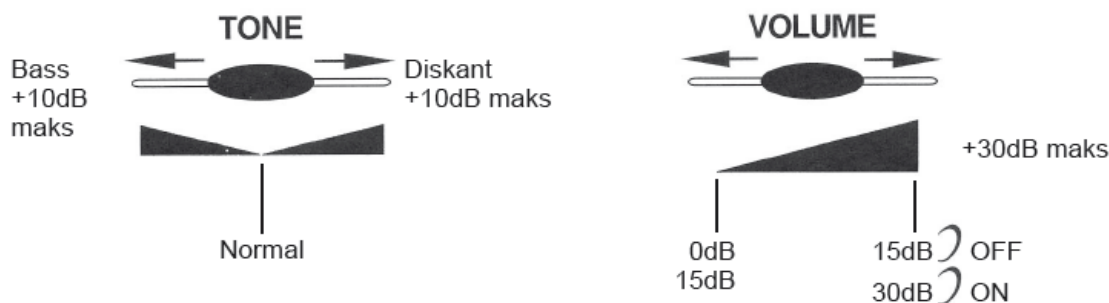Kontroller at den røde lampen ved siden av tasten med symbolet  lyser. Juster tone og volum med tastene **TONE** (4) og **VOLUME** (7).



OBS!


Når omkoplingstasten med symbolet  (24) er i posisjon **ON** (bryteren sitter på baksiden av telefonen), aktiveres de individuelle innstillingene hver gang noen bruker telefonen. Når symbolet  (24) er i posisjon **OFF**, må de individuelle innstillingene aktiveres ved å trykke på tasten med symbolet  (20) på oversiden av telefonen.

Ring en samtale


Løft av røret på vanlig måte og slå ønsket nummer. Etter avsluttet samtale legges røret på plass igjen.

Justere utgående volum

Dersom du har en svak stemme, eller den du prater med har vanskelig for å oppfatte hva du sier, kan du øke utgående volum med omkopplingsbryteren med nedenforstående symbol (19). Ved behov kan det utgående volumet også reduseres.

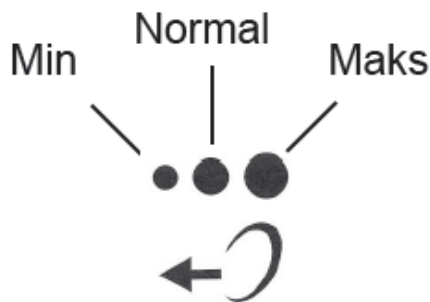


Tilbakeringing

Løft av røret og trykk på tasten med symbolet . Da slås det siste telefonnummeret automatisk (fungerer ikke for hurtigvalg og kortnummer).

Tilbakeringing med tastene med symbolene * &

* & # er servicetast som er satt av til nyere, digitale sentraler. Vennligst henvend deg til din telefonoperatør for ytterligere informasjon.


Mute


Hvis du vil si noe til en eller flere personer som befinner seg i samme rom som deg, men ikke vil at den du prater med i telefonen skal oppfatte hva dere sier, hold nede tasten med symbolet  (13). Du hører hva den du prater med i telefonen sier, men så lenge du holder tasten nedtrykket kan ikke denne høre hva du sier. Slipp opp tasten igjen for å gå tilbake til normal telefonsamtale.

Stille inn hurtigvalg og kortnummer

Telefonen kan lagre 12 telefonnumre hvorav 3 hurtigvalg (maks 21 siffer for hvert telefonnummer). De tre hurtigvalgene er ekstra lett tilgjengelige ved de tydlige tastene **P1**, **P2** og **P3** (21) på oversiden av telefonen. Vi anbefaler at disse nummerne legges inn når du installerer telefonen. På disse tre tastene kan det være hensiktsmessig å legge inn f.eks. nødnummer, telefonnummer til nærmeste familie etc.

Slik gjør du for å lagre telefonnummer under hurtigvalg og kortnummer:

- Løft av røret.
- Trykk på tasten med symbolet  (12).
- Velg og trykk på en av tastene **P1**, **P2**, **P3** (21) eller en av tastene **M1**, **M2**,, **M9** (16).
- Slå nummeret.

- Trykk på tasten med symbolet  (12) igjen.
- Nummeret er nå lagret på den tasten du valgte.

Hvis du kople ut telefonen, forsvinner de lagrede nummerne etter et par timer. Hvis du vil endre et telefonnummer, forsvinner det gamle nummeret automatisk når du legger inn et nytt telefonnummer i henhold til beskrivelsen ovenfor.

Ringte hurtigvalg eller kortnummer

Løft av røret og trykk på en av hurtigtastene **P1, P2, P3** (21) eller kortnummertastene **M1, M2,**, **M9** (16). Telefonen slår da det nummeret som er lagret på den respektive tasten.

Benytt telefonregisteret som finnes under telefonen for å skrive ned de lagrede nummerne.

Dersom telefonen ikke fungerer

- Kontroller at alle kontakter sitter ordentlig i. Det er ekstra viktig at telefonrørets modulærkontakter er ordentlig trykket inn ellers risikerer du at den du snakker med ikke hører hva du sier. Testes ved å dra i ledningen, den skalikke løsne.
- Kontroller omkoplingstastene på undersiden av telefonen:
 - TBR omkopleren (34) skal være innstilt på 100
 - Tone-/Pulsvalg (30) skal være innstilt på T (tonevalg) hvis telefonen er koplet til en moderne telefonsentral.
- Vennligst kontakt Gewa AS hvis telefonen ikke fungerer etter at ovennevnte er kontrollert.

Annet

Stell og vedlikehold

Telefonen krever normalt ikke vedlikehold. Telefonen tørkes av med en fuktig klut hvis den blir skitten. Ikke bruk løsningsmiddel eller sterke rengjøringsmidler.

Teknisk informasjon

For teknisk informasjon og gjeldende deklarasjoner henviser vi til bruksanvisningen.

For kompletterende opplysninger henviser vi til datablad/brosjyre og CE-sertifikat som kan lastes ned fra "Produkt databank" på www.edin.se. Mer informasjon finner du også på www.gewa.no.

Miljø og gjenvinning

Kast brukte batterier/produkter i henhold til gjeldende miljøforskrifter, da bidrar du til et bedre miljø.

Borrmal

