

Bruker-, vedlikeholds- og monteringsanvisning

Maxialarm PRC-2000 (trådbunden) og personsøker PRC-2020V – Knop



Maxialarm PRC-2000
(inkl. personsøker PRC-2020V)

HMS art. nr.: 135561

Best. nr.: 2223238

Personsøker PRC-2020V:

HMS art. nr.: 135560

Best. nr.: 2223237

INNHold

Maxialarm PRC-2000 og personsøker PRC-2020V	1
Generelt	2
4 kanals lommemottaker/personsøker med lyd, lys og vibrator	2
Resetting av mottakeren.....	3
Koding av mottakere	3
Batterivarsling.....	3
Skifte batteri.....	3

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no


Generelt

PRC-2000 er en 4-kanals sender som brukes sammen med mottaker PRC-2020V.

Rekkevidden mellom sender og mottaker er opp til 500 m.

Senderen henges opp på veggen og nettadapteren settes i stikkontakten. Antennen festes på veggen i loddrett posisjon. Senderen inneholder en rekkeklemme hvor eksternt utstyr kan koples til. 12VDC kan tas fra GND og 12V. Det må maks. trekkes 400mA.

Senderen aktiveres ved å kople GND til en av inngangens K1-K4.

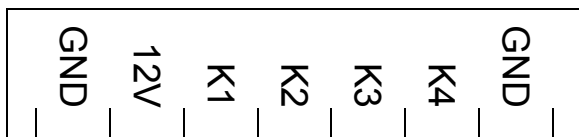

På bunnen av kabinettet sitter det en rød trykknapp. Den lyser når senderen sender til mottakeren. Hvis man trykker på knappen, sender den et signal på kanal 4 (skiftende lys på mottakeren). Begge deler kan brukes til å teste anlegget.

4 kanals lommemottaker/personsøker med lyd, lys og vibrator



Funksjonsknappen på siden av apparatet har 3 innstillinger

- Avbrutt/OFF - nederste stilling
- Tent - varsler med lys og vibrator - midterste stilling
- Tent - varsler med lys og lyd - øverste stilling
- Resetting av mottakeren gjøres ved å trykke på knappen

Varsling ved mottak

- Kanal 1 rød diode
- Kanal 2 orange diode
- Kanal 3 grønn diode
- Kanal 4 skiftende lys (rød – orange – grønt).

Ved varsling viser mottakeren med lys hvilken enhet som er aktivert, + lyd eller vibrator. Varslingen varer i 5 sekunder hvorefter det hvert 7. sekund gis et signal helt til mottakeren resettes.

Resetting av mottakeren

Trykkes det 1 gang på knappen, vises alarmen (og den resetter seg selv etter 5 sek).
Trykkes det 2 ganger på knappen, resettes mottakeren omgående.

Koding av mottakere

(Det kan benyttes flere mottakere.)

1. Hold ON/OFF knappen på mottakeren inne mens mottakeren tennes. 3 blink og lyd eller vibrator vises. Deretter blinker apparatet raskt i 5 sekunder.
2. Når apparatet blinker hurtig, slippes reset-knappen.
3. Trykk 3 ganger på reset-knappen i løpet av de 5 sekundene hvor apparatet blinker hurtig.
4. Rød diode lyser nå konstant.
5. I løpet av 10 sekunder må det gjøres et oppkall ved å trykke inn den røde knappen på senderen i 2 sekunder (eller ved å aktivere en av de tilkoblede enhetene).
6. Lykkes kodingen, vises indikasjonen fra senderen. Mislykkes kodingen, vises grønn diode og lyd eller vibrasjon i 1 sekund. (Start forfra med punkt 1.)

Batterivarsling

Ved batterivarsling blinker grønn diode og dobbelt «beep» høres hvert 15. sekund.

Skifte batteri

Bruk 1 stk. Alkaline batteri, type LR6 eller AA. Ta ut batteriet hvis mottakeren ikke skal brukes på lengre tid.