

**GEWA**

- helping people

Enviro **SERIES**

UniVox® DLS-30

Teleslyngeforsterker med pute og autoscant

Få alltid riktig lyd fra slyngen!

UniVox DLS-30 er en komplett slyngeforsterkerpakke for høreapparatbrukere til bruk når de ser på TV. DLS-30 er utstyrt med en automatisk scartilkopling som man enkelt kopler inn i scartuttaket på TV-apparatet. Den automatiske scartilkoplingen er nødvendig når du har en eller flere signalkilder (digitalboks, video etc.) tilkople TV'n og gjør at du får riktig lyd i slyngen. Det betyr at hvis du f.eks. starter videoen så får du automatisk lyden fra videofilmen i slyngen.

Hvis du har flere signalkilder koplet til TV'n, skal de seriekoples og en eller flere kilder må ha doble scartuttak (se ill. side 2). I de tilfellene hvor det ikke er mulig å få til en seriekopling, kan en mikrofon (tilbehør) koples til forsterkeren. Mikrofonen plasseres på TV'ns høyttaler.

Legg puteslyngen i ditt favorittmøbel (over eller under sofaputen) og sett høreapparatet i T-stilling. DLS-30 gir en veldig klar lyd. Takket være den innebygde tottrinns AGC-kontrollen, er den en "intelligent" forsterker med automatisk nivåkontroll. Du hører bare lyden fra TV'n og slipper støy fra omgivelsene. TV'ns høyttaler behøver ikke stå på maks volum slik at andre familiemedlemmer og naboer blir forstyrret.

Hvis man vil dekke et større område, kan en sofa- eller romslynge (tilbehør) koples til forsterkeren. Da må man være oppmerksom på at lyden når ut til et ganske stort område utenfor slyngen og at det kan oppstå problemer med overhøring.

Egenskaper

- Alltid riktig lyd på teleslyngen
- Komplette teleslyngepakke for TV/Digitalboks/ Parabol/Video/DVD med puteslynge
- Puteslyngen kan byttes ut med sofaslynge
- Automatisk scartomkopling (ledning følger med)
- Mikrofon/linjeinngang
- Enkel å installere selv
- Liten, diskret forsterker som enkelt kan festes/henges på baksiden av TV-apparatet
- Lysdioder for indikering av strømspenning og slyngestrøm
- Automatisk nivåregulering (tottrinns AGC)
- Volumkontroll
- Du hører kun lyden fra TV'n og slipper støy fra omgivelsene
- UniVox Enviro SERIES oppfyller RoHS-direktivet

Systemoversikt

UniVox® DLS-30 Enviro SERIES



DLS-30 slyngeforsterker



Puteslynge/stolslynge



Sofa-/romslynge

Best.nr. Beskrivelse

1104352 En komplett DLS-30 slyngeforsterkerpakke består av: slyngeforsterker med innebygd autoscant og mikrofon-/linjeinngang, transformator og puteslynge. Det er mulig å bytte ut puteslyngen med en sofa-/romslynge.

DLS-30 slyngeforsterker

Størrelse: 145x60x30mm (BxDxH)

Vekt: 180g ekskl. transformator

Lengde scartkabel: 50 cm

Puteslynge/stolslynge

Størrelse: 400x400x5mm (BxDxH)

Kabellengde: 10m

Sofaslynge

Kabellengde: 8m

Forlengelseskabel: 10m


Romslynge

Kabellengde: 20m

Seriekopling TV / Satelitt / Digitalboks / Video / DVD

Forsikre deg om at TV-apparatet fungerer som det skal sammen med satelittmottaker/digitalboks/video/DVD. De apparatene som koples til TV'n skal seriekoples (se eksempel på seriekopling nedenfor). Hvis det finnes flere scartuttak på TV'n, skal scartuttak nr. 1 brukes. Den/de midterste av de ytre enhetene (se ill. nedenfor) må ha to scartuttak (inn/ut).

Ved riktig sammenkopling skal bilde og lyd i TV'n automatisk endres til den programkilden du har valgt. Det betyr at hvis du f.eks. starter videoen endres lyd og bilde i TV'n til lyd og bilde fra videofilmen.

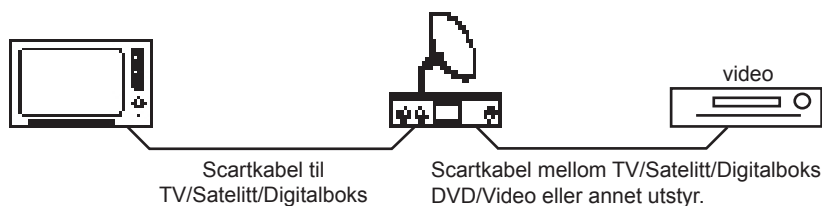

Tilbehør

Best.nr. Beskrivelse

1104145 Putetrekk
 1104158 Romslynge
 1104157 Sofaslynge
 Forlengelseskabel til sofaslynge
 1104141 13A, elektretmikrofon med borrelås

