



BRUKSANVISNING TIMSTOCK 119622-00



”För Sverige uppfyller vi våra plikter enligt den nya lagen om producentansvar för el-avfall genom att vara ansluten till elretur”

Allmänt

Batteridrivet tidhjälpmedel för användning inomhus i torra utrymmen. I leveransen ingår klisterlappar i färger motsvarande startknapparna. Klisterlapparna kan användas för att färgmarkera aktivitetsbilder eller scheman. Exempelvis om en aktivitet ska pågå 10 minuter, markeras den med grön klisterlapp.

Funktion

Nedräkning av tid från 20, 15, 10 eller 5 minuter. Nedräkningen visas med lysdiodpelaren.

Vid start tänds
20 lysdioder för 20 minuter
15 lysdioder för 15 minuter
10 lysdioder för 10 minuter
5 lysdioder för 5 minuter

Därefter slocknar en diod varje minut tills alla har slocknat. Vid räkneperiodens slut blinkar samtliga lysdioder och en kort ljudsignal hörs fem gånger. Pågående signalering kan avbrytas genom att trycka på någon av knapparna.

Så här gör man

Tryck på den knapp som motsvarar den önskade tiden.

Lysdioderna tänds upp motsvarande den tid som startknappen representerar och nedräkningen startar.

Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt under 2 sekunder.

Därefter kan ny tid startas.

På timstockens kortsida finns ett reglage för att ändra ljudsignalen. Då reglaget är i min-läge är ljudet helt avstängt och signalering sker endast genom blink med lysdioderna.

Batteri

I leveransen ingår två stycken 1,5V batterier typ R6.

Dessa räcker för ca 60 timmars användning. När lysdiodernas ljusstyrka börjar avta ska båda batterierna bytas.

Batteriluckan är låst med en skruv (krysspår).

Om så önskas kan laddningsbara batterier av typ NiMH storlek R6 användas. Dessa laddas med en särskild laddare.

(Denna typ av batterier och laddare levereras ej av Westerstrand)

Rengöring/Rekonditionering/Testing av signalvolym

Torka av timstocken med lätt fuktigt luftfritt trasa med vanligt rengöringsmedel eller rengöringsduk avsedd för elektronik.




Byt batterier vid behov. Vid behov kan en ny frontdekal klistras på timstocken.

För att testa ljudsignalens volymnivå, tryck på två mittenknappar samtidigt. Testfunktionen stängs av med en knapptryckning.

Option:

119607-00 Nyckelband

119608-00 Skyddsväska

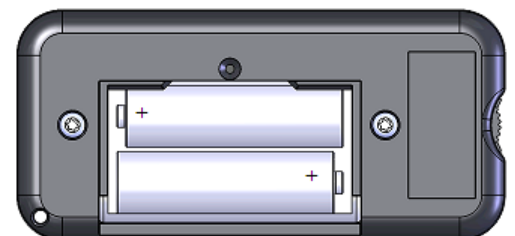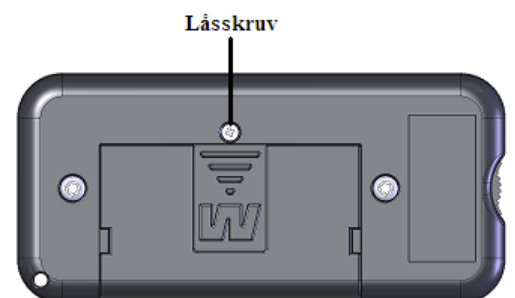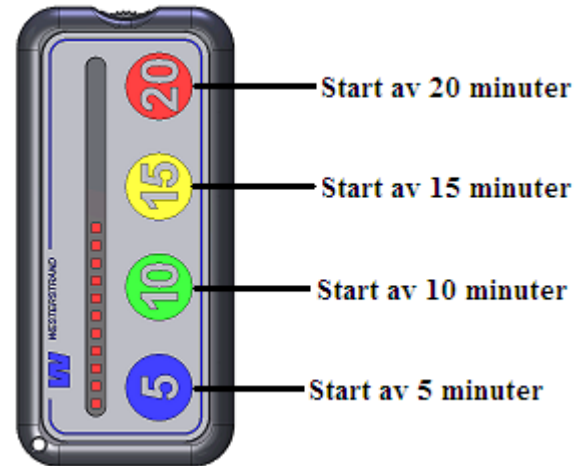

Ytermått: 111x52x27 mm. Vikt 115 g.