

koble til wifi Victor Stream 3 **CANTEC**-helping people

Hurtigoppskrift:




Når den er påslått(hold inne påknapp oppe til venstre på siden):

- Hold inne online knappen (den runde over 2-tallet): hør at flymodus er slått av.
- trykk på 7 tallet for å gå til hovedmeny ,og bla med pilbort (6 tallet) til du hører :generelle innstillinger
- Trykk # tast for å bekrefte
bla med pil (6 tallet) til trådløst, bekreft med # tast
bla med pil (6) til scan for SSDI
bekreft med #så blar vi for å høre riktig navn på nettverk og

velger dette med #

Skriv inn passord : du skriver inn passordet ved å bruke tastene for eksempel på tallet **2** finner du a,b,c ,**3** d,e,f , **4** g,h,i **5**,j,k,l,**6** m,n,o,**7** p,q,r,s **8** t,u,v **9** w,x,y,z . (<<) spole tilbake tasten, sletter det du skriver . (>>) spole fram tasten spiller av det du har skrevet. Trykk # for å bekrefte. Trykker du * stjerner avbryter du.

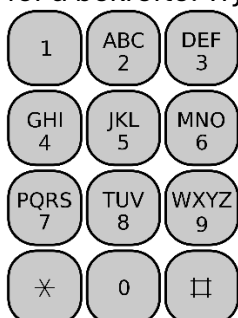

når vi skriver passord:

hvis du må velge stor bokstav eller tall(numerisk) til passordet trykker du på diamant knappen med hake (øverst til høyre) til du hører numerisk eller Stor eller liten
For spesialtegn finnes disse under 1-tall tasten, for eksempel

For andre spørsmål eller instruksjoner: cantec.no

