


Bernafon App


- Hvordan bruke appen
- Aktivere TV-adapter
- Hvordan pare høreapparatene med telefonen

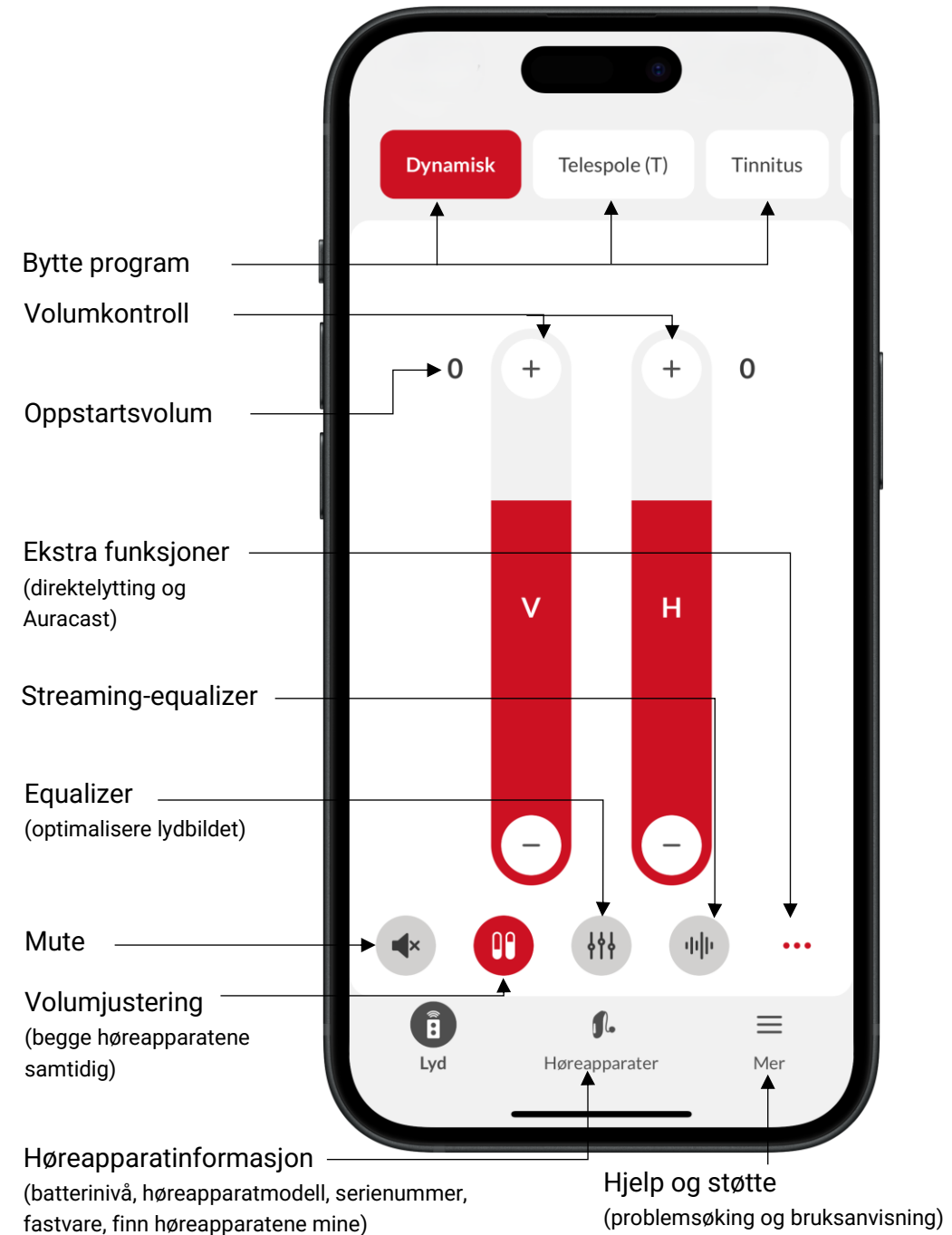

Aktivere TV-adapter



1. Sveip program-linja mot venstre
2. Trykk på TV-A
 - Du vil høre en bekreftelsesmelodi i høreapparatene når du velger TV-A programmet.

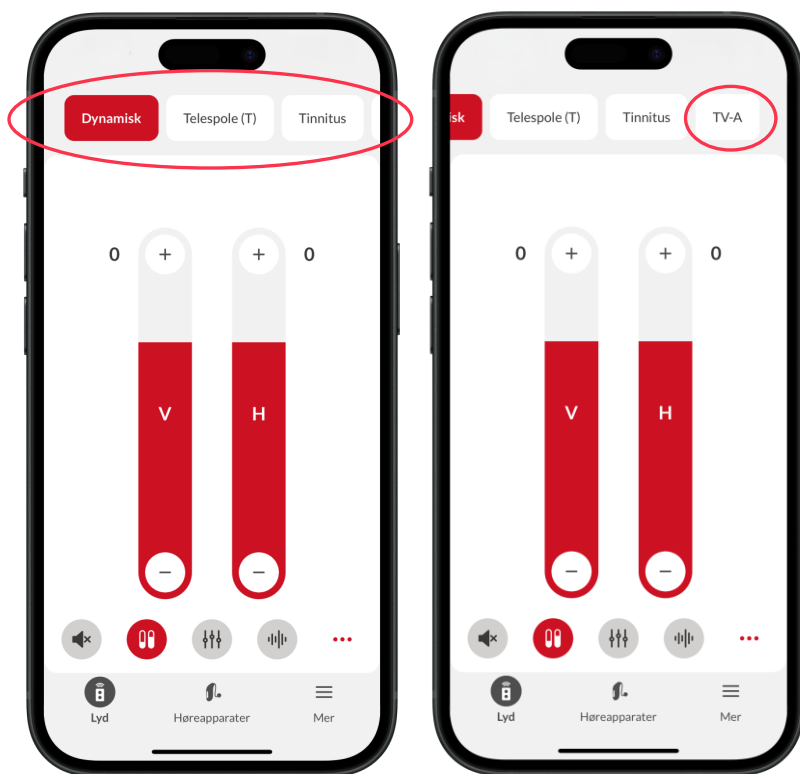

Dersom TV-A programmet ikke er listet opp i programlisten, betyr det at høreapparatene ikke er paret med TV-A.

(Se egen bruksanvisning for TV-A)

Pare høreapparat og telefon

iOS (iPhone) versjon 15.0 eller nyere

Pass på at høreapparatene har strøm og at Bluetooth er aktivert før du setter i gang.

1. Gå inn på **Innstillinger** på din iPhone
2. Velg deretter **Tilgjengelighet**
3. Velg **Høreapparater**
4. Slå dine høreapparater AV og PÅ for å aktivere paringsmodus*, og plasser de i nærheten av din iPhone
5. Fornavnet på bruker av høreapparatet vil dukke opp øverst på siden. Trykk på navnet.
6. Din iPhone vil komme med en forespørsel om å koble sammen telefon og høreapparatene, én gang pr. apparat. Trykk **Sammenkoble** for å gjennomføre dette.

Så snart høreapparatene er paret med din iPhone, åpne Bernafon app for å opprette tilkobling mellom appen og høreapparatene. Når tilkoblingen er etablert, trykk **Fortsett**. Appen er nå klar for bruk.

*Start apparatene på nytt

Oppladbare høreapparater: Sett apparatene i laderen i 5 sekunder. Apparatene skrus automatisk på igjen når de tas ut av laderen.

Høreapparater med batteri: Åpne og lukk batterilukene.