

Bernafon App

- Hvordan bruke appen
- Aktivere TV-adapter
- Hvordan pare høreapparatene med telefonen



Bytte program

Volumkontroll

Oppstartsvolum

Streaming-equalizer
(optimalisere lydbildet
som streames fra
telefon, eks. musikk)


Equalizer
(optimalisere lydbildet)

Mute

Volumjustering
(begge høreapparatene
samtidig)


Høreapparatinformasjon
(batterinivå, høreapparatmodell, serienummer,
fastvare, finn høreapparatene mine)

Hjelp og støtte
(problemsøking og
bruksanvisning)

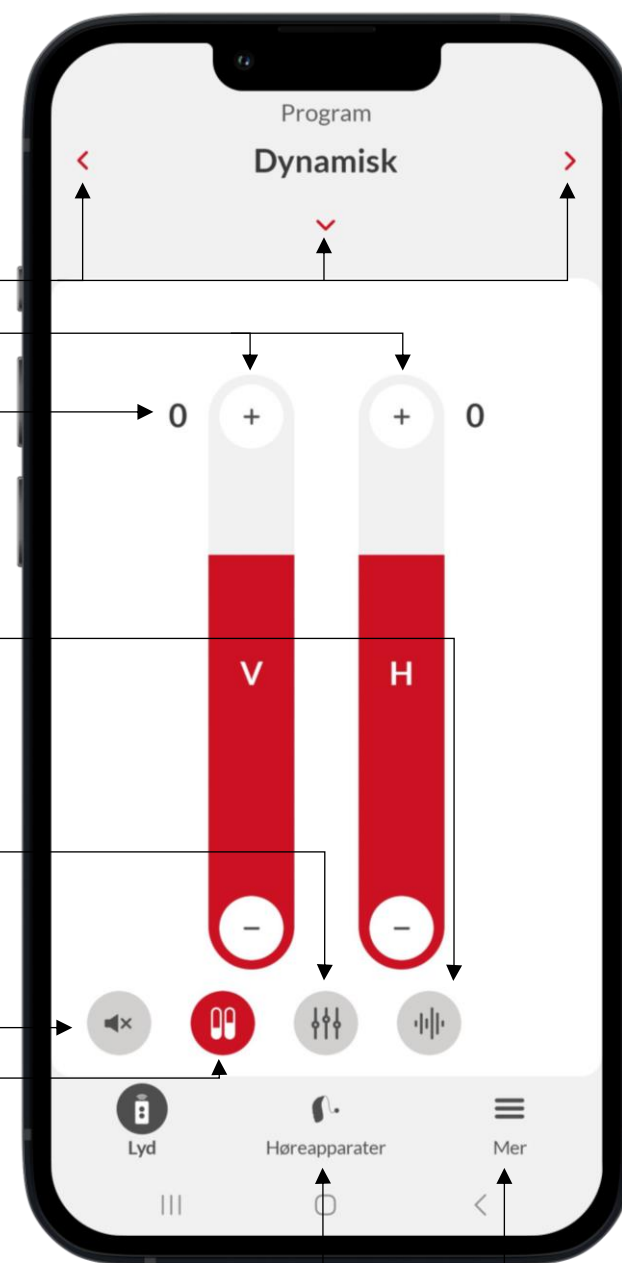



1. Trykk på pil ned for å velge program
2. Trykk på TV-A
 - Du vil høre en bekreftelsesmelodi i høreapparatene når du velger TV-A programmet.

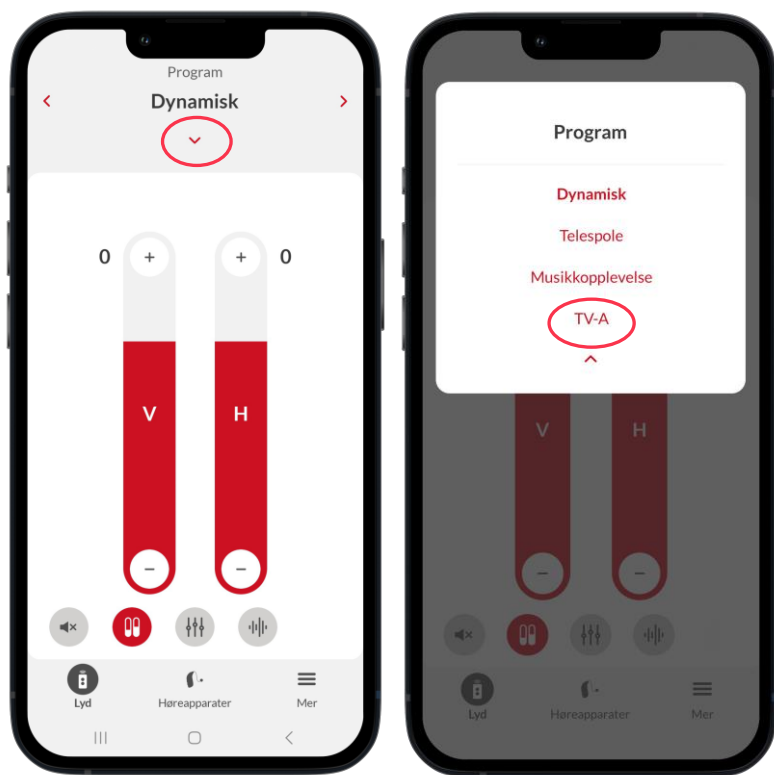

Dersom TV-A programmet ikke er listet opp i programlisten, betyr det at høreapparatene ikke er parett med TV-A.


(Se egen bruksanvisning for TV-A)

Android versjon 8 eller nyere

Pass på at høreapparatene har strøm og at Bluetooth er aktivert før du setter i gang.

1. Åpne Bernafon app og gi nødvendige tillatelser
2. Start høreapparatene på nytt*
3. Appen oppdager høreapparatene dine
4. Forsikre deg om at riktige høreapparater er funnet – trykk **JA**
5. En meldingsboks vil dukke opp som spør om du ønsker å koble sammen – trykk **Koble sammen**, én gang pr. apparat.
6. Høreapparatene er nå koblet til din telefon – trykk **Fortsett**.

Dersom ett høreapparat er koblet fra appen, trykk på **Høreapparater** nederst på skjermen. Deretter trykk **Koble sammen nye høreapparater** og gjenta tilkoblingsprosedyren.

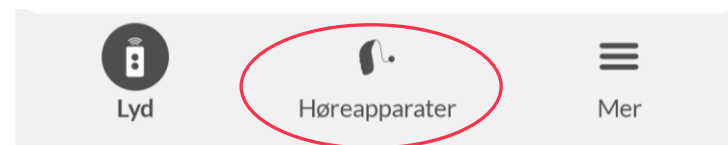

*Start apparatene på nytt

Oppladbare høreapparater: Sett apparatene i laderen i 5 sekunder. Apparatene skrus automatisk på igjen når de tas ut av laderen.

Høreapparater med batteri: Åpne og lukk batterilukene.