

Bernaфон App

- Hvordan bruke appen
- Aktivere TV-adapter
- Hvordan pare høreapparatene med telefonen



Bytte program

Volumkontroll

Oppstartsvolum

Direktelytting

Streaming-equalizer
(optimalisere lydbildet
som streames fra
telefon, eks. musikk)


Equalizer
(optimalisere lydbildet)

Mute

Volumjustering
(begge høreapparatene
samtidig)

Høreapparatinformasjon
(batterinivå, høreapparatmodell, serienummer,
fastvare, finn høreapparatene mine)

Hjelp og støtte
(problemsøking og
bruksanvisning)

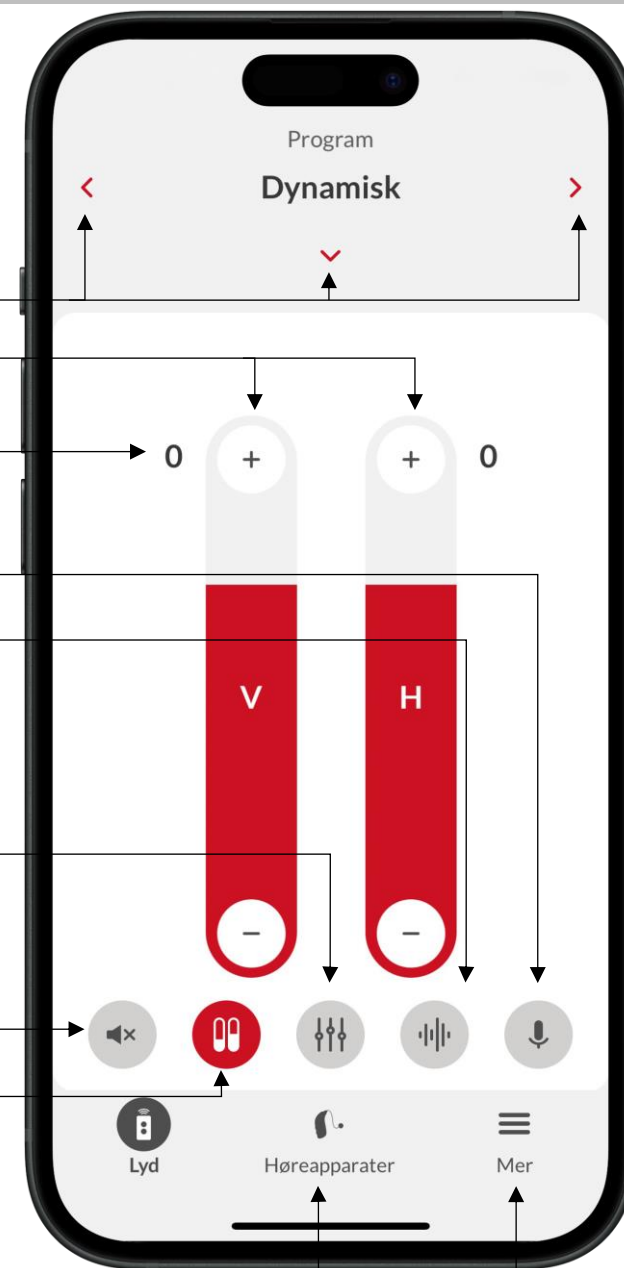

Aktivere TV-adapter



1. Trykk på pil ned for å velge program
2. Trykk på TV-A
 - Du vil høre en bekreftelsesmelodi i høreapparatene når du velger TV-A programmet.



Dersom TV-A programmet ikke er listet opp i programlisten, betyr det at høreapparatene ikke er paret med TV-A.

(Se egen bruksanvisning for TV-A)

Pare høreapparat og telefon

iOS (iPhone) versjon 15.0 eller nyere

Pass på at høreapparatene har strøm og at Bluetooth er aktivert før du setter i gang.

1. Gå inn på **Innstillinger** på din iPhone
2. Velg deretter **Tilgjengelighet**
3. Velg **Høreapparater**
4. Slå dine høreapparater AV og PÅ for å aktivere paringsmodus*, og plasser de i nærheten av din iPhone
5. Fornavnet på bruker av høreapparatet vil dukke opp øverst på siden. Trykk på navnet.
6. Din iPhone vil komme med en forespørsel om å koble sammen telefon og høreapparatene, én gang pr. apparat. Trykk **Sammenkoble** for å gjennomføre dette.

Så snart høreapparatene er paret med din iPhone, åpne Bernafon app for å opprette tilkobling mellom appen og høreapparatene. Når tilkoblingen er etablert, trykk **Fortsett**. Appen er nå klar for bruk.

*Start apparatene på nytt

Oppladbare høreapparater: Sett apparatene i laderen i 5 sekunder. Apparatene skrus automatisk på igjen når de tas ut av laderen.

Høreapparater med batteri: Åpne og lukk batterilukene.