

Hvordan pare dine Encanta høreapparater med Bernafon App

Skann QR-koden for å laste
ned appen



eller finn den på



Hvordan pare med din iPhone

- 1 Forsikre deg om at Bluetooth® er på
- 2 Start høreapparatene på nytt ved å sette dem i laderen og ta dem ut igjen.
- 3 Plassér høreapparatene i nærheten av din iPhone. Gå til Innstillinger på din iPhone og skriv MFI-høreapparater i søkefeltet.
- 4 Velg dine høreapparater ved å trykke på navnene. Trykk Sammenkoble og bekreft dine høreapparater.*

Hvordan pare med din Android-telefon

- 1 Forsikre deg om at Bluetooth® er på
- 2 Åpne Bernafon App og plassér høreapparatene i nærheten av mobiltelefonen din. Velg Sammenkoble nå.
- 3 Start høreapparatene på nytt ved å sette dem i laderen og ta dem ut igjen.
- 4 Bernafon app vil søke opp høreapparatene dine. Bekreft apparatene. Når høreapparatene er tilkoblet, trykk Fortsett.



* Hvis du har to høreapparater, må sammenkoblingen bekreftes for hvert høreapparat.

App Store er et servicemerke for Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad, Apple Watch er varemerker for Apple Inc. registrert i USA og andre land.

Bernafon