

# Sonic Traveller SBT600ss

## Väckarur med USB-uttag och vibrator

Bruksanvisning




## Innehåll

Översikt.....	3
Testfunktion .....	3
Inställning av tid.....	4
Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning.....	4
Inställning av väckningstid .....	4
Aktivera alarm.....	4
Inställning av larmets varaktighet.....	5
Stänga av larmet.....	5
Snooze .....	5
Inställning av Snooze-tid.....	5
Inställning av larmets volym och ton .....	5
Dimmerinställning.....	6
Sängvibrator .....	6
Laddning via USB.....	6
Batteribackup (batteri ingår ej) .....	6
Nätanslutning.....	6
Skötsel och underhåll.....	7
Säkerhetsföreskrifter/Garanti .....	7
Felsökning.....	7
Teknisk information och miljö.....	7

Tack för att du har valt att köpa Sonic Traveller SBT600ss väckarur med USB-uttag och vibrator. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

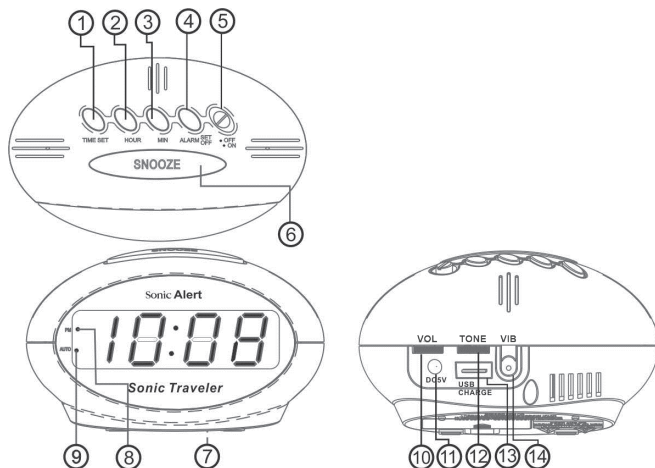

## Översikt

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TIME SET - Inställning av tid</li> <li>2. HOUR - Timme</li> <li>3. MIN - Minuter</li> <li>4. ALARM SET/OFF - Avstängning av alarm.</li> <li>5. ALARM ON/OFF - Stänga av alarmet helt.</li> <li>6. SNOOZE - repetition av larm (somna om funktion) samt reglering av bakgrundsbelysning</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Batterifack (9V batteribackup)</li> <li>8. PM indikator (vid 12 timmarsvisning)</li> <li>9. Auto (alarmindikator ON)</li> <li>10. Volymkontroll</li> <li>11. Uttag för nätadapter (DC5V)</li> <li>12. Tonkontroll</li> <li>13. USB-uttag (USB CHRGE)</li> <li>14. Uttag för vibrator</li> </ol> |
|---|---|

## Testfunktion

1. I testfunktionen visar klockan de olika funktionerna som finns t ex alarm, blinkningar och vibrator (om den är aktiverad).
2. Håll Snooze (6) och Time (1) knapparna nedtryckta i ca 3 sek. för att starta testfunktionen. Displayen visar "7ES7".
3. Om man inte trycker på någon knapp inom 1 minut så stängs testen av automatiskt och går tillbaka till tidvisning.
4. Tryck på någon av knapparna (förutom Snooze och Time) så stängs test funktionen av direkt.
5. När du är klar med testningen tryck på någon av knapparna (förutom Snooze och Time) för att lämna testfunktionen.

## Inställning av tid

1. Håll Time Set (1) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Hour (2) för att mata fram till rätt tid för timmar.
2. Håll Time Set (1) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Min (3) för att mata fram till rätt tid för minuter.

Klockan är förinställd på 24-timmarsvisning.

## Ställa in 12- eller 24-timmarsvisning

Tryck ner HOUR knappen (2) i 6 sekunder. 12 H visas i displayen. Släpp knappen och tryck ner den snabbt igen så står det 12 H. Vänta tills displayen återgår till tidvisning. Nu är det 12-timmarsvisning och på e.m. lyser PM-indikator (8). AM för f.m. visas ej.

## Inställning av väckningstid

1. Håll Alarm Set (4) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Hour (2) för att snabbt mata fram till rätt väckningstid (timmar).
2. Håll Alarm Set (4) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Min (3) för att snabbt mata fram till rätt väckningstid (minuter)
3. Förvissa dig om att du ställt in rätt väckningstid. Släpp först Hour och Min knapparna och sedan ALARM knappen.
4. Tryck på ALARM knappen om du vill kontrollera inställd väckningstid.

## Aktivera alarm

1. Anslut ej vibrator om du enbart önskar akustiskt larm.
2. Vrid fram till önskad volym med volymhjulet (10).
3. Anslut vibratorn till dess uttag (14) om enbart vibration önskas som väckning och skruva ned volymen (10) helt.
4. Anslut vibrator till dess uttag (14) och ställ in alarmet till önskad volym (10) om både alarm och vibrator önskas.
5. Ställ in önskad tid för väckning enligt ovan.

## Inställning av larmets varaktighet

Standardinställning av larmets varaktighet är 30 minuter; det går att ställa in tiden mellan 1 och 59 minuter. För att ändra larmets varaktighet:

1. Tryck och håll ALARM SET/OFF-knappen (4) i sex sekunder. Klockans display visar 30. Släpp ALARM SET/OFF knappen (4).
2. När klockans display visar 30, tryck ner MIN knappen (2) för att ställa in larmets varaktighet, välj mellan 1 och 59 minuter.
3. När displayen visar den larmtid du valt, släpp knappen. Efter ca 3 sekunder återgår klockan att visa tid.

## Stänga av larmet

Larmet kan stängas av temporärt eller permanent.

1. **Temporärt:** Tryck på ALARM Off (4) knappen så stängs larmet av för dagen och ringer först igen samma tid dagen därpå om inte tiden för väckning ändrats.
2. **Permanent:** Skjut ON/OFF (5) knappen till läget OFF. Knappen måste ställas i läge ON för att väckning skall ske igen.

## Snooze

Tryck på Snooze knappen (6) när larmet ljuder om du vill sova en stund till (9 min). Klockan ringer igen efter 9 minuter. Detta kan upprepas många gånger, upp till 119 min.

## Inställning av Snooze-tid

Standardinställningen av Snooze-tid är 9 minuter, men den kan ändras till mellan 1 och 30 minuter.

1. Tryck och håll ner SNOOZE-knappen (6) i fyra sekunder. Klockdisplayen visar standard-Snooze-tiden 9. Släpp SNOOZE-knappen (6).
2. När displayen visar snooze-tiden, tryck ner MIN-knappen (3) tills displayen visar den tid du väljer för Snooze. Släpp knappen.
3. Efter ca 3 sekunder återgår klockan att visa tid.

## Inställning av larmets volym och ton

Volym regleras med "VOL"-hjulet (10) på klockans baksida.

Bas och diskant regleras med "TONE"-hjulet (12) på klockans baksida.

## Dimmerinställning

Det finns 5 nivåer på inställning av displayens ljusstyrka. Tryck upprepade gånger på "SNOOZE"-knappen (6) för att ändra ljusstyrkan på displayen. Ljusstyrkan varierar från 5-4-3-2-1-2-3-4-5, (från stark till svag och från svag till stark).

**OBS:** Dimmerinställning fungerar inte när klockan är i Snooze-läge.

## Sängvibrator

1. Anslut vibratorns kontakt till uttaget (14) på klockans baksida.
2. Lägg vibratorm under madrassen eller kudden.

## Laddning via USB

Denna väckarklockan är utrustad med ett uttag (13) på baksidan för USB-laddning av många olika mobiltelefoner, bärbara musikspelare och elektronisk utrustning som levereras med kablar för USB-laddning. Uteffekten på USB uttaget är 500mA .

Anslut USB-kabeln, som levererades tillsammans med din enhet, till USB uttaget (13) på väckarklockans baksidan. Kontrollera laddningsindikatorn på enheten att den laddas .

Notera: Laddningstiden kommer att variera beroende på laddningsströmmen som enheten kräver. Vissa enheter kommer därför att ta längre tid att ladda än andra .

## Batteribackup

Sätt i ett 9V batteri för att använda batteribackup. Öppna batterifacket (7) på i botten på väckarklockan. Sätt in ett batteri (9V). Stäng batterifacket.

**OBS:** Vid strömavbrott hålls klockans tidsinställningar kvar om du sätter in ett batteri i batterifacket. Klockans larmfunktion fungerar dock ej under strömavbrott och även displayen slocknar. Urverket fortsätter dock att fungera, så när strömmen kommer tillbaka, visar displayen tiden igen och larmet kommer att aktiveras vid vald tidpunkt. Batterierna bör bytas var 6:e månad. Använd en liten skruvmejsel i bakkanten på batteriet för att peta ut det.

## Nätanslutning

Anslut nätadaptern till ingången märkt DC5V (11) på klockans baksida. Anslut nätadaptern till vägguttaget (230V).

Adapter: AC100-240V~, 50/60 Hz

Energiförbrukning: Adapter: DC5V, 800mA

USB uttag laddning: 500mA

## Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om det skulle bli smutsigt, torka det då med en lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte klockan där den utsätts för stark värme/solljus eller fukt. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. Använd alkaline batterier, för bästa resultat enligt rekommendation från tillverkaren. Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

## Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd inte produkten med annan nätdapter än den som levereras med produkten.

## Felsökning

- Kontrollera att alla kontakterna sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.
- Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

**OBS:** Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

## Teknisk information och miljö

För teknisk information och gällande deklARATIONER hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till produktblad och CE-certifikat som kan laddas ner från produktsidan på [www.edin.se](http://www.edin.se).

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB  
Stockby Hantverksby 3  
181 75 Lidingö

info@edin.se  
www.edin.se  
www.hörbutiken.se

**univox**  
BY EDIN